



**ООО «ПРОТЭК-ЦЕНТР»**

г. Коломна, ул. Комсомольская, д. 13

тел. 8 (496) 614-84-75,

8 (800) 100-75-51 (бесплатный звонок)

E-mail: [info@protex-centr.ru](mailto:info@protex-centr.ru)

[http: www.protex-centr.ru](http://www.protex-centr.ru)

**ПАМЯТКА  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ПРОТЕЗА МОЛОЧНОЙ  
ЖЕЛЕЗЫ**



## ООО «ПРОТЭК-ЦЕНТР»

изготавливает и **бесплатно** обеспечивает современными удобными и надежными протезами молочной железы всех льготных категорий граждан (женщин) Московской области, нуждающихся в протезировании ПМЖ. К протезу выдается 2 лифа-крепления\* различной цветовой гаммы.

Для заказа протеза федеральными льготниками (при наличии группы инвалидности) необходимо предоставить: паспорт, справку МСЭК об инвалидности, Индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида, направление на протезирование из Фонда социального страхования, Свидетельство пенсионного страхования СНИЛС.

Для заказа протеза региональными льготниками необходимо предоставить: Учетную карту выдачи протезно-ортопедических изделий и направление из Управления социальной защиты населения.

\* В зависимости от условий обеспечения.

Протез молочной железы представляет собой гелеобразную массу телесного цвета в оболочке из полиуретановой пленки.

Протез естественно выглядит, сохраняет тепло тела, восстанавливает равновесие на ампутированной стороне.

Протез молочной железы вставляется в бюстгальтер со специальным клапаном, либо в чашу бюстгальтера.

Протез сохранит свою форму и будет служить Вам долго, позволяя купание в морской (или хлорированной) воде, если Вы будете следовать нашим рекомендациям по его использованию:

- избегать сильного его сжатия;
- не помещать в тесный бюстгальтер;
- не допускать контакта с острыми и колющими предметами;
- поддерживать его чистоту;
- хранить в оригинальной упаковке в период, когда он не используется.

**Внимание!** Протез рекомендуется мыть в теплой воде с детским мылом, ополаскивать теплой водой и вытирать насухо.

Уважаемые женщины! Чтобы улучшить самочувствие и избежать осложнений после мастэктомии, мы рекомендуем Вам ежедневно выполнять комплекс упражнений лечебной гимнастики:

Компрессионный рукав стирается по мере загрязнения в нейтральной среде (детский шампунь или мыло). После полоскания рукав не отжимать, а промокнуть махровым полотенцем. Сушить рукав следует на горизонтальной поверхности. **Категорически запрещается сушить рукав на бельевой веревке, на спинке стула и в вертикальном положении и использовать для мытья вещества, содержащие хлор или любые другие отбеливатели.**

Необходимо беречь отечную руку и стараться:

- не спать на больной стороне;
- в лежачем положении размещать руку так, чтобы она была в приподнятом положении;
- избегать на отечной руке измерение давления и введение любых инъекций;
- не поднимать отечной рукой тяжести свыше 1 кг.

При любых воспалительных явлениях на отечной руке следует немедленно обратиться к лечащему врачу.

Если Вы внимательно прочтете эту памятку и последуете всем нашим советам, то Ваше протезирование будет полным и успешным.

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экзопротез предназначен для компенсации послеоперационного дефекта и восстановления симметрии туловища у женщин, перенесших мастэктомию и для восполнения контура груди и дефицита тканей в подмышечной и подключичной областях; Форма экзопротеза симметричная и асимметричная (правый или левый); Размерный ряд экзопротеза не менее 00 не более 11; Материал экзопротеза гелеобразующий силиконовый двухкомпонентный компаунд и полиуретановая пленка.

### **Чехлы для экзопротеза молочной железы:**

Чехол для экзопротеза предназначен для обеспечения сохранности экзопротеза при носке, форма чехла для экзопротеза симметричная и асимметричная (правый или левый), размерный ряд чехла для экзопротеза не менее 00 не более 11, материал чехла для экзопротеза безаллергенный трикотажный хлопчато-бумажный материал или аналог.

### **Бюстгальтера для экзопротеза молочной железы:**

Бюстгальтер (лиф-крепления) предназначен для крепления к телу экзопротеза молочной железы за счет вшитого в чашку кармана из безаллергенной ткани, полнота бюстгальтера (лифа-крепления) А, В, С, D, E, F, G или по индивидуальному размеру инвалида, размерный ряд бюстгальтера (лифа-крепления) не менее 55 см, не более 110 см с шагом не более 5 см или по индивидуальному размеру инвалида, материал бюстгальтера (лифа-крепления) - безаллергенная вышитая ткань или кружевное полотно, или аналог на хлопчато-бумажной подкладке, на узких или широких бретелях, застежка крючки-петли.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ\*

- Экзопротез молочной железы;
- Чехлы для экзопротеза молочной железы;
- Бюстгальтера для экзопротеза молочной железы.

\* Отмечается упаковщиком в зависимости от условий обеспечения/приобретения.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться в сухом отапливаемом помещении с температурой воздуха от +5С до +25С и относительной влажностью воздуха не выше 80%.

## ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Модель:

Экзопротез молочной железы:

протез молочной железы на основе силиконового геля по ТУ 9396-001-31878854-2011

Мы, ООО «МЕТИЗ ИМПЭКС», уполномоченный представитель производителя ООО «Специализированное протезно-ортопедическое предприятие Протекс-центр», Россия, 140415, Московская обл., г. Коломна, ул. Комсомольская, д.13, заявляем под свою ответственность, что устройство протез молочной железы на основе силиконового геля, производства ООО «Специализированное протезно-ортопедическое предприятие Протекс-центр», Россия, 140415, Московская обл., г. Коломна, ул. Комсомольская, д.13, к которому относится настоящая декларация, соответствует требованиям защиты и соответствует следующим стандартам или другим нормативным документам:

- ТУ 9396-001-31878854-2011
- Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №ФСР 2011/12475 от 27 сентября 2018 года
- Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1
- Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 32.50.22.129

г. Мытищи

30.06.2023 г.

Заместитель генерального директора  
по продажам в России и странах СНГ



Кочетков А.О.



Исх. № ИСХ.147/Пр от 31.07.2023г.

Директору Димитрович О.

Настоящим, ООО «МЕТИЗ ИМПЭКС» подтверждает гарантированный срок годности предложенных экзопротезов молочной железы - не менее 36 месяцев со дня производства. Данный срок годности не гарантирован в случае ненадлежащего обращения, неправильного обслуживания, а также при использовании изделия не по назначению.

Также, доводим до вашего сведения, что все существующие в мире экзопротезы грудной железы сделаны из одного и того же гипоаллергенного силиконового геля.

С уважением,

Заместитель генерального директора

по продажам в России и странах СНГ

Кочетков А.О.

