


INSTRUCȚIUNE
de utilizare a produsului dezinfectant
CHIROSAN PLUS

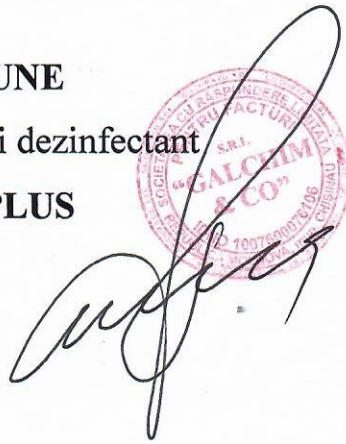

A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA CU RASPUNDEABILITATE LIMITATA", "FACTUR", "S.R.L.", "GALCHIM", "& CO", and "100760070006".

Instrucțiunea este elaborată
de Producător
Schülke CZ, s.r.o., Cehia

Instrucțiuni de utilizare chirosan® plus

Producător - Schülke CZ, s.r.o., Cehia

Compoziție:

chirosan® plus conține următoarele substanțe active:

- acidul peracetic se formează in situ (soluția 2% conține mai mult de 1000 ppm acid peracetic)

Conține: percarbonat de sodiu, acid (1-hidroxietiliden) bisfosfonic, sare de sodiu.

Date chimico-fizice:

formă - pulbere albă

miros - fără miros

pH (soluție 2%) - 7,5 - 8,5

Dezinfectant concentrat sub formă de pulbere pe bază de acid peracetic generat pentru dezinfecții monofazate, dezinfectare de gradul doi și cel mai înalt a instrumentarului medical, sălilor de operație, instrumentelor dentare anestezice și endoscoapelor. Potrivit și pentru dezinfecția suprafețelor echipamentelor medicale.

Domeniu de utilizare:

chirosan® plus este destinat pentru dezinfecția și curățarea manuală a instrumentelor și a ajutoarelor imediat după utilizare prin imersare într-o soluție de lucru pregătită în prealabil. Este, de asemenea, potrivit pentru utilizare în aparatele de curățare cu ultrasunete.

Preparatul este potrivit pentru dezinfecție:

- suprafețele dispozitivelor medicale prin ștergere (băi de hidroterapie)
- materiale de amprentă dentară
- echipament de anestezie
- tensiometre
- măști de respirație
- endoscoape, incubatoare etc.

chirosan® plus este compatibil cu materialele medicale comune. Recomandat pentru instrumente și dispozitive din oțel chirurgical, sticlă, plastic, cauciuc, porțelan, ceramică și plexiglas. Nu utilizați pe instrumente

din alamă, cupru, aluminiu, nichel sau cromate cu suprafețe deteriorate mecanic.

instrucțiuni de utilizare:

Amestecați bine cantitatea necesară de medicament în apă la o temperatură de 20 până la 25 ° C.

O soluție dezinfectantă 1% se prepară prin dizolvarea a 10 g de chirosan® plus în 990 g de apă. După cincisprezece minute de activare și re-amestecare, preparatul este gata de utilizare. Uneltele și resursele folosite sunt complet scufundate în soluția dezinfectantă pregătită. După timpul de păstrare specificat, instrumentele sunt spălate cu apă de băut demineralizată sau apă sterilă și pregătite pentru sterilizare.

Băile de hidroterapie se dezinfectează cu o soluție chirosan® plus 2%, după timpul de expunere suprafața se spală bine cu apă fierbinte.

Suprafețele dispozitivelor medicale pot fi, de asemenea, dezinfectate prin ștergere cu o cârpă înmuiată în soluția de lucru. Articolele vizibil murdare sunt mai întâi spălate și apoi dezinfectate.

Soluția de lucru este preparată proaspătă în fiecare zi.

avantajele:

- Efect de spectru complet
- Combinarea a 3 enzime
- Valabil de la 5 minute
- Solubil, nespumant
- Soluția este stabilă până la 36 de ore

Spectrul de efecte: bactericid, complet virucid, micobactericid, tuberculocid, fungicid, sporicid.

Notă: Numai pentru uz profesional.

Pericol! H302 Nociv în caz de înghițire.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

P260 Nu respirați praful.

P280 Purtați mănuși de cauciuc/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față. P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact dacă sunt prezente și ușor de făcut. Continuați să clătiți.

P314 Consultați un medic/atenție dacă vă simțiți rău.

Primul ajutor: Orice incident grav legat de produs trebuie raportat producătorului și autorității competente. Inhalare:

îndepărtați sursa de expunere. Scoateți victima la aer curat, mentineți în repaus (evitați chiar mersul pe jos), dacă este necesar, consultați un medic. Contact cu pielea: Îndepărtați



îmbrăcămintea afectată. Spălați bine cu apă și săpun.
Ingerare: Clătiți gura cu apă de băut și lăsați victima să bea 0,5 litri de apă. Nu provocați vărsăturile, solicitați asistență medicală.

Depozitare: depozitați produsul în recipientul original închis ermetic. A se păstra departe de alimente, băuturi, apă proaspătă, furaje și materiale combustibile. A se păstra departe de lumina directă a soarelui. Temperatura de depozitare: de la -10 la +25°C.

Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului: Aplicați medicamentul rămas în conformitate cu instrucțiunile de utilizare sau transferați la companii autorizate pentru eliminare. Ambalajele goale trebuie spălate temeinic și apoi reciclate.

Informații de mediu: Schülke produce produse în mod economic și utilizând procese de producție avansate, sigure și ecologice, menținând în același timp standarde de calitate înalte.

Urmați cu atenție instrucțiunile de utilizare. Nu utilizați pe instrumente din alamă, cupru, aluminiu, instrumente placate cu nichel sau cromate cu deteriorare mecanică a suprafeței.

Perioada de valabilitate: 24 luni

Tip produs: Produs biocid, grupa 1, tipul 2;

Dispozitiv medical clasa IIb





Účinnost / Účinnosť / Spektrum działania / Efficacy / Etki Spektrumu	Norm / Norma	Konc. / Stezenie / Concentration / Konsantrasyon		Čas / Czas / Time / Temas Süresi
Baktericidní / baktericidny / bakteri- obójczy / bactericidal/ bakterisidal	EN 13727 + A2	0,5 %	5 g/l	5 min
		2 %	20 g/l	2 min
	EN 13697	2 %	20 g/l	2 min
	EN 16615	2 %	20 g/l	2 min
Levurocidní / levurocidny / drożdża- kobójczy / yeasticidal/	EN 13624	0,5 %	5 g/l	5 min
		2 %	20 g/l	2 min
	EN 13697	2 %	20 g/l	2 min
	EN 16615	2 %	20 g/l	2 min
Fungicidní / fungicidny / grzybobó- jczy / fungicidal/ fungisidal (A.brasilliensis)	EN 13624	1 %	10 g/l	30 min
		2 %	20 g/l	2 min
	EN 13697	1 %*	10 g/l	30 min
		2 %	20 g/l	2 min
EN 14562*	2 %	20 g/l	40 min	
	Virucidní / virucidny / wirusobójczy wobec BVDV, Vaccinia / virucidal / virisidal BVDV, Vaccinia	DVV/RKI	0,5 %	5 g/l
EN 14476 + A1		0,5 %	5 g/l	5 min
Virucidní / virucidny / wirusobójczy wobec rota wirusa / virucidal / virisidal rotavirus	EN 14476 + A1	0,5 %	5 g/l	30 min
		1 %	10 g/l	10 min
		2 %	20 g/l	5 min
Virucidní / virucidny / wirusobójczy wobec adeno wirusa / virucidal / virisidal adenovirus, MNV - norovirus	EN 14476 + A1	0,5 %	5 g/l	30 min
		2 %	20 g/l	10 min
	EN 17111:2018	0,5 %	5 g/l	30 min
		0,5 %*	5 g/l	15 min
Virucidní / virucidny / wirusobójczy wobec wirusa polio / virucidal / virisidal poliovirus	EN 14476 + A1	0,5 %	5 g/l	30 min
		2 %	20 g/l	10 min
Mykobaktericidní / mykobaktericid- ny / prątkobójczy / mycobactericidal / mikobakterisidal	EN 14348	0,5 %	5 g/l	15 min
	EN 14563	1 %	10 g/l	15 min
		2 %	20 g/l	5 min
Sporocidní / sporocidny / sporobó- jczy / sporicidal / sporisidal (B.subtilis, Cl.difficile, B. cereus)	EN 17126*	0,5 %	5 g/l	60 min
		1 %	10 g/l	30 min
		2 %	20 g/l	10 min

* Čisté podmínky/ Čistě podmienky/ warunki czyste/ clean conditions
 200 mg/kg koncentracji w roztworze: >1000 ppm Kyselina peroxymonosulfonowa / Peroxotet acid / peroxotet acid



1% CONCENTRATION



990 g (20 – 25 °C)

+



10 g chirosan® plus



MIX



ACTIV 15 MIN