

3.3.4 Instrucțiuni de dezinfectare manuală

- **Imersați complet aparatul** în soluția de dezinfectare Cidex® gata de utilizare pentru minimum trei (3) minute, la temperatura camerei.
- Manipulați mecanismele de prindere și/sau balamalele de cel puțin trei (3) ori (dacă este cazul).
- Asigurați-vă că valvele sunt în poziție deschisă (paralele cu deschiderile) pentru expunere (dacă este cazul).
- Clătiți sub jet de apă deionizată timp de minimum 1 minut.
- Uscați bine toate suprafețele dispozitivului utilizând o lavetă sterilă, fără scame, schimbând laveta atunci când este necesar, pentru a vă asigura că dispozitivul este complet uscat.
- Continuați cu instrucțiunile de curățare și sterilizare conform instrucțiunilor de utilizare (IU) ale dispozitivului.

3.3.5 Sterilizare: Avertismente, măsuri de precauție și note



- NU se recomandă utilizarea soluțiilor de dezinfectare pentru ștergerea exteriorului capului camerei ca metodă de sterilizare.
- Capetele camerei care nu sunt supuse unui ciclu de uscare pot prezenta umezeală la finalizarea ciclului de sterilizare și nu trebuie depozitate pentru utilizare ulterioară. Nerespectarea instrucțiunii de utilizare imediată poate compromite sterilitatea capetelor camerei.
- Pentru a preveni îndoirea cablului, vă recomandăm să înfășurați cablul camerei înainte de sterilizare. Consultați **Figura 22** pentru înfășurarea recomandată a cablului capului camerei.



Figura 22: Exemplu de înfășurare pentru capul camerei

3.3.6 Instrucțiuni de sterilizare – autoclavă

1. Inspectați capetele camerei pentru a detecta eventuale deteriorări, murdărie și coroziune înainte de sterilizarea cu abur.
2. Înfășurați individual capetele camerei. În SUA, utilizați o folie de sterilizare aprobată de FDA.

Cicluri de sterilizare recomandate în Statele Unite:

Ciclul metodei	Ciclu	Temperatură	Timp de expunere	Timp de uscare
Abur (învelită)	Previdare	132°C (270°F)	4 minute	30 minute
Abur (neînvelit)	Gravitație	132°C (270°F)	10 minute	Nu este cazul

Tabelul 2: Cicluri de sterilizare recomandate în Statele Unite

Cicluri de sterilizare recomandate în afara Statelor Unite:

Ciclul metodei	Ciclu	Temperatură de expunere	Timp de expunere	Timp de uscare
Abur (învelită)	Previdare	132°C (270°F)	3 minute	30 minute
Abur (învelită)	Previdare	134°C (273°F)	3 minute	30 minute
Abur (neînvelit)	Gravitație	132°C (270°F)	10 minute	Nu este cazul
Abur (învelită)	Gravitație	132°C (270°F)	15 minute	20 minute

Tabelul 3: Cicluri de sterilizare recomandate în afara Statelor Unite

NOTĂ:

- După autoclavare, permiteți capetelor camerei să se răcească înainte de a le conecta la interfața conectorului de cablu sau de a atașa la telescop ansamblul format din capul camerei și dispozitiv de conectare. Acest lucru va ajuta la împiedicarea apariției încețoșării și a unor informații eronate în timpul inițializării.
- Capetele de cameră autoclavabile au fost testate din perspectiva utilității acestora la 273°F (134°C), la un timp de expunere de 18 minute.