

Coagularea cu fascicul de argon (ABC)

1. Selectați modul corespunzător (Lap, Open, ABC®Flex sau Manual).
2. Modul Lap este modul implicit.
 - I. Folosit pentru procedurile endoscopice și laparoscopice.
 - II. Debitul maxim al gazului este de 4 L/min.
 - III. Configurați manual setările puterii și debitului în mod independent.
Selectați modul Open.
 - I. Pentru procedurile deschise.
 - II. Debitul maxim al gazului este de 10 L/min.
 - III. Debitul gazului se reglează automat cu setarea puterii până la debitul maxim.
Selectați modul ABC®Flex.
 - I. Pentru procedurile ABC®Flex.
 - II. Debitul maxim al gazului este de 2 L/min.
 - III. Configurați manual setările puterii și debitului în mod independent.
Selectați modul Manual.
 - I. Configurați manual setările puterii și debitului în mod independent.
 3. Setati puterea și debitul de gaz.
 4. Apăsati Purge.

Controlul puterii de la distanță

(Chirurgul poate schimba puterea din câmpul chirurgical când este selectat.)

1. Apăsati butonul de alimentare la distanță de pe panoul frontal.
2. Faceți dublu clic pe butonul Cut, Coag sau ABC de pe piesa de mână.
3. Creșteți puterea prin apăsarea butonului Cut.
4. Reduceți puterea prin apăsarea butonului Coag.
5. Chirurgul poate face dublu clic pentru a ieși sau aparatul va intra în pauză după câteva secunde.

Pulse Cut

1. Apăsati butonul galben Pulse de sub ecranul LCD Cut.
2. Selectați Pure sau Blend 1-3.
3. Reglați puterea.
4. Valorile puterii afișate sunt puterea medie și de vârf la sarcină nominală.

Pulse Coag

1. Apăsati butonul albastru Pulse de sub ecranul LCD Coag.
2. Selectați Spray, Standard sau Pinpoint.
3. Reglați puterea.
4. Valorile puterii afișate sunt puterea medie și de vârf la sarcină nominală.

Pulse ABC

1. Apăsati butonul albastru Pulse de sub ecranul LCD ABC.
2. Selectați un ciclu de funcționare Single Shot, 200 ms, 400 ms sau 600 ms.
3. Reglați puterea și debitul de gaz.