

VELOX DUO WIPES

Șervețele pentru spălarea și dezinfectia rapidă a suprafețelor mici medicale, în azilurile de bătrâni, sanatorii, sălile fitness și SPA, saloanele de frizerie și cosmetică, saloane de masaj, grădinițe, școli, precum și la dezinfectarea suprafețelor care intră în contact cu produsele alimentare – produsul biocid. Se recomandă pentru suprafețele mici ale echipamentelor medicale: scaune și mese de operație, paturi, aparatură medicală și chirurgicală – dispozitive medicale. Dezinfectează suprafețele, ucigând bacteriile, ciupercile asemănătoare drojdiilor, bacilii tuberculozei, virusurile încapsulate (inclusiv Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV) și rotavirusurile și norovirusurile în 30 de secunde.

Mod de utilizare: Scoateți șervețelul din ambalaj și ștergeți suprafețele cu el. Așteptați 30 de secunde. În condiții de murdărie, timpul de acțiune asupra virusurilor încapsulate și a rotavirusurilor este de 60 de secunde. În cazul dezinfectării suprafețelor care vin în contact cu alimente, acestea trebuie clătite cu apă potabilă. Celelalte suprafețe nu necesită clătire cu apă. Închideți cu atenție ambalajul. După deschidere, utilizați șervețelele în decurs de 21 de zile. Nu utilizați dacă șervețelele sunt uscate. Nu aplicați produsul pe suprafețe sensibile la alcool (spre exemplu sticlă acrilică). Produsul este destinat utilizării de către un utilizator profesionist.

Eficacitate microbiologică: Bacterii EN 13727: 30s, EN 16615: 30s, EN 13697:2015+A1:2019: 30s, Ciuperci asemenea drojdiei (*C. albicans*) EN 13624: 15s, EN 16615: 30s, EN 13697: 2015+A1:2019: 30s (condiții curate), Mycobacterium Tuberculosis (*M. terrae*) EN 14348: 2005: 60s, Vaccinia virus (extindere pe virusurile anvelopate) EN 14476:2013+A2:2019: 30s, MNV (Norovirus murin) EN 14476:2013+A2:2019: 60 s.*

Substanța activă în 100 g: etanol - 63,7 g (CAS 64-17-5, CE: 200-578-6), propan-2-ol - 6,3 g (CAS: 67-63-0, CE: 200-661-7).

Fraze de pericol: H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor. H226 - Lichid și vapori inflamabili.

Fraze de precauție: P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P370+P378: în caz de incendiu: A se utiliza stingătorul cu praf ABC pentru a stinge. P403+P233: A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase sau ambalajele și, respectiv, deșeurile de ambalaje. În cazul unui incident medical, producătorul și URPL trebuie să fie notificate. (*AVIZ: 5414BIO/02/12.24)