

Quality Control Data sheet & Instructions for Use *Fiche de Contrôle Qualité et Conditions d'Utilisation*

Haemolytic serum / Sérum hémolytique

Product code / Code Produit: HS
Batch / N° de lot: 008
Date of manufacture / Date de fabrication: 2022/02
Expiry date / Date d'expiration: 2025/02

Kit components / Composition du kit

		Batch / Lot	Expiry date/Date exp.
Bottle / Flacon		HS-008	2025/02
Product Code	HS	Batch / Lot	008
		Expiry date/Date exp.	2025/02

Description:

Haemolytic serum obtained from a pool of rabbit sera sensitized against sheep red blood cells.
Sérum hémolytique obtenu à partir d'un mélange de sérums de lapins ayant été sensibilisés aux hématies de mouton.

For use in the Complement Fixation Test for the diagnosis of various veterinary diseases.
Pour la réalisation du Test de Fixation du Complément pour le diagnostic de diverses maladies animales.

Obtained under aseptic conditions and managed in a biological safety cabinet.
Obtenu dans des conditions aseptiques et manipulé sous hotte de sécurité biologique.

Storage / Conservation:

- Upon receipt, store between +2°C and +8°C.
- Conservation entre +2°C et +8°C après réception.*

Precaution for use / Précautions d'emploi :

- Use personal protective equipment in accordance with local regulations (protective lab coat, one way gloves, and eventually eye protection)
Utiliser des équipements de protection individuelle conformément aux réglementations locales en vigueur (gants à usage unique, blouse de laboratoire, et éventuellement protection oculaire).
- For *in vitro* use only / Pour usage *in vitro* uniquement.

Waste disposal / Elimination des déchets

- All waste should be properly decontaminated prior to disposal. Dispose in accordance with local regulations.
Tous les réactifs doivent être décontaminés avant élimination. Éliminer les produits conformément aux réglementations locales en vigueur.
- It is the responsibility of each laboratory to handle wastes and residues produced according to their type and degree of danger.
Il est de la responsabilité de chaque laboratoire pour traiter les déchets et résidus produits par type et degré de danger.

Shelf life / Durée de conservation:

- The reagent is stable up to the expiration date indicated on the package label, if stored under recommended conditions.
Le réactif est stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette de l'emballage, s'il est conservé dans les conditions recommandées.
- Do not use after the expiration date. *Ne pas utiliser après la date d'expiration.*

Quality Control / Contrôle de qualité:

Hemolytic activity : CONFORM.
Activité hémolytique CONFORME.

Use / Utilisation:**EN**

- 1- Ready-to-use serum. **Do not reconstitute with water.**
- 2- Titrate, in accordance with the normalized laboratory protocols. In our working conditions, the titration is performed with a solution of sheep red blood cells at 2.5%

FR

- 1- *Sérum prêt à l'emploi. **Ne pas reconstituer avec de l'eau.***
- 2- *Titrer selon les protocoles de laboratoire normalisés. Dans nos conditions de travail, la titration est réalisée avec une solution de globules rouges de moutons à 2,5%.*

Method / Méthode	Dilutions to test - Zone de dilution à tester
Complement Fixation Test / Réaction de Fixation du Complément.	Indicating titer (working dilution) of 1/1000. Obtained in our working conditions and according to the protocol established by the French standard NF U47-004. <i>Titre indicatif (dilution de travail) de 1/1000. Obtenu dans nos conditions de travail et selon le protocole fixé par la norme française NF U47-004.</i>



Quality Control Manager : Anaïs Agnel
Responsable Contrôle Qualité
anaïs.agnel@innovative-diagnostics.com



Director : Philippe Pourquier
Directeur
philippe.pourquier@innovative-diagnostics.com

Quality Control Data sheet & Instructions for Use
Fiche de Contrôle Qualité et Conditions d'Utilisation

Haemolytic serum / Sérum hémolytique

Product code / Code Produit: HS
Batch / N° de lot: 008
Date of manufacture / Date de fabrication: 2022/02
Expiry date / Date d'expiration: 2025/02

Kit components / Composition du kit

Bottle / Flacon		Batch / Lot	Expiry date/Date exp.
		HS-008	2025/02
Product Code	HS	Batch / Lot	008
		Expiry date/Date exp.	2025/02

Description:

Haemolytic serum obtained from a pool of rabbit sera sensitized against sheep red blood cells.
Sérum hémolytique obtenu à partir d'un mélange de sérums de lapins ayant été sensibilisés aux hématies de mouton.
For use in the Complement Fixation Test for the diagnosis of various veterinary diseases.
Pour la réalisation du Test de Fixation du Complément pour le diagnostic de diverses maladies animales.
Obtained under aseptic conditions and managed in a biological safety cabinet.
Obtenu dans des conditions aseptiques et manipulé sous hotte de sécurité biologique.

Storage / Conservation:

- Upon receipt, store between +2°C and +8°C.

Conservation entre +2°C et +8°C après réception.

Precaution for use / Précautions d'emploi :

- Use personal protective equipment in accordance with local regulations (protective lab coat, one way gloves, and eventually eye protection)
Utiliser des équipements de protection individuelle conformément aux réglementations locales en vigueur (gants à usage unique, blouse de laboratoire, et éventuellement protection oculaire).
- For *in vitro* use only / Pour usage *in vitro* uniquement.

Waste disposal / Elimination des déchets

- All waste should be properly decontaminated prior to disposal. Dispose in accordance with local regulations.
Tous les réactifs doivent être décontaminés avant élimination. Éliminer les produits conformément aux réglementations locales en vigueur.
- It is the responsibility of each laboratory to handle wastes and residues produced according to their type and degree of danger.

life / Durée de conservation:

- The reagent is stable up to the expiration date indicated on the package label, if stored under recommended conditions.
Le réactif est stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette de l'emballage, s'il est conservé dans les conditions recommandées.
- Do not use after the expiration date. *Ne pas utiliser après la date d'expiration.*

Quality Control / Contrôle de qualité:

Hemolytic activity : CONFORM.
Activité hémolytique CONFORME.

Use / Utilisation:

EN

- 3- Ready-to-use serum. **Do not reconstitute with water.**
- 4- Titrate, in accordance with the normalized laboratory protocols. In our working conditions, the titration is performed with a solution of sheep red blood cells at 2.5%

FR

- 3- *Sérum prêt à l'emploi. **Ne pas reconstituer avec de l'eau.***
- 4- *Titrer selon les protocoles de laboratoire normalisés. Dans nos conditions de travail, la titration est réalisée avec une solution de globules rouges de moutons à 2,5%.*

Method / Méthode	Dilutions to test - Zone de dilution à tester
Complement Fixation Test / Réaction de Fixation du Complément.	Indicating titer (working dilution) of 1/1000. Obtained in our working conditions and according to the protocol established by the French standard NF U47-004. <i>Titre indicatif (dilution de travail) de 1/1000. Obtenu dans nos conditions de travail et selon le protocole fixé par la norme française NF U47-004.</i>



Quality Control Manager : Anaïs Agnel
Responsable Contrôle Qualité
anaïs.agnel@innovative-diagnostics.com



Director : Philippe Pourquier
Directeur
philippe.pourquier@innovative-diagnostics.com