

HOLINX**SET PENTRU PERFUZIE****L: 150 cm | 21Gx1 ½"**

1. Tamponați dopul recipientului înainte de străpungeră.
2. Închideți regulatorul de debit.
3. Detașați protectorul pentru vârf, introduceți-l în recipientul cu soluție și poziționați-l cu capul în jos.
4. Strângând și eliberând ușor godeul de picurare, umpleți cu soluție până la jumătatea camerei acestuia.
5. Deschideți orificiul de admisie a aerului dacă este utilizat cu un recipient de soluție rigid și închideți-l dacă este folosit cu unul maleabil.
6. Deschideți parțial regulatorul de debit pentru amorsare.
7. Lăsați soluția să deplaseze complet aerul, apoi închideți regulatorul de debit.
8. Efectuați străpungera venei, apoi fixați acul.
9. Reglați debitul.

**STERILE EO****ISO 13485****20 Picături=1 mL ± 0.1 mL**

- Netoxic
- Apirogen
- De unică folosință
- Luer-Slip

REF: HIVS21/112
LOT NO: 20220506
PROD: 20220506
EXP: 20270505

Precauție:

- Nu resterilizați
- Steril până când ambalajul nu a fost deschis sau deteriorat
- Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat sau a fost deschis anterior
- Neutralizați după utilizare
- Nu depozitați la lumina directă a soarelui, la temperaturi extreme sau la umiditate ridicată
- A nu se utiliza pentru transfuzie de sânge sau derivați sanguini



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Add: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



Changzhou Holinx Industries Co., Ltd
No.1 Dongtang Rd., Zhenglou Town, Changzhou, Jiangsu, China

Repr. Aut. în Republica Moldova: S.C. "IMUNOTEHNOMED" S.R.L.
Adr.: No 42, Gh. Asachi str., Chișinău, Republica Moldova, MD-2028

PRODUS ÎN CHINA

HOLINX**SET PENTRU PERFUZIE****L: 150 cm | 21Gx1 ½" | Fără manșon**

1. Tamponați dopul recipientului înainte de străpungere.
2. Închideți regulatorul de debit.
3. Detașați protectorul pentru vârf, introduceți-l în recipientul cu soluție și poziționați-l cu capul în jos.
4. Strângând și eliberând ușor godeul de picurare, umpleți cu soluție până la jumătatea camerei acestuia.
5. Deschideți orificiul de admisie a aerului dacă este utilizat cu un recipient de soluție rigid și închideți-l dacă este folosit cu unul maleabil.
6. Deschideți parțial regulatorul de debit pentru amorsare.
7. Lăsați soluția să deplaseze complet aerul, apoi închideți regulatorul de debit.
8. Efectuați străpungerea venei, apoi fixați acul.
9. Reglați debitul.

**STERILE EO****ISO 13485****20 Picături=1 mL ± 0.1 mL**

- Netoxic
- Apirogen
- De unică folosință
- Luer-Slip

REF: HIVSW/O21
LOT NO: 20220506
PROD: 20220506
EXP: 20270505

Precauție:

- Nu resterilizați
- Steril până când ambalajul nu a fost deschis sau deteriorat
- Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat sau a fost deschis anterior
- Neutralizați după utilizare
- Nu depozitați la lumina directă a soarelui, la temperaturi extreme sau la umiditate ridicată
- A nu se utiliza pentru transfuzie de sânge sau derivați sanguini



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Add: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



Changzhou Holinx Industries Co., Ltd
No.1 Dongtang Rd., Zhenglou Town, Changzhou, Jiangsu, China

Repr. Aut. în Republica Moldova: S.C."IMUNOTEHNOMED" S.R.L.
Adr.: No 42, Gh.Asachi str., Chișinău, Republica Moldova, MD-2028

PRODUS ÎN CHINA