

GLOBACID[®] AF med

DEZINFECTANT RAPID PE BAZA DE ALCOOL

solutie gata de utilizat

Globacid[®] AF med este un dezinfectant gata de utilizat pentru dezinfectie rapida si este potrivit de utilizat pe suprafetele rezistente la alcool (inclusiv dispozitive medicale). Solutia nu lasa reziduuri pe suprafete, prin urmare este potrivita inclusiv pentru dezinfectia suprafetelor care vin in contact cu alimentele si produsele alimentare.

Respecta cerintele din domeniul medical, industria alimentara, servicii de infrumusetare, etc.

PROPRIETATILE PRODUSULUI

- timp rapid de actiune (30-60 sec)
- pe baza de alcool
- nu contine aldehide, compusi de amoniu cuaternar si ioni de clor
- nu lasa reziduuri
- potrivit in special pentru locurile greu de accesat
- nu necesita limpezire
- nu schimba aspectul vizual al suprafetei

UTILIZARE

Pulverizati solutia sau aplicati cu o laveta pe suprafete si lasati sa actioneze. Solutia trebuie sa acopere in intregime suprafetele.

TIMP DE EXPUNERE

30 secunde (noro si poliovirus 60 secunde)

SPECTRUL MICROBIOLOGIC

MICROORGANISME	INCARCATURA ORGANICA	CONCENTRATIE	TIMP DE CONTACT
Bactericida	conditii de murdarie	nediluat	30 secunde
Tuberculocida			
<i>Mycobacterium terrae</i>	conditii de murdarie	nediluat	30 secunde
Mycobactericida			
<i>Mycobacterium terrae</i>	conditii de curatenie	nediluat	60 secunde
<i>Mycobacterium avium</i>	conditii de curatenie	nediluat	60 secunde
Fungicida			
<i>Candida albicans</i>	conditii de murdarie	nediluat	60 secunde
<i>Aspergillus brasiliensis (niger)</i>	conditii de murdarie	nediluat	60 secunde
Virucida			
HBV/HCV, HIV	conditii de murdarie	nediluat	30 secunde
Herpes simplex	conditii de murdarie	nediluat	30 secunde
Virusuri gripale	conditii de murdarie	nediluat	30 secunde
Vaccinia virus	conditii de murdarie	nediluat	30 secunde
Coronavirusuri	conditii de murdarie	nediluat	30 secunde
Adenovirus	conditii de curatenie	nediluat	30 secunde

Norovirus	conditii de curatenie	nediluat	60 secunde
Poliovirus	conditii de curatenie	nediluat	60 secunde
Rotavirus	conditii de curatenie	nediluat	30 secunde

CONFORM CU STANDARDELE

EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 16615, DVV/RKI

DEPOZITARE

Verificati termenul de valabilitate pe ambalaj. Depozitati la temperaturi de 5-25°C si ferit de razele directe ale soarelui pentru a pastra calitatea produsului.

UTILIZARE

Produsul este sigur din punct de vedere ecologic, toate ingredientele active sunt biodegradabile in apa. Ambalajele din material plastic sunt reciclabile. Pentru colectare, ambalajul de plastic trebuie limpezit, iar sticla si capacul trebuie separate. Pulverizatorul cu partile lui metalice se poate colecta cu plastice. Cutia de ambalare se colecteaza la cartoane. Compatibilitatea ambalajului cu produsul este asigurata de calitate.

INFORMATII DE SIGURANTA

Cititi fisa cu date de siguranta pentru informatii suplimentare cu privire la siguranta.

COMPOZITIE

100gr de produs contine urmatoarele ingrediente active: propan-2-ol 60gr, etanol 15gr

Produsul este marcat CE conform Directivei pentru Dispozitive Medicale 93/42/EEC  0537

AMBALAJE



Sticla cu pulverizator
1L



Sticla cu capac 1L



Bidon 5L



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com



Subsemnata, Popescu Anca Florina, interpret si traducator autorizat pentru limba engleza in temeiul autorizatiei nr. 39019 din data de 05.04.2023, eliberata de Ministerul Justitiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana , ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni, si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

Inscrisul a carui traducere se solicita in intregime are, in integralitatea sa, un numar de 2 pagini, poarta denumirea de Surface rfu Spary - GLOBACID-AF-med-ENG a fost emis de Goodpoint Chemicals si mi-a fost prezentat mie in intregime.

Traducerea inscrisului prezentat are un numar de 2 pagini si a fost efectuata potrivit cererii scrise inregistrate cu nr. FN/15.11.2023, pastrate in arhiva subsemnatului.

INTERPRET SI TRADUCATOR AUTORIZAT Popescu Anca Florina

Popescu

