

DEZINFECTANT PENTRU REPROCESAREA AUTOMATĂ A ENDOSCOAPELOR

SOLUSCOPE PA

DEZINFECTANT PENTRU ENDOSCOAPELE FLEXIBILE

- Dezinfectant pe bază de acid peracetic
- Spectru larg de eficacitate
- Conform cu EN ISO 15883-4
- Compatibil cu o gamă largă de endoscoape flexibile
- Sistem închis și recipiente cu canulă integrată



SOLUSCOPE PA

A se utiliza exclusiv cu Soluscope Serie 1 PA



**SOLUSCOPE
SERIE 1 PA**

COMPOZIȚIE PRODUS

- 5% (w/w) acid peracetic
- Agenți stabilizatori

CARACTERISTICI PRODUS

- Valabilitate: 14 luni (recipient închis)
- Aspect: soluție clară și incoloră
- Parfum: caracteristic
- pH produs pur*: 1 - 4,2
- Densitate specifică la 20°C: 1,10 - 1,13
- Index de refracție: 1,35 - 1,37
- Vâscozitate: < 10 mPa/s

*măsurarea valorii pH-ului s-a făcut în condiții operaționale cu ajutorul unui pHmetru cu compensare de temperatură.

PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE

EFICACITATE/CONDIȚII	CONCENTRAȚIE	TEMPERATURĂ	TIMP DE CONTACT
Bactericid* - In conformitate cu EN 13727+A2, EN 14561	1%	40°C	6 min
Micobactericid* - In conformitate cu EN 14348, EN 14563	1%	40°C	6 min
Fungicid* - In conformitate cu EN 13624, EN 14562	1%	40°C	6 min
Virucid* - In conformitate cu EN 14476+A1, EN 17111	1%	40°C	6 min

*=condiții de curățenie

INFORMAȚII COMANDĂ

PRODUS	UNITATE DE AMBALARE	COD COMANDĂ
SOLUSCOPE PA	4 x 5 L	3105490

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Așezați flaconul pe poziție
- Înșurubați capacul alb al Soluscope Serie 1 PA pe flacon (a se consulta Manualul de Utilizare)
- Asigurați-vă că gura de aerisire nu este blocată
- Diluție automată: 1% (10ml/L) - 40°C - 6 min

Valabilitate produs după deschidere: 2 luni conectat la echipamentul de reprocesare (notați data deschiderii pe eticheta special concepută cu acest scop).


DEPOZITARE

Avertizare - respectați precauțiunile de utilizare (stabilite prin reglementările europene în vigoare cu privire la clasificarea și etichetarea produselor chimice).


DISPOZITIV MEDICAL - UTILIZAȚI ÎN SIGURANȚĂ

Clasa IIb

Citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs.

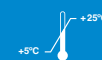

DOAR PENTRU UTILIZATORII PROFESIONALI.

 **SOLUSCOPE SAS**
(An Ecolab Company)
100, rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France

Distribuit de:
SC ECOLAB SRL
Centrul de afaceri IDEO
Sos Pacurari, nr 138
700545, Iasi, Romania
T +40 232 22 22 10
www.ecolab.ro

ECOLAB®

www.ecolab.com

Soluscope

www.soluscope.com