



HMI® PEROSTER CE



Preparat concentrat pulverizat, ecologic, de mare eficienta,
fara fosfati, pentru sterilizare rapida si dezinfectie de inalt nivel

data ultimei revizuii a textului: 05.03.2015

Identificarea preparatului/nr./cod HMI 29

Compozitie:

Substanta active:

Percarbonat de sodium;

N,N etilenbis(N-acetilacetamid)(tetra acetil etilen diamin);

Stabilizatori:

Indicatori.

Caracteristici:

Praf alb cu nuanta albastruie.

pH solutiei de 1 % – 7,5–8,5.

Solutia nu emana vapori toxici si miros neplacut.

Spectrul de actiune:

HMI® PEROSTER CE poseda actiune bactericida, (EN 13727; EN 14561, EN 13697), incl. Micobactericida (EN 14348-M.terrae, M.avium; EN 14563), fungicida (EN 13624; EN 14562 - C.albicans, A.niger,), virucida (EN 14476 - Adenovirus type 5, Poliovirus type 1, Noro virus, HBV, HCV, HIV, Vaccinia virus, Rota, Herpes, H5N1, H1N1) si sporocida (EN 13704 - Bacillus subtilis, B.cereus).

Domeniul de aplicare:

Curatarea si dezinfectia :

- instrumente medicale si stomatologice, sticlărie de laborator, utilaj si aparataj medical;
- suprafete, suprafetelor interioare si exterioare a cuvezelor;

Sterilizarea chimica la rece;

- endoscoapelor flexibile si dure cu detalii de optica;
- aparatajului termolabil
- aparaturii anesteziologice
- instrumentele chirurgicale si stomatologice.

HMI® Peroster nu deterioreaza otelul, cauciucul, plasticul, sticla organica.

Metoda de utilizare:

Este un pulbere pentru sterilizarea chimica rapida la rece pe baza oxigenului activ. Se activeaza prin metoda dizolvării in apa la temperatura de 35°C si formării substantei active, a ionilor peracetici, care sunt echivalenti cu 0,2% de acid peracetic, cu pH 8,0. HMI® PEROSTER CE deasemenea contine peroxid de hydrogen si acid acetic, se descompune pînă la dioxid de hydrogen si apa.



Experience & Quality

Producător: **HYGIENE MEDICAL INDUSTRY Co., Ltd.**
81A N. Gabrovski st.; 5000 Veliko Turnovo; Republica Bulgaria; tel. +359 / 62/ 634 609; www.hmi-company.com
Reprezentant autorizat: **I.C.S. "HMI-HIGIMED INDUSTRIE" S.R.L.**
str. M. Costin 7; of. 207 mun. Chişinău Republica Moldova; tel. +373 22 430 922
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE No:



Directives
93/42/EEC
98/8/EC



Certified Company

În apă cu aproximativ 35°C, se adaugă cantitatea necesară de **HMI® PEROSTER CE**. Soluția se amestecă pînă la dizolvarea **HMI® PEROSTER CE**. Soluția de lucru de **HMI® PEROSTER CE** este valabilă 48 de ore.

Dezinfectia și igiena intraspitalicească:			
Domeniul de aplicare: Metoda de dezinfectie și sterilizare:	Concentrația soluției de lucru:	Expoziția:	Spectrul de acțiune:
Curățarea și dezinfectia: Instrumente chirurgicale, sticlărie de laborator. - prin metoda scufundării Suprafețele interioare și exterioare a cuvelor, aparatului medical - prin stergere.	0,25% (2,5 g/l)	15 minute	Bactericida (incl. MRSA), fungicida virucida (Noro virus)
	0,5% (5 g/l)	15 minute	bactericida (incl. MRSA) fungicida virusocida (noro, Adeno) sporocida
	1,0 % (10,0 g/l)	30 minute	bactericida (incl. MRSA) fungicida micobactericida tuberculocida virucida sporocida
	1% (10 g/l)	10 minute	fungicida
	2,0% (20 g/l)	5 minute	bactericida (incl. MRSA) micobactericida tuberculocida virucida
Pentru sterilizare rapidă și dezinfectie de înalt nivel / sterilizare chimică rece la: Prin metoda scufundării - Endoscoape (dure și flexibile cu detalii de optică), - utilajului termolabil - Aparaturii anestezice care nu se supune autoclavării - Instrumentele chirurgicale, stomatologice, - sticlărie de laborator După procedura de sterilizare se clătesc cu apă sterilă * Cu grad înalt de murdărire	0,5% (5 g/l)	15 minute	bactericida (incl. MRSA) fungicida virucida sporocida
	1,0% (10 g/l)	30 minute	bactericida (incl. MRSA) fungicida micobactericida tuberculocida virucida sporocida
	2 %* (20 g/l)	15 minute	bactericida (incl. MRSA) fungicida micobactericida tuberculocida virucida sporocida
Sterilizare la: endoscoape (dure și flexibile cu detalii de optică), echipare de înțep-ment și anestezie echipament termolabil, non-autoclavă - Imersiune * După expirarea timpului de expunere ar trebui să clătească cu apă sterilă de 2 ori timp de 1 minut	2 %* (20 g/l)	60 minute	De sterilizare reducere de 6 log Fungicida; Tuberculocida; Virocida; sporocida
Temperatura recomandată a apei pentru pregătirea soluției de lucru – 35°C			

Dezinfectia si igiena in industrie			
Domeniul de aplicare: Metoda de Dezinfectie si sterilizare:	Concentratia solutiei de lucru:	Expozitia:	Spectrul de actiune:
Dezinfectia si curatarea: Utilajului de productie, constructiilor din plastic si otel in industria farmaceutica, obiectelor pentru productie si comercializare a produselor alimentare Industria cosmetologica, a tevilor de canalizare, rezervoarelor -metoda de umplere/stergere	0,25% (2,5 g/l)	15 minute	Bactericida fungicida virucida(noro)
	0,5% (5 g/l)	15 minute	sporocida
	2 % (20 g/l)	5 minute	Bactericida (вкл. MRSA) micobactericida tuberculocida virucida
Temperatura recomandata a apei pentru pregatirea solutiei de lucru – 35°C			

Reactii adverse:

Preparatul se clasifica ca iritant. Irita ochii.

Masurile de acordare a primului ajutor: la inspiratie - de a scoate sinistratul la aer liber. La contact cu pielea-inlaturarea hainei si spalarea cu apa a locului contactat. La patrunderea in ochi- spalarea cu apa curata sau solutiei de bufer pe parcursul a 15 minute. La inghitire nu se recomanda provocarea vomiei. Sinistratului in calitate de antidot i se ofera apa proteica. Adresarea la medic.

Interval intre procedurile de dezinfectie nu este.

Dupa expirarea timpului de expozitie a dezinfectiei precedente se permite folosirea solutiei pentru urmatoarea dezinfectie conform instructiunii

Masurile de precautie pentru transportarea si depozitarea (inclusiv mijloacelor de protectie individuala) preparatului

- la utilizare se recomanda folosirea manusilor de cauciuc si protectie pentru ochi;
- la transportare de tip inchis nu este necesar masuri de protectie speciala;
- pastrare : in ambalaj original la loc ferit de lumina si bine ventilat
- depozitare: Păstrați în recipientul original închis, într-un loc răcoros, bine ventilat, protejat de umiditate, căldură și lumina soarelui (-10÷25°C)

Preparatul nu este daunator pentru mediul inconjurator. Nu se permite aruncarea preparatului concentrat in mediul inconjurator.

Clasificarea conform regulamentului (EO) № 1272/2008



Atenție

Semnele marcate pe eticheta dispozitivului medical:



XXX ZZZ – numarul individual al partidei preparatului;



Data fabricarii;



Termenul de valabilitate;



Adresa producatorului;



Temperatura si conditiile de pastrare

Ambalaj: 5 kg galeata
400 g flacon

Termenul de valabilitate: 2 ani

Producător: **HYGIENE MEDICAL INDUSTRY Co., Ltd.**
81A N. Gabrovski st.; 5000 Veliko Turnovo; Republica Bulgaria; tel. +359 /62/ 634 609; www.hmi-company.com
Reprezentant autorizat: **I.C.S. "HMI-HIGIMED INDUSTRIE" S.R.L.**
str. M. Costin 7; of. 207 mun. Chi. inu Republica Moldova; tel. +373 22 430 922
Ministerul Sănătății al Republicii Moldova CERTIFICAT DE INREGISTRARE No:



Directives
93/42/EEC
98/8/EC



Certified Company