


■ Secțiune de control, secțiune de inserție

Model de endoscop: toate modelele

Cap.2

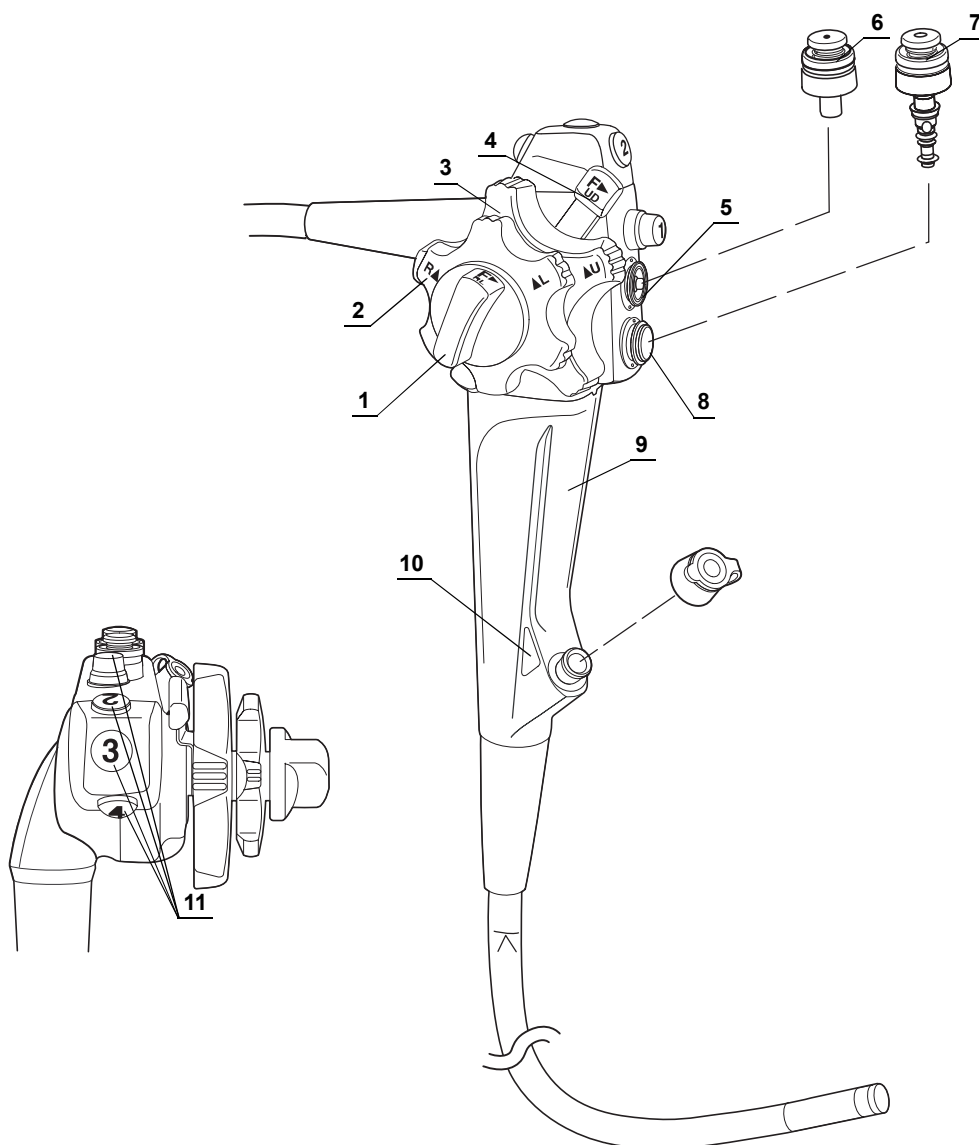

Nr.	Nomenclator	Descriere	Model endoscop
1	Dispozitiv de blocare a angulației DREAPTA/ STÂNGA	Rotirea acestui dispozitiv în direcția „F►” eliberează angulația. Rotirea dispozitivului în direcția opusă blochează secțiunea de flexie în poziția dorită.	Toate modelele
2	Buton control angulație DREAPTA/ STÂNGA	Atunci când acest buton este rotit în direcția „R▲” secțiunea de flexie se deplasează în DREAPTA; atunci când butonul este rotit în direcția „▲L” secțiunea de flexie se deplasează în STÂNGA.	Toate modelele
3	Buton control angulație SUS/JOS	Atunci când acest buton este rotit în direcția „▲U” secțiunea de flexie se deplasează în SUS; atunci când butonul este rotit în direcția „D▲” secțiunea de flexie se deplasează în JOS.	Toate modelele
4	Blocajul de angulare SUS/JOS	Deplasarea acestui dispozitiv în direcția „F►” eliberează angulația. Deplasarea dispozitivului în direcția opusă blochează secțiunea de flexie în poziția dorită.	Toate modelele
5	Cilindru de aspirație	Atașați valva de aspirație la acest cilindru.	Toate modelele
6	Valvă aspirație (MH-443)	Această valvă este apăsată pentru a activa aspirația. Valva este utilizată pentru a elimina orice lichide, reziduuri de substanțe organice, gaze intestinale sau aer din pacient.	Toate modelele
7	Valvă aer/apă (MH-438)	Orificiul din această valvă este acoperit pentru a insufla aer iar valva este apăsată pentru a alimenta apă pentru spălarea lentilelor. Poate fi utilizat de asemenea pentru a alimenta cu aer pentru a îndepărta orice lichide sau reziduuri de substanțe organice care aderă la lentilele obiectivului.	Toate modelele
8	Cilindru aer/apă	Atașați valva pentru aer/apă la acest cilindru.	Toate modelele
9	Secțiune de prindere	Prindeți de aici atunci când utilizați endoscopul.	Toate modelele
10	Cod de culori	Acest cod de culori și numere indică compatibilitatea accesoriilor de endoterapie. - Albastru: GIF-XP170N - Galben: GIF-H170 - Portocaliu: CF-H170L/I Endoscopul poate fi folosit cu accesoriile de endoterapie care au același cod al culorilor. Pentru mai multe informații privind combinarea endoscopului cu anumite accesorii de endoterapie, consultați „Combinatii de echipamente” la pagina 101 și manualele de instrucțiuni pentru accesorii compatibile.	Toate modelele
11	Comutatoarele la distanță 1 la 4	Funcțiile acestor teleîntrerupătoare, de la „1” la „4”, poate fi selectată de la sistemul video central. Consultați manualul de instrucțiuni pentru sistemul video central pentru mai multe detalii cu privire la configurarea acestor setări.	Toate modelele

Cap.2