

GHID DE UTILIZARE ROLE DE STERILIZARE

1. Rolele au 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 și 40 cm (+/- 1 cm) lățime și 200 m lungime (+/- 1 mt)
2. Rolele sunt tăiate cu o porțiune de 5-7 cm de sus și de jos.
3. După procesul de tăiere, produsul este plasat în rolă.
4. Partea de sus și de jos va fi deschisă. Este închis cu o mașină adecvată de căldură și etanșare.
5. Dacă este necesar, indicatorul poate fi pus în rolă. După aceea, va fi gata pentru procesul de sterilizare.
6. Există 2 sau 3 indicatori pe partea laterală a rolelor. Indicatorii sunt pentru abur, oxid de etilenă și formaldehidă.
7. După procesul de sterilizare, culoarea se schimbă ca mai jos :

(STEAM) De la albastru la verde

(EO) de la roz la portocaliu

(FO) de la violet la verde

8. Procesul de sterilizare se face la :

134°C timp de 3,5 min sau 7 min

121°C timp de 15min

ATENȚIE

- * Vă rugăm să acordați atenție deformării și ruperii pachetelor.
- * Nu supraîncărcați pachetele.
- * Vă rugăm să acordați atenție rezistenței de etanșare a ambelor capete.
- *Nu folosiți produse deteriorate
- *Păstrați produsele la temperatura camerei 25°C