



# DETERGENT PENTRU REPROCESAREA AUTOMATĂ A ENDOSCOAPELOR

## SOLUSCOPE EZ

**DETERGENT PENTRU ENDOSCOAPE FLEXIBILE  
DESTINAT A FI UTILIZAT EXCLUSIV CU SOLUSCOPE  
SERIE 1**

- Detergent tri-enzimatic
- Eficacitate dovedită împotriva biofilmului și a proteinelor
- Conform cu EN ISO 15883-4
- Compatibil cu o gamă largă de endoscoape flexibile
- Conexiune sigură



# SOLUSCOPE EZ

Detergent pentru endoscoape flexibile, destinat a fi utilizat exclusiv cu Soluscope Serie 1



SOLUSCOPE SERIE 1

## COMPOZIȚIE PRODUS

- Surfactanți neionici și anionici
- Agenți de sechestrare
- Complex enzimatic (protează, lipază, amilază)
- Excipienți

## CARACTERISTICI PRODUS

- Lichid limpede de culoare galben pal
- Densitate la 20°C: 1,09 mg/ml
- pH produs diluat (0,25%): aproximativ 8,5
- pH produs pur la 20°C: aproximativ 6,7\*
- pH produs diluat la 0,5%: aproximativ 7,6\*
- Conductivitate la 0,5%: 231  $\mu$ S/cm

\*măsurarea valorii pH-ului s-a făcut în condiții operaționale cu ajutorul unui pHmetru cu compensare de temperatură.

## INFORMAȚII COMANDĂ

| PRODUS       | UNITATE DE AMBALARE | COD COMANDĂ |
|--------------|---------------------|-------------|
| SOLUSCOPE EZ | 4 x 5 L             | 3105530     |

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înșurubați pistonul cu capac negru pe recipient. Asigurați-vă că gura de aerisire nu este blocată. Puneți recipientul la loc și conectați-l la echipamentul de reprocesare (a se consulta Manualul de Utilizare). Diluție automată. Valabilitate produs după deschidere: 2 luni conectat la echipamentul de reprocesare (notați data deschiderii pe eticheta special concepută cu acest scop).

## DEPOZITARE

Avertizare - respectați precauțiunile de utilizare (stabilite prin reglementările europene în vigoare cu privire la clasificarea și etichetarea produselor chimice).

## DISPOZITIV MEDICAL - UTILIZAȚI ÎN SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs.



DOAR PENTRU UTILIZATORII PROFESIONALI.



**SOLUSCOPE SAS**  
(An Ecolab Company)  
100, rue du Fauge  
Z.I Les Paluds - 13400  
Aubagne - France

Distribuit de:  
**SC ECOLAB SRL**  
Centrul de afaceri IDEO  
Sos Pacurari, nr 138  
700545, Iasi, Romania  
T +40 232 22 22 10  
www.ecolab.ro



www.ecolab.com



www.soluscope.com

# DEZINFECTANT PENTRU REPROCESAREA AUTOMATĂ A ENDOSCOAPELOR

## SOLUSCOPE PA

### DEZINFECTANT PENTRU ENDOSCOAPELE FLEXIBILE

- Dezinfectant pe bază de acid peracetic
- Spectru larg de eficacitate
- Conform cu EN ISO 15883-4
- Compatibil cu o gamă largă de endoscoape flexibile
- Sistem închis și recipiente cu canulă integrată



# SOLUSCOPE PA

A se utiliza exclusiv cu Soluscope Serie 1 PA



**SOLUSCOPE  
SERIE 1 PA**

## COMPOZIȚIE PRODUS

- 5% (w/w) acid peracetic
- Agenți stabilizatori

## CARACTERISTICI PRODUS

- Valabilitate: 14 luni (recipient închis)
- Aspect: soluție clară și incoloră
- Parfum: caracteristic
- pH produs pur\*: 1 - 4,2
- Densitate specifică la 20°C: 1,10 - 1,13
- Index de refracție: 1,35 - 1,37
- Vâscozitate: < 10 mPa/s

\*măsurarea valorii pH-ului s-a făcut în condiții operaționale cu ajutorul unui pHmetru cu compensare de temperatură.

## PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE

| EFICACITATE/CONDIȚII                                    | CONCENTRAȚIE | TEMPERATURĂ | TIMP DE CONTACT |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|
| Bactericid* - În conformitate cu EN 13727+A2, EN 14561  | 1%           | 40°C        | 6 min           |
| Micobactericid* - În conformitate cu EN 14348, EN 14563 | 1%           | 40°C        | 6 min           |
| Fungicid* - În conformitate cu EN 13624, EN 14562       | 1%           | 40°C        | 6 min           |
| Virucid* - În conformitate cu EN 14476+A1, EN 17111     | 1%           | 40°C        | 6 min           |

\*=condiții de curățenie

## INFORMAȚII COMANDĂ

| PRODUS       | UNITATE DE AMBALARE | COD COMANDĂ |
|--------------|---------------------|-------------|
| SOLUSCOPE PA | 4 x 5 L             | 3105490     |

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Așezați flaconul pe poziție
- Înșurubați capacul alb al Soluscope Serie 1 PA pe flacon (a se consulta Manualul de Utilizare)
- Asigurați-vă că gura de aerisire nu este blocată
- Diluție automată: 1% (10ml/L) - 40°C - 6 min

Valabilitate produs după deschidere: 2 luni conectat la echipamentul de reprocesare (notați data deschiderii pe eticheta special concepută cu acest scop).


## DEPOZITARE

Avertizare - respectați precauțiunile de utilizare (stabilite prin reglementările europene în vigoare cu privire la clasificarea și etichetarea produselor chimice).

## DISPOZITIV MEDICAL - UTILIZAȚI ÎN SIGURANȚĂ

Clasa IIb

Citiți cu atenție eticheta și informațiile despre produs.

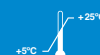

DOAR PENTRU UTILIZATORII PROFESIONALI.

**SOLUSCOPE SAS**  
(An Ecolab Company)  
100, rue du Fauge  
Z.I Les Paluds - 13400  
Aubagne - France

Distribuit de:  
**SC ECOLAB SRL**  
Centrul de afaceri IDEO  
Sos Pacurari, nr 138  
700545, Iasi, Romania  
T +40 232 22 22 10  
www.ecolab.ro

**ECOLAB®**

www.ecolab.com

**Soluscope**

www.soluscope.com