

INSTRUCȚIUNE PENTRU UTILIZARE  
**SET PETRU REALIZAREA PLASMAFAREZEI**

***Denumirea modelului: Separator de plasmă de unică folosință***

**Model:** 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2411, 2414, 2415, 2416, 2417, 2420, 2421, 2422, 2423

**Descrierea și structura:** Setul constă dintr-un container de separare, o conductă, un eșantion de sânge și o pungă pentru plasmă. Este fabricat din materiale medicale macromoleculare, care sunt prelucrate și asamblate prin extrudare și turnare prin injecție.

Setul este fabricat din următoarele materiale: policarbonat, clorură de polivinil, polipropilenă, polietilen tereftalat, copolimer acrilonitril-butadien-stiren, poliamidă.

***Utilizarea produsului, domeniul de aplicare***

Acest produs este utilizat împreună cu un separator de plasmă anticoagulant și centrifugal. Este un material consumabil de unică folosință pentru separarea plasmatică centrifugală.

***Reguli de utilizare:***

1. Scoateți produsul din ambalajul aseptice și conectați produsul cu anticoagulant pentru a vă asigura poziția de conectare în conformitate cu cerințele de operare aseptice.
2. Instalați produsul pe tăietorul de celuloză conform cerințelor de utilizare ale tăietorului de celuloză pentru a asigura instalarea corespunzătoare.
3. După utilizare, încălziți și etanșați în conformitate cu procedura standardă. Prelucrarea și conservarea se va efectua în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății.
4. Închideți clema tubului de prelevare atunci când preluați pulpa cu ajutorul tubului de testare, deschideți clema la prelevare și introduceți tubul de prelevare cu plasmă.
5. Produsul este cu un dispozitiv pentru punția a soluției saline și este conectat cu o pungă de soluție salină.
6. Produsele cu dispozitive de eșantionare sunt prelevate în funcție de cerințele eșantionatorului.

***Manipularea accidentelor***

Măsurile de urgență și de corecție întreprinse de operatori și de utilizatori trebuie să fie efectuate în conformitate cu specificațiile privind operațiunile de siguranță ale stației cu plasmă unică.

### ***Avertizări***

Acest produs este utilizat pentru colectarea componentelor sanguine. Trebuie să fie utilizat cu anticoagulant. Dacă anticoagulantul este insuficient, produsul poate funcționa incorect. Nu utilizați lichide non-anticoagulante.

### ***Notă***

1. Acest produs este destinat utilizării unice a produselor sterile, neîncălzite, ambalate în ambalaje sterile, respectând cu strictețe principiile utilizării.
2. Produsul este sterilizat cu oxid de etilenă și are o valabilitate de 3 ani.
3. Temperatura de depozitare și transportare a acestui produs este de 20-55°C, umiditatea relativă este de 8-95%.
4. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare pentru a înțelege metodele de utilizare și funcțiile produsului pentru a vă asigura o utilizare sigură.

### ***Avertizări***

1. Numai pentru o singură utilizare.
2. Utilizarea este strict interzisă dacă ambalajul este deteriorat.
3. După utilizare, ardeți sau distrugeți produsul mecanic.

### ***Efecte secundare***

1. Poate provoca aceleași efecte ca și în cazul donării sîngelui: amețeli, comă, vomă, dificultăți de respirației, hematom la locul puncției și sincopa hipovolemice.
2. Anticoagulantele care conțin săruri terțiare vor intra rapid în corpul uman și chelarea sărurilor terțiare cu calciu va duce la reacții hipocalcemice la donatorii de sânge. Astfel de reacții sunt, de obicei, caracterizate prin "amorțeală" și apar în principal în zonele periorale. Dacă apar astfel de reacții, întreaga rată de curgere a sîngelui poate fi redusă sau procedura poate fi suspendată.
3. Pot apărea reacții hipervolemice sau hipovolemice dacă echilibrul fluxului de lichid al pacientului nu este controlat în timpul procesului de separare.