

ca rezultat, indicatorul de stare/alarmă a electrodului dispersiv dublu oferă o măsură relativă a calității contactului pe măsură ce procedura progresează. Dacă calitatea contactului se deteriorează la un nivel inacceptabil, toate segmentele GRAFICULUI DE BARE vor fi stinse, INDICATORUL DE STARE va clipi pe culoarea roșie și va apărea o alarmă.

2. **INDICATORUL DE STARE/ALARMĂ A ELECTRODULUI DISPERSIV UNIC:** Indică starea unui singur electrod dispersiv atunci când electrod dispersiv unic este conectat la ESU. Acest INDICATOR DE STARE va clipi pe culoarea roșie înainte de conectarea oricărui electrod dispersiv. Acest INDICATOR DE STARE se va aprinde pe culoarea verde constant după ce un singur electrod dispersiv este conectat în mod acceptabil la ESU.

AVERTIZARE

INDICATORUL DE STARE/ALARMĂ A ELECTRODULUI DISPERSIV UNIC NU OFERĂ NICIO INDICAȚIE A CALITĂȚII CONTACTULUI DINTRE ELECTRODUL DISPERSIV UNIC ȘI PACIENT.

Dacă calitatea conexiunii dintre ESU și electrodul dispersiv unic se deteriorează la un nivel inacceptabil, acest INDICATOR DE STARE va clipi pe culoarea roșie și va apărea o alarmă.

3. **INDICATORUL MODULUI GENERAL:** Acest mod implicit se aprinde când nu sunt selectate moduri de specialitate.
4. **INDICATORUL MODULUI DE SPECIALITATE FLUIDS:** Se aprinde când este selectat modul de specialitate pentru fluide.
5. **INDICATORUL MODULUI DE SPECIALITATE LAP:** Se aprinde când este selectat modul de specialitate Lap
6. **INDICATORUL DE PROGRAM:** Indică programul selectat.
7. **TASTA DE DERULARE A MODULUI DE SPECIALITATE:** Apăsând această tastă vei derula între modul General, Fluids și Lap.
8. **TASTA DE DERULARE PENTRU SELECTAREA PROGRAMULUI:** Apăsând această tastă, vei derula între locațiile programelor stocate.
9. **TASTA DE STOCARE A PROGRAMULUI:** Stochează setările curente în locația programului selectat.
10. **INDICATORUL DE ACTIVARE PURE CUT:** Se aprinde când a fost selectat modul monopolar Pure Cut.
11. **INDICATORUL BLEND 1:** Se aprinde când este selectat Blend 1 monopolar.
12. **INDICATORUL BLEND 2:** Se aprinde când este selectat Blend 2 monopolar.

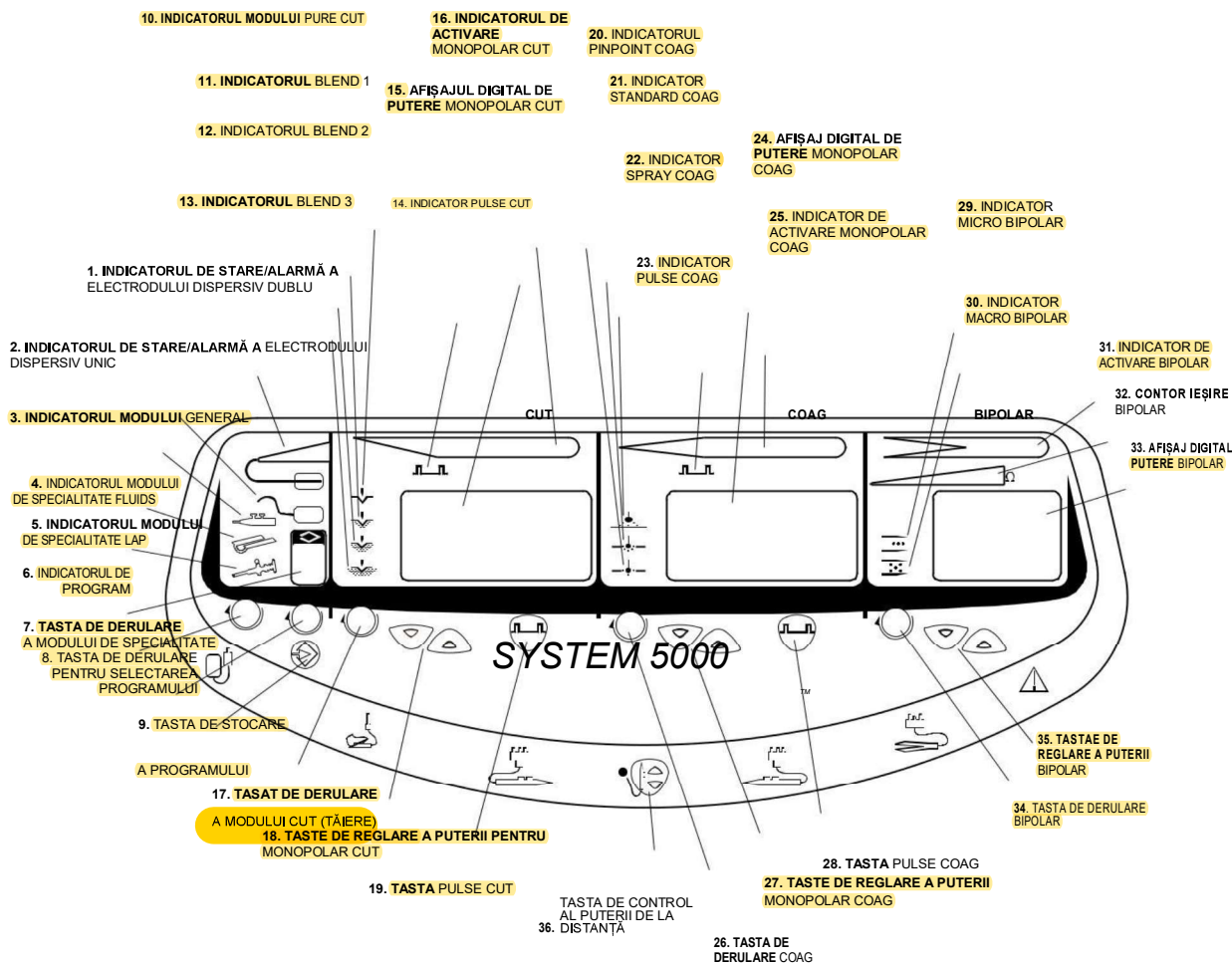


Figura 2.1 Panoul de comandă