

Fișă tehnică de control al calității și instrucțiuni de utilizare
Ser hemolitic (Hemolizina)

Codul produsului: HS
Nr. lotului: 008
Data fabricației: 2022/02
Data de expirare: 2025/02

Componentele kitului:

	Lot	Data expirării
Flacon	HS-008	2025/02

Descriere:

Ser hemolitic obținut dintr-un grup de seruri de iepure sensibilizate împotriva hematiilor de oaie. Pentru utilizare în testul de fixare a complementului pentru diagnosticarea diferitelor boli veterinare.

Obținut în condiții aseptice și gestionat într-un cabinet de siguranță biologică.

Depozitare:

- La recepționare, păstrați între +2°C și +8°C.

Precauție pentru utilizare:

- Folosiți echipament individual de protecție în conformitate cu reglementările locale (haină de protecție de laborator, mănuși de unică folosință și eventual, protecție pentru ochi).
- Numai pentru utilizare in vitro.

Eliminarea deșeurilor:

- Toate deșeurile trebuie decontaminate în mod corespunzător înainte de eliminare. Aruncați în conformitate cu reglementările locale.
- Este responsabilitatea fiecărui laborator să manipuleze deșeurile și reziduurile produse în funcție de tipul și gradul de pericol al acestora.

Termen de valabilitate:

- Reactivul este stabil până la data de expirare indicată pe eticheta ambalajului, dacă este păstrat în condițiile recomandate.
- A nu se utiliza după data de expirare.

Control de calitate:

Activitate hemolitică: CONFORMĂ.

Mod de Utilizare:

- 1- Ser gata de utilizare. A nu se reconstitui cu apă.
 - 2- Titrează, în conformitate cu protocoalele normalizate de laborator.
- În condițiile noastre de lucru, titrarea se realizează cu o soluție de globule roșii de oaie la 2,5%.

Metodă:	Diluții de testat:
Test de fixare a complementului.	Indică titrul (diluția de lucru) de 1/1000. Obținut în condițiile noastre de lucru și conform protocolului stabilit de standardul francez NF U47-004.

