

Fișă tehnică de control al calității și instrucțiuni de utilizare
Ser negativ pentru bruceloză liofilizat

Codul produsului: MRINEG-BRU

Nr. lotului: 003

Data fabricației: 2019/09

Descriere:

Ser de bovine liofilizat fără anticorpi specifici anti-*Brucella*.

Depozitare/Conservare:

- A se păstra între +2°C și +26°C înainte de reconstituire.
- Nu dezghețați niciodată mai mult de 3 ori.
- A se păstra la -20°C în alicote după reconstituire până la 1 an.
- Poate fi păstrat nediluat la +4°C sub formă lichidă până la 2 zile.

Termen de valabilitate:

Acest produs nu poartă o dată exactă de expirare deoarece este liofilizat și foarte stabil în timp.

Ca regulă generală, poate fi păstrat până la 10 ani la +2 – 26°C de la data producției în formă liofilizată.

Control de calitate:

Acest ser a fost găsit negativ când a fost testat de:

ID Screen® Bruceloză Ser Indirect ELISA pentru mai multe specii

Test de fixare a complementului CFT

Rose Bengal RSA

Mod de utilizare:

1- Reconstituiți în **1 ml** apă distilată.

2- Așteptați 1-2 min și amestecați bine pentru a omogeniza soluția.