

2.4.2 Meniul principal

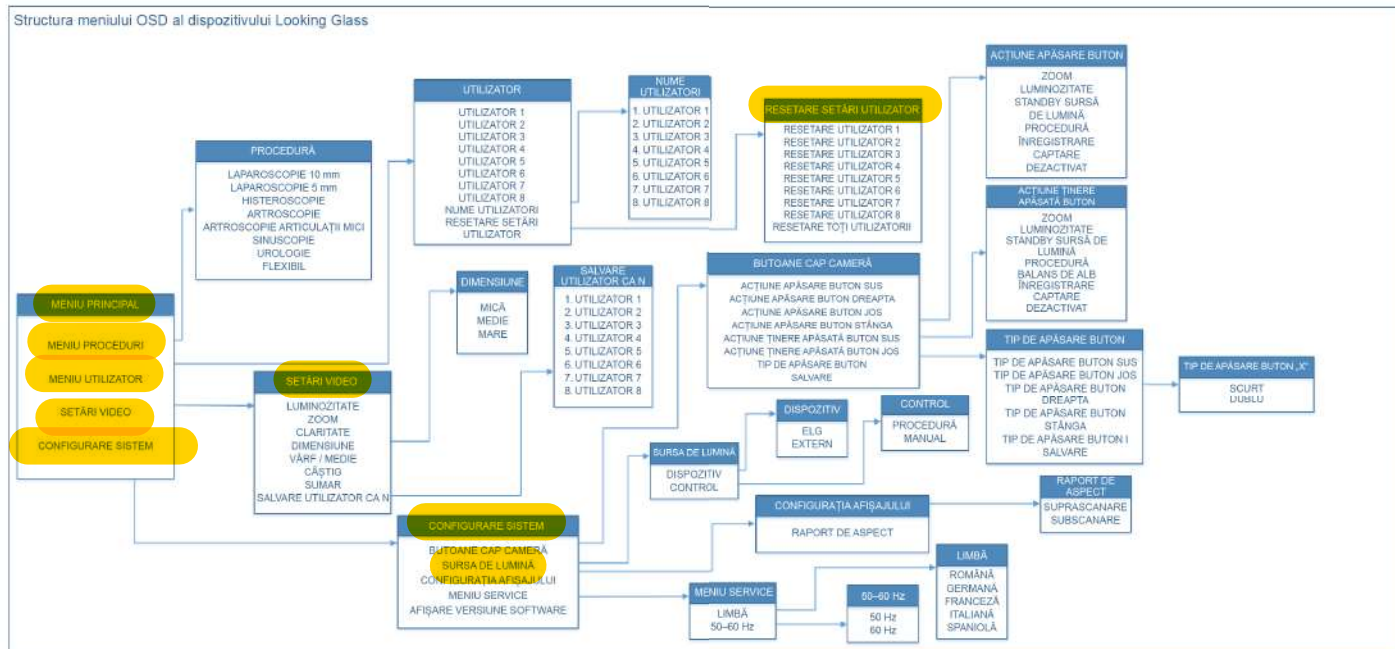


Figura 17: Structura meniului OSD al dispozitivului Looking Glass

Apăsați pe butonul MENIU de pe panoul frontal al controlerului camerei pentru a afișa MENIUL PRINCIPAL, care afișează următoarele opțiuni de meniu OSD:



Figura 18: Meniul principal OSD al dispozitivului Looking Glass

2.4.3 Meniul Proceduri

Selectați această opțiune pentru a afișa un meniu PROCEDURĂ în care veți selecta procedura medicală de efectuat. Opțiunile sunt:

LAPAROSCOPIE 10 MM
 LAPAROSCOPIE 5 MM
 HISTEROSCOPIE
 ARTROSCOPIE
 ARTROSCOPIE ARTICULAȚII MICI
 SINUSCOPIE
 TELESCOP FLEXIBIL UROLOGIE

După ce selectați procedura, meniul OSD va afișa procedura în partea de jos a ecranului timp de aproximativ 5 secunde, iar imaginea live revine.