

1.0 INTRODUCERE

Se recomandă ca personalul să studieze acest manual înainte de a încerca să opereze,



să curețe și/sau să dezinfecteze Încărcătorul de baterii cu litiu Hall® (L3000).

Utilizarea eficientă și în siguranță a acestui echipament necesită înțelegerea și respectarea tuturor avertismentelor, notificărilor de precauție și instrucțiunilor marcate pe produs și incluse în acest manual.

1.1 Utilizare prevăzută

Încărcătorul de baterii cu litiu Hall (L3000) este utilizat pentru a încărca toate bateriile cu litiu Hall aprobate. Toate bateriile Hall cu litiu pot fi încărcate înainte de sterilizare plasând acumulatorul direct într-una din cele patru stații de încărcare. Încărcătorul de baterii cu litiu Hall (L3000) nu este destinat utilizării în zonele pentru pacienți.

1.2 Contraindicații

Fără

1.3 Avertismente și măsuri de precauție



NU omiteți această secțiune. Aceasta conține avertismente și măsuri de precauție care trebuie înțelese în întregime înainte de utilizarea echipamentului. Neînțelegerea și nerespectarea acestor avertismente și măsuri de precauție poate cauza vătămarea corporală sau defectarea echipamentului.

Cuvintele **AVERTISMENT**, **MĂSURĂ DE PRECAUȚIE** și **NOTĂ** au semnificații speciale și trebuie citite cu atenție.

AVERTISMENT: Un avertisment conține informații esențiale referitoare la reacțiile adverse severe și la riscurile potențiale care pot surveni în cazul utilizării corecte sau greșite a echipamentului. Nerespectarea informațiilor sau a procedurilor incluse într-un avertisment ar putea provoca vătămări sau alte reacții adverse grave pentru pacient și/sau pentru echipa chirurgicală.



MĂSURĂ DE PRECAUȚIE: O precauție conține instrucțiuni privind măsuri speciale care trebuie aplicate de către operator în vederea utilizării sigure și eficiente a echipamentului. Nerespectarea informațiilor sau a procedurilor prezentate într-o precauție poate cauza deteriorarea echipamentului.



NOTĂ: Informații suplimentare pot fi prezentate într-o NOTĂ. Aceste informații nu au niciun efect esențial asupra pacientului sau a echipamentului.