

MASĂ PENTRU MANIPUALRE– MPI-002

Cărucior medical conceput pentru transportul și repartizarea în saloanele spitalelor și altor instituții medicale.

Structura carcasei: Oțel acoperit cu pulbere albă, grosime 1.5 mm

Rafturi: 2 unități, cu margini ridicate

Material rafturi: oțel inoxidabil satin, AISI 304

Grosime material rafturi: 0.8 mm

Sarcina suportată per raft: 25 kg

Protecția suprafeței: Strat de protecție prin pasivare chimică, conform standardului ASTM A967, pentru rezistență sporită la coroziune

Mânere pentru transportare

Roți: 4 roți pivotante din cauciuc

2 roți cu sistem de frânare: Diametru roți: 50 mm

Rezistență: Rezistentă la uzură și la substanțe pentru dezinfectare chimică

Indicații de utilizare: distribuția în secții medicale, saloane, zone de carantină sau izolare.

Contraindicații: niciuna, dacă se respectă instrucțiunile de utilizare.

Atenționare: Activați frânele înainte de utilizare staționară. nu transportați greutăți peste limita admisă.

Nu mișcați în timpul procedurilor, puneți frâne pe roți!

Dimensiuni	
Dimensiuni	670*550*920
Termen de garantie	4 ani (echivalent 48 luni)

Condiții de funcționare și depozitare:

- A se utiliza și depozita în încăperi închise, curate, la temperaturi între +2°C și +40°C, umiditate relativă 45–70%.
- Se recomandă păstrarea departe de surse de căldură și de substanțe corozive.
- Curățarea se face cu soluții pe bază de alcool sau dezinfectanți non-abrazivi, folosind lavete moi.

Condiții de menținere a garanției:

- Pierderea garanției apare în următoarele cazuri:
 - utilizare în afara destinației medicale;
 - modificări neautorizate sau intervenții tehnice neaprobat;
 - deteriorări mecanice provocate de utilizator;
 - curățare cu substanțe sau obiecte abrazive.
- Pentru intervenții în garanție este necesară păstrarea dovezii de achiziție și a documentației tehnice.



Producător: Caravan Express SRL
Republica Moldova
or. Cîmișlia, MD-4101



Maraca comerciala ALICOM