

LOT 10



Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма
«БликМедиклПродакшн»

Россия, 347900, г. Таганрог, пер. Биржевой Спуск 8-а, оф. 19, тел.: (8634) 34-13-38,
Ф-л «Ростов-на-Дону» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Ростов-на-Дону, БИК 046015233, Р/С 40702810090000000856,
К/С 30101810600000000233, ИНН 6164299736, КПП 615401001, ОКПО 89243190, ОГРН 1106164004396

Технический паспорт

Депарафинирующий раствор Блик

Назначение: Для удаления парафина из срезов тканей в рутинной гистологии, гистохимии и гибридизации in situ в процедурах проводки и окраски препаратов.

Описание:

Прозрачная бесцветная жидкость белого цвета без запаха.
Раствор готов к использованию.

Состав: Смесь алифатических углеводородов, отдушка.

Аспект	Допустимые пределы содержания	Результат анализа
Внешний вид	бесцветная прозрачная жидкость со слабым специфическим запахом.	соответствует
Начальная точка кипения	161,1	соответствует
Температура испарения	175,5	соответствует
Массовая доля ароматических углеводородов	0,001 г/кг	соответствует
Показатель преломления при 20°C	1,41	соответствует
Бромное число	1	соответствует
Плотность при 15°C	745 кг/м куб.	соответствует

Срок хранения: 1 год.



Подписи _____

Серия № _____





Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма
«БликМедиклПродакшн»

Россия, 347900, г. Таганрог, пер. Биржевой Спуск 8-а, оф. 19, тел.: (8634) 34-13-38,
Ф-л «Ростов-на-Дону» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Ростов-на-Дону, БИК 046015233, Р/С 40702810090000000656,
К/С 30101810600000000233, ИНН 6164299736, КПП 615401001, ОГПО 89243190, ОГРН 1106164004396

Депарафинирующий раствор Блик

Назначение: Используется для удаления парафина из срезов тканей в рутинной гистологии, гистохимии, иммуногистохимии и гибридизации in situ в процедурах проводки и окраски препаратов.

Описание: Прозрачная жидкость белого цвета без запаха.
Раствор готов к использованию.

Состав: Смесь алифатических углеводов, отдушка.

Внимание! При попадании раствора в глаза обильно промыть водопроводной водой.
При попадании на кожу – обильно промыть проточной водой и затем вымыть водой с мылом.

Время депарафинирования:

3 смены депарафинирующего раствора Блик по 3 минуты каждая.

После – обработка в дегидратанте Блик.


При выполнении гистохимических процедур следуйте соответствующим протоколам.

Можно оставить ткани в любом депарафинирующем растворе на длительный срок.

Примечания:

1. Рекомендуемая толщина срезов 2-4 мкм. Для более толстых срезов время депарафинирования и высушивания увеличить в 2 и более раз, а смену растворов производить в 2 и более раза чаще.
2. Стекла должны быть предварительно высушены в вертикальной стойке для стекол в термостате 60°C 30-60 минут.
3. Смену депарафинирующих растворов проводить согласно расписанию окраски (оптимально через каждые 100 стекол для сосудов окраски на 250 мл).
4. При переносе стекол из одной емкости в другую дайте стечь избытку реактива.
5. Для последующего обезвоживания желательнее пользоваться дегидратантом Блик. Нежелательно использовать этанол и ацетон.
6. Не используйте для депарафинирования микроволновую печь или другие нагревательные приборы. При температуре в лаборатории ниже 20°C можно пользоваться термостатом 40°C.
7. Срезы, депарафинированные в депарафинирующем растворе Блик, пригодны для иммуногистохимического исследования и гибридизации in situ.
8. При разливе депарафинирующего раствора Блик собрать жидкость в ведро и вымыть полы мыльным раствором и потом водой (работать в проветриваемом помещении, перчатках и фартуке).
9. Использованный депарафинирующий раствор Блик собирайте в отдельную емкость для утилизации. Нельзя выливать использованный реактив в канализацию!
10. Не использовать депарафинирующий раствор Блик вблизи открытого огня!

Срок хранения: 1 год.

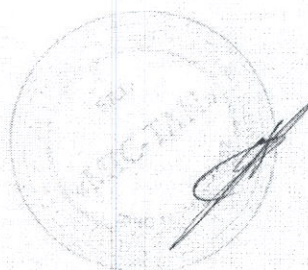



Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма
«БликМедиклПродакшн»

Россия, 347900, г. Таганрог, пер. Биржевой Спуск 8-а, оф. 19, тел.: (8634) 34-13-38,
Ф-л «Ростов-на-Дону» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Ростов-на-Дону, БИК 046015233, Р/С 40702810090000000656,
К/С 30101810600000000233, ИНН 6164299736, КПП 615401001, ОКПО 89243190, ОГРН 1106164004396

Депарафинирующий раствор Блик

Назначение: Используется для удаления парафина из срезов тканей в рутинной гистологии, гистохимии, иммуногистохимии и гибридизации *in situ* в процедурах проводки и окраски препаратов.

Описание: Прозрачная жидкость белого цвета без запаха.
Раствор готов к использованию.

Состав: Смесь алифатических углеводов, отдушка.

Внимание! При попадании раствора в глаза обильно промыть водопроводной водой.
При попадании на кожу – обильно промыть проточной водой и затем вымыть водой с мылом.

Время депарафинирования:

3 смены депарафинирующего раствора Блик по 3 минуты каждая.

После – обработка в дегидратанте Блик.


При выполнении гистохимических процедур следуйте соответствующим протоколам.

Можно оставить ткани в любом депарафинирующем растворе на длительный срок.

Примечания:

1. Рекомендуемая толщина срезов 2-4 мкм. Для более толстых срезов время депарафинирования и высушивания увеличить в 2 и более раз, а смену растворов производить в 2 и более раза чаще.
2. Стекла должны быть предварительно высушены в вертикальной стойке для стекол в термостате 60°C 30-60 минут.
3. Смену депарафинирующих растворов проводить согласно расписанию окраски (оптимально через каждые 100 стекол для сосудов окраски на 250 мл).
4. При переносе стекол из одной емкости в другую дайте стечь избытку реактива.
5. Для последующего обезвоживания желательно пользоваться дегидратантом Блик. Нежелательно использовать этанол и ацетон.
6. Не используйте для депарафинирования микроволновую печь или другие нагревательные приборы. При температуре в лаборатории ниже 20°C можно пользоваться термостатом 40°C.
7. Срезы, депарафинированные в депарафинирующем растворе Блик, пригодны для иммуногистохимического исследования и гибридизации *in situ*.
8. При разливе депарафинирующего раствора Блик собрать жидкость в ведро и вымыть полы мыльным раствором и потом водой (работать в проветриваемом помещении, перчатках и фартуке).
9. Использованный депарафинирующий раствор Блик собирайте в отдельную емкость для утилизации. Нельзя выливать использованный реактив в канализацию!
10. Не использовать депарафинирующий раствор Блик вблизи открытого огня!

Срок хранения: 1 год.

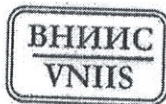

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60
<http://www.vniis.ru> E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 104-с/034 от 23.01.12.

Директору
ООО «НПФ «БликМедиклПродакшн»
Г.Ю. Манукян
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская,
15, оф.21
тел. (863) 269-53-67

На № 01
от 12.01.2012г.

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции: фиксаторы для гистологии, реактивы для проводки гистологических образцов, красители для гистологии и цитологии, наборы красителей для гистологии и цитологии, декальцификаторы, парафиновые среды, расходные материалы из пластика (гистологические кассеты, контейнеры для гистологического материала), сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позиции «Наборы реагентов для клинической лабораторной диагностики» (код ОКП 93 9816).

Указанная в настоящей справке продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.09 г. № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010г. № 148, от 17.03.2010г. № 149, от 26.07.2010г. № 548, от 20.10.2010г. № 848, от 13.11.2010г. № 906), и представление сертификата соответствия и декларации о соответствии на данную продукцию не требуется.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в отношении указанной в справке продукции или до вступления в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию.

Заведующий отделом института

Круглосуточный автоинформатор (499) 253 00 78
телефоны для справок (499) 253 03 68, (499) 253 03 79
факсы (499) 253 00 85, (499) 253 69

