

Instrucțiuni de curățare și sterilizare pentru instrumentele manuale Linvatec®, Hall® Surgical, Concept® și Shutt®

Avertizări

1. Instrumentul poate fi extrem de tăios. Manipularea necorespunzătoare poate cauza răni.
2. Avertismentele suplimentare le includ pe cele care se aplică tuturor procedurilor chirurgicale. În general, o atenție deosebită trebuie acordată asepției și evitării riscurilor anatomice.

Măsuri de precauție

1. Înainte de utilizare, curățare sau sterilizare, îndepărtați toate ambalajele de protecție și protecția pentru vârf, dacă este cazul.
2. Inspectați instrumentul înainte de utilizare pentru a vă asigura că dispozitivul este în stare fizică bună și funcționează corect. Nu trebuie să existe componente slăbite, rupte sau aliniate necorespunzător.
3. Utilizați dispozitivul cu grijă pentru a minimiza presiunea pe o parte sau curbarea.
4. Pentru a evita deteriorarea sau ruperea în timpul utilizării, nu aplicați forță excesivă asupra instrumentelor.
5. Pentru a evita deteriorarea sau ruperea, evitați contactul accidental cu alte instrumente chirurgicale în timpul utilizării.
6. Inspectați instrumentul după utilizare pentru a vă asigura că nu a suferit deteriorări.
7. Instrumentul sunt conceput pentru utilizare de către medici chirurghi cu experiență în procedurile specializate corespunzătoare. Medicul chirurg are responsabilitatea de a se familiariza cu tehnicile de utilizare corecte.

Curățare

1. Urmați măsurile de precauție universale pentru îmbrăcămintea de protecție atunci când manipulați și curățați echipamentele contaminate.
2. Deschideți și/sau dezasamblați instrumentul imediat după utilizare. Plasați într-un bazin cu apă distilată.

Notă: Soluția salină nu este recomandată, deoarece are un efect coroziv asupra anumitor metale.

3. Instrumentele trebuie curățate cu o soluție de curățare cu pH neutru și o perie non-abrazivă.
4. Clătiți sub jet de apă, apoi în apă distilată.
5. Uscați complet echipamentul folosind un prosop curat și fără scame.
6. Utilizați un lubrifiant comercial bazat pe apă pentru a minimiza uzura părților mobile.

Sterilizarea cu abur

Pregătiți instrumentul astfel încât toate suprafețele să intre în contact cu aburul. Instrumentele cu balamale și conectori Luer-Lock trebuie să fie în poziție deschisă. Dezasamblați instrumentele ori de câte ori este posibil.

Metodă	Ciclu	Temperatură minimă	Timp de expunere
Abur (învelită/neînvelită)	Previdare	270°F (132°C)	3 minute
Abur (învelită/neînvelită)	Gravitație	270°F (132°C)	10 minute

Pentru sterilizarea instrumentelor într-o tavă, consultați instrucțiunile furnizate cu tava specială de sterilizare.

Notă: Validarea sterilizării a fost efectuată în conformitate cu cerințele AAMI TIR12

Pentru mai multe informații sau o demonstrație a utilizării produsului, contactați reprezentanța de vânzări CONMED Linvatec regională sau sunați la 1-866-426-6633 în SUA.