

Imprimarea raportului

Puteți printa imagini și rapoarte generate de ARCHITECT System. Sistemul dvs. poate fi configurat pentru a imprima anumite rapoarte automat. De exemplu, rapoartele Procedure (Procedură), Cal Curve Details (Detalii curbă calibrare), Sample (Probă), și Results List (Listă rezultate) după finalizarea activității asociate.

Procedurile de imprimare ale raportului includ:

- [Imprimarea unui raport](#), pagina 5-379
- [Imprimarea raportului Order List \(Listă comandă\)](#), pagina 5-381
- [Imprimați raportul Levey-Jennings](#), pagina 5-382
- [Imprimarea QC Analysis \(Analiză QC\)](#), pagina 5-383
- [Imprimarea QC Summary \(Rezumat QC\)](#), pagina 5-383
- [Imprimarea unui raport Maintenance History \(Istoric întreținere\) pentru o anumită lună](#), pagina 5-384
- [Imprimarea unui raport Maintenance History \(Istoric întreținere\) pentru o anumită procedură](#), pagina 5-385
- [Imprimarea unui raport Procedure \(Procedură\)](#), pagina 5-385
- [Imprimarea raportului Message History Log \(Jurnal istoric mesaje\)](#), pagina 5-386
- [Imprimarea raportului Inventory Log \(Jurnal inventar\) \(funcție premium\)](#), pagina 5-387
- [Imprimarea Assay Parameter \(Parametru test\) pentru testele specificate](#), pagina 5-388
- [Imprimarea Assay Parameter \(Parametru test\) pentru toate testele](#), pagina 5-388
- [Vizualizarea unei cereri de imprimare aflată în așteptare](#), pagina 5-389
- [Ștergerea unei operațiuni de imprimare](#), pagina 5-389
- [Imprimarea unei imagini de fereastră](#), pagina 5-390
- [Ferestre - Imprimarea raportului](#), pagina 5-390

Imprimarea unui raport

Efectuați această procedură pentru a imprima un raport. Rapoartele sunt disponibile de la ecranele corespunzătoare. De exemplu, puteți imprima raportul Patient (Pacient) din ambele ecrane Results review (Revizuire rezultat) și Stored results (Rezultate stocate). Puteți imprima raportul Order List (Listă comandă) din fereastra Order status (Status comandă). Disponibilitatea rapoartelor este listată în tabelul de mai jos:

NOTĂ: Sistemul dvs. poate fi configurat pentru a imprima anumite rapoarte automat. Pentru mai multe informații, consultați [Configurarea setărilor rapoartelor](#), pagina 2-7.

Pentru a imprima datele pacientului, este necesar un ID de pacient. Dacă rezultatul testului selectat nu conține un PID, raportul va imprima informațiile antetului și nu va imprima datele.

Pentru a imprima ...	Accesați ...
Raportul Absorbance Data (Date absorbantă) (c System) , pagina A-3	Fereastra Results review (Revizuire rezultate) Fereastra Stored results (Rezultate stocate) Fereastra QC result review (Revizuire rezultate QC) Fereastra Stored QC results (Rezultate QC stocate) Fereastra Exception status (Status excepții)

Pentru a imprima ...	Accesați ...
Raportul Assay Parameter (Parametru test) (c System) , pagina A-5 Raportul Parameter Report (Raport parametru) (i System) , pagina A-13	Fereastra de configurare
Raportul Cal Curve Details (Detalii curbă calibrare) - Potențiometric (c System) , pagina A-18 Cal Curve Details Report - Linear (c System) , pagina A-21 Raportul Cal Curve Details (Detalii curbă calibrare) - Use Cal Factor/Blank (Utilizare factor/blank calibrare) (c System) , pagina A-24 Raportul Cal Curve Details (Detalii curbă calibrare) - Ajustare (i System) , pagina A-27 Raportul Cal Curve Details (Detalii curbă calibrare) - Complet (i System) , pagina A-30 Cal Curve Details Report Raportul Cal Curve Details (Detalii curbă calibrare) - Index (i System) , pagina A-33	Fereastra Calibration Status (Stare calibrare) Fereastra Calibration history (Istoric calibrare)
Raport Cal Curve Summary (Rezumat curbă calibrare) , pagina A-35	Fereastra Calibration Status (Stare calibrare) Fereastra Calibration history (Istoric calibrare)
PDF descărcat	Fereastra Abbott Mail
Raport Exception Details (Detalii excepții) , pagina A-37 Raport de stare a excepției , pagina A-40	Fereastra Exception status (Status excepții)
Raport Levey Jennings , pagina A-44	Fereastra grafic Levey-Jennings Fereastra QC reports (Rapoarte QC) Fereastra QC summary review (Revizuire rezumat QC)
Raport Maintenance History (Istoric întreținere) , pagina A-47	Fereastra Maintenance log (Jurnal de întreținere)
Raport Message History Log (Jurnal istoric mesaje) , pagina A-49 Raport jurnal de inventar (caracteristică premium) , pagina A-42	Fereastra System Logs (Jurnalizări sistem)
Raport Order List (Listă comandă) , pagina A-51 Raport de stare a comenzii , pagina A-53	Fereastra Order status (Status comandă)
Raport pacient , pagina A-55	Fereastra Results review (Revizuire rezultate) Fereastra Stored results (Rezultate stocate)
Raportul Plan My Day (Planificarea zilei de lucru) (funcție premium) , pagina A-57	Fereastra Plan my day (Planificarea zilei de lucru)
Raport procedură, bază , pagina A-61 Raportul Procedură, Coloană , pagina A-63	Fereastra Maintenance (Întreținere) Fereastra Diagnostics (Diagnoză)
Raport QC Analysis (Analiză QC) , pagina A-65 Raport QC Summary (Rezumat QC) , pagina A-73	Fereastra QC reports (Rapoarte QC) Fereastra QC summary review (Revizuire rezumat QC)
Raport Detalii rezultat QC , pagina A-68 Raport Listă rezultate QC , pagina A-71	Fereastra QC result review (Revizuire rezultate QC) Fereastra Stored QC results (Rezultate QC stocate)