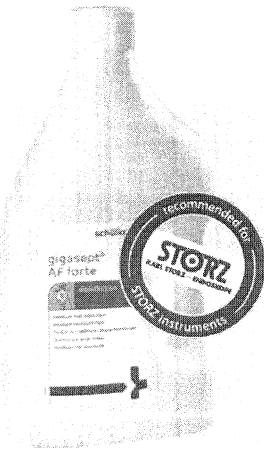


schülke -†**gigasept® AF forte**

gigasept® AF forte este un dezinfectant ce nu conține aldehide pentru dezinfectarea endoscoapelor flexibile, instrumentelor și accesoriilor medicale folosite în anestezie și îngrijire medicală.

2L / 5L**Avantajele noastre:**

- corespunde standardelor europene
- tuberculocid, microbactericid
- valabil timp de 7 zile
- miros foarte bun din motiv că nu conține aldehide
- potrivit pentru folosire în baia cu ultrasunete
- timp de contact redus chiar și în cazul sarcinii înalte datorită compoziției sale optimizate

Domeniile de utilizare

Dezinfectarea și curățarea endoscoapelor rigide și flexibile, accesoriilor de anestezie, măștilor chirurgicale, instrumentelor chirurgicale, etc.

Sfaturi de aplicare

- A nu se combina cu procesele termochimice pe bază de aldehide. Este de preferat să folosiți produse ce nu conțin aldehide.
- În afară de procesarea manuală a endoscoapelor și instrumentelor, gigasept® AF forte este potrivit și pentru mașinile semiautomate și complet automate care operează prin intermediul unui proces ciclic la temperatura camerei.

Metode de aplicare

- Asigurați-vă că dispozitivele ce urmează a fi tratate sunt complet cufundate, umezite și umplute cu soluție fără bule de aer. La expirarea timpului de contact, clătiți bine în apă de o calitate corespunzătoare ulterioare a echipamentului în apă sterilă.
- Astfel se evită orice interacțiuni și efectele nedorite în orice tratament manual

Interacțiuni

Dacă soluția de lucru și concentratele gigasept® AF forte intră în contact cu alte produse (în special cu cele care conțin aldehide), este posibilă formarea precipitațiilor/decolorarea/reducerea eficienței. Prin urmare, este necesar de evitat amestecarea produselor.

Înainte de prima folosire a gigasept® AF forte se recomandă să clătiți bine cu apă toate instrumentele, dispozitivele de aplicare și chiuvetele.

Eficiența microbiologică

- Bacterii (incl. micobacterii/M. tubekolosis) · fungi (C. albicans) · o serie de virusuri încapsulate (inclusiv HIV, HVB, HCV) · adenovirus, MRSA

Concentrațiile de aplicare / Timpul de contact

Eficiența	5 min	15 min	30 min	60 min
Aplicare conform certificatului VAH/DGHM				
bacterii (inclusiv M. terrae), fungi (C. albicans)	5 %	2 %	0,75%	
virusuri încapsulate (incl. HIV, HBV, HCV)	1 %	0,75%		
În baia cu ultrasunete: bacterii, fungi (C. albicans)	2 %			
Adenovirus				2%

1 l de soluție de lucru de 2 % corespunde cu 980 ml de apă și 20 ml de concentrat.

La 0,75 % un flacon de 2 litri ajunge pentru 260 de litri de soluție.

La 2 % un flacon de 2 litri ajunge pentru 100 de litri de soluție.

La 5 % un flacon de 2 litri ajunge pentru 40 de litri de soluție.



gigasept® AF forte



gigasept® AF forte este bactericid, fungicid și micobactericid, în conformitate cu standardele europene.

- Bactericid (EN 137227/EN 14561)
S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae
 - Fungicid (EN 13624/EN 14562):
C. albicans
 - Micobactericid (EN 14348/EN 14563):
M. terrae și M. avium
- Conform EN, concentrația de aplicare/timpul de contact este:
- 5 % - 5 min.
 - 2 % - 15 min.
 - 0,75 % - 30 min.

Date privind produsul

Substanțe active: 100 g conțin: 10 g de clorură de dimetildiocetilamoniu, 15 g de fenoxipropanol, 15,6 g de acetat de alchilguanidină, 9,5 g de laurilpropilendiamină

Etichetarea conform Regulamentului (CE) 648/2004:

5 – 15 % de tenside non-ionice, parfum.

Alte ingrediente: regulatori de pH, inhibitori ai coroziunii, coloranți.

Date fizico-chimice:

Concentrat:

Aspect: lichid limpede, verde
densitatea la 20 °C: 0,99 g/ml
pH: apr. 9,9

Soluție de lucru de 0,75%:

Aspect: soluție limpede, verde
pH: apr. 8,8

Soluție de lucru de 5 %:

Aspect: soluție limpede, verde
pH: apr. 9,0

Etichetarea conform Directivelor CE

- C: Corosiv.
N: Periculos pentru mediu.
R22: Nociv prin înghițire.
R34: Provoacă arsuri.
R50: Foarte toxic pentru organismele acvatice.
S26: La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul.
S36/37/39: A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii/fața.
S45: În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, a se consulta imediat medicul (dacă este posibil, i se arată eticheta).
S61: A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa tehnică de securitate.

Recomandări speciale

Se recomandă insistent folosirea mănușilor în timpul lucrului cu dezinfectanții.

La folosirea soluțiilor de 5 %, contactul accidental cu ochii poate cauza iritarea membranei mucoase. Este necesar de luat măsurile corespunzătoare de protecție.

A nu se depăși timpul de contact sau concentrațiile de folosire recomandate.

Din motivul alegerii ingredientelor cu eficiență înaltă, la concentrațiile recomandate de folosire pot apărea efecte de turbiditate (opalescență). Aceste efecte sunt specifice produsului și nu limitează eficiența produsului.

Forme de livrare/Unități de ambalare

Dimensiunea ambalajului	Unități de ambalare	de	Art. nr.
Flacon de 2 l	5 x 2 l		125 607
Canistră de 5 l	1 x 5 l		125 610

Accesorii/mijloace de dozare

Dimensiunile containerului	Art. nr.
Ceașcă de măsurat pentru flacon de 2 l (20 ml/1 înclinare)	183 401
Capac canistră de 5 l	135 501
Cheie canistră de 5 l	135 810
Ceașcă de măsurat pentru canistră de 5 l (20 ml la o apăsare a pompei)	117 101
Ceașcă de măsurat 50 ml	136 102
Ceașcă de măsurat 500 ml	136 101
Tuburi instrumentale schülke 3, 5, 10, 30 l	117 901

pentru informații detaliate privind mijloacele de dozare, vă rugăm să solicitați sondajul general privind tehnologia igienică.

Informație privind mediul

schülke fabrică produsele în mod economic și cu procese de producere avansate, sigure și inofensive pentru mediu, menținând, în același timp, standardele noastre de calitate înaltă.

Formula concentratului gigasept® AF forte a fost optimizată pentru a asigura un raport favorabil între ambalaj și conținut, astfel economisind energie în timpul livrării și ajutând la protejarea mediului la eliminarea produsului.

Fiind activ timp de 7 zile, produsul contaminează apa reziduală considerabil mai puțin decât soluțiile care trebuie să fie schimbate în fiecare zi.



Schülke & Mayr GmbH este certificată conform DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 și DIN EN ISO 13485 (nr. de înr. 004567-MP23) și are un sistem de mediu aprobat în conformitate cu Regulamentul de Audit Ecologic (nr. de înr. DE-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt,
Germania
Tel. +49 (0) 40-521 00-0
Fax: +49 (0) 40-52100-318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr UK Ltd.
1 Jenkin Road
Marea Britanie, Sheffield S9
IAT
Tel. +44(0)1142-5435-00
Fax: +44(0)1142-5435-01
mail.uk@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.
Seidengasse 9
1070 Viena, Austria
Tel. +43(0)1-523 25 01-0
Fax +43(0)1-523 25 01-60
office.austria@schuelke.com

gigasept® AF forte

Manipularea și depozitarea

1. **Depozitați produsul la temperatura camerei, în recipientul original.**
2. **Păstrați departe de caldură.**
3. **Păstrați departe de razele solare directe.**
4. **Asigurați-vă ca recipientul este bine închis.**
5. **Păstrați departe de produsele alimentare.**

Sfaturi de manipulare în con-diții de securitate:

Se va prepara soluția de lucru conform indicațiilor de pe eti-chetă(e) și/sau instrucțiunilor de folosire.

Măsuri de protecție împotriva incendiului și a exploziei:

Nu sunt necesare măsuri speciale de luptă împotriva incendiilor.

Măsuri de igienă:

Se vor scoate imediat toate hainele contaminate.

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere:

Se va păstra la temperatura camerei, în recipienti de original.

Informații suplimentare asu-pra condițiilor de depozitare:

Se va ține ferit de lumina directă a soarelui. Se va păstra de-parte de căldură. A se păstra ambalajul închis ermetic.

Măsuri de protecție în cazul depozitării în locuri comune:

Nu sunt de menționat materiale în mod special.

Reprezentant autorizat în Republica Moldova:

„Endo-Chirurgie” SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Drumul Viilor 30/2, ap. 54, MD-2001;

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9, MD-2023;

Telefon(fax) de contact: (022) 667286

e-mail: info@endochirurgie.md

web: www.endochirurgie.md



Schülke & Mayr GmbH este certificată conform DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 și DIN EN ISO 13485 (nr. de înr. 004567-MP23) și are un sistem de mediu aprobat în conformitate cu Regulamentul de Audit Ecologic (nr. de înr. DE-150-00003).



Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt,
Germania
Tel. +49 (0) 40-521 00-0
Fax: +49 (0) 40-52100-318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr UK Ltd.
1 Jenkin Road
Marea Britanie, Sheffield S9
1AT
Tel. +44(0)1142-5435-00
Fax: +44(0)1142-5435-01
mail.uk@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.
Seidengasse 9
1070 Viena, Austria
Tel. +43(0)1-523 25 01-0
Fax +43(0)1-523 25 01-60
office.austria@schuelke.com