

Informații despre produs (RO):

Bevisto-Instrumental

Notă: La utilizare se vor aplica instrucțiunile de utilizare de pe recipientul produsului respectiv.

BEVISTON®

Bevisto-Instrumental



Tip de preparat

Bevisto-Instrumental este un preparat cu amplă eficacitate, fără conținut de aldehide și de fenoli, destinat dezinfectării instrumentelor pentru pregătire manuală în procedura de imersie și în baie de ultrasunete. O formulă inovatoare asigură pregătirea rapidă, cuprinzătoare și protectivă cu materialul a instrumentelor cu concentrații scăzute de aplicare. Bevisto-Instrumental este adecvat pentru pregătirea întregului instrumentar termostabil și termolabil cum sunt accesoriiile pentru anestezie și endoscoapele rigide.

Concentrații de aplicare

Concentrație	Timp de expunere
Bactericid, levidicid, tuberculocid:	
2%	60 min.
3%	30 min.
4%	15 min

Efect împotriva virusului:

BVDV: 2%	15 min.
Vaccinia (incl. HBV, HCV, HIV): 2%	60 min.
Vaccinia (incl. HBV, HCV, HIV): 4%	15 min.

Caracteristici ale produsului

- Fără aldehide și fenoli
- Are efect bactericid, levidicid, tuberculocid (incl. M.-terrae)
- Este eficace împotriva tuturor virusurilor cu înveliș: BVDV, Vaccinia
- Eficace împotriva HBV/ HIV
- Rentabil
- Deosebit de delicat pentru materiale
- Cu miros plăcut, fără încărcarea dăunătoare a aerului
- Compatibilitate bună cu pielea în caz de contact involuntar de scurtă durată cu soluția utilă
- Ușor biodegradabil
- Verificare pe baza metodelor standard ale DGHM, a normelor DIN-EN privind dezinfectarea instrumentelor și a recomandărilor RKI

Domenii de utilizare

Pentru toate domeniile de utilizare în care se prepară instrumentar medical în procedura de imersie și în aparatul cu ultrasunete.

Indicații de utilizare

Este obligatorie respectarea întocmai a indicațiilor de utilizare și a liniilor directoare din partea producătorilor instrumentelor și aparatului cu ultrasunete, în special a indicațiilor privind măsurile pregătitoare, curățarea și dezinfectarea, spălarea, uscarea și depozitarea.

Indicații de preparare

Procedura de imersie

Cufundați instrumentele imediat după utilizare. Toate suprafețele și toate cavitățile trebuie să fie acoperite, respectiv umplute. Respectați concentrațiile de aplicare și timpii de expunere. Extrageți instrumentele, spălați-le bine cu apă și uscați-le.

Baia de ultrasunete:

Se vor respecta domeniul de frecvență prescris și durata de dezinfectare prevăzută. Trebuie evitate temperaturi ale apei de peste 45 °C.

Informații despre produs (RO):**Bevisto-Instrumental**

Notă: La utilizare se vor aplica instrucțiunile de utilizare de pe recipientul produsului respectiv.

Compatibilitate/ stabilitate/ calitatea apei

La prepararea soluției utile și la spălare trebuie folosită apă la nivelul de calitate al apei potabile. Dacă se depășește numărul maxim admisibil de colonii bacteriene sau dacă se evidențiază germeni patogeni, la spălare trebuie recurs la apă lipsită de germeni sau sterilă. Pentru cazul unei duriții foarte ridicate a apei potabile sau al unui conținut prea mare de cloruri recomandă apă complet demineralizată sau apă distilată. La spălarea dinaintea unei sterilizări trebuie folosită apă complet demineralizată.

Soluția utilă de Bevisto-Instrumental este rezistentă la proteine și deci poate fi utilizată de mai multe ori. În cazul instrumentelor bine curățate în prealabil, soluția utilă se menține efectivă până la 7 zile. În caz de tulburare sau de impurificare vădită se recomandă schimbarea anticipat a soluției utile.

Schimbarea preparatului

Bevisto-Instrumental nu este compatibil cu agenți de dezinfectare cu conținut de aldehide. La prima utilizare și la schimbarea preparatului trebuie procedat la curățarea temeinică și spălarea instrumentelor, accesoriilor, vanelor și dispozitivelor de preparare precum și ale reperelor auxiliare de aplicare.

Compoziție (conținutul a 100 g)

5 g alchil dimetil etil amoniu metil sulfat,
1 g clorhidrat de polihizametilen biguanid,
1,8 g diacetat de guanidiniu de propilenă de cocos.

Alte ingrediente

Inhibitori de coroziune, surfactanți neionici,
parfum, adjuvanți.

Date chimico-fizice

Aspectul lichidului: bläulich
Densitate: cca. 1 g/cm³
Valoare pH: cca. 9,5
Valoare pH (1%ige Gebr.-Lösung): cca. 8,0

Biodegradabilitate

Conform criteriilor OCDE, Bevisto-Instrumental este biodegradabil. Soluția utilă Bevisto-Instrumental poate fi eliminată împreună cu apa uzată obișnuită. În cazul deversării adecvate nu este de așteptat perturbarea sistemului biologic de epurare.

Expertiză

Hygiene Nord 06.2005/ 01.2007 bactericid,
levidicid, tuberculocid

Hygiene Nord 04.2011 MRSA

Dr. J. Steinmann 03.2005 Vaccinia

Dr. J. Steinmann 03.2005 HCV (BVDV)

Dr. Pitten 04.2009 bactericid, levidicid

Toxicologie

Toxicitate acută: LD50 ≥ 2000 mg/ kg șobolan oral.
Acest produs nu a fost testat din punct de vedere toxicologic prin încercări pe animale. Valoarea indicată a fost stabilită pe cale de calcul și este valabilă pentru concentrat. Sub formă de concentrat, Bevisto-Instrumental acționează caustic asupra pielii și a ochilor. Suportabilitate locală. Compatibilitate bună cu pielea în caz de contact involuntar de scurtă durată cu soluția utilă

Expunere:

Nu există valori maxime ale concentrației la locul de muncă supuse supravegherii.

Forme de livrare

REF 2032 14 x recipient de dozare de 1 litru

REF 2041 Canistră de 5 litri

Dispozitive auxiliare pentru aplicare

REF 9003 pompă canistră pentru dozare

REF 9006 robinet pentru canistră

REF 9004 cheie pentru canistră

Observație

Sub formă de soluție utilă, Bevisto-Instrumental nu implică o preparare periculoasă în accepțiunea Regulamentului privind substanțele periculoase. Soluția utilă nu este caustică. Recomandăm totuși respectarea măsurilor uzuale de siguranță aferente lucrului cu substanțele chimice și purtarea echipamentului uzual de protecție.

Informații despre produs (RO):**Bevisto-Instrumental**

Notă: La utilizare se vor aplica instrucțiunile de utilizare de pe recipientul produsului respectiv.

**A se respecta la manipularea concentratului
conform Regulamentului privind substanțele
periculoase**

Simbol: C Descriere: Coroziv

Conține compuși de amoniu cuaternar.

Provoacă arsuri.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul. După contactul cu pielea, spălați imediat cu multă apă. Purtați echipament de protecție corespunzător, mănuși și mască de protecție pentru ochi/față. În caz de accident sau simptome de boală, consultați imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta). A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa de securitate.

Notă

Recomandările privind preparatele noastre au la bază verificări științifice și sunt emise conform tuturor cunoștințelor de care dispunem. Alte recomandări, de ex. în ceea ce privește compatibilitatea materialelor, sunt posibile doar separat. Recomandările noastre nu îi exonerează pe clienții noștri de efectuarea unei verificări proprii a preparatelor noastre, în ceea ce privește caracterul lor adecvat pentru scopul propus și pentru procedura avută în vedere. În acest sens, nu ne asumăm nicio răspundere.

CE 0483