


4. ABLATE Setpoint [Valoare de referință pentru ABLATE (Ablație)] poate fi ajustată utilizând:
 - Pictogramele săgeată sus și jos din interfața grafică cu utilizatorul
 - Butonul gri de pe sondă sau
 - Butonul negru de pe pedala de control.
 - 4.1. Fiecare apăsare pe butonul de setare de pe sondă sau de pe pedala de control va mări setarea cu 1 unitate.
 - 4.2. Continuați să apăsați pe buton pentru a mări puterea până când se atinge setarea maximă recomandată. O apăsare suplimentară va reveni la valoarea „1”.
 - 4.3. După confirmarea valorii de referință, apăsați pe pedala galbenă pentru pedala de control sau pe butonul galben de pe sondă pentru a activa modul ABLATE (Ablație).
5. COAG (Coagulare)
 - 5.1. Valoarea de referință pentru modul COAG (Coagulare) poate fi ajustată utilizând pictogramele săgeată în sus și în jos de pe interfața grafică pentru cu utilizatorul.
 - 5.2. După confirmarea valorii de referință, apăsați pe pedala de control albastră sau pe butonul albastru de pe sondă pentru a activa modul COAG (Coagulare).

NOTĂ: Butoanele de pe sondă vor fi inactive cât timp cât o pedală de control (fără fir sau cu fir) este conectată la generator.

2.3.4 DESCRIEREA MODULUI DE OPERARE MONOPOLAR AES-1

1. Banner (Banner) – Afișează sonda monopolară conectată la generator
2. ABLATE Setpoint [Valoare de referință pentru ABLATE (Ablație)] – Valoarea de referință actuală pentru ABLATE (Ablație)
3. ABLATE Setpoint Adjustment [Ajustare valoare de referință pentru ABLATE (Ablație)] – Ajustare a valorii de referință ABLATE (Ablație)
4. COAG Setpoint [Valoare de referință pentru COAG (Coagulare)] – Valoarea de referință actuală pentru COAG (Coagulare)
5. COAG Setpoint Adjustment [Ajustare valoare de referință pentru COAG (Coagulare)] – Ajustare a valorii de referință COAG (Coagulare)
6. Foot Control (Pedală de picior) – Se afișează atunci când pedala de control este conectată la generator
7. Ground Pad Integrity (Integritatea padului de împământare) – Indicator de stare pentru măsurarea impedanței padului de împământare (electrodul de dispersare)
8. Volume Control (Control pentru volum) – Pictograme de ajustare a controlului pentru volumul tonului alertei
9. Settings (Setări) – Meniu pentru selectarea limbii, controlul temperaturii și informații despre reviziile software

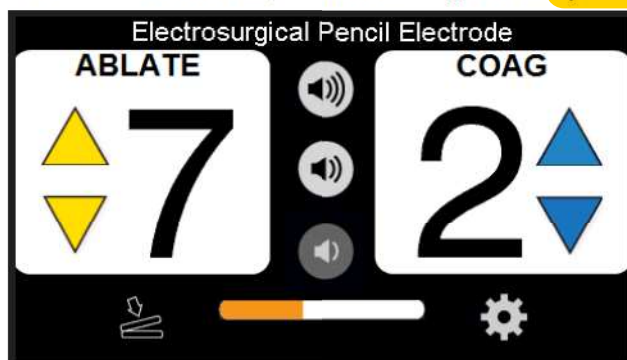

2.3.5 CONFIGURARE ȘI UTILIZARE

1. Selectați sonda monopolară AES dorită și padul de împământare (electrodul dispersiv).
2. Conectați conectorul sondei și conectorul padului de împământare în prizele respective de pe panoul frontal al generatorului.
3. Interfața grafică cu utilizatorul va permite selectarea tipului de sondă monopolară la conectarea sondei.