


<p>BIOGROUP MEDICAL SYSTEM S.r.l. Loc. Campiano 9/b Talamello (RN) P.Iva 00964170419 Divisione Prove Interlaboratorio</p> 	<p>Istruzioni di uso Instructions for Use</p> <p>SIEROLOGIA SEROLOGY</p>	<p>I.O. 06 - IFU</p> <p>Rev. 00</p> <p>Data 04/2019</p>
---	--	---

REF: MSQUALITYS

CONTENUTO :

1 FLACONE DI SIERO DI CONTROLLO.

COMPOSIZIONE :

Un flacone di siero umano liofilizzato.

PRECAUZIONI D'USO

La ricerca di anticorpi contro i virus HIV I - HIV II - HCV e dell'Antigene di superficie dell'epatite B ha dato risultati negativi.

Il prodotto va comunque trattato come materiale potenzialmente infetto e sono quindi da rispettare tutte le norme igieniche e di sicurezza previste dalla legislazione vigente e dal regolamento interno del laboratorio.

CONSERVAZIONE E STABILITA'

Conservare il flacone di siero a 2-8°C

MODALITA' D'USO

- Portare il siero a temperatura ambiente almeno 30 minuti prima di eseguire il test.
- Ricostituire con la quantità di acqua distillata come indicato sull'etichetta del flacone
- Agitare delicatamente per inversione
- Attendere 30 min prima dell'uso
- Effettuare i saggi previsti come su di un normale campione

N.B.

ATTENZIONE I FLACONI CONTENGONO MATERIALE DI ORIGINE UMANA. SI RACCOMANDA DI ATTUARE TUTTE LE PROCEDURE CONSIGLIATE A SCOPO DI PREVENZIONE.

REF: MSEQUALITYS - MSQSSE1

INLCUDES:

1 VIAL HUMAN SAMPLE

COMPOSITION:

1 vial of Human lyophilized sample stabilized

PRECAUTIONS:

The serum has been tested for Human Immunodeficiency Virus (HIV) antibody, Hepatitis B Surface Antigen (HbsAg), and Hepatitis C Virus (HCV) antibody and found to be NON-REACTIVE.

However this material should be handled carefully.

STORAGE AND STABILITY

Store the kit at 2-8 °C

Do Not Freeze

PROCEDURE

- Bring the sample to room temperature at least 30 minutes before running the test
- Reconstitute with distilled water as indicated on the vial label
- Shake gently by inversion
- Wait 30 minutes before use
- Run test using sample like normal human serum
- Insert the results in the Qs Software

WARNING:

ATTENTION THE VIALS CONTAIN HUMAN SOURCE MATERIAL

	Consultare istruzioni per l'uso / Read instructions for use		Dimensione / Numero test / Dimension / Number tes
	Scadenza / Expiry	REF	Numero di catalogo / Catalog Number
	Limiti temperatura di conservazione/ Storing temperature limits		Fabbricante / Producer
LOT	Numero di lotto / Lot Number		