


Montageanleitung fm mobil Art.-Nr.: 8721106

Prüfung der Lieferung

Trotz sorgfältiger Verpackung können Transportschäden entstehen. Bitte nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und evtl. Beschädigungen prüfen.

Montage – Gerätefuß und Standrohr (Abb. 1)

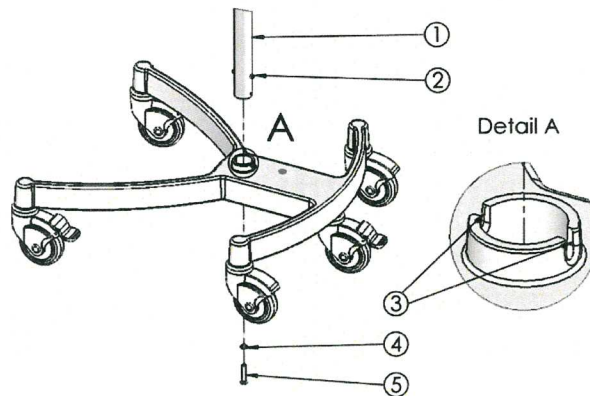

Gerätefuß aufstellen und alle 3 Radfeststeller betätigen.


Stativrohr (1) so in die Bohrung stecken, dass der Stift (2) in den Schlitz (3) eingeführt ist.

Wichtig:

Stativrohr (1) mit der Fächerscheibe (4) und der Innensechskantschraube M8 (5) befestigen (handfest).

Erforderliches Werkzeug: Innensechskantschlüssel Größe 5

Montage – Schiebegriff (Abb. 2)

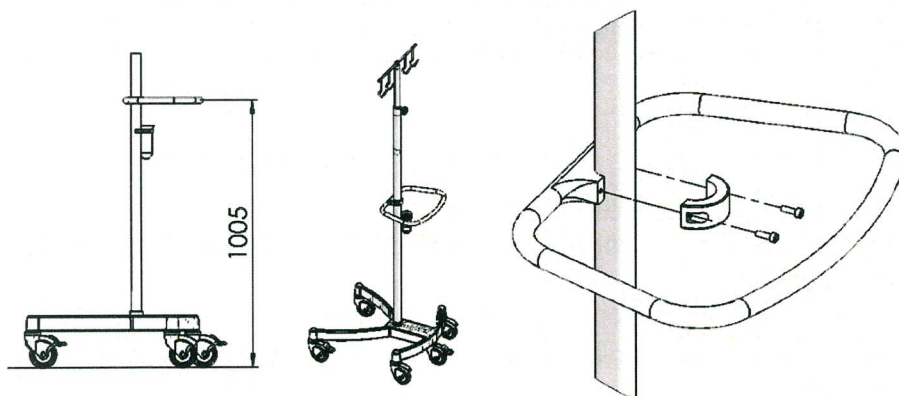


Beachten Sie die Ausrichtung des Schiebegriffes zum Fahrgestell gemäß der Abb. 2.

Der Schiebegriff ist in einer Höhe von ca. 1005mm zu befestigen (handfest)

Dazu sind die Schrauben abwechselnd gleichmäßig einzuschrauben, sodass der Spalt zwischen Schelle und Griff links und rechts gleich groß ist.

Erforderliches Werkzeug: Innensechskantschlüssel Größe 4

Montage fm system (Abb. 3)

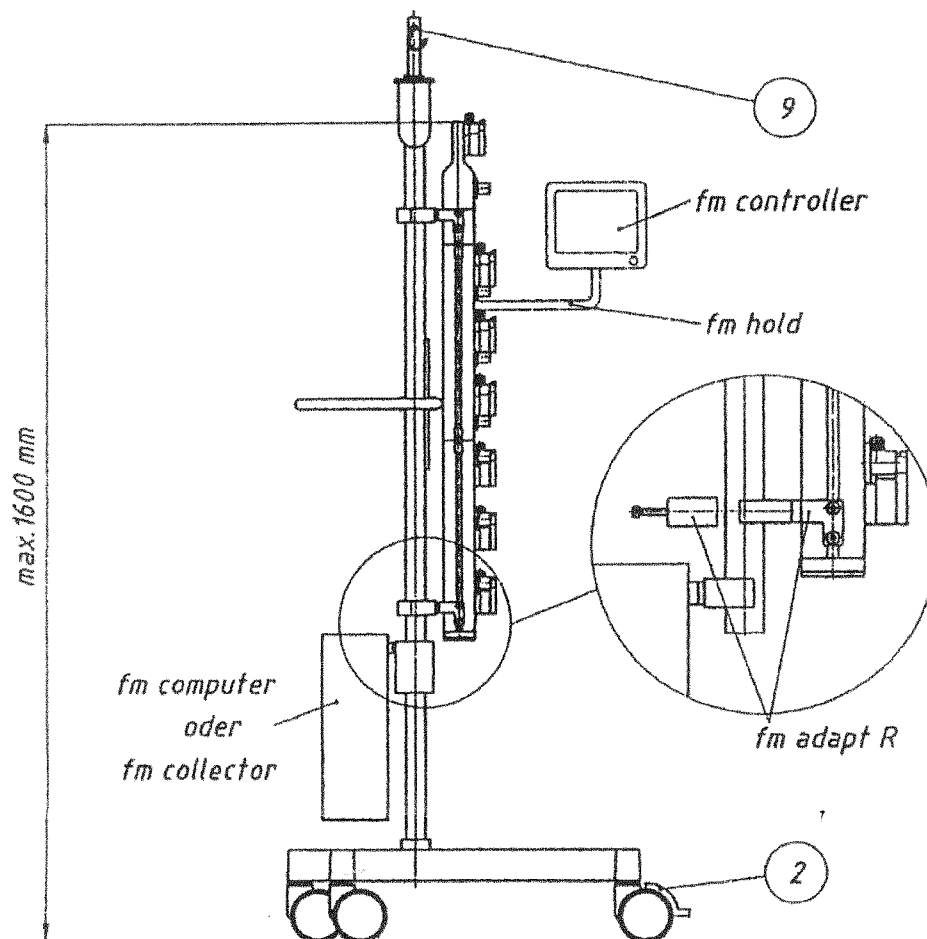

Das fm system darf nur in der dargestellten Richtung montiert werden. Siehe hierzu die ausführliche Gebrauchsanweisung für das fm system.

Sicherheitshinweise

Zur Montage nur das vorgeschriebene Zubehör verwenden.

Beim Transport des fm mobil müssen wegen evtl. zu geringer Durchfahrhöhen und Durchfahrbreiten folgende Maßnahmen erfolgen:

Die Flaschenaufhängung ⑨ ist soweit als möglich einzufahren und zu arretieren.

Der Haltearm (fm hold) für den fm controller muss beim Transport abgenommen bzw. in Richtung fm system geschwenkt werden.

Zur Sicherung gegen Wegrollen sind beide Radfeststeller ② zu arretieren.

M685020016F04
Sach Nr. 38913780.