

Vârf de trocar, dispozitiv de trecere cu doi pini (8623) Vârf de burghiu, dispozitiv de trecere cu doi pini (C8623)

Important Informatii produs

A. Indicatii

1. pasaj grefă ACL
2. Plasarea știftului de ghidare a șuruburilor de interferență

B. Avertizări

1. Unghiurile adecvate de flexie a genunchiului trebuie confirmate înainte de avansare.
2. Suportul pentru picior ar trebui să fie plasat sus pe picior, permițând o expunere adecvată pentru ieșirea știftului
3. Dispozitivul de trecere cu două pini cu vârf de traseu poate fi avansat fie prin găurire, fie prin lovire. Dispozitivul de trecere cu două pini cu vârf de foraj poate fi avansat numai prin găurire
4. Structurile neurovasculare trebuie evitate la avansarea acestui dispozitiv.

C. Sterilizare

Acest instrument este furnizat nesteril. Sterilizați prin autoclavare cu abur după îndepărtarea tuturor ambalajelor și etichetării de protecție care nu pot fi auto-autixlabile.

Rețineți că instrucțiunile de mai jos nu garantează că dispozitivul este steril. Instituția dumneavoastră este în continuare responsabilă pentru validarea normală a asigurării sterilității.

Metoda	Ciclu	Temperatură	Timpul de expunere
Abur(împachetat)	Gravitate	270°F (132°C)	10 minute
Abur(împachetat)	Vacuum Tare	270°F (132°C)	4 minute

D. Specificatii Material

17.4 oțel inoxidabil
ASTM/A564/A564M

E. Informatii

Pentru mai multe informații sau o demonstrație a produsului, contactați reprezentantul regional de vânzări Linvatec sau sunați la 1-800-237-016g în S.U.A.