

LaparoVue® Sistem de vizibilitate


Soluții Laparoscopice

Acest echipament este destinat utilizării numai de către profesioniști din domeniul sănătății instruiți.

Doar de unică folosință. Nu reutilizați, reprocessați sau reesterilizați - Reutilizarea, reprocessarea sau reesterilizarea poate duce la funcționarea defectuoasă sau riscul de contaminare încrucișată care, la rândul său, poate duce la rănierea, îmbolnăvirea sau decesul pacientului.

ATENȚIE:

Dispozitivul este steril dacă ambalajul este uscat, nedeschis și nedeteriorat. Nu utilizați dacă punga este deteriorată sau sigiliul pachetului este rupt. Este posibil să existe umezeală în interiorul pungii interioare resigilabile.

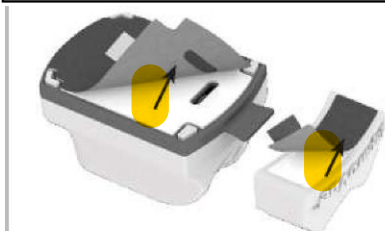

Metoda de atașare a câmpului steril

9. Dacă doriți, fixați atât unitatea principală, cât și suportul telescopului pe câmpul steril prin îndepărtarea suportului adeziv situat pe partea inferioară a unității și a suportului.



Curățare/Dezaburire Telescop

10. Agitați pentru a îndepărta resturile și așteptați cinci secunde pentru a încălzi luneta înainte de a o introduce în pacient. În condiții de ceață ridicată, nu ștergeți tot lichidul anti-aburire de pe lentilă. Atingeți sau agitați luneta pentru a elimina excesul de lichid fără a șterge.

NOTĂ: Introducerea și retragerea rapidă a lentilei este insuficientă pentru a încălzi sau a sparge resturile de pe obiectiv.

11. Reveniți rapid cu telescopul în corp pentru a preveni răcirea

12. Lentila poate fi, de asemenea, curățată folosind cârpa din microfibră sau suprafața din microfibră situată pe unitatea principală.

Curățare trocar cu bețișoare VueTip


13. Folosiți tamponul pentru trocare VueTip® cu cap mic pentru trocare de 5-8 mm și tamponul cu trocar VueTip® cu cap mare pentru trocare de 8-12 mm.

14. Prindeți mânerul și împingeți capul de spumă direct în trocar. Nu eliberați și nu îndoiți tamponul VueTip® Trocar.

15. La anumite modele de trocar care au o supapă cu arc, deschideți supapa în timpul introducerii sau retragerii tamponului pentru trocar VueTip®. Asigurați-vă că troc-ar nu are margini ascuțite care se pot agăța de tamponul pentru trocar VueTip®. Nu extindeți capul de spumă dincolo de capătul distal al trocarului.

16. Bețișoarele VueTip® Trocar sunt radioopace

17. Bețișoarele VueTip® Trocar nu sunt compatibile cu trocarele Snowden-Pencer sau cu alte trocare metalice.

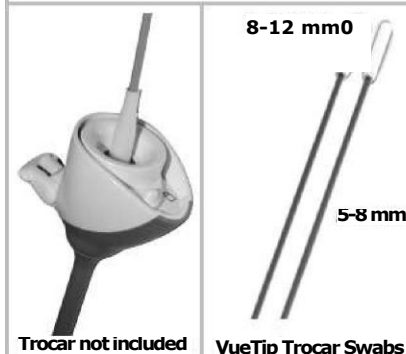

De unică utilizare

18 După utilizare, sistemul de vizibilitate LaparoVue® trebuie aruncat în conformitate cu ghidurile locale pentru deșeurile medicale care includ bateriile. Alimentat de 3 baterii alcaline AN.

Informații operaționale:

LaparoVue este proiectat să funcționeze timp de maximum cinci (5) ore odată ce unitatea este activată

Temperatura ambiantă în timpul funcționării trebuie menținută între 50°F și 104°F (10°C și 40°C)

LaparoVue® găzduiește telescoape cu dimensiuni de 3 mm-12 mm

În timpul intervenției chirurgicale, ambele porturi pot fi utilizate simultan

Contraindicații:

Acest dispozitiv nu este proiectat, vândut sau destinat utilizării cu excepția cazurilor indicate.

Report serious incidents involving this device to CONMED at customer service@conmed.com or to your local distributor.