

шприце и при извлечении на блок для смешивания замешиваются в канюле, таким образом материал сразу готов к использованию.

Выложенный на блок для смешивания материал можно взять с помощью лентуло и ввести его вращательными движениями в канал, или же можно с помощью прилагающихся внутриканальных типсов внести материал напрямую в канал, а уже затем с помощью лентуло доставить его в апикальную область.

После этого корневой канал пломбируется обычным образом с помощью гуттаперчевых штифтов или подогретой гуттаперчи. Выложенный на блок для смешивания Apexit Plus при комнатной температуре и средней влажности воздуха остается мягким в течение многих часов, таким образом, при лечении нескольких каналов Apexit Plus замешивается только один раз.

Время отверждения Apexit Plus находится в диапазоне от двух до пяти часов. В очень сухих каналах, или ситуациях в которых слой силера толще, чем обычно (например, при пломбировании техникой одного штифта) это время может составлять даже свыше десяти часов. Дальнейшее лечение зуба можно производить любым традиционным материалом. Какие-либо манипуляции с каналом, такие, как препарирование под штифт с последующим восстановлением культи или резекция верхушки корня, должны производиться не ранее, чем через 24 часа после пломбирования канала.

Apexit Plus не содержит фармацевтических компонентов, таких, как кортикоиды, антибиотики и формальдегидсодержащие препараты. Поэтому воспаления снимаются не в результате противовоспалительного и иммуноподавляющего действия таких добавок.

В случае инфицированных каналов применение Apexit Plus предполагает установить предварительную антибактериальную прокладку, чтобы избежать возникновения послеоперационной чувствительности.

Если такая чувствительность все-таки наступила, она, как правило, проходит в течение максимум 48 часов.

#### **Условия хранения**

- Apexit Plus нельзя использовать по истечении срока годности
- Apexit Plus не чувствителен к температурным влияниям и может храниться при комнатной температуре или в холодильнике (2–28° C).
- после использования смешивающую канюлю оставит на шприце, заменять ее на новую только при последующем использовании. Не использовать повторно запирающий затвор!
- срок хранения: см. срок годности

**Хранить в месте, недоступном для детей!  
Для использования только в стоматологии**

**Инструкция составлена: 12/2010; Rev. 2**

#### **Изготовитель:**

Ivoclar Vivadent AG  
FL-9494 Шаан / Лихтенштейн

Продукт разработан для применения в стоматологии и подлежит использованию только в соответствии с инструкцией по применению. Производитель не несет ответственности за применение в иных целях или использование, не соответствующее инструкции. Кроме того, потребитель обязан под свою ответственность проверить продукт перед его использованием на соответствие и возможность применения для поставленных целей, если эти цели не указаны в инструкции.