

SOLUȚIE DE CURĂȚARE ALCALINĂ PENTRU MAȘINI AUTOMATE DE SPĂLAT INSTRUMENTE

DETRO MATIC A – MANUAL DE UTILIZARE

- **PRODUS DE CURĂȚARE ALCALIN**
- **CONCENTRAT**

Proprietățile produsului

Compatibil cu toate mașinile de spălat instrumente medicale

Compatibil cu toate tipurile de duritate a apei

Curățarea și dezinfectia instrumentelor rezistente la căldură la 93 °C

Curățarea instrumentelor termolabile la 40-60 °C

Protecție împotriva coroziunii

Concentrație de utilizare redusă Efect puternic

Zone de utilizare

Curățare alcalină a instrumentelor din metal, sticlă, ceramică, porțelan, materiale din plastic în mașinile de spălat automate.

Ingredient

> 5% Hidroxid de potasiu (nr. CAS: 1310-58-3, surfactanți, silicat, complexant agenți, inhibitori de coroziune

Dozare

Se utilizează la o concentrație de 0,1-0,2%. (10-20 ml produs la 10 litri de apă). Acest nivel poate fi crescut în funcție de nivelul de contaminare.

Avertizare

Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de utilizare. Nu utilizați pentru curățarea mâinilor, feței și alimentelor. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Agent iritant. Evitați contactul cu pielea și mucoasele. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă.

Condiții de depozitare

A se păstra departe de lumina directă a soarelui. A se păstra recipientele bine închise și într-un loc bine ventilat, la o temperatură între 0 și 30 °C.

Ambalaj

5 litri

DETRO HEALTHCARE KİMYA SANAYİ A.Ş.

--212 659 77 62--212 659 77 63

_ - info@detrox.com.tr - www.detrox.com.tr