



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501, <https://ansp.md> e-mail:
office@ansp.gov.md IDNO:1018601000021

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT**

Nr.	B-0322/2025
din	06.10.2025

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

Bacticide AF

Alte denumiri comerciale

II. Date de identificare ale solicitantului (numele, adresa, țara)

"DITA ESTFARM" S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Burebista, 23,
2032

III. Date de identificare a producătorului (numele, adresa, țara)

Chemi Pharm AS, Estonia, Tanassilma, Tănassilma tee 11, Tănassilma küla, Saku vald, 76406,

IV. Date de identificare a produsului

1. Categoria de produs biocid

1.1. Grupa principală 1

1.2. Tip de produs 2

Certificatul de înregistrare este valabil până la data: 12.05.2028.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.2020 s-a decis ca următorul produs biocid poate fi fabricat sau comercializat și utilizat în republica Moldova. Conform prevederilor legislației în vigoare.

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director adjunct

Vasile Gustiuc



Anexa 1
la certificatul nr. B-0322/2025 din 06.10.2025 pentru înregistrare de stat a
produsului biocid

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

Bactucid AF

VI. Date privind substanța(ile) activă(e) a produsului

<i>Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau alte)</i>	<i>Nr. CE</i>	<i>Nr. CAS</i>	<i>Cantitatea în produs</i>
Etanol	200-578-6	64-17-5	50-75%
Propan-2-ol	200-661-7	67-63-0	2,5-10%

VII. Forma de condiționare

Lichid

VIII. Modul de ambalare (tipul, capacitatea)

Sticlă cu pulverizator 500 ml, 1000 ml □ canistra 5000 ml

IX. Domeniul și aria de utilizare

1. Domeniul de utilizare

Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale.

2. Aria de aplicare

Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale, obiectelor de inventar și orice alte tipuri de suprafețe mici, pentru utilizare în instituțiile medicale.

X. Eficacitate

<i>Activitatea</i>	<i>Metoda de testare/protocolul de testare</i>	<i>Specia/tulpina</i>	<i>Concentrații</i>	<i>Timp de acțiune</i>
Bactericidă în condiții de murdărie	EVS EN 14561:2006	Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Staphylococcus aureus	nediluat	30 s
	EVS EN 13727:2012 A2:2015	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	80% 50% 10%	15 s
Bactericidă/levuricidă în condiții de murdărie	EVS EN16615:2015	Candida albicans Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Staphylococcus aureus	nediluat	60 sec
	EVS EN 13697:2015	Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Escherichia coli Candida albicans	nediluat	30 s
Fungicidă în condiții de murdărie	EVS EN 13697:2015	Asoergillus brasiliensis	nediluat	3 min
	EVS EN 13624:2013			

		Aspergillus brasiliensis	80% 50% 25%	2 min
Levuricidă în condiții de murdărie	EVS EN 14562:2006	Candida albicans	nediluat	30 sec
	EVS EN 13624:2013	Candida albicans	nediluat	30sec
Micobactericidă în condiții de curățenie și de murdărie	EVS EN 14348:2005	Mycobacterium avium Mycobacterium terrae	nediluat	30 s
Mycobactericidă în condiții de curățenie	EVS EN14563:2009	Mycobacterium avium Mycibacterium terrae	nediluat	30 sec
Virucidă în condiții de curățenie	E14476:2013+A1:2015/p r A2:2016	Adenovirus type 5 Murine Norovirus(MNV)	nediluat	30 sec
Virucidă în condiții de curățenie	EN14476:2013+A1:2015	Poliovirus type 1	nediluat	2 min
Virucidă în condiții de curățenie	EN14476:2013+AI:2015	Murine norovirus(MNV)	nediluat	20sec
Virucidă în condiții de curățenie și murdărie	EN14476:2013+A1:2015	Adenovirus type 5	nediluat	30 sec
Virucidă în condiții de murdărie	EN14476:2013+A1:2015	Human rotavirus strain WA	nediluat	15 sec
Virucidă în condiții de murdărie	EN14476:2013+A1:2015	Murine Norovirus,against MNV	nediluat	15 sec
Virucidă în condiții de murdărie și curățenie	EN 14476:2013+A1:2015	Vaccinia virus Ankara	nediluat	15 sec

XI. Indicații de utilizare

<i>Metoda de aplicare</i>	<i>Concentrația soluției de lucru</i>	<i>Timpul de acțiune</i>
Dezinfectarea suprafețelor prin pulverizare și stergere	soluția nediluată	30 sec

XII. Etichetarea produsului biocid

Simboluri și indicarea pericolelor	
Fraze de risc (R) și/sau Pictograme de pericol (H)	
Fraze de prudență (S) și/sau Fraze de precauție (P)	

XIII. Categoria de utilizatori

Profesionali,

XIV. Recomandări/restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu

