

## Fereastra Plan my day (Planificarea zilei de lucru)

Din fereastra Plan my day (Planificarea zilei de lucru) puteți vizualiza statusul reactivilor, calibrărilor, consumabilelor, controlului de calitate și întreținerii pentru intervalul de timp definit de utilizator.

Fereastra Plan my day (Planificarea zilei de lucru) include:

- [Fereastra Plan my day \(Planificarea zilei de lucru\) - fereastra Reagents \(Reactivi\)](#), pagina 5-28
- [Descrieri ale statusurilor ecranului Reagents \(Reactivi\)](#), pagina 5-30
- [Fereastra Plan my day \(Planificarea zilei de lucru\) - fereastra Calibrations \(Calibrări\)](#), pagina 5-30
- [Descrieri ale statusurilor ecranului Calibrations \(Calibrări\)](#), pagina 5-32
- [Fereastra Plan my day \(Planificarea zilei de lucru\) - fereastra Supplies \(Consumabile\)](#), pagina 5-33
- [Descrieri ale statusurilor ecranului Supplies \(Consumabile\)](#), pagina 5-34
- [Fereastra Plan my day \(Planificarea zilei de lucru\) - fereastra QC](#), pagina 5-34
- [Descrieri ale statusurilor ecranului QC](#), pagina 5-36
- [Fereastra Plan my day \(Planificarea zilei de lucru\) - fereastra Maintenance \(Întreținere\)](#), pagina 5-36
- [Descrieri ale statusurilor ecranului Maintenance \(Întreținere\)](#), pagina 5-37

### Fereastra Plan my day (Planificarea zilei de lucru) - fereastra Reagents (Reactivi)


Din fereastra reactivilor al ferestrei Plan my day (Planificarea zilei de lucru) puteți vizualiza:

- Module ID (ID Modul)
- Pozițiile reactivului
- Nume test
- Număr lot de reactiv
- **Testele de reactiv rămase**
- Stabilitatea rămasă în aparat
- Reagent Status (Starea reactivului)

Informațiile afișate sunt asociate cu reactivii care pot necesita intervenția operatorului pentru a procesa cu succes probele fără întrerupere în intervalul de timp definit de utilizator. Consultați [Descrieri ale statusurilor ecranului Reagents \(Reactivi\)](#), pagina 5-30.

Atunci când sistemul nu poate afișa toate datele pe un singur ecran, se afișează o elipsă (...). Vizualizați raportul imprimat pentru a vedea toate datele.

Figură 5.11: Fereastra Plan my day (Planificarea zilei de lucru) - fereastra Reagents (Reactivi)

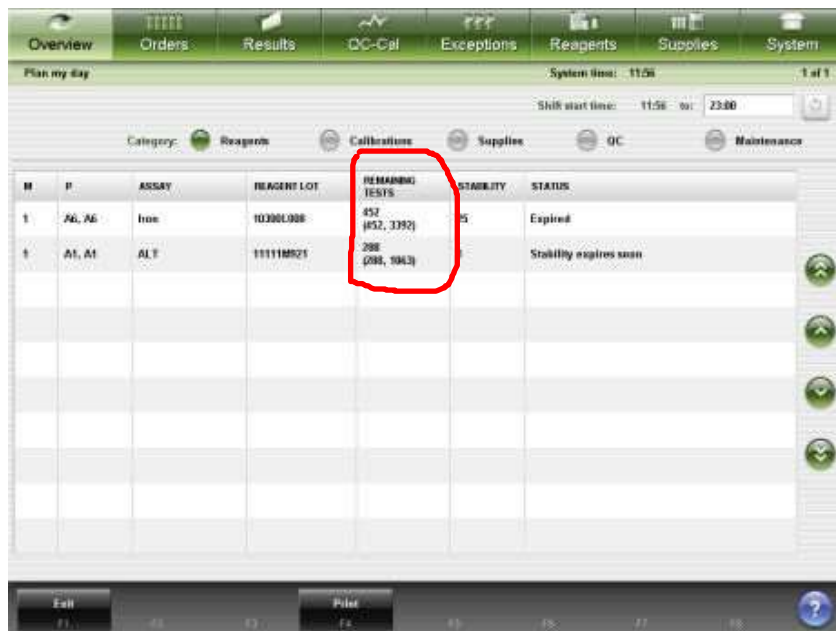

Pentru descrieri ale acestor câmpuri, consultați [Descrieri ale câmpului din fereastra Plan my day \(Planificarea zilei de lucru\) - fereastra Reagents \(Reactivi\)](#), pagina E-22.

Când accesați fereastra Plan my day (Planificarea zilei de lucru) - fereastra Reagents (Reactivi), informațiile sunt sortate în funcție de status.

Pentru a sorta coloanele din această fereastră, selectați antetul coloanei dorite. Informațiile sunt sortate conform descrierii din următorul tabel.

| Coloană                  | Scurtă descriere                                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M                        | Numeric, în ordine crescătoare.                                                                    |
| P                        | Poziția caruselului în ordine crescătoare.                                                         |
| TEST ȘI LOT DE REACTIVI  | Alfanumeric, în ordine crescătoare.                                                                |
| TESTE RĂMASE             | Numeric, în ordine crescătoare.                                                                    |
| STABILITATE LA ÎNCĂRCARE | Cea mai redusă stabilitate.                                                                        |
| STATUS                   | Consultați <a href="#">Descrieri ale statusurilor ecranului Reagents (Reactivi)</a> , pagina 5-30. |

Pentru a afișa această fereastră, consultați [Accesați fereastra Plan my day \(Planificarea zilei de lucru\)](#), pagina 5-27.

#### Proceduri aferente...

- [Procedurile c4000 - Gestionarea inventarului de reactivi](#), pagina 5-124
- [Procedurile c8000/c16000 - Gestionarea inventarului de reactivi](#), pagina 5-139
- [Procedurile i2000/i2000SR - gestionarea inventarului de reactivi](#), pagina 5-154
- [Procedurile i 1000SR - gestionarea inventarului de reactivi](#), pagina 5-160
- [Imprimarea unui raport](#), pagina 5-379