

## ETICHETAREA Ecranului de Protecție (viziera)

**Producator:** SC Santino-Service SRL, c/f1003600106104, Chisinau, str. Feredeului 12, MD

**Numar de Inregistrare:**

**Marcaj SM:** 

### 1) Suport de cască pentru ecranul de protecție (viziera)

#### **Execuție:**

Suport pentru fixarea unei viziere de protecție la cască. Prin intermediul unui mecanism dublu de pliere, viziera se duce foarte ușor în sus.

#### **Adaptat pentru:**

Toate căștile de protecție obișnuite cu formă dreaptă.

**Material:** Polipropilen

**Greutate:** 39g

### 2) Ecran de protecție

**Execuție:** Vizieră transparentă din PET, grosime 0,5 mm; marimi 340mm/250mm; 250mm/250mm.

**Material:** PET

**Nuanța:** transparent

### 3) Instrucție de utilizare:

- 1 Dezinfectați minuțios ecranul vizierii cu soluție pe bază de alcool.
- 2 Procedați la fel și cu suportul pentru fixare.
- 3 Fixați ecranul la cele două elemente de asamblare frontale ale suportului.
- 4 Apoi fixați-l și la elementele laterale.
- 5 Atașați elasticul pe fixatoarele prevăzute lateral.
- 6 Viziera de protecție este gata pentru exploatare.

### 4) Condiții de pastrare:

La loc uscat.