

ANIOXYDE 1000

Dezinfectant de grad înalt /
STERILIZANT



- Formula patentată
- Primul dezinfectant de nivel înalt din sistemul PHERA®, activ împotriva sporilor bacteriilor
- Producerea extemporanee de acid peracetic
- Alternativă la glutaraldehidă
- Fără aldehide:
fără fixare a proteinelor
- Fără acid acetic
- Posibil control al eficacității băii cu benzi de testare
- Eficacitate totală în 5 minute

Gata de utilizare
după activare



INDICAȚII

Dezinfectant de nivel înalt/Sterilizant la rece pentru echipamente chirurgicale, medicale, endoscopice, termosensibile și dispozitive medicale.


CARACTERISTICI

- Absența vaporilor de acid acetic: toleranță mai bună a utilizatorului
- Utilizare ușoară: activator integrat în canistra de 5L
- Eficacitatea sa dovedită la 900 ppm de acid peracetic
- Durata de utilizare a băii de înmuiere: maxim 14 zile, verificați conformitatea soluției cu benzile de testare
- Compatibil cu orice fel de produse de curățare pre-dezinfectante pH neutru.
- Compatibilitate largă cu materiale, rezervoare și masa de lucru.
- Poate fi utilizat în prezența unui sistem de aspirare a vaporilor
- Prezența agenților anticorozivi pentru controlul coroziunii metalelor
- Soluția dezinfectantă conține de la 1500 ppm de acid peracetic (după activare) până la 900 ppm (concentrația limită de prag detectată de benzile de testare)


ANIOXYDE 1000

Dezinfectant de nivel înalt/Sterilizant la rece


Instrucțiuni

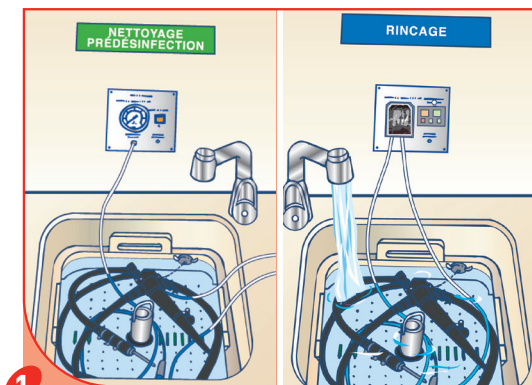


1 Etapa de pre-dezinfectie: Curatati dispozitivul medical cu un produs pre-dezinfectant precum ANIOSYME X3, ANIOS'CLEAN EXCEL D sau ANIOSYME PLA II.
Clătiți bine.
Pentru echipamente endoscopice: periați canale

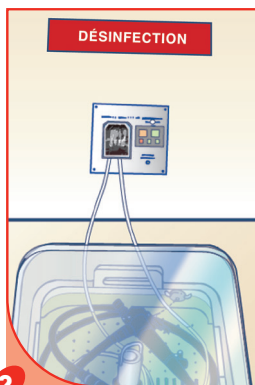

2 Dezinfectarea:
Activați soluția conform instrucțiunii
Acoperiți vasul de dezinfectare
Timp de contact 5 minute.
Pentru endoscopape asigurați fluidizarea lichidelor prin canale

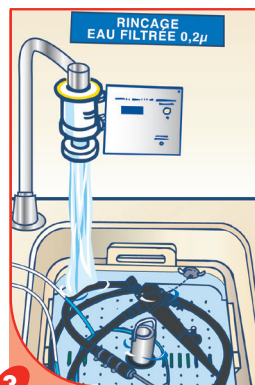

3 Clătiți abundent cu apă sterilă sau filtrată (0.2 µm)
Pentru endoscoape inclusiv și canalele.

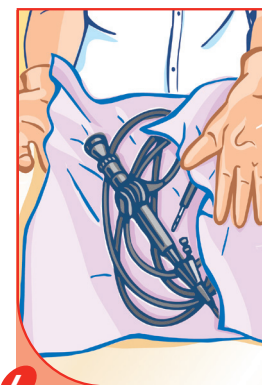

4 Uscați cu un prosop de unică folosință. Păstrați dispozitivul medical cât mai aseptice posibil până să-l folosească din nou.

Compoziție

Producerea extemporanee de acid peracetic din aceticaprolactamă (sistem PHERA®).
ANIOXYDE 1000-GENERATOR conține 3% peroxid de hidrogen.

Precauțiuni

Periculoase - respectați precauțiile de utilizare (Elaborat conform normelor europene în vigoare privind clasificarea și etichetarea produselor chimice)
Depozitare între +5°C și +25°C.
PĂSTRAȚI DREPT
Dispozitiv medical de clasa IIb (Directiva 93/42/CEE cu modificările ulterioare).

Ambalaj

- 1 4 cans, 5L + iactivator.....Ref. 1081.299
2 Bandede de control(box of 50).....Ref. 100.194

MICROBIOLOGICAL PROPERTIES

Active against	Standards	Contact time
Bacteria	EN 1040, EN 13727, EN 14561	5 minutes
Mycobacteria	EN 14348, EN 14563	5 minutes
Yeasts / Moulds	EN 1275, EN 13624, EN 14562	5 minutes
Viruses	EN 14476 : Poliovirus, Adenovirus, MNV	5 minutes
Spores of bacteria	EN 17126 : - Bacillus subtilis - Bacillus cereus EN 13704 : - Bacillus subtilis (5 log) - Bacillus cereus - Clostridium sporogenes - Clostridium difficile	5 minutes

Toată activitatea antimicrobiană a produsului este inclusă în dosarul științific, disponibil la cerere.



HOCHWERTIGES DESINFEKTIONSMITTEL

Anioxyde 1000

HOCHWERTIGES DESINFEKTIONSMITTEL FÜR MEDIZINISCHE GERÄTE: CHIRURGISCHE UND MEDIZINISCHE GERÄTE, ENDOSKOPIEGERÄTE UND HITZEEMPFINDLICHE GERÄTE

- Patentierte Formel
- Das erste hochwertige Desinfektionsmittel nach dem PHERA® System
- aktiv gegen Sporen und Bakterien
- Umgehende Produktion von Peressigsäure
- Alternative zu Glutaraldehyd
- Aldehydfrei: keine Fixierung von Proteinen
- Kontrolle der Wirksamkeit des Einweichbades mittels Teststreifen
- Vollständige Wirksamkeit in 5 Minuten




Anioxyde 1000

Hochwertiges Desinfektionsmittel für medizinische Geräte: chirurgische und medizinische Geräte, Endoskopiegeräte und hitzeempfindliche Geräte


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einfache Anwendung: Aktivator bereits im 5L Kanister integriert
- Wirksamkeit wurde bei 900 ppm Peressigsäure nachgewiesen
- Verwendungsdauer des Einweichbades: Maximal 7 Tage, Wirksamkeit der Lösung mittels Teststreifen prüfen
- Kompatibel mit allen gängigen Prozesschemikalien mit neutralem pH - Wert zur desinfizierenden Vorreinigung
- Kann in Gegenwart eines Dampfabsaugsystems verwendet werden
- Hohe Kompatibilität mit Materialien, Becken und Arbeitstisch
- Korrosionskontrolle von Metallen durch vorhandene Korrosionsschutzmittel
- Die Desinfektionslösung enthält 1500 ppm Peressigsäure (nach Aktivierung) bis 900 ppm (durch Teststreifen festgestellte Grenzkonzentration)


GEBRAUCHSANWEISUNG

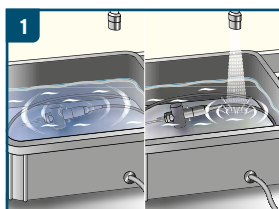


1 Vor-Desinfektionsschritt: Reinigen Sie das Medizinprodukt mit einem Reinigungsmittel oder einem Vordesinfektionsmittel. Gründlich spülen. Für endoskopische Geräte: Kanäle bürsten.

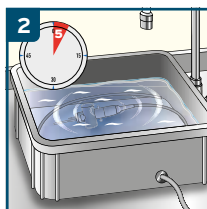

2 Desinfektionsschritt: Gießen Sie die aktivierte Lösung ein (siehe Aktivierungsverfahren auf dem Etikett / Protokoll). Decken Sie das Becken ab. Beachten Sie die minimale Kontaktzeit. Für endoskopische Geräte: Lassen Sie die Lösung in den Kanälen zirkulieren. Fügen Sie kein Produkt zu Anioxyde 1000 hinzu.

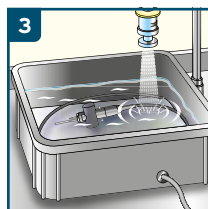

3 Gründlich mit sterilem oder gefiltertem Wasser (0,2 µm) spülen, um Spuren des Produkts zu entfernen. Für endoskopische Geräte: die internen und externen Teile des Medizinprodukts spülen.

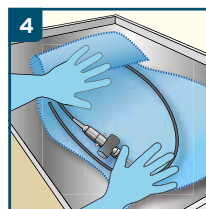

4 Mit einem Einwegtuch trocknen. Halten Sie das medizinische Gerät so aseptisch wie möglich, um es wieder zu verwenden.

MIKROBIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

ANFORDERUNGEN/BEDINGUNGEN	EINWIRKZEIT
Bakterizid - Gemäß EN 13727 / EN 14561 saubere Bedingungen	5 min
Levurozid - Gemäß EN 13624 / EN 14562 saubere Bedingungen	5 min
Tuberkulozid - Gemäß EN 14348 / EN 14563 saubere Bedingungen	5 min
Fungizid - Gemäß EN 13624 / EN 14562 saubere Bedingungen	5 min
Mykobakterizid - Gemäß EN 14348 / EN 14563 saubere Bedingungen	5 min
Viruzid - Gemäß EN 14476 / EN 17111 saubere Bedingungen	5 min
Adenovirus - Gemäß EN 14476 / EN 17111 saubere Bedingungen	5 min
Norovirus - Gemäß EN 14476 / EN 17111 saubere Bedingungen	5 min
Sporizid gegen B. Subtilis / C. Difficile: Gemäß EN 17126 saubere Bedingungen	5 min

VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATION

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Anioxyde 1000	4 x 5L Kanister + integrierter Aktivator	XXXXXX
Anioxyde 1000	Teststreifen mit Peressigsäure-Rate 1000 ppm (50 pro Box) in Anioxyde 1000	XXXXXX



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
0459 France

Vertrieb durch:
ECOLAB GmbH
Rivergate D1/4.OG
Handelskai 92
1200 Wien
Österreich

ANWENDUNGSGEBIET

Hochwertiges Desinfektionsmittel für medizinische Geräte: chirurgische und medizinische Geräte, Endoskopiegeräte und hitzeempfindliche Geräte.

INHALTSSTOFFE

Umgehende Herstellung von Peressigsäure aus dem Acetylcaprolactam (PHERA®-System), Anioxyde 1000 Generator mit 3% Wasserstoffperoxid.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Zweikomponentenlösung für den professionellen Einsatz. Gebrauchsfertig nach Aktivierung.

Warten Sie vor dem ersten Gebrauch mindestens 30 Minuten (Zeit für die Aktivierung des Produkts). Reinigen und spülen Sie das medizinische Gerät sorgfältig aus, bevor Sie es in ANIOXYDE 1000 (aktivierte Lösung) einweichen.

Überprüfen Sie den Peressigsäuregehalt zu Beginn der Sitzung mit einem ANIOXYDE 1000-Teststreifen, nach einer Unterbrechung der Anwendung und alle 4 Stunden bei durchgehender Nutzung. Maximale Lagerung des Einweichbades: 14 Tage (außer Frankreich - Maximal 7 Tage gemäß französischer Verordnung)

- 1.** Vor-Desinfektionsschritt: Reinigen Sie das Medizinprodukt mit einem Reinigungsmittel oder einem Vordesinfektionsmittel. Gründlich spülen. Für endoskopische Geräte: Kanäle bürsten.
- 2.** Desinfektionsschritt: Gießen Sie die aktivierte Lösung ein (siehe Aktivierungsverfahren auf dem Etikett / Protokoll). Decken Sie das Becken ab. Beachten Sie die minimale Kontaktzeit. Für endoskopische Geräte: Lassen Sie die Lösung in den Kanälen zirkulieren. Fügen Sie kein Produkt zu Anioxyde 1000 hinzu.
- 3.** Spülen Sie das Produkt gründlich mit sterilem oder gefiltertem Wasser (0,2 µm) ab, um Spuren des Produkts zu entfernen. Für endoskopische Geräte: die internen und externen Teile des Medizinprodukts spülen.
- 4.** Mit einem Einwegtuch trocknen. Halten Sie das medizinische Gerät so aseptisch wie möglich, um es wieder zu verwenden.

LAGERUNG

Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch (erstellt nach den geltenden europäischen Vorschriften für die Klassifikation und Kennzeichnung chemischer Produkte). Lagerung: von + 5 ° C bis + 25 ° C. Aufrecht lagern.

GUTACHTEN

Medizinprodukt. Die vollständige antimikrobielle Aktivität von Anioxyde 1000 ist im wissenschaftlichen Dossier enthalten, welches auf Anfrage erhältlich ist.

MEDIZINPRODUKTE SICHER VERWENDEN

Bitte lesen Sie das Etikett und die Produktinformation.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

ECOLAB®


www.ecolab.at



**Reprocesarea manuală a endoscoapelor și
instrumentelor chirurgicale devine rapidă și sigură cu
ANIOXYDE 1000 - sterilizare chimică în 5 minute**

Soluție activă pentru utilizare 14 zile consecutiv.

Anioxyde 1000

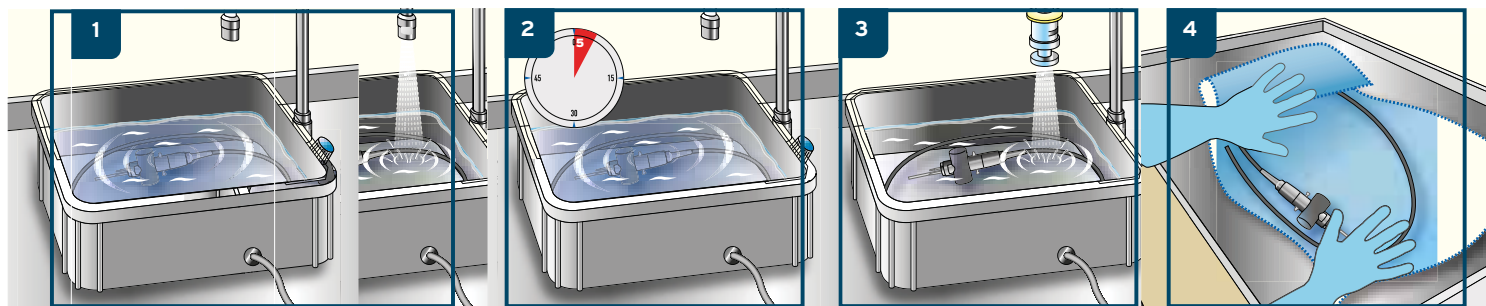

Curățarea enzimatică și dezinfectare
5 minute cu **ANIOSYM XL3**
cu clătire ulterioară cu apă filtrată

Sterilizarea - 5 minute
ANIOXYDE 1000

Clătire cu apă
filtrată - 0,2 μm

Uscarea

BENEFICIILE PRODUSULUI

Formula patentată

Primul dezinfectant de nivel înalt din sistemul PHERA®, activ împotriva sporilor bacteriilor

Producerea extemporanee de acid peracetic

Alternativă la glutaraldehidă. Fără aldehide: fără fixare a proteinelor

Controlul eficacității soluției de lucru cu benzi de testare

Eficacitate totală în 5 minute



FISA DE DATE DE SECURITATE

(Norma REACH (CE) nr. 1907/2006 - nr. 2015/830)

SECȚIUNEA 1 : IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI SI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

1.1. Element de identificare a produsului

Numele produsului : ANIOXYDE 1000_ACTIVATEUR

Codul produsului : 1081/1102

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Dezinfectant rece pentru instrumente și endoscoape

Preparat de activare GENERATORULUI pentru constituirea preparatului dezinfectant.

Pentru informații suplimentare privind indicațiile produsului, consultați eticheta.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Personalitate Juridică : Laboratoires ANIOS.

Adresa : PAVE DU MOULIN .59260.LILLE - HELLEMMES.FRANCE.

Telefon : + 33 (0)3 20 67 67 67. Fax: + 33 (0)3 20 67 67 68.

e:mail : fds@anios.com

www.anios.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență : + 33(0)1 45 42 59 59.

Societate/Organism : INRS.

SECȚIUNEA 2 : IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008 și modificărilor sale.

Lichid inflamabil, Categoria 3 (Flam. Liq. 3, H226).

Iritarea ochilor, Categoria 2 (Eye Irrit. 2, H319).

Toxicitate asupra unui organ țintă specific (o singură expunere), Categoria 3 (STOT SE 3, H336).

Acest amestec nu prezintă pericol pentru mediu. Nu se cunoaște niciun prejudiciu sau nu există probabilitatea niciunui prejudiciu asupra mediului, în condiții normale de utilizare.

2.2. Elemente pentru etichetă

Conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008 și modificărilor sale.

Pictograme de pericol :



Cuvânt de avertizare :

ATENȚIE

Identificatorii de produs :

603-117-00-0

PROPAN-2-OL

Etichetă adițională :

Fraze de pericol :

H226

Lichid și vapori inflamabili.

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H336

Poate provoca somnolență sau amețeală.

Fraze de precauție -Generale :

P102

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Fraze de precauție - Prevenire :

P210

A se feri de scântei și flăcări expuse. Fumatul interzis.

- P261 A se evita să se inspire vaporii.
P280 A se purta mănuși de protecție.
Frazе de precauție - Intervenție :
P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință.
Continuați să clătiți.
P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.
Frazе de precauție - Depozitare :
P403 A se depozita într-un spațiu bine ventilat.
Frazе de precauție - Eliminare :
P501 Produsul neutilizat și ambalajul său trebuie îndepărtate ca deșeuri periculoase.

2.3. Alte pericole

Amestecul nu conține „Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită” (SVHC) $\geq 0,1\%$, publicate de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), conform articolului 57 din REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>
Niciun alt pericol identificat potrivit datelor de până acum.

SECȚIUNEA 3 : COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII

Formularea frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16.

3.2. Amestecuri

Compoziția :

identificare	(CE) 1272/2008	Nota	%
CAS: 1888-91-1 EC: 217-565-6 N-ACETILCAPROLACTAM	GHS07 Wng Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319		50 $\leq$ x % < 100
INDEX: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 REACH: 01-2119457558-25 PROPAN-2-OL	GHS02, GHS07 Dgr Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	[1]	25 $\leq$ x % < 50
CAS: 95-14-7 EC: 202-394-1 1,2,3-BENZOTRIAZOLE	GHS07 Wng Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H332 Aquatic Chronic 3, H412		2.5 $\leq$ x % < 10

Informații despre componente. :

[1] Substanță pentru care există valori limită de expunere la locul de muncă.

SECȚIUNEA 4 : MĂSURI DE PRIM AJUTOR

În mod general, în caz de dubiu sau dacă simptomele persista, consultați fără rezerve un medic.

NICIODATA nu dați să înghita unei persoane inconștiente.

Atenție: o persoană inconștientă trebuie așezată în poziție laterală de siguranță.

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

În caz de expunere prin inhalare :

Îndepărtați victima de locul expus și duceți-o afară.

Dacă apar probleme respiratorii (de exemplu, tuse puternică):

Așezați victima în poziție pe jumătate șezând, cu pieptul ridicat; mențineți victima la căldură și într-un loc liniștit.

Chemați un medic imediat.

În caz de împrăscare sau de contact cu ochii :

Dacă este cazul, îndepărtați lentilele de contact.

Spălați cu apă proaspătă și curată din abundență timp de 15 minute, ținând pleoapele ridicate.

Dacă apar dureri, roșeață sau tulburări de vedere, consultați un oftalmolog. Arătați ambalajul sau eticheta.

În caz de împrăscare sau de contact cu pielea :

A se îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată sau murdară. Acesta nu va mai fi folosită fără a fi decontaminată.

A se clăti imediat cu apă din abundență.

În cazul iritării pielii, consultați un medic. Arătați ambalajul sau eticheta.

In caz de înghitire :

Clătiți gura, nu permiteți victimei să bea, nu induceți voma, calmați persoana și transportați-o imediat la spital sau la medic. Arătați eticheta medicului.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atât acute, cât și întârziate

A se vedea secțiunea 11

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

A se ține cont de indicațiile medicului

SECȚIUNEA 5 : MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

Inflamabil.

A se ține departe de sursele de foc produsele comburante. A se ține departe de sursele de foc, orice material inflamabil.

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere adecvate

A se folosi extincitoare pe bază de pudră sau spumă.
Spume speciale pentru lichide polare, pudre și dioxid de carbon.

Mijloace de stingere neadecvate

În caz de incendiu, nu utilizați :
- jet de apă

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Un incendiu va produce adesea un fum gros negru. Expunerea la produsele de descompunere poate comporta riscuri pentru sănătate.
Nu respirați fumurile.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Utilizați un aparat respirator autonom și o salopetă completă de protecție.

SECȚIUNEA 6 : MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

A se referi la măsurile de protecție enumerate în rubricile 7 și 8.
Mențineți la distanță persoanele neprotejate.
Puneți toate sursele inflamabile în afara oricărui pericol și păstrați-le la distanță.
A se evita inhalarea vaporilor.
Eliminați toate sursele posibile de aprindere și ventilați încăperile.
A se evita orice contact cu pielea și cu ochii.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Inconjurați și adunați scurgerile cu materiale absorbante necombustibile, de exemplu: nisip, pamânt, sticlă pisată în butoaie în vederea eliminării deșeurilor.
Nu aruncați în mediile naturale (cursuri de apă, soluri, vegetație, etc.)

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Absorbiți produsul vărsat cu materiale absorbante necombustibile, și măturați sau scoateți cu fărâșul. Puneți deșeurile în containere pentru a fi eliminate. Nu le amestecați cu niciun alt deșeu. Spălați cu apă din abundență suprafața contaminată.
Nu recuperați produsul pentru a-l reutiliza.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Observații privind eliminarea: a se vedea secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7 : MANIPULAREA SI DEPOZITAREA

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Produs pentru uz extern - A nu se înghiți.
A se evita orice contact cu pielea și ochii.
Manipulați, respectând instrucțiunile de folosire de pe etichetă.

Prevenirea incendiilor :

Pastrati ambalajele bine închise și îndepărtați de sursele de căldură, de scântei și flacăra deschisă.
Nu utilizați unelte care pot provoca scântei. Nu fumați.
A se păstra la loc ferit de orice sursă de aprindere - nu fumați.
A se păstra la loc ferit de materialele inflamabile.

Echipamente și proceduri recomandate :

Pentru protecția individuală, a se vedea secțiunea 8.
Observați precauțiile indicate pe eticheta de asemenea reglementările în privința protecției muncii.

Evitați contactul amestecului cu ochii.
Baie oculară și sursă de apă în apropiere.
Aerisiți bine încăperea.

Echipamente si proceduri interzise :

Fumatul, consumarea de alimente și de băuturi sunt interzise în locurile unde se utilizează amestecul.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați recipientul bine închis.
A se păstra NUMAI în ambalajul original.
Temperatură de depozitare recomandată: de la +5°C la +25°C.
A nu se depăși termenul de valabilitate indicat pe ambalaj.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Păstrați la adăpost de materiale incompatibile (a se vedea secțiunea 10)

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Uz exclusiv profesional
Consultați paragraful 1 pentru indicația produsului

SECȚIUNEA 8 : CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

Datele acestui capitol se raportează la produsul specific indicat în acest document. În cazul manipulării concomitente și/sau a expunerii simultane la diferiți agenți chimici, aceștia din urmă trebuie imperativ luați în considerare în alegerea echipamentelor de protecție individuală.

VLM/VME (Valoare Limită de Expunere și Valoare Medie de Expunere) prezentate mai sus sunt menționate de numărul CAS al substanței.

Paragraful 3 precizează numele chimic corespondent numărului CAS.

8.1. Parametri de control**Valori limită de expunere profesională :**

- Germania - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS	VME :	VME :	Depășire	Observații
67-63-0		200 ppm 500 mg/m3		2(II)

- Belgia (Hotărârea din 19/05/2009, 2010) :

CAS	TWA :	STEL :	Ceiling :	Definiție :	Criterii :
67-63-0	200 ppm 500 mg/m3	400 ppm 1000 mg/m3			

- Franța (INRS - ED984 :2012) :

CAS	VME-ppm :	VME-mg/m3 :	VLE-ppm :	VLE-mg/m3 :	Note :	Nr. TMP :
67-63-0	-	-	400	980	-	84

- Spania (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Mayo 2010) :

CAS	TWA :	STEL :	Ceiling :	Definiție :	Criterii :
67-63-0	400 ppm 998 mg/m3	500 ppm 1250 mg/m3			

- Polonia (2014) :

CAS	TWA :	STEL :	Ceiling :	Definiție :	Criterii :
67-63-0	900 mg/m3	1200 mg/m3			

- Cehia (Regulamentul nr. 361/2007) :

CAS	TWA :	STEL :	Ceiling :	Definiție :	Criterii :
67-63-0	500 mg/m3	1000 mg/m3		I	

- Slovacia (Regulamentul nr. 300/2007) :

CAS	TWA :	STEL :	Ceiling :	Definiție :	Criterii :
67-63-0	200 ppm 500 mg/m3	1000 mg/m3			

- Elveția (SUVA 2015) :

CAS	VME	VLE	Valeur plafond	Notations
67-63-0	200 ppm 500 mg/m3	400 ppm 1000 mg/m3		B SSC

- România (Hotărâre 1218/2006) :

CAS	TWA :	STEL :	Ceiling :	Definiție :	Criterii :
67-63-0	81 ppm 200 mg/m3	203 ppm 500 mg/m3			

8.2. Controale ale expunerii**Controale tehnice adecvate**

Asigurați-vă de buna aerisire a încăperilor. Concentrațiile din atmosferă de la locul de muncă nu trebuie să depășească valorile limită date în condițiile normale de utilizare.

Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentele de protecție individuală

Utilizați echipamente de protecție individuală curate și corect întreținute.

Depozitați echipamentele de protecție individuală într-un loc curat, departe de zona de lucru.

În timpul utilizării, nu consumați alimente, băuturi și nu fumați. Dezbrăcați și spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de a o reutiliza. Asigurați o ventilație adecvată, în special în spațiile închise.

- Protecția ochilor/feței

Evitați contactul cu ochii.

Sursă de apă în apropiere.

- Protecția mâinilor

Folosiți mănuși de protecție corespunzătoare, rezistente la agenții chimici, în conformitate cu norma SR EN374.

Alegerea mănușilor trebuie făcută în funcție de aplicație și de durata de utilizare a locului de muncă.

Mănușile de protecție trebuie alese în funcție de locul de muncă: alte produse chimice care pot fi manipulate, protecții fizice necesare (tăiere, înțepare, protecție termică), dexteritate necesară.

În timpul manipulării acestui produs, purtați mănuși adecvate.

Din cauza solvenților prezenți, sunt recomandate mănușile din cauciuc sintetic sau cele din cauciuc nitril.

În cazul apariției de semne de degradare, mănușile trebuie înlocuite imediat.

- Protecția corpului

Personalul va purta îmbrăcăminte de lucru spălată în mod regulat.

După contactul cu produsul, toate părțile contaminate ale corpului vor trebui să fie spălate.

- Protecția respiratorie

În caz de aerisire insuficientă, existând riscul depășirii VLE/VME, purtați un aparat respirator adecvat (măști cu filtre pentru vaporii organici - protecție de tip A)

SECȚIUNEA 9 : PROPRIETĂȚILE FIZICE SI CHIMICE

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Informații generale:

Stare Fizica :	Lichid Fluid.
Culoare:	portocaliu
Miros:	slab

Informații importante legate de sănătate, siguranță și mediu :

pH :	5.50 .
	Netru.
Punct/interval de fierbere :	neprecizat.
Punct de aprindere :	25.50 °C.
Presiune de vapori (50°C) :	neimplicata.
Densitate :	+/- 1.0
Hidrosolubilitate :	Solubil.
Punct/interval de topire :	neprecizat.
Temperatura de autoinflamare :	neprecizata.
Punct/interval de descompunere :	neprecizat.

9.2. Alte informații

pH-ul reluat la rubrica 9.1 reprezintă o valoare indicativă. Vă rugăm să consultați mai jos valorile minimă și maximă de pH-ul ale produsului:

pH-ul produsului pur	5,0 - 6,5
----------------------	-----------

SECȚIUNEA 10 : STABILITATE SI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate

Nu există reacții periculoase dacă prescripțiile/indicațiile privind depozitarea și manipularea sunt respectate.

10.2. Stabilitate chimică

Acest amestec este stabil în condițiile de manipulare și depozitare recomandate în secțiunea 7.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Cf. secțiunile 10.1 & 10.2

10.4. Condiții de evitat

A nu se amesteca cu alte produse.

A nu se pulveriza deasupra unei flăcări sau deasupra oricărui corp incandescent.

A se evita expunerea la căldură.

10.5. Materiale incompatibile

A nu se amesteca cu alte produse, excepție făcând cele definite pentru utilizare.

10.6. Produși de descompunere periculoși

La temperaturi mari, produse periculoase de descompunere se pot produce, sub formă de fum, din monoxizi și dioxizi de carbon, oxizi de azot.

SECȚIUNEA 11 : INFORMATII TOXICOLOGICE

11.1. Informații privind efectele toxicologice

11.1.1. Substanțe

Necunoscut

11.1.2. Amestec

Datele toxicologice ale amestecului (rezultate din studii sau din aplicarea metodei convenționale) sunt descrise mai jos.

Toxicitate acută :

Estimarea toxicității acute (ETA)*:

ETA orală: > 2000 mg/kg

* conform metodei de calcul prezentată în regulamentul CLP (Clasificare, Etichetare, Ambalare) Partea a 3-a Capitolul 3.1, din datele diferitelor componente prezente în produs

Ingestia poate genera o iritare a aparatului digestiv, o durere abdominală, dar și dureri de cap și grețuri.

Poate provoca migrene și amețeli, poate acționa ca și anestezie și poate avea alte efecte la nivelul sistemului nervos central.

Coroziune cutanată/iritație cutanată :

Posibilitatea apariției mâncărimii cu roșeață locală ușoară spre moderată.

Leziuni oculare grave/iritație oculară :

Poate cauza o ușoară iritare oculară: simptomele conjunctivitei: roșeață și lăcrimare.

Sensibilizare respiratorie sau cutanată :

Produsul nu este clasat în această categorie de pericol.

Mutagenicitate pe celulele germinale :

Produsul nu este clasat în această categorie de pericol.

Cancerigenitate :

Produsul nu este clasat în această categorie de pericol.

Toxicitate pentru reproducere :

Produsul nu este clasat în această categorie de pericol.

Toxicitate specifică pentru anumite organe țintă – expunere unică :

Produsul nu este clasat în această categorie de pericol.

Toxicitate specifică pentru anumite organe țintă - expunere repetată :

Produsul nu este clasat în această categorie de pericol.

Pericol prin inspirație :

Produsul nu este clasat în această categorie de pericol.

SECȚIUNEA 12 : INFORMATII ECOLOGICE

12.1. Toxicitatea

12.1.1. Substanțe

Necunoscut

12.1.2. Amestecuri

Amestecul nu este clasificat ca fiind periculos pentru mediul înconjurător, conform regulamentului CE 1272/2008.

12.2. Persistența și degradabilitatea

Nu este disponibilă nicio dată.

12.3. Potențialul de bioacumulare

Nu este disponibilă nicio dată.

12.4. Mobilitatea în sol

Nu este disponibilă nicio dată.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu este disponibilă nicio dată.

12.6. Alte efecte adverse

Nu este disponibilă nicio dată.

SECȚIUNEA 13 : CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

Trebuie stabilită o gestionare corespunzătoare a deșeurilor reprezentate de amestec și/sau de recipientul acestuia, conform dispozițiilor directivei 2008/98/CE.

Ambalajele nu trebuie refolosite.

Nu aruncați în cursurile de apă.

13.1. Metode de tratare a deșeurilor**Deseuri :**

Gestionarea deșeurilor se face fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului și, în special, fără a crea risc pentru apă, aer, sol, faună sau floră.

Reciclați sau eliminați conform legislației în vigoare, de preferință printr-o unitate de reciclare sau o firmă autorizată.

Ambalaje murdare :

Goliți complet recipientul. Pastrati eticheta/etichetele pe recipient.

A se duce la o unitate de reciclare.

Codurile deșeurilor (Directiva 2001/573/EC, 2006/12/EEC, Directiva 94/31/EEC relative la deșeurile periculoase) :

18 01 06 * produse chimice pe bază de sau conținând substanțe periculoase

Pentru informații:

Codul deșeurilor trebuie stabilit de către utilizator, în conformitate cu aplicarea produsului.

Codul de deșeu următor este menționat cu titlu indicativ

18 = Deșeuri provenind de la îngrijirea medicală sau veterinară și/sau de la cercetarea asociată (excepție făcând deșeurile de bucătărie și de restaurant neprovenind direct din îngrijirea medicală)

SECȚIUNEA 14 : INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

Transportați produsul conform dispozițiilor ADR pentru sosea, al RID pentru calea ferată, al IMDG pentru mare, și al ICAO/IATA pentru transportul aerian (ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2015).

14.1. Numărul ONU

1993

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

UN1993=FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(propan-2-ol)

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

- Clasificarea :



3

14.4. Grupul de ambalare

III

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

-

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

ADR/RID	Clasa	Cod	Grupa	Eticheta	Ident.	LQ	Dispo.	EQ	Cat.	Tunel
	3	F1	III	3	30	5 L	274 601 640E	E1	3	D/E
IMDG	Clasa	2° Etichetă	Grupa	LQ	EMS	Dispo.	EQ			
	3	-	III	5 L	F-E, S-E	223 274 955	E1			
IATA	Clasa	2° Etichetă	Grupa	Pasager	Pasager	Cargo	Cargo	nota	EQ	
	3	-	III	355	60 L	366	220 L	A3	E1	
	3	-	III	Y344	10 L	-	-	A3	E1	

Pentru cantități limitate, consultați secțiunea 2.7 a OACI/IATA și capitolul 3.4 al ADR și I'IMDG.

Pentru cantități exceptate, consultați secțiunea 2.6 a OACI/IATA și capitolul 3.5 al ADR și I'IMDG.

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15 : INFORMATII DE REGLEMENTARE**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

- Informații referitoare la ambalaj:

Amestecul este ambalat într-un ambalaj care nu depășește 125 ml.

15.2. Evaluarea securității chimice

Informațiile obținute din evaluarea siguranței chimice a substanțelor prezente în cadrul produsului sunt integrate în secțiunile adecvate din prezenta fișă de date de siguranță, de fiecare dată când este necesar.

SECȚIUNEA 16 : ALTE INFORMATII

Condițiile de lucru ale utilizatorului nefiindu-ne cunoscute, informațiile date în prezenta fișă de securitate sunt bazate pe cunoștințele noastre și pe reglementările atât naționale cât și comunitare.

Întotdeauna este responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru a răspunde exigențelor legale și reglementărilor locale.

Informațiile oferite în prezenta fișă de date de siguranță trebuie considerate ca fiind o descriere a cerințelor de siguranță aplicabile acestui amestec.

Este recomandată transmiterea informațiilor acestei fișe de date de securitate utilizatorilor, eventual într-o formă adecvată.

Această informație se referă la produsul descris specific și nu poate fi valabilă în combinație cu alt(e) produs(e). Produsul nu trebuie întrebuințat în alte scopuri decât cele specificate în rubrica 1, fără a fi obținut în preleabil instrucțiuni scrise de manipulare.

MODIFICĂRI FĂCUTE FAȚĂ DE VERSIUNEA PRECEDENTĂ

- § 9
- § 11
- § 15

Formularea frazelor menționate în secțiunea 3 :

H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H302 + H332	Nociv în caz de înghițire sau inhalare.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H332	Nociv în caz de inhalare.
H336	Poate provoca somnolență sau amețeală.
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Abrevieri :

ADR : Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organizația Aviației Civile Internaționale.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

GHS02 : flacăra

GHS07 : semnul exclamării

REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE

Tip		Denumire		Den.comerc.	Model	Nr. catalog	Tara	Prodicator	Reprezentant
II.2. Eticheta (etichete) dispozitivului medical și al ambalajului		Eticheta_1L							
	I.3. Certificatul CE	Certificat CE							
	II.3. Instrucțiunile de utilizare	Instrucțiuni de utilizare							
II.2. Eticheta (etichete) dispozitivului medical și al ambalajului		Eticheta_5L			1 L		Franta	LABORATOIRES ANIOS	ERICON S.R.L.
					5 L		Franta	LABORATOIRES ANIOS	ERICON S.R.L.
II.2. Eticheta (etichete) dispozitivului medical și al ambalajului		Sticker			LICHID, 1 L		Franta	LABORATOIRES ANIOS	ERICON S.R.L.
					LICHID, 5 L		Franta	LABORATOIRES ANIOS	ERICON S.R.L.
I.2. Declarația de conformitate CE		Declaratie de conformitate CE			5 L, ACTIVATOR	1081.299	Franta	LABORATOIRES ANIOS	ERICON S.R.L.
					5 L	182000	Franta	LABORATOIRES ANIOS	ERICON S.R.L.
					500 ML	182000	Franta	LABORATOIRES ANIOS	ERICON S.R.L.
					PRAF, 5 KG	1896	Franta	LABORATOIRES ANIOS	ERICON S.R.L.
					1 L	2084.073	Franta	LABORATOIRES ANIOS	ERICON S.R.L.
					1 L	2235000	Franta	LABORATOIRES ANIOS	ERICON S.R.L.