



## Lampa bactericida UVC, putere 30W, pentru sterilizare

### Manual de instructiuni

Lampa UVC cu montare pe perete este recomandată pentru incinte și spații mici (microbiologie, măsuțe instrumentar, hotel, spitale, clinici etc) cu o suprafață de sterilizare de până la 30 mp.

- Prevăzută cu 1 tub generator de radiație UV-C (lungime de undă 253,7nm);
- Durata de viață a tuburilor UV până la reducerea radiației UV cu 15%: minim 8000 ore;
- Tip montare : staționar;
- Alimentare: 220V / 50Hz, cablu de alimentare cu intrerupator on/off;
- Termen de garanție 12 luni.

TIMPUL DE STERILIZARE: poziționați lampa în centrul camerei și urmați instrucțiunile:

Suprafața Timp sterilizare

- 0-30 mp 15 min
- 30-60 mp 30 min
- 60-80 mp 60 min

APLICATII:

- Dezinfecția aerului și suprafețelor din încăperi cu încărcătura microbiană mare prin intermediul radiației UV (spitale, laboratoare de analize medicale, laboratoare de microbiologie, săli de operație, cabinete medicale individuale CMI, cabinete stomatologice, săli așteptare, producția de medicamente, produse naturiste etc).

MICROORGANISME DISTRUSE: bacterii, viruși, spori de mușcăi, drojdii, alge, protozoare etc.

MOD DE INSTALARE:

1. Îndepărtați corpul protector și tubul bactericid.
2. Conectați cablurile electrice la blocul terminal pentru conexiuni.
3. În interiorul cutiei veți găsi șuruburile corespunzătoare cu ajutorul cărora se realizează fixarea acestuia pe perete.
4. După montare puteți pomă tensiunea de alimentare a instalației electrice.

#### ATENȚIE!!!

1. Înainte de a porni lampa asigurați-va că în camera respectivă nu au rămas persoane, animale sau plante.
2. Lumina ultravioletă reflectată dintr-o oglindă de exemplu poate fi la fel de daunătoare pentru piele și ochi.
3. Nu lasați aparatul nesupravegheat, la îndemana copiilor sau a persoanelor lipsite de discernământ (cel mai bine închideți cu cheia camera în care acesta funcționează).
4. Lumina ultravioletă UV-C directă este daunătoare pentru piele și mai ales pentru ochi, poate provoca arsuri grave.
5. Nu vă dezinfectați mâinile cu această lampă, folosiți lumina ultravioletă UV-C doar pentru dezinfecția obiectelor. Pentru mâini folosiți săpunul sau alte produse recomandate.
6. Nu priviți direct la lampa în timpul utilizării.
7. Lucruri precum tablouri, panze, fotografii și în general obiecte care pot fi deteriorate de lumina soarelui, nu sunt, de asemenea, recomandate să fie expuse la lumina directă a lampii UV-C.
8. Opriti lampa atunci când doriți să o curățați.
9. Dacă temperatura camerei este mai mică de 20 grade Celsius sau mai mare de 40 grade Celsius, timpul de sterilizare trebuie extins.
10. După ce s-a încheiat ciclul de sterilizare al încăperii nu intrați imediat, încănta trebuie aerisită minim 15 minute.
11. Nu lasați copiii în preajma dispozitivului.

Acest simbol indică faptul că acest produs face obiectul unei colectări separate. Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie să fie colectate separat și să nu fie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie să fie predate unui sistem de colectare, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE. Echipamentele electrice și electronice sunt periculoase pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană, ca urmare a prezenței în compoziția lor a unor substanțe periculoase. Pentru informații suplimentare privind predarea și colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate, vă rugăm să contactați autoritățile locale și central de colectare autorizate în acest sens.