

**PROSPECT PENTRU UTILIZATOR**  
**Peroxid de hidrogen-MC**  
**soluție dezinfectantă 6%**

**DENUMIREA PRODUSULUI**

**Peroxid de hidrogen-MC, soluție dezinfectantă 6%**

**COMPOZIȚIA**

1 flacon de 100 ml conține:

Substanța activă: peroxid de hidrogen 30% - 20,0 g

Excipienți: benzoat de sodiu, apă purificată.

**PREZENTARE**

Produsul este prezentat sub formă de lichid transparent, incolor, fără miros.

Peroxid de hidrogen-MC soluție dezinfectantă, intră în categoria biocide.

Peroxid de hidrogen-MC posedă o reducere a microorganismelor de referință *S. aureus* și *E. hirae* și a microorganismului de referință *C. albicans*.

**RECOMANDĂRI**

Peroxid de hidrogen-MC – pentru dezinfectarea suprafețelor din încăperi (podea, pereți, uși etc.), transportului (ambulanță, transport public, ect), pentru dezinfectarea obiectelor; pentru dezinfecția materialului de curățare; pentru dezinfectarea și sterilizarea dispozitivelor medicale în unitatea sanitară rezistente la coroziune;

**ADMINISTRARE**

Timpul de contact necesar al Peroxid de hidrogen-MC 6% cu substratul tratat trebuie să fie 60 minute. Substanța chimică prin care se poate realiza dezinfecția de nivel înalt este: - Peroxidul de hidrogen stabilizat (6%).

**Avertizări de pericol (fraze H):** H225 Lichid și vapori foarte inflamabili .; H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.; H318 Provoacă leziuni oculare grave.

**Recomandări de siguranță (fraze P):** P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.; P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor; P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. P305 + P351 + P338 În caz de contact cu ochii: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul

**EFECTE NEDORITE**

Evitați pătrunderea soluției în ochi și pe mucoase.

Lumina și căldura reduc activitatea preparatului.

## **CONTRAINDICĂȚII**

Hipersensibilitata la componentele produsului.

## **ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE**

1. Se interzice de a scoate dopul flaconului cu dinții.
2. Este necesar de respectat procentajul soluției pentru fiecare lavaj în parte.
3. După prelucrarea suprafețelor cu Peroxid de hidrogen-MC, obiectele supuse dezinfectiei se lasă 2 – 10 min, apoi se spală cu apă curată sau se șterge cu o cârpă umedă.

## **CONȚINUTUL AMBALAJULUI**

Soluție dezinfectantă. Câte 40ml, 50 ml, 100ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 4000 ml, 5000 ml, în damigeana cu capac sau flacoane de sticlă sau masă plastică de culoare oranj(brună) cu gât elicoidal închis cu / sau fără dopuri din polietilenă și cu căpăcele din masă plastică (capac din polietilenă, capac din aluminiu). Câte un flacon împreună cu/sau fără prospectul pentru utilizator se ambalează în cutie individuală. Se admite ambalarea flacoanelor în cutie colectivă, fără ambalarea lor în cutie individuală.

## **PĂSTRARE**

A se păstra la temperatura sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor!

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere.

## **TERMEN DE VALABILITATE**

2 ani.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

## **DATA ULTIMEI VERIFICĂRI A TEXTULUI**

Iulie 2020

## **DENUMIREA ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI**

„MC Pharmaceuticals” SRL, Republica Moldova

MD - 2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor, nr. 9/1,

e-mail: office@mcpharma.md,

tel: 068051605.

*Însoțiți orice reclamație cu numărul de serie înscris pe ambalaj!*