

Instrucțiune de utilizare a produsului dezinfectant

Velox® Wipes NA

Șervețele fără alcool pentru dezinfectarea suprafețelor echipamentului medical sensibile la alcool. Acționează în doar 1 minut

Velox Wipes NA sunt recomandate pentru a dezinfecta o varietate de suprafețe a echipamentului medical fabricate din plastic, sticlă acrilică, oțel inoxidabil, metal, aluminiu, cauciuc și porțelan. Potrivite pentru dezinfectarea aparatelor medicale, echipamentului de reabilitare, scaunelor pentru tratament, incubatoarelor, sondelor aparatelor USG și a lămpilor în sălile de terapie intensivă și săli de operație. Fără

alcool, aldehide și fosfați, șervețelele au o aromă plăcută și nu decolorează suprafețele.

Instrucțiuni de utilizare:

Extrageți un șervețel din container și umeziți suprafața care trebuie curățată și dezinfectată. Se închide capacul. După deschiderea ambalajului. După deschiderea ambalajului, folosiți șervețelele în termen de 30 zile. Nu folosiți dacă șervețelul este uscat. Suprafața nu necesită clătire cu apă după dezinfectare. Înainte de a aplica pe suprafețele sensibile, testați șervețelele pe o arie nevizibilă. Produsul este conceput pentru uz profesional.

Substanțe active: 100 bucăți șervețele conțin: amine, săruri cuaternare de amoniu: 173 g formulă saturată, 100 g conțin: 0,15 g de N- (3-aminopropil) —N-dodecilopropano- 1, 3- diamină (CAS: 2372-82-9), 0,14 g de poli (oxy-1,2- etanodilo),. alpha .- (didecilmetiloamino) etil] -. Omega.- hidroxi-, propanoat (sare) (CAS: 94667-33-1).

Ambalaj: container din plastic cu 100 șervețele, pungă rezervă cu 100 șervețele.

Activitatea microbiologică:

Eficacitatea:	EN 14885	Condiții	
		curat	murdar
Bacteria (inclusiv MRSA)	EN 13727	1 min.	1 min.
Fungi (C. albicans)	EN 13624	1 min.	1 min.
Mycobacteria (M.terrae)	EN 14348	5 min.	10 min.
Virusuri încapsulate (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Ebola)	EN 14476	1 min.	1 min.

DOMENII DE APLICARE





Reprezentant oficial în Republica MOLDOVA:



S.A. M-INTER-FARMA

**MD 2025 Mun.Chisinau, str.Grenoble 23
Tel: (022) 904 – 006, 904 – 005, Fax: 904 – 007**

Număr de înregistrare de stat a dispozitivelor medicale Nr. DM000037816