

GLOBACID®SF med

AGENT DE CURATARE SI DEZINFECTIE PE BAZA DE AMINE *concentrat*

Globacid®SF med este folosit pentru curatarea si dezinfectia diverselor dispozitive medicale rezistente la apa (scaune pentru pacienti, brancarde, rame ale paturilor etc) si suprafetelor (usi, pervaze, dulapuri, podele, rame ale paturilor, obiecte din bucatarie, intrerupatoare, etc). Este protivit pentru curatarea si dezinfectia obiectelor din sala de operatii .

Este , de asemenea, in conformitate cu cerintele din domeniul alimentar, al serviciilor de infrumusetare, etc.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Eficient din punct de vedere al costurilor
- Spectru larg de eficacitate
- Fara aldehide
- Proprietati excelente de curatare
- Nu ataca materialele (metal, plastic, plexi)
- Miros neutru

FOLOSIRE

Preparati solutia de lucru din apa curata si concentrat, conform timpului de aplicare necesar (vezi in tabel). Pentru ca solutia de lucru sa fie la capacitate maxima de curatare, folositi apa rece sau la temperatura camerei. Dupa expirarea timpului de aplicare, toate suprafetele care intra in contact cu alimentele trebuie limpezite. **NB!** **Evitati contactul cu produse pe baza de aldehide.** In consecinta, suprafetele care au fost anterior tratate cu produse pe baza de aldehide trebuie curatate de reziduurile de aldehide.

CONCENTRATIILE SOLUTIILOR DE LUCRU SI TIMPI DE APLICARE

Dezinfectie generala, spatii curatate	0,25%	2,5ml/l	15 min
Cazuri de infectii, spatii murdare	1,25%	12,5ml/l	15 min
Bactericid, fungicid (<i>Candida albicans</i>), toate virusurile incapsulate, adeno virus	0,25%	2,5ml/l	5 min
Eficacitate sporicida (<i>Clostridium difficile</i>)	4%	40ml/l	40 min

SPECTRUL MICROBIOLOGIC

Produsul are eficacitate bactericida, tuberculocida, fungicida, virucida impotriva virusurilor incapsulate (incl. HBV, HIV, HCV, coronavirus, gripal, vaccinia virus) si eficacitate virucida impotriva virusurilor neincapsulate (incl. rota-, noro-, adeno-, polio- and poliomavirus) si eficacitate sporicida (*Clostridium difficile*).

STANDARDE DE CONFORMITATE

EN 1276, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 16615, EN 17126, DVG, DVV/RKI, DGHM/ÖGHMP

DEPOZITARE

Cititi data expirarii pe ambalaj. Depozitati la temperaturi de 5-25°C, si feriti de contactul direct cu lumina soarelui , evitati inghetarea, pentru a pastra calitatea produsului.

UTILIZARE

Produsul este sigur pentru mediu, toate ingredientele active sunt biodegradabile la clatirea cu apa .Ambalajele din plastic sunt reciclabile. Pentru a fi colectate, ambalajele de plastic sunt adecvate atunci cand sunt clatite iar sticla si capacul sunt separate. Cutia de ambalare este sortata pentru colectarea cartonului. Compatibilitatea dintre ambalaj si produs este asigurata de calitate .

INFORMATII DE SIGURANTA

Cititi fisa de siguranta a produsului pentru informatii de siguranta suplimentare.

COMPOZITIE


100gr de produs contin urmatoarele ingrediente active: clorura de didecildimetilamoniu 6gr, N-(3-aminopropil)-N- dodecilpropane-1,3-diamine 5,5gr

pH 10-11

Produsul poarta marcajul CE conform Directivei pt Dispozitive Medicale 93/42/EEC



AMBALARE

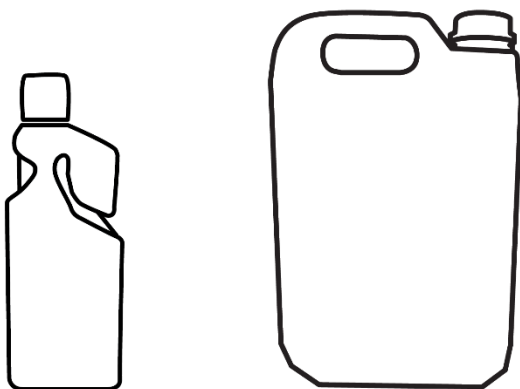

flacon dozator 1 l

bidon 5 l



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com

