

**COMPONENTA TRUSEI MEDICALE
PENTRU PRIMUL AJUTOR MEDICAL**

Conform Hotărîrea Guvernului N-1306 din 21 noiembrie 2008

cu privire la stabilirea conținutului minim al truselor de prim ajutor medical din dotarea autovehiculelor.

Nr. d/o	Denumirea medicamentelor si consumabilelor	Cantitatea
I. Medicamente		
1.	Validol 60 mg N10	1 blister
2.	Soluție de amoniac 10% 10ml	1 flacon
3.	Soluție alcoolică de iod 5%	1 flacon
II. Consumabile		
4.	Bandaj elastic pentru fixare	2 buc.
5.	Emplastru bactericid	10 buc.
6.	Emplastru simplu	1 buc.
7.	Pansament emplastru	4 buc.
8.	Fașa de tifon sterilă 7x14 cm	2 buc.
9.	Fașa de tifon nesterilă 7x14 cm	3 buc.
10.	Garou hemostatic	1 buc.
11.	Foarfecă	1 buc.
12.	Vată medicinală	1 buc.
13.	Lanternă	1 buc.
14.	Pix sau creion	1 buc.
15.	Foi pentru notițe	3 buc.
16.	Cutie individuală	1 buc.

Denumirea și adresa:

ÎM "BECOR" SRL
str.Calea Orheiului 111/5, mun.Chișinău
Tel:(022) 40-62-99

INSTRUCTIUNE DE UTILIZARE A TRUSEI MEDICALE

Validol 60 mg, comprimate

Se utilizează *sublingual* în dureri cardiace (crize ușoare de angină pectorală), rău de mișcare, isterie, atac de panică.

Soluție amoniac 10% - 10ml

Se utilizează ca preparat cu acțiune excitantă și revulsivă.

Prin *inhalare* (cateva picături pe tifon sau vată) pentru restabilirea respirației în caz de leșin (lipotemie).

Extern (soluție diluată sub forma de comprese) pentru prelucrarea înțepăturilor de insecte și a mușcăturilor minore de șarpe.

Soluție alcoolică de iod 5% - 10ml

Se utilizează extern ca bactericid și virucid, antiseptic și dezinfectant.

Garou hemostatic

Se utilizează pentru hemostaza temporară a arterelor membrelor. Se aplică mai sus de locul traumat (deasupra cotului sau a genunchiului), se înfășoară de câteva ori pe membru și se fixează. Garoul se aplică pentru cel mult 1,5 ore, timpul fixării se indică cu creionul sau pixul pe foiță pentru notițe.

Emplastru bactericid

Se utilizează pentru protejerea și recuperarea zonelor afectate: plăgilor, rănilor survenite prin zgârâiere, înțepare sau combustii ușoare de infectare și contactare mecanică

Emplastru

Se utilizează pentru fixarea pansamentelor.

PĂSTRAREA

Trusa medicală se păstrează cu capacul în sus, la temperatura camerei. A se feri de foc și de lovituri.

Verificați periodic trusa Dumnevoastre cu privire la termenele de valabilitate a produselor. Dacă este necesar înlocuiți produsul cu termen critic sau expirat.

**UTILIZAREA CORECTA A TRUSEI MEDICALE VĂ
POATE PĂSTRA VIAȚA.**