

Aerosept **ULTRA150**

DEZINFECTIA PRIN CALE AERIANA IN MODUL CONECTAT



LES + ANIOS

- Capacitate de tratament : camera de 30 pe 150 m³
- 2 moduri de funcțiune :
 - Manual pentru acces la informații esențiale.
 - Conectare cu control de pe tabletă sau smartphone pentru acces la toate opțiunile.
- Trasabilitate pe suport numeric
- Noua tehnica brevetată :
 - Atomizor ultrasonic
- Tehnologie nouă fără compresor de aer
- Procedeu conform normei NFT 72-281*
- Utilizare simplificată
- Intretinere simplificată (acces facil la pompa)
- Pratic, ergonomic și portabil

INDICATII

Atomizor autonom și complet automat destinat dezinfectării suprafețelor curățate anterior.

Utilizat cu :

ASEPTANIOS AD*

- Bactericid și levuricid în 30 min.
- Micobactericid în 45 min.
- Fungicid și sporidicid în 60 min.

ASEPTANIOS OXY +*

- Bactericid și levuricid în 15 min.
- Micobactericid și fungicid în 30 min.
- Sporidicid în 60 min.

* Consultați Fișa științifică pentru a consulta toate afirmațiile și studiile.
Condiții de utilizare: 7 ml/m³ - 20°C.

PROCES CU PERFORMANTE RIDICATE

- Duza ultrasonica difuzează un fluid care este distribuit uniform pe toate suprafețele de tratat.
- Aerosolizare controlată pentru distribuția optimă a soluției în cameră.
- Auto-reglarea debitului duzei pentru calitatea și eficiența optimizată a aerului.
- Concentrație perfect stabilizată 7 ml/m³.
- Reglarea frecvenței vibrațiilor duzei pentru a obține o dimensiune optimă a particulelor (dimensiunea picăturii)

PROCEDEU SIMPLIFICAT

- Dispozitiv conectat la smartphone-uri și tablete : permite controlul de la distanță în timpul utilizării (conexiune bluetooth).
- Vizualizare instantanee a funcționării în timpul difuzării printr-un indicator luminos pe dispozitiv sau direct pe aplicație (dacă aparatul este conectat la Bluetooth).
- Este posibilă selectarea volumului și difuzorului prin introducerea sau cod de bare.
- Indicarea timpului de început și de sfârșit al ciclului.
- Setarea timpului de început al ciclului.
- Calculul automat al difuziei și al timpului de contact datorită unei pompe peristaltice.
- Preînregistrare posibilă de la 1 la 6 utilizatori și de la 1 la 6 camere.

PROCEDEU SECURIZAT

- Pornire de la distanță fără prezența umană, întârziere de la 1 minut la 9 ore.
- Oprire în cazul unei defecțiuni cu trasabilitatea erorii.
- Control de la distanță și în timp real prin intermediul aplicației.
- Trasabilitate completă cu vizibilitate în cazul unei eventuale defecțiuni.
- Fără stropire cu produs: recipient prevăzut cu o canulă care împiedică contactul direct cu produsul.

Aerosept^{ULTRA}150

TRAZABILITATE OPTIMA

- Informații privind urmărirea și înregistrarea disponibile în aplicație.
- Posibilitatea de a recupera informații esențiale cu privire la dezinfectie:

- Identificarea utilizatorului și a produsului
- Identificarea dispozitivelor și a materialelor medicale disponibile în cameră.
- Numarul de lot*
- Volumul de produs utilizat
- Durata operațiunii
- Monitorizarea progresului ciclului
- Anomalii întâlnite...

* dacă utilizatorul a completat informațiile din aplicație.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Capacitate rezervă : bidon de 2L
- Debit nominal : env. 0.7L/ora
- Greutate : 9 Kg
- Dimensiuni : 400 H x 200 L x 500 P mm
- Alimentare : 100-240 V (±10%) – 50/60 Hz – 32 W

CONDITII DE MEDIU

- Utilizare : doar în interior
- Temperatura:
 - La utilizare : 20°C ± 2°C în timpul pornirii
 - Transport / Depozitare : între -5°C și +70°C
- Nivel de umiditate:
 - La utilizare : între 50% și 75% umiditate relativă în timpul pornirii
 - Transport / Depozitare : între 40% și 80%
- Presiune atmosferică / Altitudine de utilizare :
 - Maxim : 795 hPa (corespunde cu o altitudine de 2000 m)
- Fluctuațiile rețelei : 100-240 VAC ± 10%
- Categoria de supratensiune : II
- Gradul de poluare : 3

MANUAL DE UTILIZARE*

- Pozitionați aparatul (echipat cu recipientul său de dezinfectant) într-un colț al camerei pentru a trata la aproximativ 1 metru de pereți (perimetru de securitate).
- Pistolul de pulverizare trebuie să indice spre centrul camerei.
- Să nu existe niciun obstacol în fața aparatului de-a lungul întregii căi de pulverizare.
- Porniți aparatul.
- Selectați volumul camerei, apoi apăsați butonul de pornire / oprire.
- Pornirea are întârziere 1 minut, necesară pentru a părăsi camera.
- Oprește automată la sfârșitul programului.
- Aerisiți camera.

*Consultați manualul de utilizare pentru întregul proces.

PRECAUTII DE UTILIZARE

Înainte de a utiliza aparatul, citiți instrucțiunile. Produsele folosite în acest aparat sunt periculoase – Respectați precauțiile indicate pe eticheta produsului utilizat (Stabilit în conformitate cu normele europene actuale pentru clasificarea și etichetarea substanțelor chimice). Înainte de utilizare, citiți eticheta și informațiile despre produs.

Utilizați biocidele cu precauție.

REFERINTE

AEROSEPT ULTRA 150.....	418.200
ASEPTANIOS OXY + (4 bidoane de 2L).....	2121.724
ASEPTANIOS AD (4 bidoane de 2L).....	2122.724

Pentru a menține o stare generală bună a dispozitivului, vă recomandăm să efectuați întreținerea în mod regulat. Procedurile sunt descrise în manualul de utilizare, disponibil la cerere.