

Арехит® Plus

Русский

Инструкция

Описание
Арехит Plus - это рентгеноконтрастный, нерастворимый, не расщипый усадки цемент на основе гидроксида кальция с преобладающими физическими и биологическими свойствами. Применяется для постоянного пломбирования корневых каналов с использованием гуттаперчи. Арехит Plus является двухкомпонентным материалом (двухенный шприц со статическим смесителем заполнен пастами базы и активатора)

Рабочее время
Если вода не добавляется, рабочее время составляет прим. 3 часа. При добавлении воды это время заметно сокращается.

Соотношение смешивания
Благодаря использованию двохенного шприца со статическим смесителем отпадает необходимость ручного смешивания. Материал выдвигается из шприца уже замешанным в правильном соотношении.

Состав
Соли кальция (гидроксид, оксид, фосфат), гидрированный коллоидиум, диэтилцилат, соли висмута (оксид, карбонат), высокодисперсный оксид кремния (гланализованный) и алкиловые сложные эфиры фосфорной кислоты.

Показания
- постоянное пломбирование канала после витальной экстирпации,
- постоянное пломбирование канала после удаления гангренозной плывы и дезинфицирующей прокладки.

- постоянное пломбирование канала при пародонтигах. Арехит Plus подходит для техники одного штифта, латеральной конденсации, а также для работы с разогретой гуттаперчей.

Противопоказания

- Ретроградное пломбирование.
- При известной аллергии на компоненты материала, приведенные в его составе, от применения Арехит Plus следует отказаться.

Побочные действия

Избегать контакта Арехит Plus с кожей / слизистой оболочкой и глазами. В неотвержденном состоянии Арехит Plus может оказывать легко раздражающее действие.

Взаимодействие с другими препаратами

Отверждение Арехит Plus в корневом канале зависит от наличия влаги. При недостаточно влажном канале отверждение происходит относительно быстро. Необходимую влажность для отверждения обеспечивает через дентинные каналы. Материал отверждается, начиная с апекса, поскольку здесь слой дентина самый тонкий, а апикальное отверстие обеспечивает последующий доступ жидкости. Поэтому перед началом пломбирования с помощью Арехит спелует тщательно высушить корневой канал. Вне полости рта, на блоке для смешивания в зависимости от влажности воздуха в помещении Арехит Plus может находиться в мягком состоянии в течение нескольких дней.

Применение

Снять затвор двохенного шприца поворотом на 1/4 оборота против часовой стрелки (выбросить, повторно использовать нельзя!) и установить смешивающую канюлю. В случае, если шприц уже использовался, установить новую канюлю только непосредственно перед извлечением материала Арехит Plus. При этом канюлю задвинуть вниз, до тех пор, пока не совпадут отметки на канюле и двохенном шприце. Взять за цветную основу и зафиксировать канюлю поворотом на 1/4 оборота по часовой стрелке. База и катализатор Арехит Plus уже дозированы в двохенном