

ECOCHIM – GRUP S.R.L.



or. Ungheni, str. Națională 119, ecochim.trade@gmail.com, +373 60 162 333



BIO-DEZ

**Dezinfectant
Universal
PRODUS CU
UTILIZARE LARGĂ**



Descriere:

Dezinfectant Universal «Bio - Dez» este un produs biocid pentru uz extern.

Dezinfectant Universal «Bio-Dez» se utilizează pentru dezinfectarea eficientă a mâinilor, suprafețelor, instrumentelor și dispozitivelor medicale

Substanțe active:

Alcool etilic 72 – 76%, clorura de benalconiu 0,024-0,029 %

Substanțe auxiliare:

Apă dedurizată, glicerină medicală, albastru de metilen

Spectrul de acțiune:

Virucidă, micobactericidă/tuberculocidă, bactericidă, fungicidă/levuricidă.



Grupa principală: 1

Tip de produs: 1,2,4

Indicarea pericolelor: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de surse de căldură/flăcări deschise sau suprafețe încinse. În caz de contact cu ochii clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Eliminați conținutul/containerul în conformitate cu reglementările locale/locale/regionale/naționale/internaționale.

Condiții de păstrare:

Se recomandă păstrarea la temperatura sub +25°C



Activitate	Metoda/protocol de testare	Specia	Concentrații	Timpul de acțiune
Bactericidă (Hygienic Handrub)	EN 1500:2013	Escherihia coli K12	100%/3 mlx1	60 sec
Bactericidă (Hygienic Handwash)	PN-EN 1499:2013-07	E.coli K12 NCTC 10538	100%	30 sec
Bactericidă (Surgical Handrub)	EN 12791:2016+A1:2017	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus , Enterococcus hirae , Escherichia coli K12 , Candida albicans	100%, 2x7ml	2x45 sec
Bactericidă în condiții de murdărie	EN 13727:2012+A2:2015	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus , Enterococcus hirae , Escherichia coli K12	97%;80%	60sec
Bactericidă în condiții de murdărie	PN EN 13697+A1:2019 08	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae , Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli	100%, 50%	60 sec
Bactericidă în condiții de murdărie	PN EN 1276:2019-12	Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	80%;50%	60 sec
Bactericidă în condiții de murdărie	EN 13727:2012+A2:2015	3 Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus , Enterococcus hirae , Escherichia coli K12 , Staphylococcus aureus MRSA, Enterococcus faecium	97%;80%;50%	60sec
Bactericidă în condiții de murdărie	UNE-EN 14561:2007	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	100%	60sec
Bactericidă în condiții de murdărie	PN-EN 13697+A1:2019-08	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa , Escherichia coli	100%;50%	60sec
Fungicidă în condiții de murdărie	EN13624:2022	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	97%	90 sec
Fungicidă în condiții de murdărie	PN EN 1650:2008+A1:2013-08	Candida albicans , Aspergillus brasiliensis	50%;80%	60sec
Fungicidă în condiții de murdărie	PN EN 13697+A1:2019 08	Candida albicans , Aspergillus brasiliensis	50%;100%	60 sec
Fungicidă în condiții de murdărie	EN 13624:2022	Aspergillus brasiliensis , Candida albicans	80%	90 sec
Fungicidă în condiții de murdărie	PN EN 13697+A1:2019	Aspergillus brasiliensis , Candida albicans	nedil	60 sec
Fungicidă/levuricidă în condiții de murdărie	PN EN 1650:2008+A1:2013-08	Candida albicans , Aspergillus brasiliensis	80%;50%	60sec
Levuricidă în condiții de murdărie	EN13624:2022	Candida albicans	80%	90sec
Levuricidă în condiții de murdărie	PN EN 13697+A1:2019	Candida albicans	nedil	60 sec
Levuricidă în condiții de murdărie	EN 13624:2014	Candida albicans	80%;50%	60 sec
Levuricidă în condiții de murdărie	EN 14562:2007	Candida albicans	100%	60 sec
Levuricidă/Fungicidă în condiții de murdărie	EN 14562:2007	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	100%	90 sec
Micobactericidă/Tuberculocidă în condiții de murdărie	EN 14348:2005	Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae	80%;50%	60 sec
Micobactericidă/Tuberculocidă în condiții de murdărie	UNE-EN 14563:2009	Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae	100%	60 sec
Virucidă în condiții de murdărie	UNE-EN 14476:2014+A2:2019	Poliovirus type 1, Adenovirus type 5, Murine Norovirus	80%	60 sec



Dezinfectant Bio-Dez



Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru/doza de aplicare	Timpul de acțiune
Dezinfecție mâinilor prin frecare	nedil / 3 ml	60 sec
Prin imersiune, înmuiere, irigare sau ștergerea suprafețelor	nedil.	60 sec (90sec.:EN 14562, EN 13624 acțiunea fungică)
Imersiune, pulverizare, stropire, ștergere cu laveta	activitate:bacterică, fungică, virucidă, micobacterică, nediluat	60 sec
Dezinfecția mâinilor prin spălare	nedil./3ml	30sec
Dezinfecția chirurgicală mâinilor prin frecare	nedil./ 2*7ml	2*45 sec



Dezinfectarea mâinilor: Aplicați soluția Bio-Dez pe mâini într-o cantitate de cel puțin 3 ml și frecați bine până la uscarea completă. Timpul de acțiune este de cel puțin 60 de secunde, acordând o atenție deosebită zonei unghiilor, deoarece aceasta este predispusă la acumularea de impurități. Dezinfecția chirurgicală a mâinilor se efectuează conform regulamentului, de două ori câte 45 de secunde.

Dezinfectarea suprafețelor: Pulverizați sau ștergeți suprafața cu soluția și lăsați-o să se usuce complet. Timpul de acțiune este de cel puțin 60 de secunde. Nu necesită clătire.

Asigurați-vă că suprafața tratată (inclusiv a dispozitivului medical) este rezistentă la alcool și că producătorul permite tratarea dispozitivului cu soluții ce conțin alcool.