

Obiectele de dezinfectie	Concentrația soluției de lucru %	Timpul de expoziție (min.)	Concentrația soluției de lucru %	Timpul de expoziție (min.)	Concentrația soluției de lucru %	Timpul de expoziție (min.)
Instrumentele chirurgicale	0,25	60	0,5	30	-	-
Endoscoape	0,25	60	0,5	30	-	-
Suprafețele cabinetelor medicale, aparaturii medical	0,25	60	0,5	30	-	-
Suprafețele în încăperi (podea, pereți, mobilier)	0,25	60	0,5	30	-	-
Albituri	0,25	60	0,5	30	-	-
Aparatură tehnico-sanitară	0,25	60	0,5	30	-	-
Vesela de laborator	0,25	60	0,5	30	-	-
Obiectele de deservire a bolnavilor	0,20	60	0,5	30	-	-
Deșeurile medicale	0,25	60	0,5	30	-	-
Suprafețelor și aparaturii saloanelor de frumusețe	0,25	60	0,5	30	-	-
Instrumentarul predestinat pentru saloanele de frumusețe	0,25	60	0,5	30	-	-
Dezinfectia și curățarea transportului, suprafețelor și inventarului predestinate pentru animale și pasări, a barierelor pentru dezinfectie	0,25	60	0,5	30	-	-
Prin metoda pulverizării manual/automat					1.0	Pina la uscare

Soluția de lucru se pregătește în containere de plastic sau sticlă în următoarele proporții:

Concentrația (%)	Cantitatea necesară a preparatului HMI® PROFIK FF CE (ml) și apei (g/ml) pentru pregătirea soluției de lucru									
	1 L		2 L		3 L		5 L		10 L	
	HMI® PROFIK FF CE, ml	Apa g	HMI® PROFIK FF CE, ml	Apa g	HMI® PROFIK FF CE, ml	Apa g	HMI® PROFIK FF CE, ml	Apa g	HMI® PROFIK FF CE, ml	Apa g
0,25	2,5	997,5	5,0	1995	7,5	2992,5	12,5	4987,5	25,0	9975
0,5	5,0	995	10,0	1990	15,0	2985	25,0	4975	50,0	9950
1,0	10,0	990	20,0	1980	30,0	2970	50,0	4950	100,0	9900
2,0	20,0	980	40,0	1960	60,0	2940	100,0	4900	200	9800

Pentru dezinfectia instrumentelor medicale soluția de lucru se păstrează în vase de plastic ermetic închise. Valabilitatea soluției de lucru este de 7 zile. În această perioadă se admite utilizarea repetată a soluției de lucru cu condiția păstrării transparenței sale.

Reacții adverse în caz de contact direct cu preparatul: iritan. Irita pielea și mucoasele.

HMI® PROFIK FF CE nu se clasifică ca un preparat periculos.

Măsuri de acordare a primului ajutor în cazul intoxicației: În contact cu pielea – de îndepărtat haina. Spălarea locului dat cu apă. În contact cu ochii – spălarea cu apă curată timp de 15 minute. La înghițire – de a nu provoca vomă. În calitate de antidot se recomandă lichid proteic (4 albușuri de ouă la ½ litri de apă). Adresarea la medic.

Interval între procedurile de dezinfectie nu este.

După expirarea timpului de expoziție a dezinfectiei precedente se permite folosirea soluției pentru următoarea dezinfectie conform instrucțiunii