

1.0 Denumirea produsului: Pungă pentru sânge din plastic de unică folosință 400 ml.

2.0 Producător și adresă

2.1 Producător: Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd.

2.2 Adresa producătorului: No.18 Xingshan Road, High-tech Industrial Development Zone, Weihai, Shandong Province, China

2.3 Adresa producției: No.10 Junshan Road, High-tech Industrial Development Zone, Weihai, Shandong Province, China

3.0 Reprezentantul și adresa UE

3.1 Reprezentantul UE: Shanghai International Holding Corp.GmbH (Europa)

3.2 Adresă: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg Germania

4.0 Instrucțiunea produsului

4.1 Produsul este un sistem închis format din ac de colectare a sângelui, tub, conector de transfuzie și corpul pungii, steril, netoxic, non-pirogen.

4.2 Acest produs conține soluția de întreținere CPDA-1, care este potrivită pentru colectarea sângelui integral și a transfuziei clinice de sânge sau separarea componentelor sanguine.

4.3 Acest produs este sterilizat cu abur la temperatură înaltă. Perioada de valabilitate este de 2 ani.

4.4 Punga de ambalare a produsului este o pungă de membrană compozită rezistentă la temperaturi ridicate.

5.0 Instrucțiuni

5.1 Instrucțiuni pentru utilizarea pungii de sânge din plastic de unică folosință.

5.1.1 Selectarea locului de puncție pentru recoltarea sângelui

5.1.2 Legați garoul și dezinfectați locul puncției.

5.1.3 Închideți clema de oprire a sângelui sacului de sânge, rotiți și deschideți capacul protector al acului de colectare a sângelui (atenție la atingerea acului la deschidere). După ce dezinfectantul este uscat, puncția venoasă se efectuează la locul puncției și acul de colectare a sângelui este fixat.

5.1.4 Puneți punga de sânge pe cântarul oscilant.

5.1.5 Când se utilizează punga de sânge cu dispozitiv de prelevare de siguranță, canula de separare conectată cu dispozitivul de prelevare este deschisă pentru a face fluxul de sânge în punga de prelevare a dispozitivului de prelevare. După prelevare, clema de oprire a dispozitivului de prelevare este închisă.

5.1.6 Deschideți clema de oprire de pe sacul de sânge și faceți sângele să curgă în sacul de sânge.
5.1.7 Când volumul de colectare a sângelui atinge cerința, slăbiți turnichetul, închideți clema de turnichet pe tubulatura sacului de sânge, scoateți acul de colectare a sângelui și manipulați locul puncției conform cerinței.

5.1.8 Dacă utilizați punga de sânge fără dispozitiv de siguranță, acul folosit pentru puncția venoasă poate fi introdus în tubul de colectare a sângelui sub vid pentru a colecta probe de sânge.

5.1.9 Când se folosește sacul de sânge cu dispozitiv de protecție a acului, acul poate fi acoperit complet de capacul de protecție al acului de-a lungul direcției cateterului după recoltarea sângelui, iar cateterul poate fi fixat la capătul dispozitivului de protecție a acului .

5.1.10 Etanșați termic și separați cateterul de acul de colectare a sângelui și aruncați acul de colectare a sângelui folosit conform cerințelor prescrise.

5.1.11 atunci când utilizați punga de sânge cu un dispozitiv de prelevare, termoizolați și separați dispozitivul de prelevare după terminarea recoltării de sânge, iar tubul de recoltare a sângelui poate fi colectat de la dispozitivul de prelevare în conformitate cu cerințele.

5.1.12 Păstrați pungile de sânge la temperatura prescrisă.

5.1.13 Separarea, transferul și depozitarea componentelor sanguine se efectuează după cum este necesar.

5.2 Atenție

5.2.1 Utilizarea produselor trebuie să fie conformă cu cerințele normelor de funcționare a stațiilor de sânge și cu legile și reglementările relevante aferente, este limitată la instruirea personalului stațiilor de sânge.

5.2.2 Utilizare unică, distrugeți după utilizare.

5.2.3 Interziceți utilizarea, dacă accesoriile cad, se deplasează sau se defectează, soluția anticoagulantă este tulbure sau există un corp străin în ea.

5.2.4 Interziceți utilizarea, dacă produsele sunt sparte, poluate sau prezintă scurgeri de soluție.

5.2.5 Când pungile sunt în stare înghețată, vibrațiile trebuie evitate pentru a preveni fracturarea pungilor sau a tubului, înainte de utilizare, punga interioară lichidă trebuie topită în stare lichidă.

5.3 Atenție specială

5.3.1 Acest produs este valabil 2 ani. Pungile trebuie folosite pentru colectarea sângelui în 35 de zile înainte de expirarea pungilor de sânge.

5.3.2 Când spargeți canula de rupere, ar trebui să rupem dopul pentru a-l transforma într-o stare disociativă pentru a asigura fluxul sanguin lin.

5.3.3 Starea de stocare a sângelui integral va fi de 2 °C -6 °C cu 35 de zile 5.3.4 Produsele sunt recipiente din plastic moale din PVC, nu este necesară ventilație în timpul transfuziei

5.3.5 Acest produs este fabricat din material PVC care conține ftalat de acid formic de (2-etil) ester (DEHP) plastifiat, iar produsul conține DEHP, iar copiilor li se interzice utilizarea acestuia.