

GLOBACID[®]SF med

AGENT DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE PE BAZĂ DE AMINE

concentrat

Globacid[®]SF med este utilizat pentru curățarea și dezinfectarea diferitelor dispozitive medicale rezistente la apă (scaune pentru pacienți, tărgi, rame de pat etc.) și suprafețe (uși, pervazuri, dulapuri, pardoseli, rame de pat, inventar de bucătărie, întrerupătoare etc.). Potrivit pentru curățarea și dezinfectarea inventarului din sălile de operație.

De asemenea, corespunde cerințelor din industria alimentară, servicii de înfrumusețare etc.

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI

- economic
- spectru larg de eficacitate
- fără aldehyde
- proprietăți excelente de curățare
- prietenos cu materialele (metal, plastic, plexiglas)
- miros neutru

UTILIZARE

Se prepară soluția de lucru din apă curată și concentrat conform timpului de expunere necesar (consultați tabelul). Pentru prepararea soluției de lucru și pentru proprietăți mai bune de curățare, folosiți apă rece sau la temperatura camerei.

După expirarea timpului de expunere, toate suprafețele care intră în contact cu alimentele trebuie clătite.

NB! Evitați contactul cu produsele pe bază de aldehyde. Suprafețele tratate anterior cu produse pe bază de aldehyde trebuie curățate de reziduurile de aldehyde.

CONCENTRAȚIILE SOLUȚIILOR DE LUCRU ȘI TIMPI DE APLICARE

Dezinfectare generală, mediu pre-curățat incl. tuberculocid:	0,25%	2,5ml/l	15 min
Cazuri de infecție, mediu murdar, bactericid, fungicid (Candida albicans), tuberculocid, virucid complet:	1,25%	12,5ml/l	15 min
Fungicid (C. albicans, A. brasiliensis), condiții murdare:	2,5%	25ml/l	5 min
Bactericid, fungicid (Candida albicans), toate virusurile încapsulate, adenovirus:	0,25%	2,5ml/l	5 min
Eficacitate sporicidă (Clostridium difficile), micobactericid (M. avium):	2,5%	25ml/l	15 min

SPECTRUL MICROBIOLOGIC

Produsul are eficacitate bactericidă, micobactericidă, fungicidă, virucidă împotriva virusurilor încapsulate (incl. HBV, HIV, HCV, coronavirus, gripă, virus vaccinia) și eficacitate virucidă împotriva virusurilor neîncapsulate (incl. rota-, noro-, adeno-, polio- și polyomavirus) și eficacitate sporicidă (Clostridium difficile).

STANDARDE DE CONFORMITATE

EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 16615, EN 17126, EN 17387, DVV/RKI

DEPOZITARE

Consultați data de expirare de pe ambalaj.

A se păstra la temperaturi de 5–25°C, ferit de lumina directă a soarelui.

Evitați înghețarea pentru a asigura calitatea produsului.

UTILIZARE / ELIMINARE

Soluția de lucru este ecologic sigură, toți ingredientele active sunt biodegradabile în apa uzată.

Materialele plastice de ambalaj sunt reciclabile. Pentru colectare, ambalajul din plastic este adecvat atunci când este clătit, sticla și capacul separate. Cutia de ambalaj se sortează pentru colectarea cartonului.

Compatibilitatea ambalajului și a produsului este asigurată din punct de vedere al calității.

INFORMAȚII DE SECURITATE

Consultați fișa cu date de securitate a produsului pentru informații suplimentare.

COMPOZIȚIE

100 g de produs conține ingrediente active:

clorură de didecildimetilamoniu 6 g

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină 5,5 g

pH 10 - 11

Produsul poartă marcajul CE conform Directivei privind dispozitivele medicale 93/42/EEC



AMBALAJ : Sticlă de dozare 1L ; Bidon 5L



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com



Utilizați dezinfectanții în siguranță. Citiți
întotdeauna eticheta și informațiile despre produs
înainte de utilizare.

11/2023