

A7+ TouchCare®
Sistemul de Gestionare a
Insulinei

Manual de Utilizare

©2021, Medtrum Technologies Inc. Toate drepturile rezervate.



Humalog® este o marcă înregistrată a Eli Lilly and Company.

NovoRapid® este o marcă înregistrată a Novo Nordisk A/S.

Apidra® este o marcă înregistrată a Sanofi S.A.



Medtrum Technologies Inc.
7F, Building 8, No. 200, Niudun
Road

Shanghai 201203, China

Tel: +86-21-50274781

Fax: +86-21-50274779

www.medtrum.com



Medtrum B.V.
Nijverheidsweg 17
5683 CJ Best
Olanda
Tel: +31 (0) 499745037

CE 0197

Acest produs respectă Directiva
93/42/EEC (MDD) și Directiva
2014/53/EU (RED).

REF SY-018
Versiunea: 1.09
Data publicării:
27 mai 2021

UG881116WW
348431

1 Introducere	Error! Bookmark not defined.
1.1 Înainte de a începe.....	9
1.2 Indicații	9
1.3 Contraindicații	10
1.4 Siguranța Utilizatorului	10
1.4.1 Avertizări și Măsurile de Precauție	10
1.4.2 Consumabile	14
1.4.3 Comunicarea prin undă de Frecvență Radio (FR)	15
1.4.4 Trusă de Urgență	15
1.4.5 Apă	16
1.4.6 Depozitare.....	16
1.4.7 Măsurile de Precauție FCC	17
1.4.8 Măsurile de Precauție IC	18
1.5 Warranty Information	18
2 Sistemul dumneavoastră A7+ TouchCare® ...	Error! Bookmark not defined.
2.1 Managerul Personal de Diabet (PDM).....	24
2.2 Pompa cu Plasture	24
2.3 Sistemul de Detectare a Glucozei (Opțional)	25
2.4 Aplicația Mobilă.....	26
3 Cum se utilizează PDM	Error! Bookmark not defined.
3.1 Bazele PDM-ului	28
3.1.1 Pornirea/Oprirea PDM-ului.....	28
3.1.2 Încărcarea PDM-ului	28
3.1.3 Modul de Putere	30
3.1.4 Bara de Derulare	31
3.2 Setarea PDM-ului.....	31
3.2.1 Alegerea limbii și țării/regiunii.....	31
3.2.2 Ora și Data	32

Cuprins

3.2.3 Calculatorul Bolusului.....	33
3.3 Fereastră Principală.....	34
3.3.1 Pictograme de pe Bara de Status	34
3.3.1.1 Pictograma Bateriei	34
3.3.1.2 Pictograma Orei.....	35
3.3.1.3 Pictograma Audio	35
3.3.1.4 Pictograma Semnalului RF a Pompei	36
3.3.1.5 Pictogramele de Alertă	36
3.3.2 Statusul Pompei	36
3.3.3 Statusul Glicemic.....	38
3.3.4 Pictograma EasyLoop	42
3.3.5 Graficul Senzorului	43
3.3.6 Statusul Alarimei	44
3.4 Fereastră de Blocare.....	45
3.5 Fereastră Notificări.....	46
3.6 Fereastră Scurtături.....	47
3.7 Fereastră Status	47
3.8 Meniuri	49
3.8.1 Bolus.....	49
3.8.2 Rata Bazală	49
3.8.3 Suspendare.....	49
3.8.4 Plasture	50
3.8.5 Senzor.....	50
3.8.6 Istoric.....	50
3.8.7 Evenimente	50
3.8.8 EasyLoop	50
3.8.9 Setări	50
3.9 Evenimente	50
3.9.1 Măsurătoare BG	51
3.9.2 Injectarea Insulinei	52

3.9.3 Informații cu privire la Carbohidrați	52
3.9.4 Informații cu privire la Exercițiul Fizic	53
3.9.5 Informații de sănătate	54
3.9.6 Alte evenimente.....	54
3.10 Istoric	55
3.10.1 Istoricul Pompei	56
3.10.2 Istoricul Senzorului.....	56
3.10.3 Istoricul Alertei PDM	56
3.10.4 Istoricul Evenimentelor.....	57
3.10.5 Istoricul BG	57
3.10.6 Istoric rezumativ	58
3.10.6.1 Istoric rezumativ: Istoricul Insulinei	59
3.10.6.2 Istoric rezumativ: Istoricul Bolusului	59
3.10.6.3 Istoric rezumativ: Istoricul BG	59
3.10.6.4 Istoric rezumativ: Istoricul Senzorului	60
3.10.6.5 Istoric rezumativ: Istoricul Suspendării Reduse	60
3.11 Setări.....	60
3.11.1 Sistemul CGM (Opțional)	60
3.11.2 Pompa de Insulină.....	60
3.11.3 Setări Generale	61
3.11.3.1 Limbă	61
3.11.3.2 Ora/Data.....	61
3.11.3.3 Opțiuni Audio	62
3.11.3.4 Fereastră	64
3.11.3.5 Atenționare de Încredere	64
3.11.3.6 Setările Utilizatorului.....	65
3.11.3.7 Blocare cu Parolă.....	69
3.11.4 Atenționări	71
3.11.4.1 Atenționare Personală.....	72
3.11.4.2 Atenționare Bolus.....	73

Cuprins

3.11.4.3 Atenționare BG	73
3.11.4.4 Atenționare Cal.....	73
3.11.5 Numele Utilizatorului	74
3.11.6 Telefon	75
3.11.7 Diagnosticări.....	76
3.11.8 Despre Noi.....	78
3.12 Soluționarea Problemelor	78
4 Modul de utilizare a Pompei cu Plasture	Error! Bookmark not defined.
4.1 Schimbarea Plasturelui cu Rezervor	82
4.1.1 Înainte de Schimbarea Plasturelui cu Rezervor	82
4.1.1.1 Dezactivarea Plasturelui cu Rezervor Actual	83
4.1.1.2 Înlăturarea Plasturelui cu Rezervor Actual	84
4.1.1.3 Introducerea SN-ului Bazei Pompei.....	85
4.1.2 Activarea unui Nou Plasture cu Rezervor.....	89
4.1.3 Conectarea Bazei Pompei la un Nou Plasture cu Rezervor	90
4.1.4 Umplerea Noului Plasture cu Rezervor.....	91
4.1.5 Amorsarea Pompei.....	94
4.1.6 Alegerea și Pregătirea Locului de Injectare.....	96
4.1.7 Atașarea Pompei cu Plasture	97
4.1.8 Inițierea Administrării Insulinei.....	99
4.2 Bolus.....	101
4.2.1 Bolus Normal	101
4.2.2 Bolus Maxim.....	106
4.3 Rată bazală	107
4.3.1 Setările dumneavoastră ale Ratei Bazale	107
4.3.2 Editarea Modelului dumneavoastră Bazal Standard.....	108
4.3.3 Verificarea Ratei Bazale actuale.....	110
4.3.4 Revizuirea Modelelor dumneavoastră Bazale.....	111
4.3.5 Ștergerea unui segment de timp al Modelului Bazal	112

4.3.6 Modificarea Orei Modelului Bazal	113
4.3.7 Rată Bazală Maximă	115
4.4 Suspendare și Reluare	116
4.4.1 Suspendarea Administrării Insulinei	116
4.4.2 Reluarea Administrării Insulinei	119
4.5 Setările Pompei de Insulină	120
4.5.1 Adăugarea/Modificarea SN-ul Bazei Pompei	120
4.5.2 Setarea Bolus	121
4.5.3 Setarea Ratei Bazale	122
4.5.4 Alerte Pompei	123
5 Caracteristicile Avansate ale Pompei	Error! Bookmark not defined.
5.1 Calculator Bolus	127
5.1.1 Cum funcționează Calculatorul Bolus	127
5.1.2 Cum se setează Calculatorul Bolus	127
5.1.3 Bolus Normal folosind Calculatorul Bolus	134
5.2 Bolus Combinat/Extins	137
5.2.1 Bolus Extins/Prestabilit fără Calculator Bolus	138
5.2.2 C Bolus Extins/Prestabilit folosind un Calculator Bolus	141
5.3 Bolus Prestabilit	144
5.3.1 Setarea Bolusului Prestabilit	145
5.3.2 Administrarea unui Bolus Prestabilit	146
5.4 Alegerea unui Model Bazal	147
5.5 Rată Bazală Temporară	147
5.5.1 Activarea unei Rate Bazale Temporară	147
5.5.2 Anularea unei Rate Bazale Temporară	148
5.6 Rată Bazală Temporară Prestabilită	149
5.6.1 Setarea Ratei Bazale Temporară Prestabilite	149
5.6.2 Activarea unei Ratei Bazale Temporară Prestabilite	150
5.7 Atenționare	151

Cuprins

5.7.1 Atenționare Bolus	151
5.7.2 Atenționare BG	152
5.8 Istoricul Pompei	154
5.8.1 Istoricul Pompei	154
5.8.1.1 Istoricul de Administrare	154
5.8.1.2 Istoricul Alertei	158
5.8.2 Scurt Istoric al Pompei	158
5.8.2.1 Scurt istoric: Istoricul Insulinei	158
5.8.2.2 Scurt istoric: Istoricul Bolusului	159
5.9 Soluționarea problemelor în ceea ce privește Pompa	160
6 Utilizarea unui sistem CGM (Opțional)	Error! Bookmark not defined.
6.1 Alerte de Glucoză	164
6.1.1 Limite Superioare și Inferioare	164
6.1.2 Alerte Predictive	167
6.1.3 Alerte de Rată	168
6.1.4 Repetare	171
6.1.5 Senzor Pierdut	172
6.2 Modificarea Senzorului	172
6.2.1 Deconectarea Senzorului de la PDM-ul dumneavoastră	172
6.2.2 Înlăturarea Senzorului Actual și Deconectarea Transmițătorului	173
6.2.3 Încărcarea Transmițătorului	174
6.2.4 Adăugarea unui SN la Transmițător	174
6.2.5 Introducerea unui Nou Senzor	179
6.2.5.1 Alegerea unui Loc de Inserție	179
6.2.5.2 Pregătirea Locului de Inserție	180
6.2.5.3 Desfacerea Senzorului Glicemic	180
6.2.5.4 Înlăturarea Învelișului Protector de pe Suportul de Montare a Senzorului	181

6.2.5.5 Localizarea Suportului de Montare a Senzorului	181
6.2.5.6 Înlăturarea Dispozitivului de Siguranță	182
6.2.5.7 Inserarea Senzorului.....	182
6.2.5.8 Înlăturarea Inserției.....	182
6.2.5.9 Verificarea Suportului de Montare a Senzorului	183
6.2.5.10 Eliminarea în siguranță a dispozitivului de inserție a Senzorului	183
6.2.6 Atașarea Transmițătorului dumneavoastră	184
6.2.7 Conectarea Senzorului la PDM-ul dumneavoastră	185
6.3 Calibrarea Senzorului Dumneavoastră	187
6.3.1 Introducerea contorului dumneavoastră BG	188
6.3.2 Setarea Repetării Calibrării	189
6.3.3 Memento Calibrare.....	189
6.4 Setările Sistemului CGM	190
6.4.1 Carasteristica CGM activă/inactivă	190
6.4.2 Setarea unui SN al Transmițătorului	191
6.4.3 Interval Grafic	192
6.4.4 Repetarea apelului.....	192
6.4.5 Alertă silențioasă	192
6.4.6 Senzor Expirat	193
6.5 Istoricul Senzorului	194
6.5.1 Istoricul Senzorului.....	194
6.5.1.1 Istoricul Datelor	195
6.5.1.2 Istoricul Calibrării	197
6.5.1.3 Istoricul Alertelor	197
6.5.2 Istoricul pe scurt: Istoricul Senzorului	198
6.6 Remedierea problemelor cu privire la CGM	199
7 Modul de Utilizare a (P)LGS (Opțional).....	Error! Bookmark not defined.
7.1 Setările (P)LGS	203

Cuprins

7.1.1 Suspendare Redusă	204
7.1.2 Suspendare Predictivă Redusă	206
7.2 Istoric Rezumativ: Istoricul Suspendării Reduse	208
7.3 Soluționarea problemelor de Suspendare Redusă	209
8 Sistem de Siguranță și Alarme/Alerte	Error! Bookmark not defined.
8.1 Sistem de Siguranță	211
8.2 Verificări de Siguranță	211
8.3 Alarme	211
8.3.1 Alarme PDM	214
8.3.2 Alarme Pompă	216
8.4 Alerte	218
8.4.1 Alerte PDM	220
8.4.2 Alerte Pompă	220
8.4.3 Alerte CGM	222
8.5 Memento	228
8.5.1 Memento PDM	229
8.5.2 Memento Pompă	229
8.5.3 Memento CGM	229
9 Declarația Producătorului	Error! Bookmark not defined.
9.1 Emisii electromagnetice	232
9.2 Imunitate electromagnetică	232
10 Anexa I: Simboluri și Pictograme	Error! Bookmark not defined.
10.1 Simbolurile Etichetei Produsului	241
10.2 Pictograme PDM	242
11 Anexa II: Informații Tehnice	Error! Bookmark not defined.
11.1 Specificațiile PDM	245
11.2 Specificațiile Pompei Plasturelui	245
11.3 Specificațiile Transmițătorului	247

11.4 Specificațiile Senzorului Glicemic.....	247
11.5 Precizia Sistemului CGM.....	248
12 Glosar	Error! Bookmark not defined.

1.1 Înainte de a începe

Verificați cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală (echipa de diabetologie) care sunt necesități individuale de pregătire. NU încercați să utilizați Sistemul A7+ TouchCare® înainte de a fi instruit în mod corespunzător.

Ca parte a instruirii dumneavoastră, furnizorul dumneavoastră de asistență medicală va lucra cu dumneavoastră pentru a stabili instrucțiunile de gestionare a diabetului și setările care se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră. Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală vă poate oferi setările inițiale ale Pompei de Insulină și ale sistemului dumneavoastră CGM. După o practică și o instruire corespunzătoare, vi se va părea ușor să introduceți și să modificați setările sistemului.

Pompa A7+ TouchCare® este proiectat pentru a folosi insulină U-100. Următoarele tipuri analoge de insulină au fost testate și s-a constatat că sunt sigure pentru a fi folosite cu Pompa A7+ TouchCare®: Humalog®, NovoRapid®, și Apidra®. Așadar, înainte de utilizarea unei insuline diferite cu această Pompă, verificați eticheta insulinei pentru a vă asigura că poate fi folosită cu această Pompă a dumneavoastră. Utilizarea unei insuline cu o concentrație mai mică sau mai are poate atrage după sine leziuni grave sau chiar decesul. Pompa dumneavoastră nu este creată pentru a administra nicio altă substanță.

Sistemul de Monitorizare Continuă a Glucozei A7+ TouchCare® (CGM) este alcătuit dintr-un Senzor de Glucoză și un Transmițător. Senzorul de Glucoză măsoară nivelul glucozei din lichidul interstițial. Transmițătorul transmite fără ajutorul unui cablu informațiile dumneavoastră în timp real de la Senzorul de glucoză la Managerul dumneavoastră Personal de Diabet (PDM).

Nu toate dispozitivele sau accesoriile sunt disponibile în toate țările în care sistemul A7+ TouchCare® este aprobat. Pentru a comanda consumabilele, contactați reprezentanții dumneavoastră locali.

1.2 Indicații

Sistemul A7+ TouchCare® este indicat pentru a fi folosit de perioadele (cu vârsta începând de la 2 ani) cu diabet. Sistemul este creat pentru a fi folosit de un singur pacient și trebuie folosit doar sub îndrumarea unui furnizor de asistență medicală.

Pompa cu Plasture este indicată pentru administrarea continuă subcutanată a insulinei, conform cotelor setate și variabile, pentru gestionarea diabetului zaharat în cazul persoanelor care necesită insulină.

Sistemul CGM este indicat pentru monitorizarea continuă a nivelurilor de glucoză din lichidul interstițial și detectarea unor eventuale episoade hipoglicemice sau hiperglicemice. Interpretarea rezultatelor Sistemului CGM trebuie să se bazeze pe tendințele glicemice și pe câteva citire consecutive.

1.3 Contraindicații

Sistemul A7+ TouchCare® nu este recomandat persoanelor care nu sunt dispuse sau nu sunt capabile:

- Să păstreze legătura cu furnizorul lor de asistență medicală.
- Să își testeze nivelurile de glucoză din sânge așa cum le recomandă furnizorul lor de asistență medicală.
- Să mențină abilitățile suficiente de autoîngrijire în cazul diabetului.
- Să recunoască și să răspundă la alerte și alarme. (Vederea și/sau auzul suficiente sunt necesare).

1.4 Siguranța Utilizatorului

1.4.1 Avertizări și Măsuri de Precauție

Afirmații Generale

Asigurați-vă că ați citit și v-ați familiarizat cu Manualul de Utilizare înainte de a folosi Sistemul A7+ TouchCare®. Nerespectarea instrucțiunilor poate atrage după sine durere sau leziune și poate afecta de asemenea performanța sistemului. Dacă nu înțelegeți ceva sau aveți întrebări, întrebați-vă furnizorul de asistență medicală, sunați la serviciul de relații cu clienții sau contactați distribuitorul dumneavoastră local Medtrum.

Sistemul A7+ TouchCare® System are diferite setări și caracteristici. Cel mai bine este să discutați cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală pentru a stabili care sunt setările și caracteristicile corespunzătoare pentru dumneavoastră. Anumite caracteristici necesită cunoștințe vaste de pompare a insulinei și competențe avansate de îngrijire a propriei persoane. NU utilizați sistemul A7+ TouchCare® până în momentul în care aveți informații specifice

Introducere

cu privire la planul dumneavoastră de tratament și înainte de a fi fost instruit de către furnizorul dumneavoastră de asistență medicală sau de către distribuitorul local Medtrum în mod specific cu privire la fiecare caracteristică.

Măsurile de precauție Generale

NU aplicați produse de îngrijire a pielii pe sistemul A7+ TouchCare®, acest lucru poate avea ca rezultat deteriorarea suprafeței din plastic a produselor. Curățați pielea de produse de îngrijire precum cremă de protecție solară utilizând un material textil curat. Dacă găsiți vreo fisură în oricare parte a sistemului A7+ TouchCare®, contactați serviciul de relații cu clienții.

Sistemul A7+ TouchCare® include dispozitive medicale active. Atunci când eliminați orice dispozitiv al Sistemului A7+ TouchCare®, respectați regulamentele locale de eliminare a deșeurilor.

Vă recomandăm să aveți pe cineva în apropiere (familie, prieteni etc.) care să înțeleagă diabetul și Sistemul A7+ TouchCare® astfel încât, în caz de urgență, să vă poată ajuta. Asigurați-vă că aceștia s-au familiarizat cu informațiile oferite de furnizorul dumneavoastră de asistență medicală.

Avertizări Generale

Nu este permisă nicio modificare a sistemului.

NU utilizați sistemul A7+ TouchCare® dacă aveți pielea sensibilă sau dacă sunteți alergic la adezivii acrilici.

NU utilizați niciun alt accesoriu în afară de cele specificate în prezentul Manual de Utilizare care vă poate deteriora definitiv sistemul și va anula garanția acestuia.

NU permiteți copiilor mici să țină Plasturele cu Rezervor, Baza Pompei, Transmițătorul sau Senzorul fără supravegherea unui adult. Plasturele cu Rezervor, Baza Pompei, Transmițătorul și Senzorul conțin piese mici și pot reprezenta un pericol de sufocare.

NU utilizați sistemul dumneavoastră A7+ TouchCare® în prezența substanțelor anestezice inflamabile sau a gazelor explozibile.

Măsurile de Precauție cu privire la Pompa cu Plasture

Contactați furnizorul dumneavoastră de asistență medicală atunci când faceți modificări în ceea ce privește stilul de viață, precum începerea/încheierea

programului dumneavoastră de exerciții sau pierdere/luarea semnificativă în greutate întrucât acest lucru vă poate afecta modul în care organismul dumneavoastră utilizează insulina.

Avertizări cu privire la Pompa cu Plasture

În cazul în care Sistemul A7+ TouchCare® nu poate să administreze în mod corespunzător insulina trebuie să fiți pregătit să vă administrați singur o injecție cu insulină. Știind să faceți acest lucru vă va ajuta să evitați riscul de cetoacidoză diabetică (DKA) sau nivelul foarte ridicat de glucoză în sânge.

NU opriți folosirea Pompei dumneavoastră dacă sunteți bolnav, exceptând situația în care vi se comunică să faceți acest lucru de către furnizorul dumneavoastră de asistență medicală. Chiar și atunci când sunteți bolnav, organismul dumneavoastră necesită în continuare insulină.

Dacă se constată o defecțiune sau deteriorare a Bazei Pompei dumneavoastră în timpul funcționării, vă rugăm să contactați serviciul de relații cu clienții sau distribuitorul dumneavoastră local Medtrum pentru înlocuire.

Măsurile de precauție cu privire la Sistemul CGM

Senzorul poate presupune nevoie speciale în ceea ce privește starea dumneavoastră de sănătate sau medicația dumneavoastră. Vă rugăm să discutați despre acestea și despre medicații cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală înainte de a folosi Senzorul.

Dacă se constată o defecțiune sau deteriorare a Transmițătorului dumneavoastră în timpul funcționării, vă rugăm să contactați serviciul de relații cu clienții sau distribuitorul dumneavoastră local Medtrum pentru înlocuire.

Avertizări cu privire la Sistemul CGM

NU ignorați simptomele nivelului ridicat sau scăzut al glicemiei. În cazul în care considerați că citirile Senzorului dumneavoastră de glucoză sunt inexacte în comparație cu modul în care vă simțiți, măsurați manual nivelul glucozei din sânge cu un glucometru. Dacă problema continuă, aruncați Senzorul vechi și introduceți unul nou.

Dacă suspectați în timpul utilizării că Senzorul dumneavoastră este defect, NU încercați să îl înlăturați de unul singur. Contactați furnizorul dumneavoastră de asistență medicală pentru a vă acorda asistență în înlăturarea Senzorului.

Măsurile de precauții cu privire la Managerul Personal de Diabet (PDM)

PDM dumneavoastră este caracterizat de un ecran tactil color. Vă rugăm să îl folosiți cu degetele uscate.

Înainte de a pune PDM dumneavoastră în buzunar sau în geantă, amintiți-vă să apăsați butonul de pornire pentru a pune PDM în modul de veghe, astfel încât să evitați utilizarea necorespunzătoare rezultată în urma unor mișcări sau atingeri accidentale. Apăsați butonul de pornire din nou pentru a aprinde ecranul.

Verificați-vă PDM ocazional pentru a vă asigura că emite sunete care sunt ușor de detectat și că vibrațiile funcționează în mod corect.

Dacă restituiți PDM dumneavoastră pentru service, un PDM de înlocuire vă va fi trimis. NU folosiți PDM de înlocuire până când acesta nu este programat pentru a fi adecvat nevoilor dumneavoastră specifice.

Dacă scăpați PDM dumneavoastră sau dacă a fost lovit de o suprafață dură, verificați dacă fereastră ecranului și ecranul tactil funcționează în mod corespunzător, dacă PDM poate fi încărcat normal. Sunați serviciul de relații cu clienții sau distribuitorul dumneavoastră local Medtrum în cazul în care constatați sau suspectați că PDM dumneavoastră a fost deteriorat. PDM dumneavoastră este creat pentru a fi încărcat cu un încărcător compatibil. Folosirea unui alt încărcător decât cel compatibil ar putea deteriora permanent PDM dumneavoastră și anulează garanția acestuia.

Intervalul de Temperatură de Funcționare

Sistemul dumneavoastră A7+ TouchCare® este creat pentru a funcționa la temperaturi cuprinse între 5°C (41°F) și 40°C (104°F). NU expuneți sistemul la temperaturi în afara acestui interval. NU expuneți sistemul direct la razele de soare pentru o perioadă lungă de timp.

Curățare

NU folosiți produse de curățenie, chimicale, solvenți, înălbitor, bureți de sârmă sau instrumente ascuțite pentru a vă curăța PDM, Baza Pompei sau Transmițătorul. Nu puteți niciodată PDM, Baza Pompei sau Transmițătorul în mașina de spălat vase și nu folosiți apă fierbinte pentru a le curăța.

NU folosiți uscătorul de păr, cuptorul cu microunde sau cuptorul convențional pentru a vă usca PDM, Baza Pompei sau Transmițătorul. Folosiți un prosop moale.

NU curățați nicio parte a sistemului în timpul folosirii acestuia.

Radiografii, scanări RMN și CT

Sistemul A7+ TouchCare® poate fi afectat de radiațiile puternice sau de câmpurile magnetice. Dacă urmează să efectuați o radiografie, un RMN sau CT sau orice alt tip de expunere la radiații, înlăturați Pompa cu Plasture și Senzorul de Detectare a Glucozei și puneți-le în afara zonei de tratament cu PDM dumneavoastră. Schimbați Plasturele cu Rezervor și Senzorul după ce testarea sau procedura este finalizată.

Sistemul A7+ TouchCare® este creat pentru a tolera câmpuri electromagnetice și electrostatice uzuale, inclusiv sistemele de securitate aeroportuare și telefoanele mobile.

1.4.2 Consumabile

- **Plasture cu Rezervor** — Baza Pompei (JN-022) poate fi folosită doar cu un Plasture cu Rezervor Medtrum de 200 de Unități (MD-JN-011). Schimbați Rezervorul dumneavoastră cu Plasture la fiecare 2-3 zile sau conform indicațiilor furnizorului dumneavoastră de asistență medicală.
- **Senzor Glicemic** —Transmițătorul (MD1026) este folosit cu Senzorul Glicemic Medtrum (MD3026). Schimbați Senzorul dumneavoastră Glicemic MD3026 la fiecare paisprezece zile.

Atenție: Pentru protecția dumneavoastră, Baza Pompei a fost supusă unei testări extensive pentru a confirma funcționarea corespunzătoare a acesteia atunci când este folosită cu consumabilele fabricate sau distribuite de Medtrum. Vă recomandăm să utilizați Plasturii cu Rezervor și Senzorii Glicemic Medtrum întrucât nu punem garanta funcționarea corespunzătoare a sistemului în cazul în care acesta este folosit cu consumabile oferite de terți și, așadar, nu suntem responsabili pentru daunele sau funcționarea incorectă a sistemului care poate rezulta în urma unei astfel de utilizări.

1.4.3 Comunicarea prin Unde de Frecvență Radio (RF)

Notă: Sistemul A7+ TouchCare® poate genera, utiliza și radia energie cu frecvență radio și poate cauza interferență dăunătoare pentru comunicarea

prin unde radio. Nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație. În cazul în care Sistemul A7+ TouchCare® cauzează interferențe negative recepției undelor radio sau de televiziune, sunteți încurajat să încercați să corectați interferența prin intermediul uneia din următoarele măsuri:

- Mutați sau relocați Sistemul A7+ TouchCare®.
- Creșteți distanța dintre Sistemul A7+ TouchCare® și celălalt dispozitiv care emite/primește interferența.

Dispozitivele electronice de consum uzual care transmit pe aceeași bandă de frecvență folosită de Sistemul A7+ TouchCare® pot afecta comunicarea dintre PDM și Pompa dumneavoastră cu Plasture sau Transmițător. Cu toate acestea, această interferență nu determină transmiterea unor date incorecte și nu vă prejudiciază dispozitivul în niciun fel.

În baza modulației GFSK, sistemul comunică la frecvențe cuprinse între 2402 și 2480 MHz cu un nivel de putere de 0 dBm. Comunicarea prin unde RF dintre Pompa dumneavoastră cu Plasture și PDM funcționează până la o distanță de 4 metri (13 feet). Comunicarea prin unde RF dintre Transmițătorul dumneavoastră și PDM funcționează până la o distanță de 10 metri (33 feet).

1.4.4 Trusa de Urgență

Păstrați o trusă de urgență cu dumneavoastră în permanență pentru a vă asigura că aveți proviziile necesare. Informați un membru al familiei, un coleg de serviciu și/sau prieten cu privire la locul în care țineți trusa de urgență.

Această trusă trebuie să includă, dar fără a se limita la:

- Tablete sau gel de glucoză cu acționare rapidă
- Consumabile pentru monitorizarea BG
- Consumabile pentru testarea cetonei din urină
- Seringa de Insulină
- Insulină U-100 cu acționare rapidă
- Plasturi cu Rezervor Extra Medtrum 2.0 mL
- Baterie Suplimentară
- Instrucțiunile de la furnizorul dumneavoastră de asistență medicală cu privire la cantitatea de insulină ce trebuie injectată dacă administrarea pompei este întreruptă
- Șervețele cu alcool

- Trusă de urgență Glucagon
- Numere de telefon de contact de urgență

1.4.5 Apă

Atât Pompa cu Plasture, cât și Senzorul dumneavoastră (inclusiv Transmițătorul instalat) sunt rezistente la apă la o adâncime de 2,5 metri (8 feet) timp de până la 60 de minute (IPX8). După expunerea la apă, clătiți dispozitivele cu apă curată și uscați-le cu un prosop.

Atenție: NU expuneți Pompa cu Plasture sau Senzorul dumneavoastră (inclusiv Transmițătorul instalat) la apă cu o adâncime mai mare de 2,5 metri (8 feet) sau pentru o perioadă mai mare de 60 de minute. Verificați des pentru a vă asigura că dispozitivele sunt atașate în siguranță și la locul lor.

Atenție: PDM este protejat împotriva introducerii degetelor și nu poate fi deteriorată sau să devină nesigur în timpul unui test specific la care este expus în momentul introducerii în apă pe verticală (IP22).

Atenție: Pompa cu Plasture poate să nu administreze insulina în mod normal atunci când este în apă. Transmițătorul poate să nu transmită datele în mod normal atunci când este în apă.

Notă: Apa fierbinte poate diminua durata de viață a Senzorului.

1.4.6 Depozitare

Depozitați Baza Pompei și Plasturele cu Rezervor la temperaturi cuprinse între 10°C (14°F) și 55°C (131°F) și la niveluri de umiditate cuprinse între 20% și 90%, umiditate relativă. NU depozitați Baza Pompei și Plasturele cu Rezervor direct în lumina soarelui, la temperaturi extreme sau în zone cu umiditate foarte ridicată.

Depozitați Senzorul la temperaturi cuprinse între 2°C (36°F) și 30°C (86°F), și la niveluri de umiditate cuprinse între 20% și 90%, umiditate relativă pe durata prelungită de depozitare a Senzorului. Pentru temperaturi de peste 30°C (86°F), Senzorul va necesita depozitare în locuri reci la temperaturi care să nu fie sub 2°C (36°F). Puteți să depozitați Senzorul la frigider dacă acesta are temperatura cuprinsă în acest interval de temperatură. Senzorul nu trebuie să fie depozitat în congelator. Așteptați ca Senzorul să se încălzească la

temperatura camerei înainte de a-l folosi pentru a preveni condensul. Depozitarea Senzorului în mod inadecvat poate determina citiri imprecise ale Senzorului glicemic și puteți rata o valoare scăzută sau ridicată a glucozei din sânge.

Depozitați Transmițătorul la temperaturi cuprinse între 10°C (14°F) și 55°C (131°F) și la niveluri de umiditate cuprinse între 20% și 90%, umiditate relativă. Păstrați cablul de încărcare USB și Transmițătorul în locuri separate atunci când le depozitați.

Depozitați Managerul Personal de Diabet (PDM) la temperaturi cuprinse între 10°C (14°F) și 55°C (131°F) și la niveluri de umiditate cuprinse între 20% și 90%, umiditate relativă.

1.4.7 Măsurile de precauție FCC

Cerințe de Etichetare

Acest dispozitiv este conform cu partea 15 a Regulilor FCC. Funcționarea este condiționată de următoarele două aspecte: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferență negativă și (2) acest dispozitiv poate accepta orice interferență primită, inclusiv interferența care poate cauza o funcționare nedorită.

Informații pentru utilizator

Orice schimbare sau modificare ce nu este aprobată în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate poate anula autorizația utilizatorului de a folosi echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că este conform cu limitele pentru un dispozitiv digital de Clasă B, în conformitate cu partea 15 a Regulilor FCC. Aceste limite sunt create pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor negative de la o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și folosit conform instrucțiunilor, acest lucru poate cauza interferențe negative în ceea ce privește comunicațiile prin undă radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu poate apărea la o anumită instalație. În cazul în care acest echipament cauzează interferențe negative la recepția undelor radio sau de televiziune, lucru care poate fi determinat de pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența cu ajutorul uneia sau mai multor din următoarele măsuri:

- Reorientați sau relocați antena de primire.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză cu un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

Atenționare RF pentru dispozitivul portabil

Dispozitivul a fost evaluat pentru a întruni cerința generală de expunere la RF. Dispozitivul poate fi folosit portabil în condiții de expunere fără restricții.

1.4.8 Măsuri de Precauție IC

Acest dispozitiv respectă standardele RSS de scutire a licenței Industry Canada. Funcționarea este condiționată de următoarele două aspecte:

(1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe, și (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferența care poate cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

1.5 Informații cu privire la Garanție

Managerul Personal de Diabet (PDM)

Medtrum Technologies Inc. ("Medtrum") oferă o garanție pentru PDM său împotriva defectelor legate de materiale și manoperă pe o perioadă de 4 ani de la data inițială de livrare a PDM către cumpărătorul inițial („Perioada de Garanție”). În timpul Perioadei de Garanție, Medtrum, la discreția sa, fie va repara, fie va înlocui (cu un nou sau recertificat PDM, la alegerea Medtrum) orice PDM defect, cu condițiile și exceptând situațiile menționate în prezentul document. Această Garanție se aplică doar dispozitivelor noi și, în cazul în care PDM este reparat sau înlocuit, perioada de garanție nu va fi prelungită.

Garanția este valabilă doar dacă PDM este folosit în conformitate cu instrucțiunile societății Medtrum, și nu se aplică:

- În cazul în care dauna rezultă din modificările sau schimbările efectuate PDM-ului de către utilizator sau terți după data de fabricare;
- În cazul în care dauna rezultă din service-ul sau reparațiile efectuate unei părți a PDM de o altă persoană sau entitate diferită de Medtrum;
- Dacă un încărcător necorespunzător este folosit cu PDM;

Introducere

- În cazul în care dauna rezultă dintr-un eveniment de *Forță Majoră* sau orice alt eveniment care nu poate fi controlat de Medtrum; sau
- În cazul în care dauna rezultă din neglijența sau folosirea necorespunzătoare, inclusiv, dar fără a se limita la depozitarea necorespunzătoare sau abuzul fizic precum scăparea sau altele asemenea.

Această garanție va fi personală cumpărătorului inițial. Vânzarea, închirierea sau alt transfer sau utilizare a PDM prevăzut în această garanție pentru sau de către un alt utilizator decât cumpărătorul inițial va determina anularea imediată a prezentei garanții. Această garanție se aplică doar PDM și nu se aplică altor produse sau accesorii.

SOLUȚIILE FURNIZATE PENTRU ACEASTĂ GARANȚIE SUNT SOLUȚIILE EXCLUSIVE DISPONIBILE PENTRU CERERILE DE GARANȚIE. NICI MEDTRUM, NICI FURNIZORII SAU DISTRIBUITORII ACESTEIA NU VOR FI RESPONSABIL PENTRU DAUNELE ACCIDENTALE, INDIRECTE SAU SPECIALE DE ORICE NATURĂ SAU TIP CAUZATE DE SAU CE REZULTĂ DINTR-UN DEFECT AL PRODUSULUI. TOATE CELELALTE GARANȚII, EXPRIMATE SAU IMPLICITE, SUNT EXCLUSE, INCLUSIV GARANȚIILE DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP.

Baza Pompei

Medtrum Technologies Inc. ("Medtrum") oferă o garanție pentru Baza Pompei sale împotriva defectelor legate de materiale și manoperă pe o perioadă de 1 an de la data inițială de livrare a Bazei Pompei către cumpărătorul inițial („Perioada de Garanție”). În timpul Perioadei de Garanție, Medtrum, la discreția sa, fie va repara, fie va înlocui (cu o nouă sau recertificată Bază a Pompei, la alegerea Medtrum) orice Bază a Pompei defecte, cu condițiile și exceptând situațiile menționate în prezentul document. Această Garanție se aplică doar dispozitivelor noi și, în cazul în care Baza Pompei este reparată sau înlocuită, perioada de garanție nu va fi prelungită.

Garanția este valabilă doar dacă Baza Pompei este folosită în conformitate cu instrucțiunile societății Medtrum, și nu se aplică:

- În cazul în care dauna rezultă din modificările sau schimbările efectuate Bazei Pompei de către utilizator sau terți după data de fabricare;
- În cazul în care dauna rezultă din service-ul sau reparațiile efectuate unei părți a Bazei Pompei de o altă persoană sau entitate diferită de Medtrum;

- Dacă un Plasture cu Rezervor non-Medtrum este folosit cu Baza Pompei;
- În cazul în care dauna rezultă dintr-un eveniment de *Forță Majoră* sau orice alt eveniment care nu poate fi controlat de Medtrum; sau
- În cazul în care dauna rezultă din neglijența sau folosirea necorespunzătoare, inclusiv, dar fără a se limita la depozitarea necorespunzătoare sau abuzul fizic precum scăparea sau altele asemenea.

Această garanție va fi personală cumpărătorului inițial. Vânzarea, închirierea sau alt transfer sau utilizare a Bazei Pompei prevăzute în această garanție pentru sau de către un alt utilizator decât cumpărătorul inițial va determina anularea imediată a prezentei garanții. Această garanție se aplică doar Bazei Pompei și nu se aplică altor produse sau accesorii.

SOLUȚIILE FURNIZATE PENTRU ACEASTĂ GARANȚIE SUNT SOLUȚIILE EXCLUSIVE DISPONIBILE PENTRU CERERILE DE GARANȚIE. NICI MEDTRUM, NICI FURNIZORII SAU DISTRIBUITORII ACESTEIA NU VOR FI RESPONSABIL PENTRU DAUNELE ACCIDENTALE, INDIRECTE SAU SPECIALE DE ORICE NATURĂ SAU TIP CAUZATE DE SAU CE REZULTĂ DINTR-UN DEFECT AL PRODUSULUI. TOATE CELELALTE GARANȚII, EXPRIMATE SAU IMPLICITE, SUNT EXCLUSE, INCLUSIV GARANȚIILE DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP.

Transmițătorul

Medtrum Technologies Inc. ("Medtrum") oferă o garanție pentru Transmițătorul său împotriva defectelor legate de materiale și manoperă pe o perioadă de 1 an de la data inițială de livrare a Transmițătorului către cumpărătorul inițial („Perioada de Garanție”). În timpul Perioadei de Garanție, Medtrum, la discreția sa, fie va repara, fie va înlocui (cu un nou sau recertificat Transmițător, la alegerea Medtrum) orice Transmițător defect, cu condițiile și exceptând situațiile menționate în prezentul document. Această Garanție se aplică doar dispozitivelor noi și, în cazul în care Transmițătorul este reparat sau înlocuit, perioada de garanție nu va fi prelungită.

Garanția este valabilă doar dacă Transmițătorul este folosit în conformitate cu instrucțiunile societății Medtrum, și nu se aplică:

- În cazul în care dauna rezultă din modificările sau schimbările efectuate Transmițătorului de către utilizator sau terți după data de fabricare;

Introducere

- În cazul în care dauna rezultă din service-ul sau reparațiile efectuate unei părți a Transmițătorului de o altă persoană sau entitate diferită de Medtrum;
- Dacă un Senzor Glicemic non-Medtrum este folosit cu Transmițătorul;
- În cazul în care dauna rezultă dintr-un eveniment de *Forță Majoră* sau orice alt eveniment care nu poate fi controlat de Medtrum; sau
- În cazul în care dauna rezultă din neglijența sau folosirea necorespunzătoare, inclusiv, dar fără a se limita la depozitarea necorespunzătoare sau abuzul fizic precum scăparea sau altele asemenea.

Această garanție va fi personală cumpărătorului inițial. Vânzarea, închirierea sau alt transfer sau utilizare a Transmițătorului prevăzut în această garanție pentru sau de către un alt utilizator decât cumpărătorul inițial va determina anularea imediată a prezentei garanții. Această garanție se aplică doar Transmițătorului și nu se aplică altor produse sau accesorii.


SOLUȚIILE FURNIZATE PENTRU ACEASTĂ GARANȚIE SUNT SOLUȚIILE EXCLUSIVE DISPONIBILE PENTRU CERERILE DE GARANȚIE. NICI MEDTRUM, NICI FURNIZORII SAU DISTRIBUITORII ACESTEIA NU VOR FI RESPONSABIL PENTRU DAUNELE ACCIDENTALE, INDIRECTE SAU SPECIALE DE ORICE NATURĂ SAU TIP CAUZATE DE SAU CE REZULTĂ DINTR-UN DEFECT AL PRODUSULUI. TOATE CELELALTE GARANȚII, EXPRIMATE SAU IMPLICITE, SUNT EXCLUSE, INCLUSIV GARANȚIILE DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP.



2.1 Managerul Personal de Diabet (PDM)

Managerul Personal de Diabet (PDM) monitorizează și controlează Pompa dumneavoastră cu Plasture și Sistemul de Monitorizare Continuă a Glicemiei, prin intermediul comunicării prin unde RF wireless. Acesta stochează datele Pompei și Senzorului din ultimele 90 de zile. Păstrați cu dumneavoastră PDM în permanență astfel încât, atunci când aveți nevoie, să vă puteți administra un bolus, să modificați rata bazală, să verificați nivelul dumneavoastră glicemic și așa mai departe.

Atunci când comunicarea RF este pierdută sau întreruptă din cauza unei condiții extreme sau distanță prea mare, nu veți putea să vă folosiți PDM pentru a control sau monitoriza Pompa cu Plasture sau Sistemul de Monitorizare Continuă a Glicemiei. Însă, Pompa cu Plasture va putea să administreze în continuare insulina bazală în funcție de setările dumneavoastră programate, va efectua verificări de siguranță și va opri în mod automat administrarea în caz de situații grave. Transmițătorul poate continua să înregistreze citirile glicemice ale Senzorului. PDM este creat pentru a detecta și pentru a vă notifica cu privire la o deconectare. Imediat ce problema este rezolvată, comunicarea RF va fi reluată.

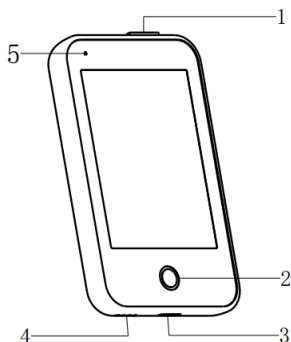

1. Buton de Opreire
2. Buton Principal (Buton Software)
3. Port de Încărcare
4. Orificiu de Sunet
5. Indicator luminos


✓ Managerul Personal de Diabet (PDM) (FM-018)

2.2 Pompa cu Plasture


Pompa cu Plasture este un dispozitiv mic, portabil, auto-adeziv purtat direct pe corpul dumneavoastră pentru a administra doze precise, personalizate de

Sistemul dumneavoastră A7+ TouchCare®

insulină în organismul dumneavoastră prin intermediul unui ac. Pompa cu Plasture este alcătuită dintr-o Bază a Pompei reutilizabilă și un Plasture cu Rezervor de unică folosință. Baza Pompei reutilizabilă susține piesele electronice și păstrează toate setările Pompei dumneavoastră. Plasturele cu Rezervor de unică folosință de 200 Unități include un șurub precis de dozare, o seringă, un activator, un ac, un buton și o baterie pentru a alimenta Pompa dumneavoastră. Sistemul de administrare și carcasa Plasturelui cu Rezervor sunt piesele aplicate ale Pompei.

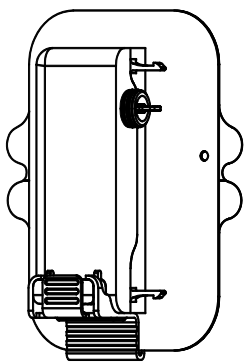

✓ Plasture cu Rezervor
(MD-JN-011, consumabil)

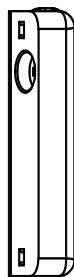


✓ Baza Pompei
(JN-022)

2.3 Sistemul de Detectare a Glucozei (Opțional)

Sistemul de Detectare a Glucozei este o piesă opțională a Sistemului A7+ TouchCare® care constă într-un Senzor Glicemic de unică folosință și un Transmițător reutilizabil. Senzorul Glicemic este introdus sub piele pentru a vă măsura nivelul de glucoză din lichidul interstițial. Senzorul este piesa aplicată a Sistemului de Detectare a Glucozei. Transmițătorul înregistrează datele Senzorului și transmite datele dispozitivului cu fereastră prin intermediul comunicării cu unde RF wireless. Cablul de încărcare USB al Transmițătorului sau portul de încărcare este de asemenea inclus în pachet.


Transmițătorul MD1026, compatibil cu senzorul MD3026 și cu cablul de încărcare LQ005 sunt cele care urmează.

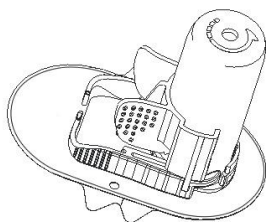

- ✓ **Senzorul de Glucoză**
(MD3026, Consumabil)



- ✓ **Transmițător**
(MD1026, Reîncărcabil)

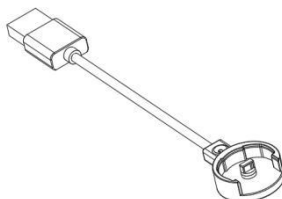

- ✓ **Cablu de încărcare USB**
(LQ005)

2.4 Aplicația Mobilă

Aplicația EasyPatch este un instrument auxiliar pentru a monitoriza și controla Pompa cu Plasture și Sistemul de Monitorizare Continuă a Glicemiei. În cazul în care PDM este defect sau PDM este inaccesibil, Aplicația EasyPatch vă poate ajuta să controlați și să monitorizați sistemul.

Aplicația EasyTouch este un instrument auxiliar pentru a monitoriza PDM.

Aplicația EasySense este un instrument auxiliar pentru a monitoriza și controla Sistemul de Monitorizare Continuă a Glicemiei. În cazul în care PDM este defect sau PDM este inaccesibil, Aplicația EasySense vă poate ajuta să controlați și să monitorizați sistemul

3.1 Informațiile de bază ale PDM

Vă recomandăm ca PDM dumneavoastră să fie folosit doar de un utilizator calificat și căruia să îi fie destinat.


3.1.1 Pornirea/Oprirea PDM

Pornire

- Atunci când apăsați lung pe butonul de pornire, o lumină verde se va aprinde intermitent, ecranul se va aprinde, iar PDM este pornit cu succes.
- Atunci când apăsați scurt butonul de pornire, o lumină galbenă se va aprinde timp de aproximativ 8 secunde, dar PDM nu este pornit.

Oprire

- Atunci când apăsați lung pe butonul de pornire timp de aproximativ 2 secunde, fereastra de închidere apare. Atunci, puteți să glisați pentru a-l închide, o lumină galbenă se va aprinde timp de aproximativ 6 secunde, indicând faptul că închiderea a fost finalizată.

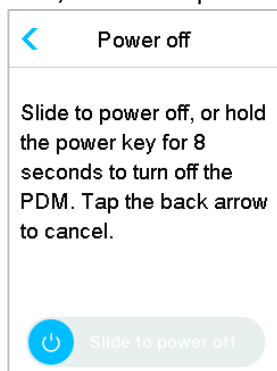

- Dacă apăsați lung butonul de pornire timp de aproximativ 6 secunde, o lumină galbenă se va aprinde timp de aproximativ 2 secunde, indicând faptul că închiderea a fost finalizată.

3.1.2 Încărcarea PDM

Ca o măsură de siguranță, PDM vă va afișa alerta „BATERIE PDM DESCĂRCATĂ” sau „ÎNCĂRCAȚI PDM ACUM” atunci când PDM funcționează în modul de baterie descărcată. Dacă primiți o alertă „BATERIE PDM DESCĂRCATĂ”,

Modul de utilizare a PDM

răspundeți la alertă și continuați. Deși PDM va continua să funcționeze în mod normal, durata de viață a bateriei poate scădea.


PDM necesită în adaptor AC cu o priză de DC 5.0V care să fie conformă cu IEC 60601-1 și IEC 60950, precum UES06WNCPU-050 100SPA, (intrare: 100-240V, 50/60Hz, 0.2A; ieșire: 5.0V DC, 1.0A). Adaptorul este creat ca parte a sistemului ME:

Notă:

- 1) Nu folosiți alte tipuri de încărcătoare. În caz contrar, PDM poate să nu funcționeze normal.
- 2) Trebuie să încărcați PDM atunci când bateria este descărcată pentru a continua să utilizați PDM.
- 3) Setările nu se vor pierde dacă bateria PDM este descărcată completă sau dacă apare o eroare a PDM.
- 4) Bateria trebuie să fie încărcată complet atunci când folosiți pentru prima dată PDM, ceea ce, de obicei, durează în jur de 2 ore. Dacă bateria nu este încărcată complet după 12 ore de încărcare continuă așa cum se solicită, vă rugăm să contactați serviciul de relații cu clienții.
- 5) De obicei, atunci când PDM este încărcat complet, acesta este disponibil pentru a fi utilizat timp de o săptămână (7 zile).
- 6) O lumină albastră se aprinde intermitent atunci când PDM se încarcă, iar lumina verde aprinsă în permanență indică faptul că PDM s-a încărcat complet.
- 7) Doar persoana (inclusiv pacientul) cu o pregătire corespunzătoare este autorizată să folosească PDM.

Procesul de încărcare:

1. Conectați PDM la adaptor.
2. Băgați adaptorul într-o priză de alimentare cu energie electrică.

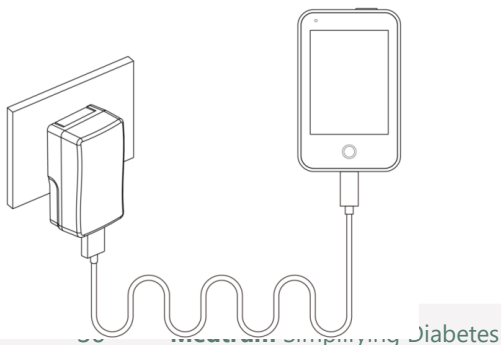

3.1.3 Modul de Putere

PDM are două moduri de putere:

Modul de Veghe

PDM intră în Modul de Veghe după închiderea iluminării ecranului și după ce ecranul se închide. Puteți trece PDM în Fereastra de Blocare a Modulului Activ apăsând scurt Butonul de pornire.

- Rata bazală activată, rata bazală temporară și toate funcțiile bolusului nu se vor schimba.
- Ecranul se va bloca după închiderea iluminării ecranului.
- Apăsați butonul de Pornire și ecranul se luminează, iar PDM indică Fereastra de Blocare.


Modul Activ

PDM este în Modul Activ atunci când iluminarea ecranului rămâne aprinsă.

- Puteți trece PDM din Modul de Veghe în Modul Activ apăsând Butonul de pornire.
- În Modul de Veghe, toate Alertele și Alarmerile cu privire la Pompă și CGM vor activa imediat ecranul pentru a intra în Fereastra de Blocare. Alertele și Alarmerile trebuie să fie șterse manual după glisarea pentru deblocare.




O Alarmă apare atunci când ecranul este blocat.

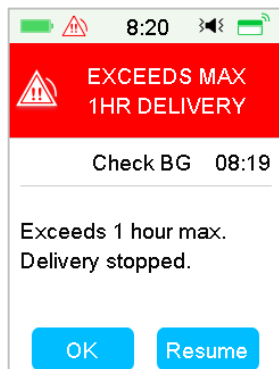

O Alarmă apare atunci când ecranul nu este blocat.

3.1.4 Bara de Derulare


Dacă există un text cu o lungime excesivă pentru ecran, va apărea bara de derulare în partea dreaptă a ecranului. Puteți vizualiza textul suplimentar derulând în sus și în jos.

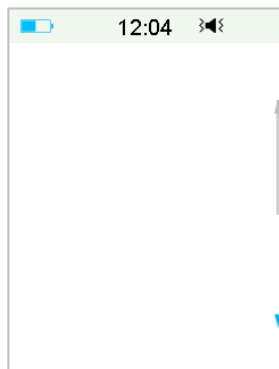

3.2 Setarea PDM


3.2.1 Alegerea limbii și țării/regiunii

1. Alegeți limba dumneavoastră și apoi apăsați Următorul.

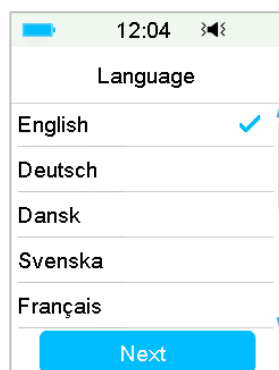

Puteți modifica limba. Consultați opțiunea „Limbă” în Secțiunea „Setări” pentru instrucțiunile de setare.



2. Alegeți țara/regiunea dumneavoastră, apoi apăsați **Următorul**.

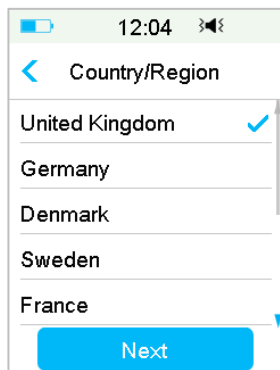

3.2.2 Ora și Data


Atunci când porniți PDM pentru prima dată, trebuie să setați ora și data. Setarea corectă a datei și orelor în PDM dumneavoastră este necesară pentru o administrare precisă a insulinei bazale și vă permite să păstrați o evidență corectă a administrării insulinei dumneavoastră și a citirilor Senzorului. Puteți alege un format al ceasului de 12 ore sau 24 de ore.

1. Alegeți ora, apoi apăsați **Următorul**.

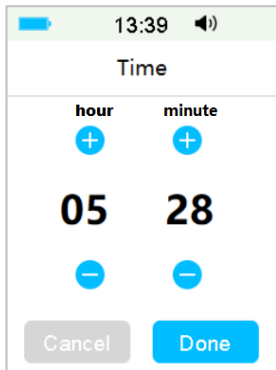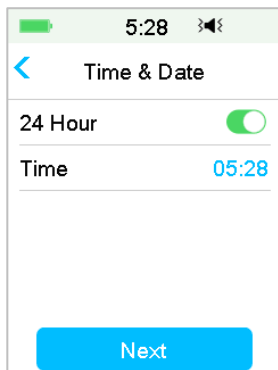

- (1) Alegeți ora.
- (2) Apăsați pe butonul albastru  pentru a crește și  pentru a scădea ora din partea stângă.
Apăsați pe butonul albastru  pentru a crește și  pentru a scădea minutele din partea dreaptă
- (3) Atunci când ați terminat, apăsați **Efectuat**.


2. Alegeți Data, apoi apăsați **Următorul**.

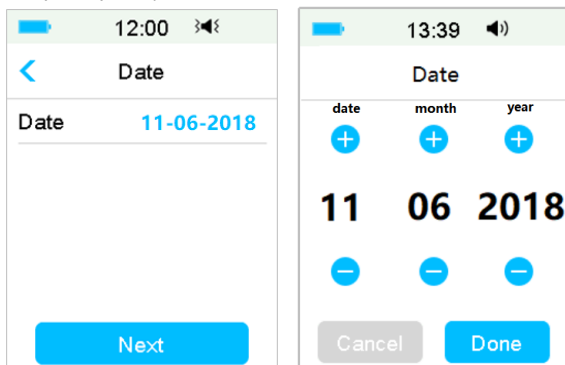

- (1) Alegeți data.
- (2) Ajustați ziua, luna și anul separat.
- (3) Atunci când ați terminat, apăsați Efectuat.

3.2.3 Calculator Bolus


După ce ați finalizat setările datei și orei, puteți alege dacă folosiți Calculatorul Bolus sau nu. Apăsați pe **Setare** pentru a iniția Setarea Calculatorului Bolus. Apăsați pe **Omite** pentru a merge direct în Fereastra de Blocare. *Consultați secțiunea „Calculator Bolus” în Capitolul „Caracteristicile Avansate ale Pompei” pentru mai multe informații.*

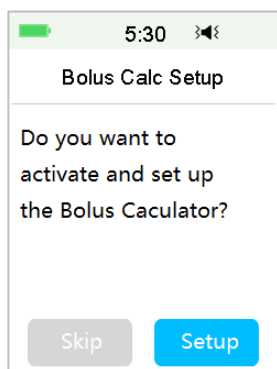

Dacă alegeți **Setare**, funcția Calculator Bolus va fi forțată să se deschidă;
Dacă alegeți **Omite**, funcția Calculator Bolus va rămâne închisă.

3.3 Fereastră Principal

Fereastră Principală este punctul inițial pentru accesare ferestrelor de programare. Puteți să vă întoarceți la Fereastră Principală apăsând **Cheia Principală**. Prima linie afișează pictogramele barei de status, inclusiv Bateria PDM, Alertă/Alarmă, Ora, Sunet/Vibrație, IOB (Insulina în Recipient), Pictograma EasyLoop, Insulina rămasă și Statusul de Pompei dumneavoastră de administrare a Insulinei și Statusul Glucozei.

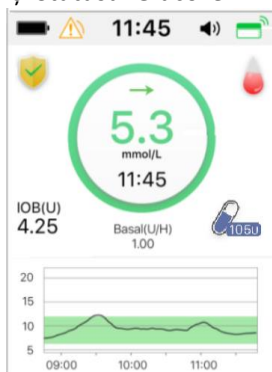

Notă: În această fereastră, glisați pe ecran de la dreapta la stânga și puteți accesa fereastra meniului principal. Glisați de la stânga la dreapta pentru a deschide fereastra de status. Glisați pe PDM de sus în jos pentru a deschide fereastra de notificare a alertelor. Glisați pe ecran de jos în sus pentru a deschide fereastra de scurtături.

3.3.1 Pictograme de pe Bara de Status

3.3.1.1 Pictograma Bateriei

Pictograma bateriei indică durata de viață rămasă a bateriei.

Atunci când PDM nu se încarcă

Există cinci pictograme care indică nivelurile diferite ale bateriei. Trebuie să încărcați PDM atunci când pictograma bateriei devine roșie.

-  Cel puțin 80% rămas
-  Cel puțin 60% rămas
-  Cel puțin 20% rămas

Modul de utilizare a PDM



Cel puțin 10% rămas



Baterie descărcată

Atunci când PDM se încarcă

Există șase pictograme care indică nivelurile diferite ale bateriei.



Mai puțin de 10% încărcat



Cel puțin 10% încărcat



Cel puțin 20% încărcat



Cel puțin 60% încărcat



Cel puțin 80% încărcat



Încărcat complet

3.3.1.2 Pictograma Oră

Puteți alege ora actuală afișată în format de 12 ore sau în format de 24 ore. A sau p apare în cazul formatului de 12 ore. Pentru instrucțiuni cu privire la setarea orei pe PDM dumneavoastră, consultați „Ora și Data” în Secțiunea „Setări”.

- 02:00 p format de 12 ore
- 14:00 format de 24 ore

3.3.1.3 Pictograma Audio

Există opt tipuri de pictograme audio, care indică diferite tipuri de Atenționări; le puteți seta în meniul **Setări Generale** și în meniul **Setări CGM**.



Sunet



Vibrație



Sunet și Vibrație



Sunet Oprit/Vibrație Oprită



Alertă Silențios + Sunet pentru Atenționare



Alertă Silențios + Vibrație pentru Atenționare



Alertă Silențios + Sunet și Vibrație



Alertă Silențios + Sunet Oprit/Vibrație Oprită

3.3.1.4 Pictograma de Semnal RF al Pompei

O pictogramă RF a Pompei apare doar atunci când există o Pompă cu Plasture activă.



Pompa cu Plasture este activă, iar comunicare prin unde RF este bună.



Pompa cu Plasture este activă, dar comunicare prin unde RF este pierdută sau întreruptă.

3.3.1.5 Pictograme de Alertă

Un triunghi galben cu un semn de exclamare galben (alertă), un triunghi roșu două semne de exclamare roșii (alarmă cu prioritate medie) sau un triunghi roșu cu trei semne de exclamare roșii (alarmă cu prioritate ridicată) apare doar atunci când există o situație de alertă sau alarmă în cadrul sistemului dumneavoastră de gestionare a insulinei. *Consultați Capitolul „Siguranța Sistemului și Alarmer/Alerte” pentru mai multe informații.*



Pictogramă de Alertă



Pictogramă de alarmă cu prioritate medie



Pictogramă de alarmă cu prioritate ridicată

3.3.2 Statusul Pompei



1. Pictograma EasyLoop
2. Statusul Pompei de Administrare a Insulinei
3. IOB (Insulină în Recipient)
4. Semnalul RF al Pompei
5. Insulină rămasă

Puteți vizualiza **Statusul Pompei** în Fereastra Principală.

Modul de utilizare a PDM

Pictogramele Statusului Administrării Insulinei în diferite situații:

Pictogramă	Formă și culoare	Descriere
	Inel gri	Inelul gri indică faptul că nu există nicio Pompă activată.
	Inel verde	Inelul verde reprezintă o injectare a ratei bazale.
	Inel verde deschis și verde închis	Inelul verde cu partea verde închis reprezintă Rata Bazală Temporară, iar partea cu verde închis indică progresul injectării Ratei Bazale Tempore.
	Inelul albastru deschis și albastru închis	Inelul albastru reprezintă Bolusul Normal, iar partea cu albastru închis indică progresul injectării.
	Inelul mov deschis și mov închis	Inelul mov reprezintă partea care indică progresul injectării.
	Inel roșu	Inelul roșu indică statusul de suspendare a injectării.

Informațiile cu privire la status sunt indicate de textul de mai jos:


- ✧ Rată Bazală (U/H) 1,00: Rata bazală actuală este 1,00 U/H.
- ✧ Rată Bazală Temporară (U/H) 1,00: Rata Bazală Temporară este activată, iar rata bazală temporară activă este 1,00 U/H.
- ✧ Rată Bazală Temporară (U/H) 1,00 85%: Rata Bazală Temporară este activată, iar rata bazală temporară activă este 1,00 U/H (85% din modelul bazal actual).
- ✧ Normal (U) 1.00/2.00: Bolusul normal este activ și 1,00 U din bolusul administrat | total bolus programat: 2,00 U.

- ✧ Extins (U) 1,00/2,00: Bolusul Extins este activ și 1,00 U din bolusul administrat | total bolus programat: 2,00 U.
- ✧ C-Normal (U) 1.00/2.00: Bolusul Normal din Bolusul Combinat este activ și 1,00 U din bolusul normal administrat | total bolus normal programat: 2,00 U.
- ✧ C-Ext. (U) 1.00/2.00: Bolusul Extins din Bolusul Combinat este activ și 1,00 U din bolusul extins administrat | total bolus extins programat: 2,00 U.
- ✧ Timp de suspendare rămas 0:15: Suspendarea este activă, iar rata bazală se va lua automat după 15 minute.
- ✧ Insulină rămasă: Cantitatea actuală de insulină rămasă în rezervor.

3.3.3 Statusul Glicemic

Puteți vizualiza **Statusul Glicemic** din Fereastra Principală.

Caracteristic CGM activată:

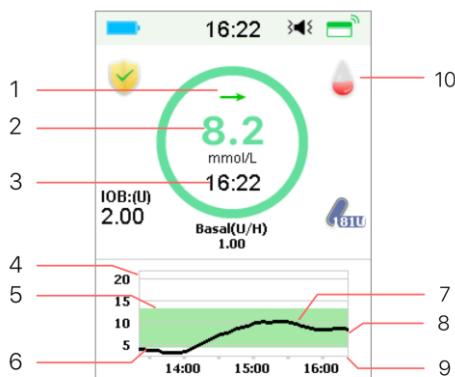

1. Săgeata de Tendință
2. Ultimul status sau ultima citire a senzorului
3. Ora ultimei citiri a senzorului
4. Axa limitei glicemice
5. Limita superioară a limitei glicemice
6. Limita inferioară a limitei glicemice
7. Curba CGM
8. Ultimul punct glicemic
9. Axa timpului
10. Calibrare

Caracteristica CGM dezactivată:

Modul de utilizare a PDM



Săgeata de tendință

Săgeata de tendință indică viteza și direcția citirilor dumneavoastră ale Senzorului glicemic.

- Stabil
- ↗ Creștere ușoară
- ↑ Creștere
- ↑↑ Creștere rapidă
- ↘ Scăderea ușoară
- ↓ Scădere
- ↓↓ Scădere rapidă

Nicio săgeată Nicio informație

Pictograma de Calibrare

Dacă Senzorul dumneavoastră are o rutină de calibrare de 24 de ore, pictograma de calibrare se umple pe măsură ce este timpul pentru următoarea calibrare.



Următoarea calibrare este necesară în 20 până la 24 de ore.



Următoarea calibrare este necesară în 16 până la 20 de ore.



Următoarea calibrare este necesară în 12 până la 16 ore.



Următoarea calibrare este necesară în 8 până la 12 ore.



Următoarea calibrare este necesară în 4 până la 8 ore.



Următoarea calibrare este necesară în 0 până la 4 ore.



O calibrare este necesară acum.

Dacă Senzorul dumneavoastră are o rutină de calibrare de 12 de ore, pictograma de calibrare se umple pe măsură ce este timpul pentru următoarea calibrare.



Următoarea calibrare este necesară în 10 până la 12 ore.



Următoarea calibrare este necesară în 8 până la 10 ore.



Următoarea calibrare este necesară în 6 până la 8 ore.



Următoarea calibrare este necesară în 4 până la 6 ore.



Următoarea calibrare este necesară în 2 până la 4 ore.




Următoarea calibrare este necesară în 0 până la 2 ore.



O calibrare este necesară acum.


Pictograma statusului de recuperare a datei

Dacă deconectați Senzorul pentru o perioadă de timp și îl reconectați, durează puțin recuperarea datelor. Pictograma  indică faptul că datele sunt în curs de recuperare. Aceasta dispare atunci când recuperarea datelor este finalizată.

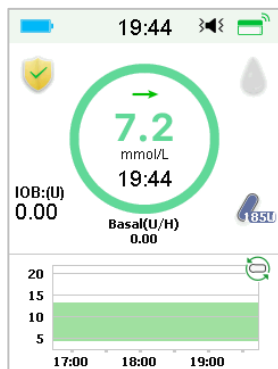

Condiții speciale

În condiții normale ale Senzorului, cea mai recentă citire a glicemiei este afișată în centrul inelului din Fereastra Principală. În anumite condiții, citirea Senzorului va fi înlocuită de un status al Senzorului în mijlocul inelului.

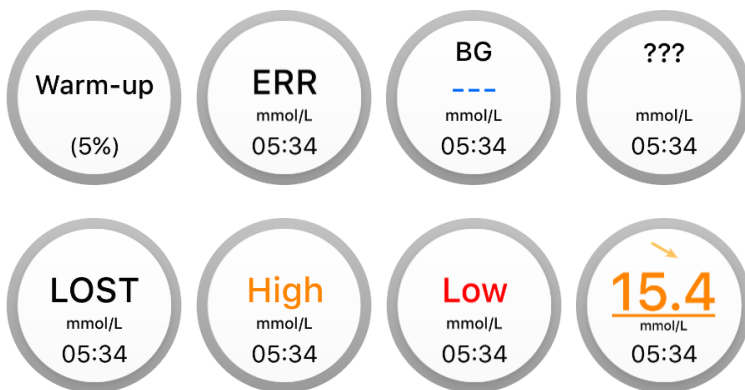

Încălzire – Senzorul se încălzește.

ERR – Senzorul se va recalibra după 15 minute.

BG – Senzorul se va recalibra acum.

??? – Nicio citire.

PIERDUT – Semnalul Senzorului a fost pierdut pentru o perioadă mai mare de 10 minute.


SUPERIOR – Senzorul glicemic este peste 22,2 mmol/L (400mg/dL).

Inferior - Senzorul glicemic este sub 2,2 mmol/L (40mg/dL).

Citire subliniată – Calibrare întârziată. Un nou glucometru este necesar pentru calibrare.

Notă:

- (1) Atunci când Senzorul se încălzește, o bară de progres va fi afișată în partea de jos a Ferestrei Principale. Durează 120 de minute pentru fiecare Senzor ca să se încălzească.

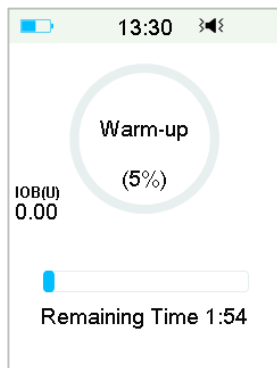

- (2) După ce introduceți o valoare a glucometrului pentru a calibra Senzorul, poate dura până la 3 minute pentru ca Senzorul să își ajusteze citirile, iar în timp ce citește, Senzorul glicemic se aprinde intermitent.

3.3.4 Pictograma EasyLoop

Atunci când activați funcția Suspendare Redusă sau Predicție Redusă în Meniul **EasyLoop**, sistemul va intra în modul pictogramei EasyLoop. Pompa cu Plasture va efectua verificările de siguranță și va opri automat administrarea atunci când citirea CGM declanșează funcția de suspendare. Există două tipuri de pictograme EasyLoop. Dacă Suspendarea Redusă sau Predicție Redusă apare în diferite situații, pe ecran vor fi afișate pictograme diferite.




Va apărea atunci când funcția Suspendarea Redusă sau Predicție Redusă este disponibilă momentan sau când funcția Suspendarea Redusă sau Predicție Redusă este declanșată, iar administrarea insulinei a fost suspendată.




Va apărea atunci când funcția Suspendarea Redusă sau Predicție Redusă este indisponibilă momentan.

3.3.5 Graficul Sensorului

Axa Y a graficului Sensorului este caracterizată de patru valori: 5, 10, 15, 20 mmol/L (90, 180, 270, 360 mg/dL). Axa X a graficului Sensorului prezintă perioada ultimelor 3 ore.

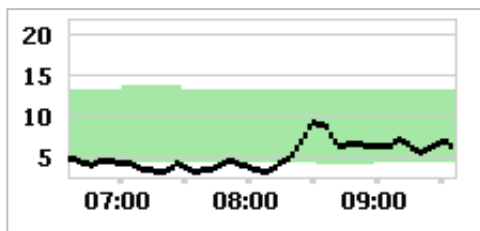

Graficul Sensorului poate fi schimbat pentru a fi afișat în format panoramic. Atingeți lung Graficul Sensorului timp de 1 secundă și afișajul se va întoarce pe orizontală. Puteți vedea graficul tendinței informațiilor dumneavoastră glicemic din ultimele 3 ore, 6 ore, 12 ore și 24 de ore.

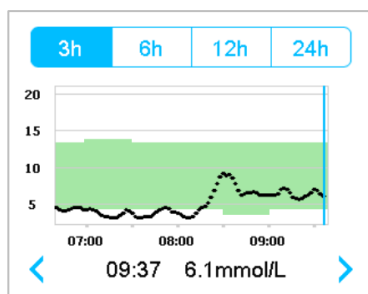

- Atingeți graficul Sensorului și mișcați cursorul pentru a indica valorile glucozei. Folosiți săgeata stânga și dreapta pentru a alege ora. Intervalul de timp dintre două valori este de 2 minute.
- Punctul de timp atunci când un nou Senzor este aplicat va fi marcat cu o etichetă cu un pătrat verde „□”. Citirile din timpul etapei de încălzire nu vor fi afișate, dar vor fi marcate ca „încălzire”.
- Valoarea glucozei sau statusul special va fi afișat în zona de jos, între săgețile stânga și dreapta. Statusul special include: eroare calibrare (ERR), nicio citire (???), etapa de încălzire (încălzire), Senzorul glicemic este peste 22,2 mmol/L (400mg/dL), (VALOARE MARE) și Senzorul glicemic este sub 2,2 mmol/L (40mg/dL). (VALOARE MICĂ).


- După etapa de încălzire, valorile dinainte de prima calibrare sunt înlocuite de „BG”.
- Atunci când calibrarea Senzorului expiră, valorile citite vor fi subliniate.
- Calibrarea va fi marcată cu un punct roșu „•”.
- Blocurile în pătrat verde de pe grafic reprezintă limitele Inferioare și Superioare ale glucozei.
- În afișajul panoramic, atingeți pe Butonul Principal pentru a vă reîntoarce în Fereastra Principală.
- Atunci când datele sunt recuperate după reconectarea senzorului, nu puteți accesa afișajul panoramic apăsând lung pe grafic.
- Atunci când folosiți doar pompa de insulină ca un sistem de sine stătător, graficul senzorului afișează nivelul de glucoză din sânge înregistrat și valorile BG vor fi afișate ca puncte roșii „•”.

3.3.6 Statusul Alarmei

Anumite statusuri ale Alarmei rămân chiar și după ce alarma a fost ștearsă. Următoarele alarme vor fi afișate în Fereastra Principală în acest caz:

BATERIE PLASTURE DESCĂRCATĂ COMPLET, POMPĂ ÎN AFARA ARIEI, REZERVOR GOL, PLASTURE EXPIRAT, OCLUZIE DETECTATĂ, EROARE PLASTURE, AUTO OPRIT, DEPĂȘEȘTE MAX TTD, DEPĂȘEȘTE MAX 1 ORE, EROARE BAZA POMPEI, SUSPENDARE REDUSĂ și SUSPENDARE PRE REDUSĂ.


De exemplu:

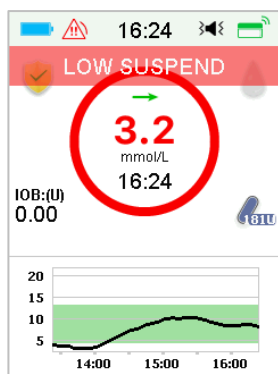

3.4 Fereastra de Blocare


PDM afișează **Fereastra de Blocare** de fiecare dată când îl porniți pentru a vedea informațiile cu privire la glucoză, informațiile cu privire la administrarea insulinei, informațiile cu privire la alarmă/alertă, data și ora. De asemenea, puteți personaliza această fereastră prin editarea numelui dumneavoastră de utilizator și numărul de telefon. *Consultați opțiunile „Nume de utilizator” și „Telefon” în Secțiunea „Setări” pentru mai multe informații.* PDM afișează Fereastra de Blocare după închiderea ecranului. Atunci când ecranul se face negru, apăsați scurt pe butonul de Pornire pentru a activa Fereastra de Blocare.

1. Fereastra de Blocare fără Alarmă, Alertă și Atenționare.

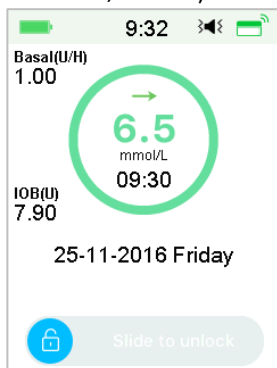

Consultați secțiunea “Statusul Pompei” pentru mai multe informații cu privire la statusul administrării.

2. Fereastra de Blocare atunci când apar Alarmer, Alerte și Atenționări

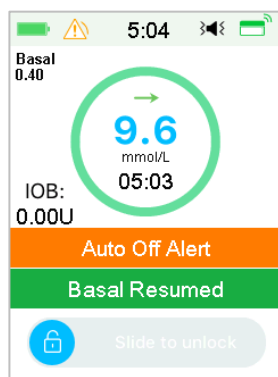


Consultați Capitolul „Sistem de Siguranță și Alarme/Alerte” pentru mai multe informații cu privire la statusul Alarmei, Alertei sau Atenționării.

3.5 Fereastra de Notificare


Fereastra de Notificare înregistrează doar notificările de alertă și alarmă care sunt încă valabile astăzi. Puteți glisa din sus în jos în Fereastra Principală pentru a deschide Fereastra de Notificare.

- (1) Dacă nu există nicio notificare zilnică de Alertă și Alarmă, fereastra nu va afișa nicio Înregistrare.
- (2) Dacă există o notificare de Alertă și Alarmă, doar Notificările încă existente vor fi afișate.
- (3) Cele mai recente notificări vor fi afișate în partea de sus.

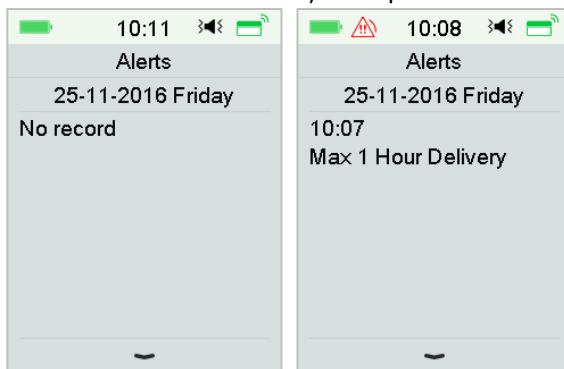

3.6 Fereastra de Scurtături

Fereastra de Scurtături vă oferă acces rapid la unele setări inclusiv la Bolus, Calibrare, Sunet, Vibrație și Iluminare. Puteți glisa de jos în sus din Fereastra Principală pentru a deschide Fereastra de Scurtături.

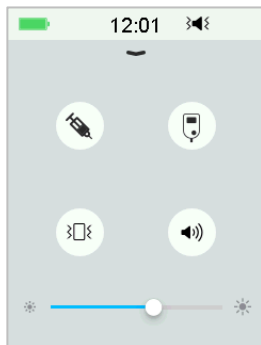


- (1) Pictograma de Scurtătură BG sau Calibrare „  ”
- (2) Pictograma de Scurtătură Bolus „  ”
 - Dacă funcția Bolus Alimentar/Corecție Bolus este activată, veți accesa fereastra de Bolus Alimentar/Corecție Bolus apăsând pe această pictogramă.
 - În caz contrar, veți intra în fereastra Bolus Manual apăsând această pictogramă.
- (3) Pictograma de Opțiuni Audio
Există două pictograme de Opțiuni Audio, fiecare schimbându-se după o atingere: Sunet oprit „  ”, Volum ridicat „  ”.
- (4) Pictograma de Opțiuni de Vibrație
Există două pictograme de Opțiuni de Vibrație, fiecare schimbându-se după o atingere: Vibrație oprită „  ”, Vibrație pornită „  ”.
- (5) Pictograma de ajustare a iluminării “  ”
Există zece niveluri de iluminare care sunt crescute de la stânga la dreapta.

3.7 Fereastra de Status

Fereastra de Status enumeră statusul funcționării actuale a sistemului. Glisați din stânga spre dreapta în Fereastra Principală pentru a deschide Fereastra de

Modul de utilizare a PDM

Status. Glisați din dreapta spre stânga sau apăsați butonul Principal din Fereastra de Status pentru a vă întoarce la Fereastra Principală.

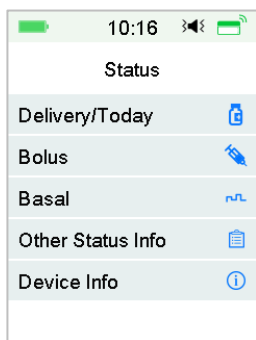

Fereastra de Status afișează următoarele informații.

Administrare/Azi

10:46	
< Delivery/Today	
Temp Basal:	Yes
Suspend:	Yes
Bolus:	27.90U
Basal:	10.25U
Total:	38.15U
Insulin Left:	88.80U

Bolus

10:47	
< Bolus	
Last Bolus:	E0.10U
25-11-2016	10:46
Ext Bolus:	2.00U
Ext:	0.10U/2.00U
Time Left:	00:29

Rata Bazală

10:48	
< Basal	
Basal Mode:	Manual
Pattern:	Standard
24-Hr Total:	24.00U
Basal:	1.00U/H
Temp Basal:	Active
Start	25-11 10:46
End	25-11 14:46
Rate	1.00U/H


Modul de utilizare a PDM

Alte Informații cu privire la Status Informații cu privire la Dispozitiv

11:45	10:49
Other Status Info	Device Info
Patch Life Left 0day1hour26min	PDM SN: 067F3586
Sensor Life Left 2day2hour56min	Version 1.67.169
Transmitter Battery Normal	Pump SN: 106000674
Next calibration 6hour24min	Version 1.70.170
Sensor Status Monitoring	Transmitr SN: 102005219
	Version 1.68.181

3.8 Meniuri

Meniul Principal cuprinde nouă meniuri secundare: **Bolus**, **Rata Bazală**, **Suspendare**, **Plasture**, **Senzor**, **Istoric**, **Evenimente**, **EasyLoop**, **Setări**. Glisați din dreapta spre stânga în Fereastra Principală pentru a deschide Meniul Principal.

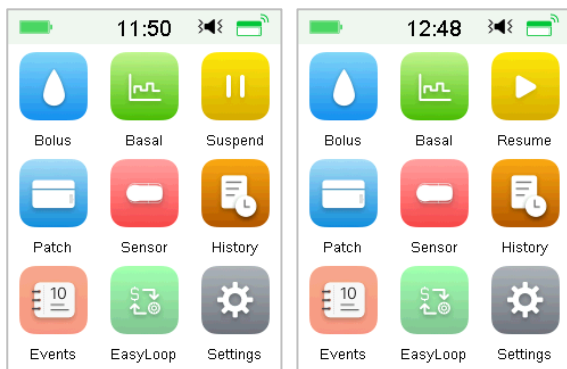

Notă: După ce toate administrările de insulină sunt suspendate, pictograma **Suspendare** din Meniul Principal se va schimba în pictograma **Reluare**.

3.8.1 Bolus

Meniul **Bolus** include setările și funcțiile pentru administrările bolusului. Consultați Secțiunea „Bolus” din Capitolul „Modul de utilizare a Pompei cu Plasture” pentru mai multe informații cu privire la bolus și Capitolul „Caracteristicile Avansate ale Pompei” pentru setările avansate ale bolusului.

3.8.2 Rata Bazală

În meniul **Rată Bazală** puteți administra insulină bazală temporară, puteți alege și vizualiza diferite modele bazale. *Consultați Capitolul „Modul de utilizare a Pompei cu Plasture” și Capitolul „Caracteristicile Avansate ale Pompei” pentru mai multe informații.*

3.8.3 Suspendare

Atunci când nu este administrat niciun Bolus, puteți suspenda administrarea Bazală pentru o anumită perioadă de timp atingând pictograma **Suspendare**.

Atunci când este administrat un Bolus, cu ajutorul funcției **Suspendare** puteți suspenda Bolusul și toate administrările de insulină (bazală și bolus) pentru o anumită perioadă de timp.

Consultați Secțiunea „Suspendare și Reluare” din Capitolul „Modul de utilizare a Pompei cu Plasture” pentru mai multe informații.

3.8.4 Plasture

Puteți schimba Plasturele dumneavoastră cu Rezervor și să verificați SN Bazei Pompei din meniul **Plasture**. *Consultați Capitolul „Modul de utilizare a Pompei cu Plasture” pentru mai multe informații.*

3.8.5 Senzor

Meniul **Senzor** include funcțiile de calibrare și conectare a Senzorului Glicemic. *Consultați Capitolul „Modul de utilizare a sistemului CGM” pentru mai multe informații.*

3.8.6 Istoric

În meniul **Istoric** puteți revedea Istoricul Pompei, Istoricul Senzorului, Istoricul PDM, Istoricul Evenimentelor, Istoricul BG și Istoricul Rezumativ. *Consultați Secțiunea „Istoric” din acest capitol pentru mai multe informații.*

3.8.7 Evenimente

Fereastra **Evenimente** vă ajută să înregistrați diferite evenimente, inclusiv: glucoza din sânge, carbohidrați, injecție cu insulină, stare de sănătate, exercițiu și altele. *Consultați Secțiunea „Evenimente” din acest capitol pentru mai multe informații.*

3.8.8 EasyLoop

Meniul **EasyLoop** este folosit pentru a seta „Alertele de Glucoză” și funcțiile „Suspendare (Pre) Redusă”. Consultați Secțiunea „Alerte de Glucoză” din Capitolul „Modul de utilizare a sistemului CGM” și Capitolul „Modul de utilizare a P)LGS” pentru mai multe informații.

3.8.9 Setări


În meniul **Setări** puteți edita setările personale ale sistemului dumneavoastră. Consultați Secțiunea „Setări” din acest capitol pentru mai multe informații.

3.9 Evenimente

Sistemul A7+ TouchCare® poate să înregistreze diferite evenimente, inclusiv glucoza din sânge, carbohidrați, injecție cu insulină, stare de sănătate, exercițiu și altele. Aceste informații vă pot ajuta pe dumneavoastră și furnizorul dumneavoastră de asistență medicală pentru a lua decizii mai bune cu privire la planul dumneavoastră de gestionare a diabetului.

Accesați fereastra **Evenimente**. Puteți alege tipul evenimentului pe care doriți să îl înregistrați.

Meniu Principal → Evenimente

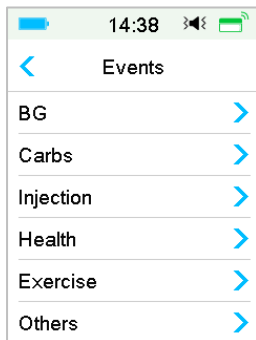

3.9.1 Măsurare BG

1. Alegeți Tipul **BG** în fereastra **Evenimente**.


2. Alegeți data și ora pentru evenimentul BG.

Notă: Ora se referă la ora de recoltare a sângelui.

3. Puteți alege între Măsurătorile BG și Lab din opțiunea **Metodă**.

Notă: **Lab** se referă la glicemia din sânge venos testată în laborator.


4. Atingeți **BG** pentru a introduce valoarea BG pe rândul BG, nivelul standard de glucoză din sânge este 120 mg/dL (sau 6,7 mmol/L). Intervalul de intrare este 40 - 400 mg/dL (sau 2,2 – 22,2 mmol/L).

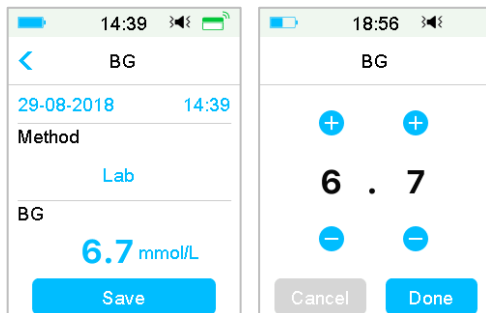

5. Atunci când ați terminat, apăsați **Salvare** pentru a confirma intrarea. Sau apăsați **<** pentru a anula.

3.9.2 Injectarea insulinei

1. Alegeți **Injectare** din fereastra **Evenimente**.
2. Alegeți data și ora pentru injectarea insulinei.
3. Atingeți opțiunea **Tip**, puteți alege tipul insulinei dintre „Cu acțiune rapidă”, „Cu acțiune medie”, „Cu acțiune de lungă durată”, „Pre-combinat” și „neselectat”.
4. Atingeți valoarea **Doză** pentru a alege cantitatea de insulină pe care o folosiți, Intervalul de intrare este 0,1 – 99 unități.

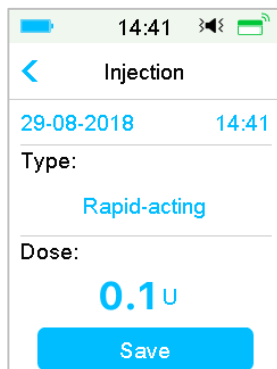

14:41

< Injection

29-08-2018 14:41

Type:

Rapid-acting

Dose:


0.1 U

Save

5. Atunci când ați terminat, apăsați **Salvare** pentru a confirma intrarea. Sau apăsați < pentru a anula.

3.9.3 Informații cu privire la carbohidrați

1. Alegeți **Carbohidrați** din fereastra **Evenimente**.
2. Alegeți data și ora pentru consumul de carbohidrați.
3. Atingeți valoarea **Carbohidrați** pentru a alege carbohidrații pe care îi mâncați sau îi beți. Intervalul de intrare este 0-300 grame.

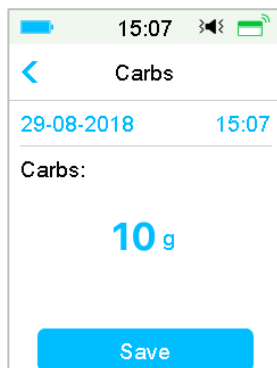

15:07

< Carbs

29-08-2018 15:07

Carbs:


10 g

Save

4. Atunci când ați terminat, apăsați **Salvare** pentru a confirma intrarea. Sau apăsați < pentru a anula.

3.9.4 Informații cu privire la exercițiul fizic

1. Alegeți **Exercițiu** din fereastra **Evenimente**.
2. Alegeți data și ora pentru exercițiul fizic.
3. Atingeți opțiunea **Intensitate** pentru a alege intensitatea exercițiului fizic. Puteți alege intensitatea între „Ușor”, „Mediu” și „Greu”.
4. Atingeți valoarea **Durată** pentru a alege durata exercițiului. Intervalul de intrare este 5 minute ~ 8 ore, creșterea intrării fiind de 5 minute.

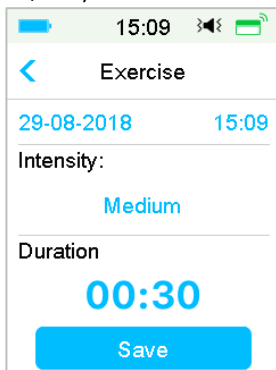

15:09

< Exercise

29-08-2018 15:09

Intensity:

Medium

Duration

00:30


Save

5. Atunci când ați terminat, apăsați **Salvare** pentru a confirma intrarea. Sau apăsați < pentru a anula.

3.9.5 Informații cu privire la Sănătate

1. Alegeți **Sănătate** din fereastra **Evenimente**.
2. Alegeți data și ora pentru informații cu privire la sănătate.
3. Atingeți opțiunea **Sănătate** pentru a alege condiția fizică. Puteți alege intensitatea dintre „boală”, „Stres”, „Simptome Mari”, „Simptome Mici”, „Menstruație” și „Alcool”.

Modul de utilizare a PDM

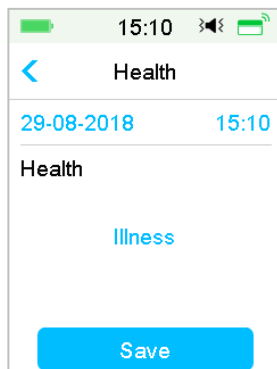

4. Atunci când ați terminat, apăsați **Salvare** pentru a confirma intrarea. Sau apăsați  pentru a anula.

3.9.6 Alte evenimente


Această secțiune vă arată cum să introduceți alte repere.

1. Alegeți **Altele** din fereastra **Evenimente**.
2. Alegeți data și ora pentru alte evenimente.
3. Atingeți textul **Notă** pentru a introduce informații cu privire la un alt eveniment.



De exemplu, atunci când doriți să introduceți „a”, atingeți **abc** și alegeți „a”. Apăsați pe **ABC** pentru a trece la majuscule.

4. Atingeți și alegeți literele pentru intrarea text.

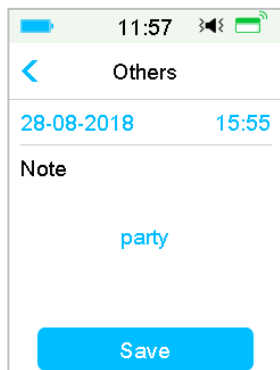

Notă: Nu utilizați mai mult de 22 caractere pentru a descrie un eveniment.


5. Atunci când ați terminat, apăsați **Salvare** pentru a confirma intrarea. Sau apăsați  pentru a anula.

3.10 Istoric

PDM dumneavoastră stochează istoricul de administrare a insulinei, istoricul Senzorului, istoricul PDM, istoricul Evenimentelor, istoricul BG și Istoricul rezumativ pentru a vă ajuta să gestionați diabetul.

Accesați fereastra **Istoric**.

Meniu Principal ➔ Istoric

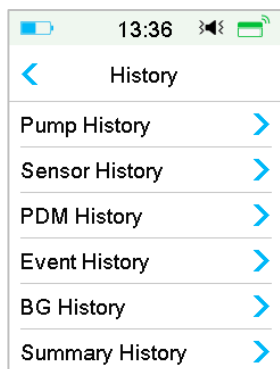

3.10.1 Istoricul Pompei

În meniul **Istoricul Pompei**, puteți vizualiza Istoricul Pompei. Consultați Secțiunea „Istoricul Pompei” din Capitolul „Caracteristicile Avansate ale Pompei” pentru mai multe informații.


3.10.2 Istoricul Senzorului

În meniul **Istoricul Senzorului**, puteți vizualiza Istoricul Senzorului. Consultați Secțiunea „Istoricul Senzorului” din Capitolul „Modul de utilizare a sistemului CGM” pentru mai multe informații.

3.10.3 Istoricul Alertelor PDM

Istoricul PDM stochează istoricul Alertelor PDM.

Meniu Principal → Istoric → Istoric PDM → Istoricul Alertelor PDM

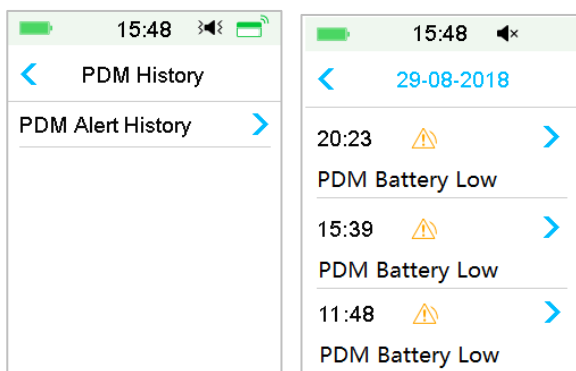

Atingeți data pentru a schimba înregistrările diferitelor date. Atingeți fiecare Alertă pentru a vizualiza informațiile detaliate ale alertei. Atingeți < pentru a vă întoarce la meniul anterior.

Consultați secțiunea „Pictogramele Alertelor” pentru mai multe informații cu privire la modul în care puteți soluționa alarmele și alertele și semnificația diferitelor pictograme ale alarmelor/alertelor.

3.10.4 Istoricul Evenimentelor

Accesați fereastra **Istoricul Evenimentelor**.

Meniu Principal → Istoric → Istoricul Evenimentelor

15:50	
Event History	
Type	All
29-08-2018	
Health	15:50
Injection	15:49
Carbs	15:49
BG	15:49

Atingeți opțiunea „Tip” pentru a alege tipul evenimentului pentru a vizualiza, prin urmare, înregistrările. Atingeți data sau  ,  pentru a trece de la o înregistrare a diferitelor date la alta. Alegeți o înregistrare a evenimentului pentru a vizualiza detaliile.

3.10.5 Istoricul BG

Accesați fereastra **Istoricul BG**.

Meniu Principal → Istoric → Istoricul BG

1:10	
BG History	
03-09-2018	
 7.3mmol/L	15:52
 5.6mmol/L	15:49
 8.1mmol/L	9:24

Istoricul BG conține BG din Calibrări  , Evenimente BG  și intrările BG din timpul administrării Bolusului prin intermediul Calculatoarelor Bolus  . Atingeți data sau  ,  pentru a trece de la o înregistrare a diferitelor date la alta.


3.10.6 Istoricul rezumativ

Istoricul rezumativ afișează un rezumat al istoricului trecut incluzând Istoricul Insulinei, Istoricul Bolusului, Istoricul BG, Istoricul Senzorului și Istoricul Suspendării Reduse.

Accesați fereastra **Istoric rezumativ**.

Meniu Principal → Istoric → Istoric rezumativ

În partea dreaptă sus a fiecărei ferestre de rezumat, alegeți 1 zi pentru a vizualiza datele istoricului pentru o singură zi sau alegeți mai multe zile (7, 14, 30 de zile) pentru a vizualiza un rezultat mediu al zilele selectate.

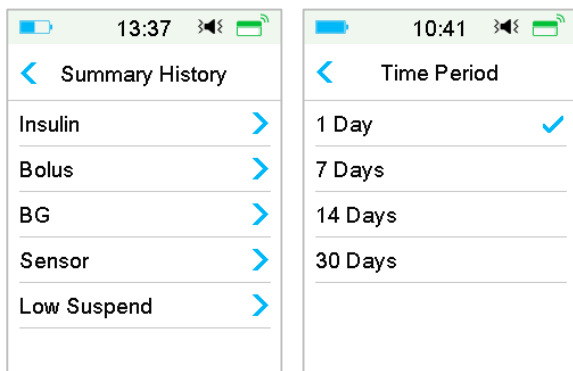

3.10.6.1 Istoric rezumativ: Istoric Insulinei

Consultați Secțiunea „Istoricul rezumativ al Pompei” din Capitolul „Caracteristicile Avansate ale Pompei” pentru mai multe informații.

3.10.6.2 Istoric rezumativ: Istoric Bolus

Consultați Secțiunea „Istoricul rezumativ al Pompei” din Capitolul „Caracteristicile Avansate ale Pompei” pentru mai multe informații.

3.10.6.3 Istoric rezumativ: Istoric BG

Această fereastră afișează istoricul rezumativ al rezultatelor BG.

Meniu Principal → Istoric → Istoric rezumativ → BG

13:41	13:41
< BG 1D	< BG 14D
< 24-11-2016 >	< 10-11-2016 23-11-2016 >
BG Test #3.0	BG Test #3.4
Average BG 7.6mmo/L	Average BG 9.6mmo/L
High BG 13.8mmol/L	High BG 13.8mmol/L
Low BG 3.5mmol/L	Low BG 5.5mmol/L

Testări BG: Numărul total de citiri BG introduse manual din zilele selectate.

BG mediu: Citirile medii BG din zilele selectate.

BG Mare: Cea mai mare citire BG din zilele selectate..

BG Mică: Cea mai mică citire BG din zilele selectate.

3.10.6.4 Istoric rezumativ: Istoricul Sensorului

Consultați Secțiunea „Istoricul Sensorului” din Capitolul „Modul de utilizare a sistemului CGM” pentru mai multe informații.

3.10.6.5 Istoric rezumativ: Istoricul Suspendării Reduse

Consultați Secțiunea „Istoricul Suspendării Reduse” din Capitolul „Modul de utilizare a (P)LGS” pentru mai multe informații.

3.11 Setări

13:48	13:51
< Settings	< Settings
CGM System >	Diagnostics >
Insulin Pump >	About Us >
General >	
Reminders >	
Username >	
Telephone >	

3.11.1 Sistemul CGM (Opțional)


Apăsați pe **Sistem CGM** din fereastra **Setări** pentru a deschide fereastra **Sistem CGM**. Puteți seta Senzorul dumneavoastră în fereastra Sistem CGM. Puteți activa și dezactiva Sistemul CGM, puteți seta SN Transmițătorului, puteți seta ora de repetare a alertei de calibrare, puteți seta alerta silențioasă, puteți activa și dezactiva alerta de expirare a Senzorului. *Consultați Capitolul „Modul de utilizare a sistemului CGM” pentru mai multe informații.*

3.11.2 Pompa de Insulină

Apăsați pe **Pompa de Insulină** din fereastra **Setări** pentru a deschide fereastra **Pompa de Insulină**. Puteți seta Pompa dumneavoastră de Insulină din fereastra **Pompă de Insulină**. *Consultați Capitolul „Modul de utilizare a Pompei cu Plasture” și Capitolul „Caracteristicile Avansate ale Pompei” pentru mai multe informații.*

3.11.3 Setări Generale


Meniul **Setări Generale** cuprinde: Limba, Ora/Data, Opțiuni Audio, Afișaj, Atenționare de Încredere, Setările Utilizatorului.

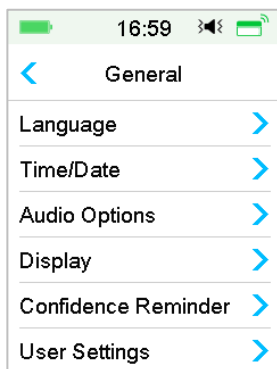

3.11.3.1 Limba

Puteți modifica limba PDM dumneavoastră.

Meniu Principal → Setări → Generale → Limba

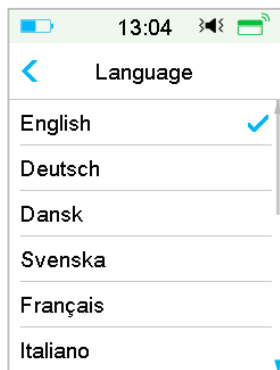

3.11.3.2 Ora/Data


Setarea orei și datei corecte în PDM dumneavoastră este esențială pentru administrarea exactă a insulinei bazale și pentru păstrarea unei evidențe corecte a administrării insulinei dumneavoastră și a altor evenimente. Puteți alege un format de ceas de 12 ore sau de 24 de ore. Ocazional, atunci când trebuie să schimbați setările datei și orei (de exemplu, pentru a ajusta trecerea la ora de vară sau după resetarea PDM), schimbați Plasturele cu Rezervor vechi și activați un nou platur.

Notă: Ca o caracteristică de siguranță, puteți doar să modificați data și ora atunci când nu există un Platur cu Rezervor activ.


1. Accesați fereastra de Setare a **Orei/Datei**.

Meniul Principal → Setări → General → Ora/Data

Dacă activați comutatorul, ora este setată în format de 24 de ore.

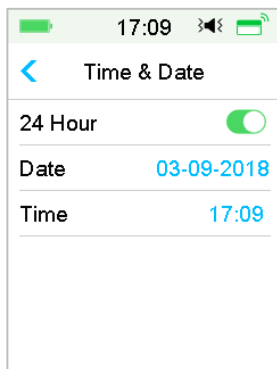

2. Tastatura pentru dată și tastatura pentru Oră

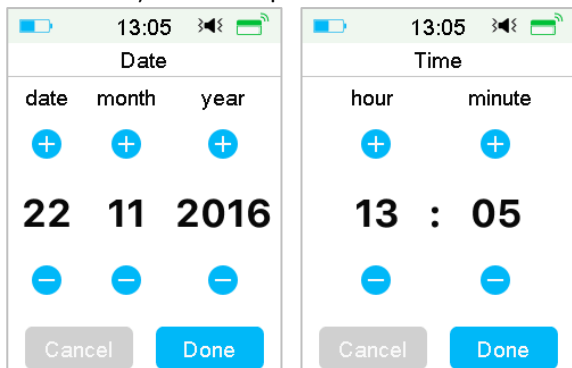

3.11.3.3 Opțiuni audio

Sunet/Vibrație

Puteți alege una din cele patru opțiuni audio pentru alertele și alarmele dumneavoastră: sunet, vibrație, sunet și vibrație sau ambele oprite. Setările din fabrică sunt sunet și vibrație. Alegerea dumneavoastră se aplică atât PDM dumneavoastră, cât și Pompei cu Plasture.

Dacă opțiunea **Sunet** este selectată, atât PDM dumneavoastră, cât și Pompa cu Plasture vor emite un semnal sonor atunci când apare o alertă.

Dacă opțiunea **Vibrație** este selectată, atât PDM dumneavoastră, cât și Pompa cu Plasture vor vibra atunci când apare o alertă.

Dacă opțiunea **Sunet oprit/Vibrație Oprită** este selectată, atât PDM dumneavoastră, cât și Pompa cu Plasture nu vor emite un semnal sonor și nu vor vibra.

Însă, există excepții:

Dacă o alarmă nu este anulată în 10 minute, PDM dumneavoastră și/sau Pompa cu Plasture va emite un semnal de sirenă până când alarma este anulată.


Atunci când apare „SUB 3,1mmol/L (SUB 56mg/dL)”, PDM dumneavoastră emite o vibrație triplă la fiecare trei minute. Dacă nu este anulată în 8 minute, PDM dumneavoastră va emite un semnal de sirenă până când alerta este anulată.

Consultați "Pictograme Audio" pentru semnificația diferitelor pictograme audio.

Consultați Capitolul „Sistem de Siguranță și Alarmer/Alerte” pentru mai multe informații.


Accesați fereastra **Opțiuni Audio**.

Meniu Principal ➔ Setări ➔ General ➔ Opțiuni Audio

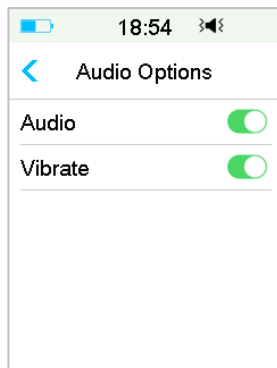

3.11.3.4 Afișaj

Puteți seta durata de iluminare a ecranului dumneavoastră între 30 sec, 1 min și 2 min. De asemenea, puteți seta luminozitatea ecranului.

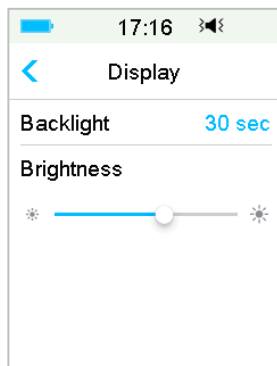

Glisați sau atingeți pentru a ajusta luminozitatea, puteți alege între 10 niveluri de luminozitate. Cu cât nivelul este mai mic, cu atât consumă mai puțină energie.


3.11.3.5 Atenționare de Încredere

Dacă această caracteristică este activată, PDM va emite un semnal sonor și/sau o vibrație ca răspuns la instrucțiunile dumneavoastră, inclusiv:

- Începutul și sfârșitul unui bolus
- Începutul și sfârșitul unei rate bazale temporare
- Modificarea modelului bazal
- Finalizarea editării ratei bazale
- Setarea de suspendare a alarmei are efect
- Setarea de administrare maximă are efect
- Senzor conectat
- Administrarea insulinei a fost reluată
- Setarea alertei Glucozei
- Setarea alertei/alarmei Pompei
- Apăsarea butonului PAGINĂ PRINCIPALĂ

3.11.3.6 Setările Utilizatorului

Puteți utiliza această caracteristică pentru a salva, restaura sau reseta toate setările PDM.

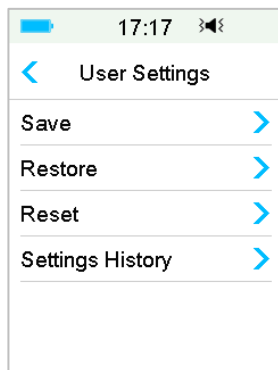


Notă: Dacă există un Plasture cu Rezervor Activ, **Resetarea Setărilor** și **Restaurarea Setărilor** vor fi dezactivate.

Salvare


Urmați acești pași pentru a salva setările actuale ale PDM dumneavoastră:

1. Apăsați **Salvare** în fereastra **Setările Utilizatorului**.
2. Dacă este prima dată când salvați setările PDM dumneavoastră, această fereastră apare:

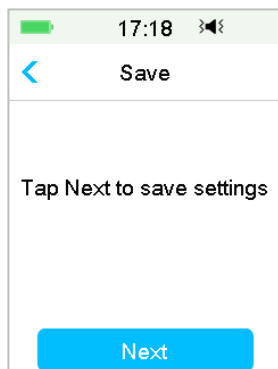


Dacă ați salvat setările PDM, această fereastră va apărea:

Modul de utilizare a PDM

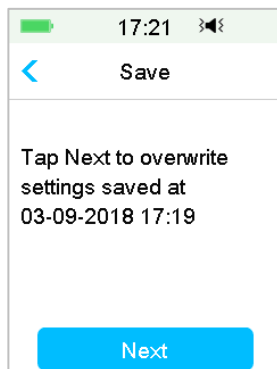

Citiți instrucțiunile de pe ecran; apoi apăsați **Continuă** pentru a salva setările dumneavoastră actuale.


3. Această fereastră indică faptul că setările dumneavoastră de utilizator au fost salvate.

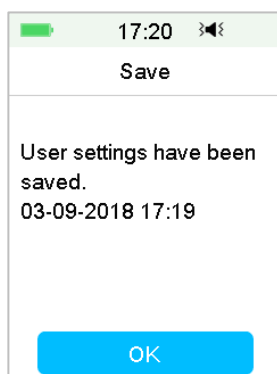


Restaurare

Urmați acești pași pentru a restaura cele mai recente setări ale PDM pe care le-ați salvat în PDM dumneavoastră.

1. Alegeți **Restaurare** în fereastra **Setările Utilizatorului**.
2. Citiți instrucțiunile de pe ecran, apoi apăsați **OK** pentru a restaura setările.

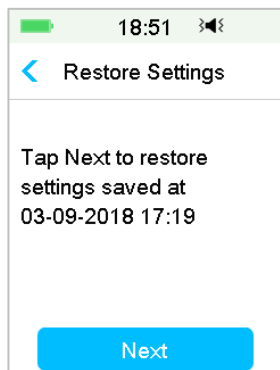

3. Această fereastră indică faptul că setările dumneavoastră de utilizator au fost restaurate. Apăsați **OK** pentru a ieși din meniu și verificați setările sistemului dumneavoastră.

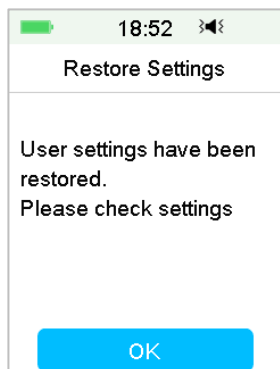


Resetare

Atenționare: NU resetați setările PDM dumneavoastră decât dacă vi se solicită acest lucru de furnizorul dumneavoastră de asistență medicală. Dacă resetați setările PDM dumneavoastră, va fi necesar să reprogramați setările PDM personal conform instrucțiunilor furnizorului dumneavoastră de asistență medicală.

Urmați următorii pași pentru a reseta setările PDM:

1. Alegeți **Resetare** din fereastra **Setările Utilizatorului**. Apoi, alegeți **Da**.

Modul de utilizare a PDM

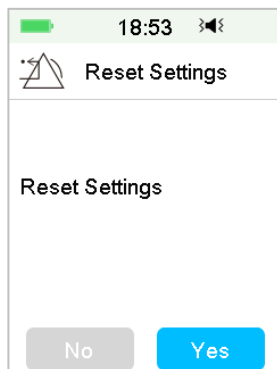


2. Apăsați **OK**. PDM va fi resetat la setările standard din fabrică și va fi repornit.



Istoricul Setărilor

În această fereastră, puteți revedea toate înregistrările recente de efectuare a setărilor utilizatorului și data și ora.


1. Alegeți **Istoricul Setărilor** din fereastra **Setările Utilizatorului**.
2. Glisați pentru a derula în sus/jos pentru a vedea întregul istoric al setărilor.

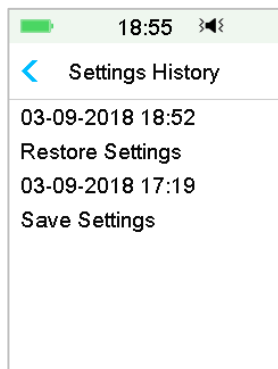

3.11.3.7 Blocare cu Parolă


Funcția de blocare cu parolă este o caracteristică de siguranță care previne funcționarea necorespunzătoare de către un utilizator căruia nu îi este destinat dispozitivul.

Meniul Principal → Setări → General → Blocare cu Parolă

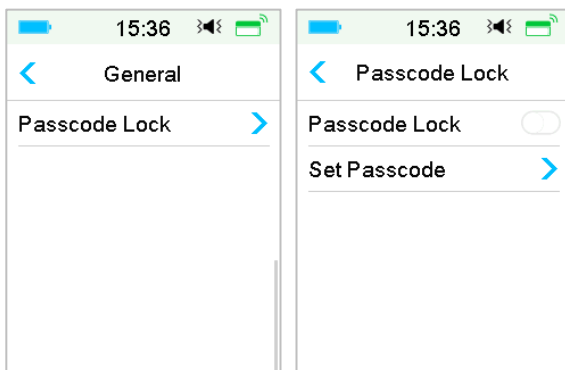


Apăsați pe **Setare Parolă**, introduceți vechea parolă și apoi setați o nouă parolă.

Modul de utilizare a PDM



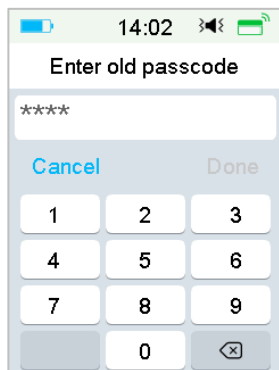


Introduceți o parolă din 4 cifre.


Notă: Parola standard este 0000.

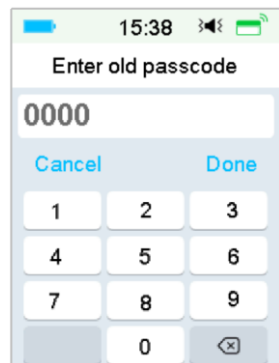

Introduceți noua parolă de două ori.

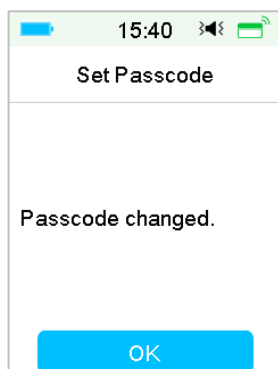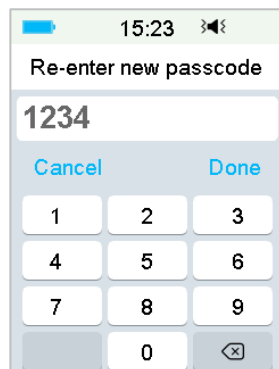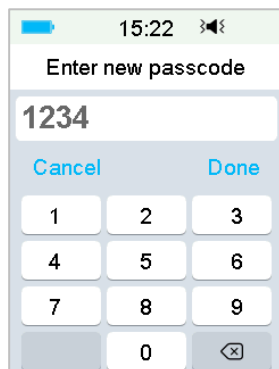


Activați Blocarea cu Parolă și introduceți Parola pentru a activa Blocarea, Blocarea cu Parolă fiind doar pentru o singură folosire, trebuie să introduceți parola de fiecare dată când activați funcția.

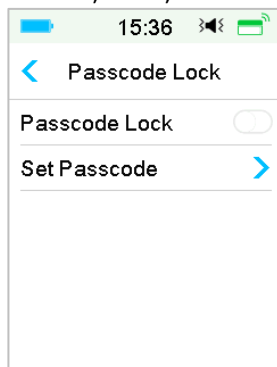

Atunci când caracteristica Blocare cu Parolă este activă, doar Fereastra de Blocare este afișată. Trebuie să introduceți parola corectă după ce glisați pentru a debloca PDM. Odată ce ați deblocat PDM, Blocarea cu Parolă este dezactivată automat.

3.11.4 Atenționări

Apăsați pe **Atenționări** în **Setări** pentru a accesa fereastra **Atenționări**.

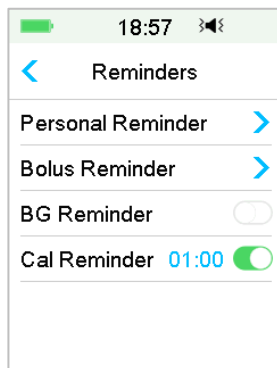


3.11.4.1 Atenționare Personală

Setarea din fabrică pentru această caracteristică este dezactivată. Atenționările personale pot fi utile pentru a vă aminti când să vă verificați nivelul dumneavoastră de glucoză din sânge, să mâncați, bolus etc.


Modul de utilizare a PDM

Puteți adăuga, șterge sau să revizuiți Atenționările atunci când opțiunea Atenționare Personală este activată. Accesați fereastra **Atenționare Personală**.

Meniul Principal → Setări → Atenționări → Atenționare Personală

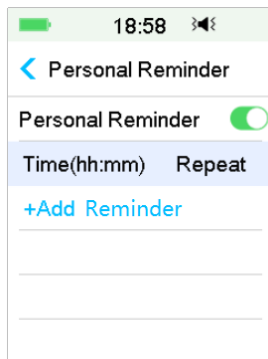


Apăsați pe **+ Adăugare Atenționare** pentru a adăuga o atenționare, alegeți ora și apăsați pe **Efectuat**.

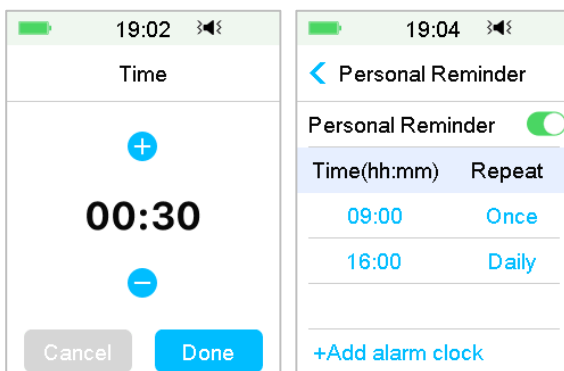

Notă:

- 1) Puteți seta până la 4 Atenționări.
- 2) Atenționările vor fi salvate automat.

Glisați de la dreapta la stânga pe o atenționare, apăsați pe **Ștergere** pentru a șterge acest segment.

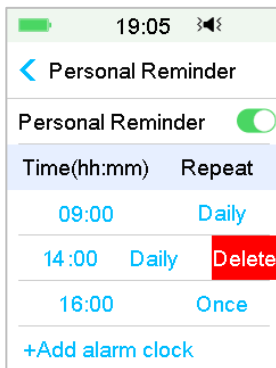

3.11.4.2 Atenționare Bolus

Consultați Secțiunea „Atenționare” în Capitolul „Caracteristicile Avansate ale Pompei” pentru mai multe informații.

3.11.4.3 Atenționare BG

Consultați Secțiunea „Atenționare” în Capitolul „Caracteristicile Avansate ale Pompei” pentru mai multe informații.

3.11.4.4 Atenționare Cal

Consultați Secțiunea „Atenționare Calibrare” în Capitolul „Modul de utilizare a sistemului CGM” pentru mai multe informații.

3.11.5 Nume de utilizator

1. Accesați fereastra **Nume de utilizator**.

Meniu Principal → Setări → Nume de utilizator

2. Atingeți pe ----- pentru a introduce numele dumneavoastră de utilizator.


Modul de utilizare a PDM



- (1) Folosiți tastatura pentru a introduce numele de utilizator. De exemplu, atunci când doriți să introduceți „a”, apăsați butonul **abc**, și va apărea „a”, „b”, „c” în partea de sus a tastaturii, apoi selectați „a”.
- (2) Atunci când ați terminat, apăsați **Efectuat**.
- (3) Atingeți numele cu albastru pentru a edita Numele de utilizator din nou.

Notă: Puteți introduceți până la 18 litere cu spații incluse. Numele dumneavoastră de utilizator va fi afișat în Fereastra de Blocare.

PDM afișează numele de utilizator în Fereastra de Blocare pentru a vă ajuta să vă identificați propriul PDM. Puteți confirma întotdeauna că numele de utilizator este corect înainte de folosirea PDM.

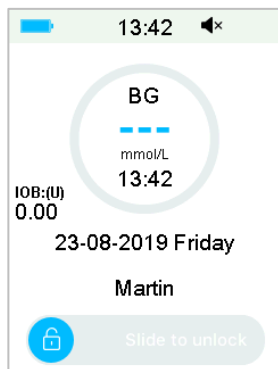


3.11.6 Telefon

1. Accesați fereastra **Telefon**.

Meniul Principal → Setări → Telefon

Modul de utilizare a PDM

2. Atingeți ----- pentru a introduce numărul dumneavoastră de telefon sau numărul de apel de urgență.

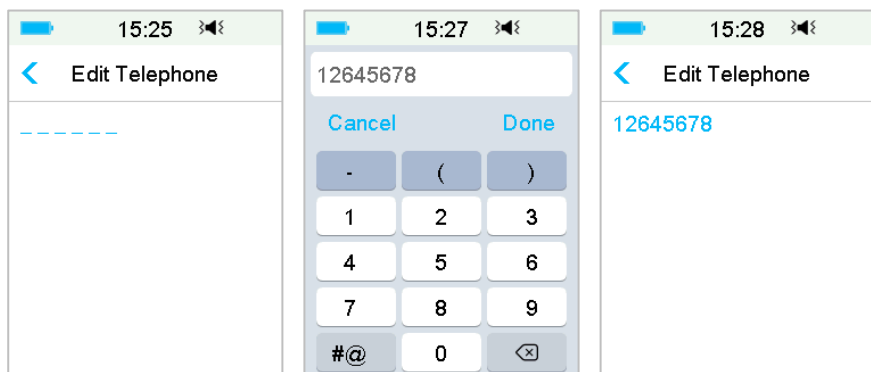


- (1) Utilizați tastatura pentru a introduce numărul de telefon.
- (2) Atunci când ați terminat, apăsați **Efectuat**.
- (3) Atingeți numărul cu albastru pentru a edita numărul de telefon din nou.

Notă: Puteți introduceți până la 18 cifre cu spații incluse.

PDM afișează **Numărul de Telefon** în Fereastra de Blocare care funcționează în două moduri opționale:

1. pentru a vă ajuta să găsiți PDM dacă este pierdut.
2. pentru a afișa numărul dumneavoastră de urgență (membrii familiei, doctor, centrul de asistență medicală).

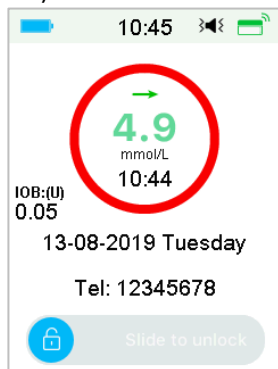


3.11.7 Diagnosticare

Funcția Diagnosticare vă ajută să verificați dacă PDM emite semnale sonore și vibrează în mod corespunzător.


1. Accesați fereastra **Diagnosticare**.

Meniu Principal → Setări → Diagnosticare


2. Alegeți **Diagnosticare**, apoi apăsați **Continuă**.

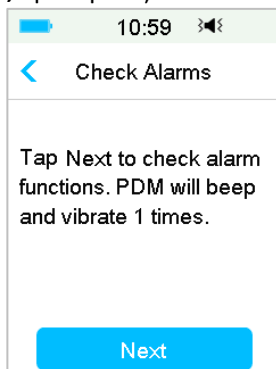

3. PDM va emite un semnal sonor de trei ori și va vibra o dată în timp ce ecranul indică faptul că sunt verificate alarmele.

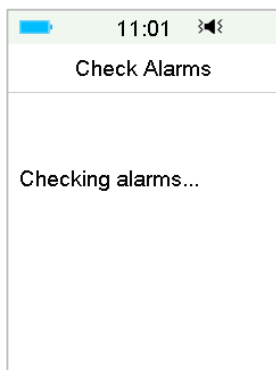


4. Atunci când verificarea este completă, apăsați pe **OK** pentru a vă întoarce la meniul anterior.

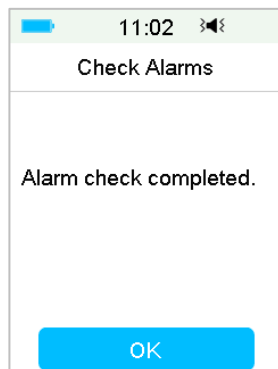

Atenție: Dacă PDM nu emite semnal sonor sau vibrație, sunați la serviciul de asistență cu clienții. Continuarea utilizării PDM, vă poate pune sănătatea în pericol.

Notă: PDM dumneavoastră folosește energia bateriei pentru a emite un semnal sonor și pentru a vibra. Verificarea des a alarmelor poate reduce durata de viață a bateriei și Alarma „ÎNCĂRCAȚI PDM ACUM” poate apărea mai rapid decât vă așteptați.

3.11.8 Despre noi

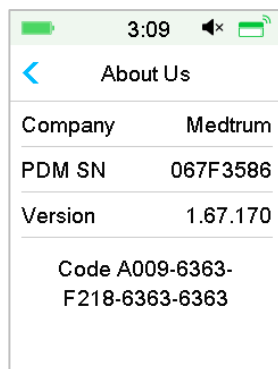

Aici puteți vedea numele Societății, SN-ul PDM, versiunea programului PDM și codul.

3.12 Soluționarea problemelor

Această secțiune cuprinde proceduri și informații care vă ajută să înțelegeți și să soluționați probleme care pot apărea cu Sistemul A7+ TouchCare. Aceasta

Modul de utilizare a PDM

vă va oferi o simplă analiză și anumite răspunsuri detaliate, vă rugăm să le consultați în secțiunile aferente.

Ce protocol folosește Sistemul A7+ TouchCare pentru a comunica?

Protocolul prin Bluetooth.

Bluetooth Low Energy (BLE) mai exact.

Pot să fac saună cu un PDM?

Nu.

Intervalul de temperatură de funcționare pentru PDM este +5°C ~ +40°C.

Când trebuie să încarc PDM meu?

Vă recomandăm să vă încărcați PDM atunci când apare alerta PDM BATERIE DESCĂRCATĂ.

PDM NU PORNEȘTE DUPĂ CE APĂS BUTONUL DE PORNIRE:

1. Bateria PDM este prea descărcată. Încărcați PDM.
2. PDM este în afara intervalului său de temperatură de funcționare. Mutați PDM la o temperatură cuprinsă între +5°C ~ +40°C și apoi încercați să îl porniți.



4.1 Schimbarea plasturelui cu rezervor

Plasturele cu Rezervor necesită înlocuit și nu trebuie refolosit. Plasturele cu Rezervor trebuie să fie înlocuit aproximativ la fiecare 2-3 zile sau conform indicațiilor furnizorului dumneavoastră de asistență medicală.

Atenție: NU încercați să aplicați sau să folosiți o Pompă cu Plasture înainte să fi fost instruit de furnizorul dumneavoastră de asistență medicală. Folosirea unui dispozitiv cu o instruire inadecvată sau cu setări necorespunzătoare vă poate pune în pericol sănătatea și siguranța. Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală vă va ajuta să setați și să aplicați prima dumneavoastră Pompă cu Plasture dacă utilizați pentru prima dată o Pompă cu Plasture A7+.

Atenție: Folosiți o tehnică aseptică atunci când pregătiți, umpleți, atașați sau înlăturați un Plasture cu Rezervor. Acest lucru înseamnă:

1. să vă spălați mâinile cu apă și săpun
2. să curățați fiola cu insulină cu un șervețel cu alcool
3. să curățați locul de injectare cu un șervețel cu alcool
4. că păstrați obiectele sterile departe de germeni posibili

Atenție: Verificați întotdeauna BG cu o oră sau două înainte de schimbarea Plasturelui cu Rezervor. Amintiți-vă să verificați nivelul de insulină din Plasturele dumneavoastră cu Rezervor cu două ore înainte de a merge la somn. Schimbați Plasturele cu Rezervor dacă nu are suficientă insulină pentru a acoperi nevoile dumneavoastră de insulină din timpul nopții.

4.1.1 Înainte de schimbarea Plasturelui cu Rezervor

Aveți nevoie de următoarele obiecte înainte de a începe:

- O fiolă cu insulină cu acțiune rapidă U-100
- Un Plasture cu Rezervor nedeschis
- O Bază a Pompei
- Șervețele cu alcool
- O seringă sterilă de unică folosință de 2mL cu ac cu capac

Atenție: Folosind un alt tip de insulină decât insulina cu acțiune rapidă U-100 sau folosind o insulină expirată sau inactivă, poate duce la hiperglicemia sau cetoacidoză diabetică (DKA). NU folosiți o insulină tulbure întrucât poate fi inactivă.

Notă: Seringa furnizată de Medtrum este compatibilă cu portul de umplere al

Plasturelui cu Rezervor. Sunt de asemenea permise alte seringi și ace care îndeplinesc următoarele specificații.

Specificațiile seringii


- Volumul rezervorului: 2,0 mL
- Dimensiunea acului: 26G
- Lungimea acului: 8 mm (0.31")
- Asigurați-vă că seringă cu ac a fost sterilizată în mod corespunzător.

Atenție: Un Plasture cu Rezervor care nu a fost dezactivat corespunzător poate continua să administreze insulină așa cum a fost programat punându-vă în pericol de supra-administrare sau posibilă hipoglicemie. NU aplicați un nou Plasture cu Rezervor înainte să fi dezactivat și înlăturat vechiul Plasture cu Rezervor.


4.1.1.1 Dezactivarea Plasturelui cu Rezervor actual

Atenție: Trebuie să dezactivați Plasturele cu Rezervor actual înainte să îl înlăturați de pe corpul dumneavoastră și să deconectați Baza Pompei de la Plasturele cu Rezervor.

Meniul Principal → Plasture → Dezactivare Plasture

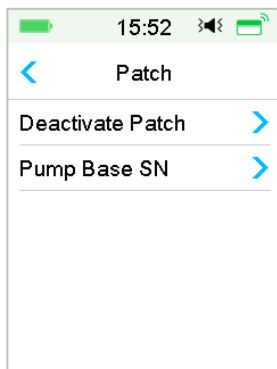

1. Glisați pentru a Dezactiva Plasturele cu Rezervor actual. Apăsați pe  sau Butonul Principal pentru a anula această operațiune.


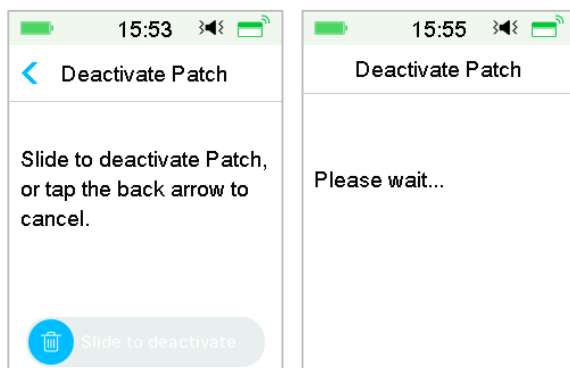


2. Câteva secunde mai târziu, veți vedea un mesaj care indică faptul că Plasturele a fost dezactivat.



4.1.1.2 Înlăturarea Plasturei cu Rezervor actual


1. După dezactivarea Plasturei cu Rezervor, apăsați butonul de eliberare a acului de pe partea laterală a Plasturei cu Rezervor, apoi glisați în direcția săgeții pentru a retrage actul. Ridicați ușor marginile benzii adezive de pe pielea dumneavoastră și înlăturați întregul Plasture cu Rezervor.

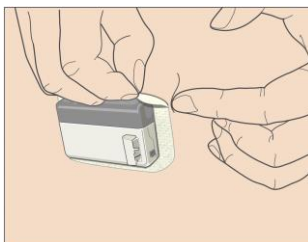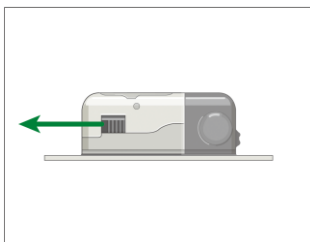

Notă: Pentru a evita o posibilă iritație a pielii, înlăturați încet și cu grijă Plasturele cu Rezervor. Dacă rămâne adeziv pe piele, înlăturați-l cu apă și săpun.

Atenție: Verificați locul de injectare a insulinei pentru semne de infecție.

2. Apăsați și țineți apăsată cele două butoane de eliberare de la ambele capete ale Bazei Pompei și înlăturați Baza Pompei de pe vechiul Plasture cu Rezervor. Aruncați vechiul Plasture cu Rezervor conform regulamentelor locale de eliminare a deșeurilor.

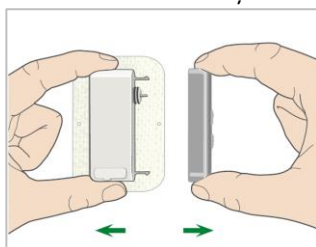

Atenție: NU aruncați Baza Pompei dumneavoastră. Aceasta este reutilizabilă.

4.1.1.3 Introduceți SN-ul Bazei Pompei

Înainte de activarea unui nou plasture, asigurați-vă că numărul de serie al Bazei Pompei a fost introdus în PDM dumneavoastră.

Meniul Principal ➔ Plasture ➔ SN-ul Bazei Pompei

Notă: Nu uitați să actualizați SN-ul în cazul în care treceți la o nouă Bază a Pompei.

Notă: Puteți să schimbați SN Bazei Pompei doar atunci când nu există un Plasture cu Rezervor activ.

Puteți găsi SN Bazei Pompei pe cutia produsului sau pe Baza Pompei dumneavoastră.

G



P/N 882022LAMMM0100

A7+ TouchCare System

Insulin Management System - mmol/L

REF SY-018 LOT XXXXXXXXXX

Pump Base (XXXXXX 1x)

REF JN-022 SN XXXXXXXXXX

Personal Diabetes Manager (1x)

REF FM-018 SN XXXXXXXXXX



Medtrum Technologies Inc.

7F, Building 8, No. 200, Niudun Road, Shanghai 201203, China

+86-21-50274781 www.medtrum.com

Medtrum B.V.

Nijverheidsweg 17, 5683 CJ Best, The Netherlands

Tel: +31 (0) 499745037

EC REP



0197



(01)06971123680629
(21)XXXXXXXXXX
(10)XXXXXXXXXX

TouchCare


SN XXXXXXXXXX


REF JN-022

IPX8




1. Puteți fie să introduceți SN manual sau să căutați SN dacă este prima dată când introduceți SN-ul.

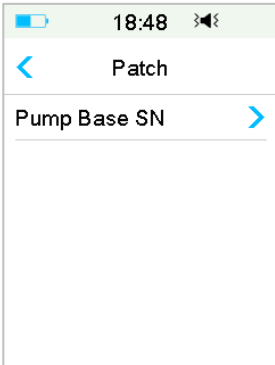

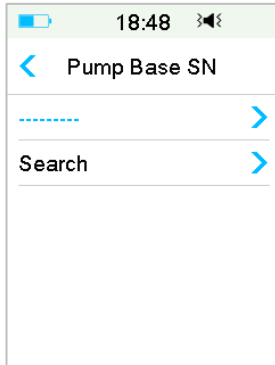


2. Puteți să introduceți SN-ul doar manual dacă doriți să actualizați SN-ul.

Introducerea SN-ului manual

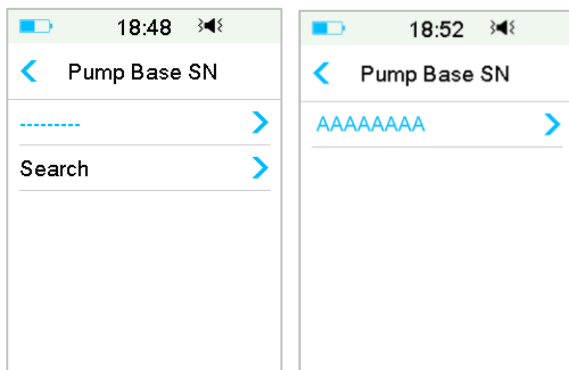

Apăsați ----- sau SN-ul existent al Bazei Pompei și veți vedea următoarea fereastră. Apoi introduceți SN-ul în PDM dumneavoastră și apăsați **Efectuat**.

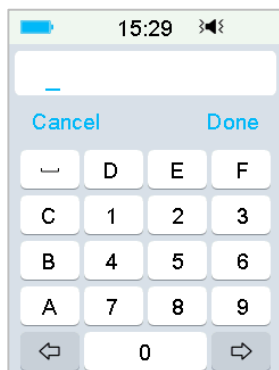


Notă: Dacă este un SN din 8 cifre, apăsați spațiu „ ” la sfârșit.


Căutarea SN-ului

Puteți selecta **Căutare** pentru a căuta SN-ul dacă este prima dată când introduceți SN-ul.

Asigurați-vă că Baza Pompei dumneavoastră este conectată la un nou Plasture cu Rezervor și mutați PDM mai aproape de Pompa dumneavoastră înainte de a căuta SN-ul. *Consultați Secțiunea „Conectarea Bazei Pompei la un nou Plasture cu Rezervor” pentru mai multe informații.*

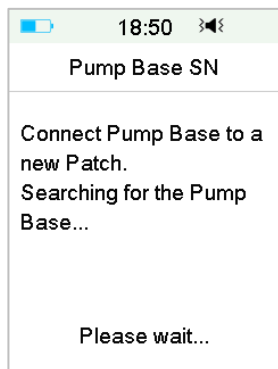


Dacă PDM dumneavoastră găsește o Pompă, SN-ul Bazei Pompei apare pe ecran. Verificați dacă este același cu SN-ul imprimat pe Baza Pompei dumneavoastră. Dacă este corect, apăsați **OK**.

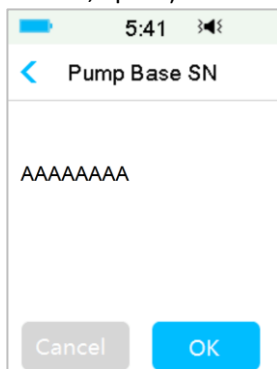

Dacă PDM dumneavoastră găsește mai multe Pompe, SN-urile nu vor fi afișate pentru a vă împiedica să selectați SN-ul greșit.

Apăsați **OK** pentru a vă întoarce la Meniul Plasture și apoi selectați „-----” pentru a introduce SN-ul manual.

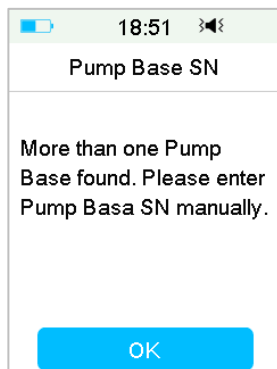


Dacă PDM dumneavoastră nu găsește o Pompă, asigurați-vă că Baza Pompei dumneavoastră este conectată la un nou Plasture cu Rezervor, mutați PDM mai aproape de Pompa dumneavoastră și căutați din nou sau introduceți SN-ul manual.

4.1.2 Activarea unui nou Plasture cu Rezervor


Atunci când nu există niciun Plasture vechi activat sau când Plasturele vechi a fost înlăturat, puteți accesa Meniul Plasture pentru a activa un nou plasture. Asigurați-vă că numărul de serie al Bazei Pompei a fost introdus corect în PDM dumneavoastră.

Meniul Principal → Plasture → Plasture Nou

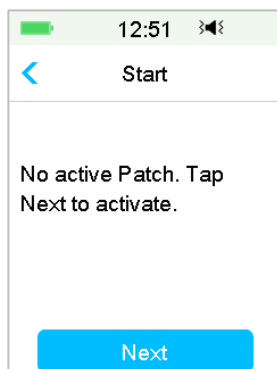


4.1.3 Conectarea Bazei Pompei la un nou Plasture cu Rezervor

1. Apăsați **Următorul** în PDM dumneavoastră și veți vedea următorul mesaj pe ecran.

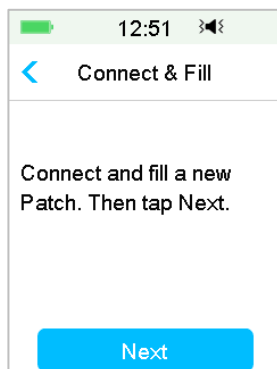

Atenție: NU utilizați un Plasture cu Rezervor dacă ambalajul steril al acestuia a fost deteriorat sau deja deschis sau dacă Plasturele cu Rezervor a expirat sau dacă Plasturele cu Rezervor este deteriorat în vreun mod.

2. Puneți degetul mare și degetul arătător pe Baza Pompei. Țineți noul Plasture cu Rezervor cu cealaltă mână. Introduceți cârligele și conectorul de pe Plasturele cu Rezervor până la capătul fantelor Bazei Pompei.

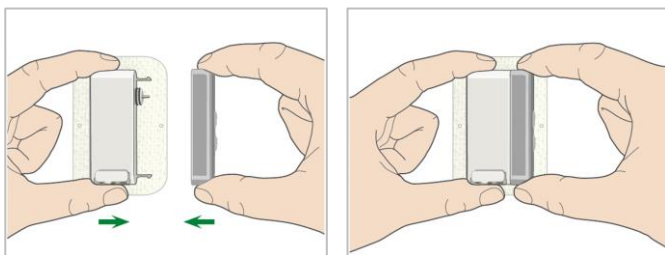

3. Pompa efectuează o serie de verificări de siguranță imediat ce sunt conectate cele două piese. Verificările de siguranță durează aproximativ douăzeci de secunde. Indicatorul luminos se aprinde intermitent în ordine albastru, verde, galben și roșu, iar Pompa emite semnale sonore de patru ori.



Atenție: Dacă Pompa nu emite un semnal sonor sau indicatorul luminos nu se aprinde intermitent, contactați serviciul de relații cu clienții. Aceasta vă poate pune în pericol sănătatea în cazul în care continuați să utilizați Pompa.

Atenție: Dacă apare o singură defecțiune, indicatorul luminos se aprinde intermitent de culoare roșie, iar Pompa nu poate trece la pasul următorul, contactați serviciul de relații cu clienții.


4.1.4 Umplerea noului Plasture cu Rezervor

Atenție: Dacă insulina dumneavoastră este depozitată în frigider, așteptați până când insulina ajunge la temperatura camerei înainte să umpleți rezervorul. Folosirea insulinei reci poate să producă bule de aer în rezervor. În timpul umplerii rezervorului, asigurați-vă că înlăturați bulele de aer.

Atenție: Atunci când umpleți Plasturele cu Rezervor, asigurați-vă că acesta este la cel puțin 30 cm (12 inch) de toate obiectele magnetice, precum magneți, telefoane mobile și alți Plasturi cu Rezervor. Pompa cu Plasture va detecta volumul de insulină în rezervor odată ce este plină, iar dacă Pompa cu Plasture este într-un câmp magnetic, volumul detectat poate fi imprecis.

Urmați pașii de mai jos pentru a umple un nou Plasture:

1. Curățați vârful fiolei de insulină cu un șervețel cu alcool.
2. Înlăturați capacul de protecție de pe ac. Păstrați capacul.
3. Cu ajutorul furnizorului dumneavoastră de asistență medicală, decideți care este cantitatea de insulină (70 U-200 U) pe care trebuie să o introduceți în Plasturele cu Rezervor.
4. Trageți aer în seringă până la cantitatea de insulină de care aveți nevoie.
5. Introduceți acul în fiola de insulină și atrageți pistonul pentru a presuriza fiola.

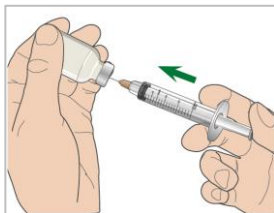

6. În timp de încă țineți pistonul, întoarceți fiola invers astfel încât aceasta să fie în partea de sus și apoi trageți ușor pistonul pentru a umple seringă cu numărul dorit de unități. Atingeți ușor partea laterală a seringii pentru a face bulele de aer să se ridice în partea de sus a seringii. Împingeți ușor pistonul doar atât cât să înlăturați bulele de aer din seringă.



Atenție: Evitați folosirea insulinei din mai multe fiole întrucât acest lucru poate introduce aer în seringă.

7. Cu fiola în jos, țineți seringă. Trageți drept pentru a înlătura acul seringii din fiolă, apoi introduceți-l perpendicular în portul de insulină de pe partea laterală a Plasturelui cu Rezervor.


Atenție: Asigurați-vă că introduceți seringă perpendicular și nu oblic în portul de umplere a insulinei.

8. Țineți seringă pe verticală în Pompa cu Plasture, iar acul în portul de umplere, trageți pistonul până când acesta este complet retras. Acesta va înlătura tot aerul rămas în rezervor. Bulele se vor ridica spre piston.




9. Asigurați-vă că anul este încă în portul de umplere și eliberați pistonul. Presiunea va trage pistonul până în poziția neutră a acestuia, dar NU va împinge aer deloc în rezervor.
10. Retrageți acul din portul de umplere. Întoarceți seringă cu fața în sus și trageți de piston. Scuturați seringă pentru a vă asigura că toate bulele de

aer se ridică în partea de sus. Apăsați cu grijă pistonul pentru a înlătura bulele de aer până când insulina umple centrul acului și veți vedea o picătură de insulină în vârful acului.

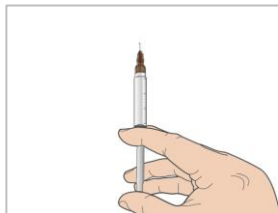

11. Reintroduceți acul în portul de umplere și umpleți cu grijă rezervorul cu insulină. Este normal să simțiți o anumită contrapresiune pe măsură ce apăsați încet pe piston.

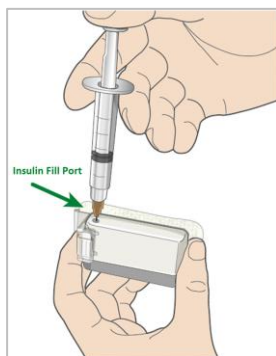

Atenție: NU utilizați un Plasture cu Rezervor dacă auziți un trosnit sau dacă simțiți o rezistență puternică anormală atunci când apăsați pistonul. Aceste condiții pot avea ca rezultat lipsa administrării insulinei suficiente.

Atenție: NU injectați aer în portul de umplere. Acest lucru poate cauza administrarea insuficientă sau întreruptă a insulinei.

Atenție: NU umpleți Plasturele cu Rezervor atunci când îl purtați. Acest lucru poate cauza prejudicii serioase pentru viața și sănătatea dumneavoastră.

12. Țineți pistonul în poziție în timp de înlăturați acul din rezervor. Puneți capacul de protecție înapoi pe ac. Aruncați în siguranță seringă într-un recipient de deșeurii în conformitate cu regulamentele locale de eliminare a deșeurilor.

Atenție: Folosiți Plasturele dumneavoastră cu Rezervor imediat după ce l-ați umplut. NU depozitați Plasturele cu Rezervor plin cu insulină. Plasturele cu Rezervor trebuie să fie folosit imediat după ce l-ați umplut cu insulină.

13. După ce umpleți Plasturele cu Rezervor, apăsați OK pentru a continua.

Notă: Contactați serviciul de relații cu clienții dacă ați umplut Plasturele cu Rezervor cu mai mult de 70 de unități, dar pictograma volumului rezervorului este încă goală.

Notă: După umplerea Plasturei cu Rezervor cu insulină, trebuie să schimbați Plasturele cu Rezervor în termen de 1 oră. Ca Atenționare a faptului că Plasturele cu Rezervor a fost umplut și trebuie să fie folosit, PDM va emite un semnal sonor și/sau vibrație la fiecare 10 minute. Dacă nu aplicați Plasturele cu Rezervor pe corpul dumneavoastră într-o oră, trebuie să îl dezactivați și să îl aruncați.

Notă: Odată ce un Plasture cu Rezervor (conectat la o Bază a Pompei) este activat și comunică cu un PDM; puteți doar să primiți comenzi de la acel PDM, nu de la altul.

4.1.5 Amorsarea Pompei


Odată ce Plasturele cu Rezervor este umplut cu cantitatea adecvată de insulină (70 U-200 U), apăsați pe **Continuă** în PDM dumneavoastră și veți vedea următorul mesaj pe ecran.




Țineți Pompa cu Plasture pe o suprafață plană curată cu o mână, iar cu cealaltă mână, apăsați partea de sus pătrată a capacului butonului în toate direcțiile

până când auziți un click, indicând faptul că butonul acului este blocat în poziție de două cârlige de pe capacul butonului.

Atenție: Nu inițiați amorsarea înainte ca partea de sus pătrată a capacului butonului să fie apăsat complet.

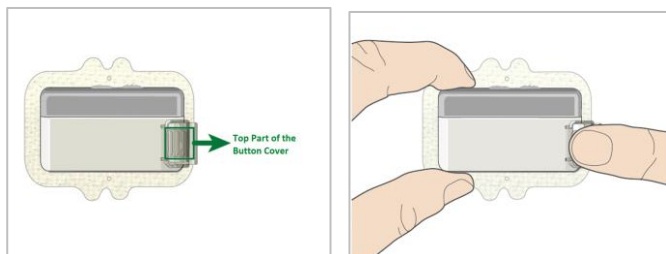

Apoi, apăsați **Continuă** în PDM dumneavoastră pentru a amorsa Pompa.

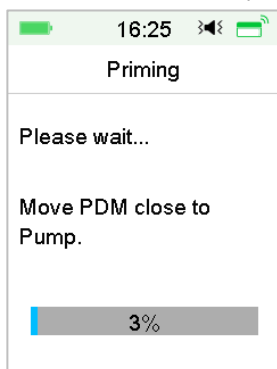

Atenție: NU înlăturați capacul butonul înainte ca amorsarea să fie finalizată. Odată finalizată, va apărea următoarea fereastră „Atașare și Inserție”, iar Pompa vibrează de trei ori.



Atenție: Dacă Pompa nu vibrează, contactați serviciul de relații cu clienții. Continuarea utilizării Pompei vă poate pune în pericol sănătatea.

4.1.6 Alegerea și Pregătirea Locului de Injectare

Locul de pe corpul dumneavoastră în care atașați Pompa este important pentru succesul tratamentului dumneavoastră. Discutați despre cele mai bune locuri de injectare cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală.


Atunci când alegeți locația Pompei, luați în considerare următoarele:

- Să puteți ajunge în mod confortabil la Pompă.
- Să aplicați Pompa pe o zonă plată a pielii cu grăsime subcutanată adecvată.
- Zona trebuie să rămână plată în timpul activităților zilnice normale fără a se îndoi sau a se plia.

Atunci când alegeți locația Pompei, evitați următoarele:

- Zonele care sunt strânse de îmbrăcăminte, precum linia curelei sau talia.
- Zone curbate sau rigide din cauza mușchilor sau oaselor.
- Zone care implică mișcare riguroasă în timpul exercițiilor.
- Zone ale pielii cu cicatrici, tatuaje sau iritații.
- 5,0 cm (2 inch) în jurul ombilicului.
- Zone cu păr în exces.

Zonele corpului (cu gri) adecvate pentru a fi locuri de injectare:

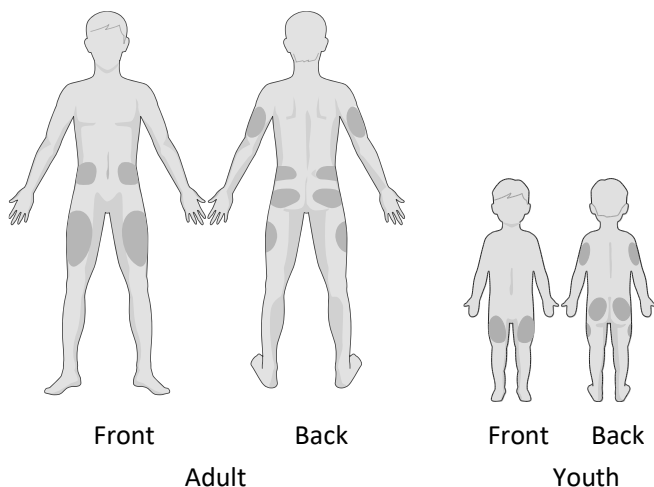

Dacă alegeți un loc de inserție pe abdomen sau fese, aplicați Senzorul în poziție orizontală.

Dacă alegeți un loc de inserție pe membrul dumneavoastră superior, aplicați Senzorul în poziție verticală.


Atenție: Schimbați locul de fiecare dată când aplicați un nou Plasture cu Rezervor. Asigurați-vă că rotiți locurile de injectare astfel încât acestea să nu fie folosite excesiv. Un nou loc de injectare trebuie să fie la cel puțin 2,5 cm (1 inch) distanță de ultimul loc.

Practicați folosind o tehnică aseptică așa cum se descrie la începutul acestui capitol. Curățați zona cu un șervețel cu alcool acolo unde veți atașa Pompa. Așteptați ca zona să se usuce înainte de aplicarea Pompei.


Notă: Dacă aveți pielea sensibilă sau pielea dumneavoastră se irită, contactați furnizorul dumneavoastră de asistență medicală.

4.1.7 Atașarea Pompei cu Plasture

1. Înlăturați capacul butonului.

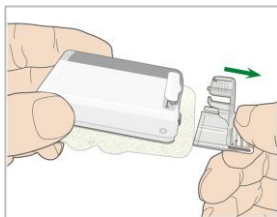

2. Dezlipiți folia adezivă din partea de jos a Plasturei cu Rezervor. Înlăturați folia și dezvăluiți adezivul.

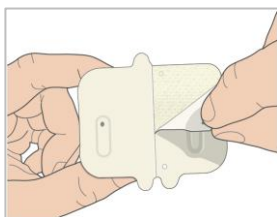

3. Evitați atingerea părții lipicioase a foliei adezive, apăsați pe Pompă pe piele în locul ales de injectare.



4. Țineți Pompa fixată timp de 5-10 secunde. Mișcați degetul dumneavoastră în jurul întregii margini a foliei adezive pentru a vă asigura că ați atașat-o în siguranță pe corpul dumneavoastră.




Notă: Adezivul Plasturelui cu Rezervorul ține Plasturele fixat în poziție timp de până la 3 zile. Anumite produse sunt disponibile pentru a îmbunătăți aderența dacă este necesar. Întrebați furnizorul dumneavoastră de asistență medicală despre aceste produse. Evitați aplicarea loțiunii de corp, cremele sau uleiurilor în apropierea locului de injectare întrucât acest lucru poate afecta aderența.


Notă: Adezivul este creat pentru o singură utilizare. Odată ce este înlăturat, un Plasture cu Rezervor nu poate fi reaplicat.

4.1.8 Inițiați Administrarea Insulinei

1. Apăsați butonul cu ac printr-o singură mișcare unică pentru a introduce complet acul sub piele dumneavoastră până când butonul rămâne blocat.

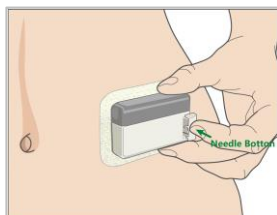


2. Apăsați **Continuă** după ce introduceți acul și pe ecran, va apărea următoarea fereastră.

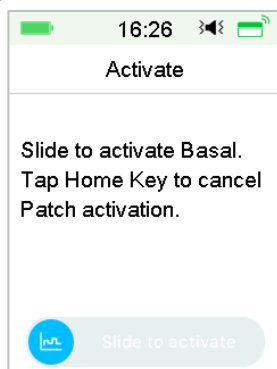


Atenție: Verificați locul de injectare și acul după ce introduceți pentru a vă asigurați că acul a fost introdus în mod corespunzător. Dacă acul nu este introdus în mod corespunzător, poate apărea hiperglicemia.

3. Glisați pentru a activa administrarea bazală dacă acul este introdus în mod corespunzător. Apoi apăsați Butonul principal dacă constatați vreo problemă cu acul, apoi PDM vă va instrui să aruncați Plasturele cu Rezervor.

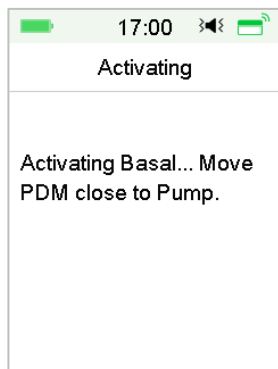

Atenție: Ar trebui să verificați zona din jurul Plasturelui cu Rezervor la intervale regulate de timp pentru o posibilă înroșire, iritație sau inflamație. Dacă descoperiți o infecție, înlăturați imediat Plasturele cu Rezervor și aplicați unul nou într-o altă zonă.

4. Acum Plasturele dumneavoastră cu Rezervor este activat.

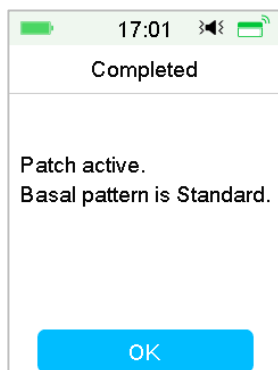

Atenție: NU deconectați Baza Pompei de la Plasturele cu Rezervor în timp ce Pompa cu Plasture este conectată la corpul dumneavoastră.

Atenție: Verificați în mod frecvent locul de injectare pentru a vedea dacă este amplasat corect, putând apărea scurgeri în cazul injectării inadecvate. De

asemenea, puteți verifica nivelul de glucoză din sânge pentru a vă asigura de injectarea normală.


4.2 Bolus

O doză bolus este insulina pe care o administrați pentru a acoperi mesele sau gustările sau pentru a corecta nivelul ridicat de glucoză din sânge. Consultați furnizorul dumneavoastră de asistență medicală cu privire la modul în care trebuie să setați doza dumneavoastră bolus.

Sistemul dumneavoastră A7+ TouchCare® vă oferă trei tipuri de bolus: Bolus Normal, Bolus Extins și Bolus Combinat. Această secțiune vă oferă informații pentru un Bolus Normal. *Consultați Capitolul „Caracteristicile Avansate ale Pompei” pentru mai multe informații cu privire la Bolusul Extins și Bolusul Combinat.*

Accesați fereastra **Bolus**.

Meniul Principal → Bolus

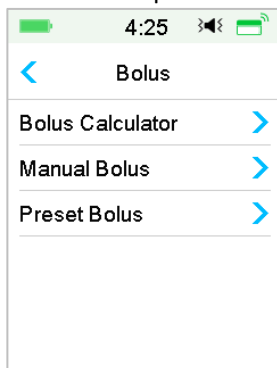

Notă: Atunci când Calculatorul Bolus este dezactivat din Setări, Calculatorul Bolus nu va fi apărut în meniul Bolus. *Consultați capitolul „Caracteristicile Avansate ale Pompei” pentru mai multe informații.*

4.2.1 Normal Bolus

1. Pentru a administra un Bolus Normal, accesați fereastra **Bolus Manual**.

Meniul Principal → Bolus → Bolus Manual

4:47

< Manual Bolus

Set Bolus

0.00U

Type

Normal Bolus

IOB: 0.00U

Next

2. Setați valoarea bolusului dumneavoastră.
3. Selectați tipul Bolusului Normal, tipul Bolusului însemnând Bolus Normal, Bolus Extins sau Bolus Combinat.

4:49

< Type

Normal Bolus ✓

Extended Bolus

Combo Bolus

4. Apăsați **Continuă** pentru a confirma dacă setarea bolusului este corectă.

19:42

< Manual Bolus

Set Bolus

1.00U

Type


Normal Bolus

IOB: 0.05U


Next

Notă: Puteți seta o doză a bolusului între 0 și Bolus Max. Atunci când un Bolus extins este deja în curs de administrare, puteți doar să alegeți un Bolus Normal.


Notă: Fereastra **Atenționare BG** va apărea dacă opțiunea Atenționare BG este activată. Consultați Secțiunea „Atenționare BG” din Capitolul „Caracteristicile Avansate ale Pompei” pentru mai multe informații.

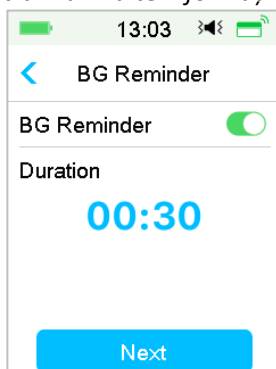


5. **Glisați pentru administrarea bolusului.** Pe măsură de Bolusul Normal este administrat, cantitatea arătată pe ecran se va adăuga la cantitatea bolusului actual care este administrată.

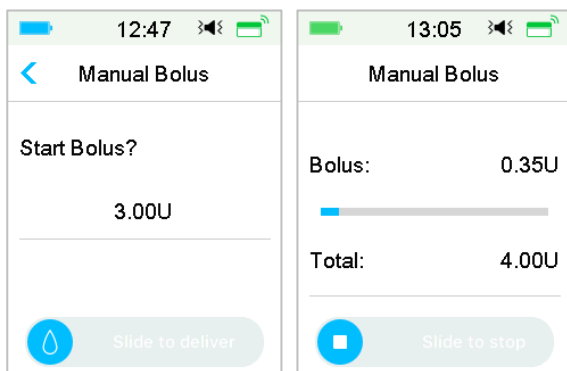


Notă: Pe măsură ce bolusul este administrat, puteți apăsa pe Butonul Principal pentru a vă întoarce la Meniul Principal. Bara circulară de progres indicând faptul că un bolus este în curs de administrare este afișată în Meniul Principal.

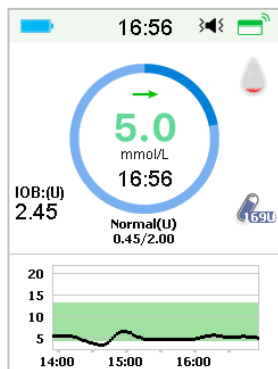


6. Puteți anula un Bolus Normal activ, în Meniul **Suspendare** chiar după ce administrarea insulinei a fost inițiată. **Glisați pentru Anulare** pentru anularea bolusului. Un mesaj pe ecran vă va spune câtă insulină a fost administrată. Atingeți **OK** pentru a vă întoarce la Meniul Principal.

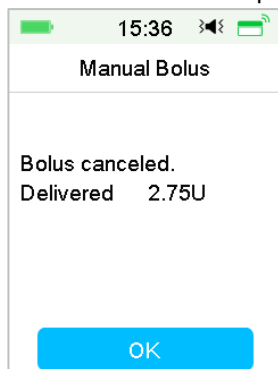


7. Dacă valoarea administrării date depășește cantitatea rămasă de insulină din Rezervor, fereastra va afișa următoarea atenționare:

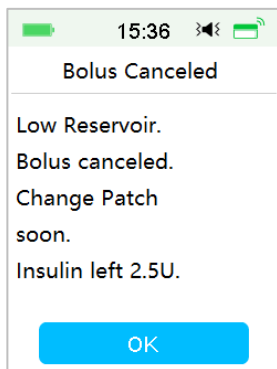

8. Dacă Bolusul total din ultimele 30 de minute a depășit deja 10 U, fereastra va afișa următoarea atenționare:

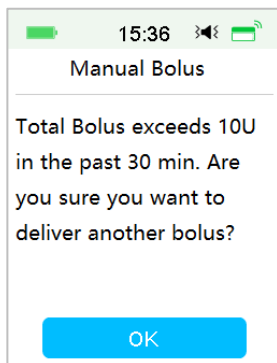

9. În cazul în care conexiunea din PDM și Pompă eșuează în timpul administrării, fereastra indică „Verificare statusul Pompei”, iar administrarea nu poate fi anulată.

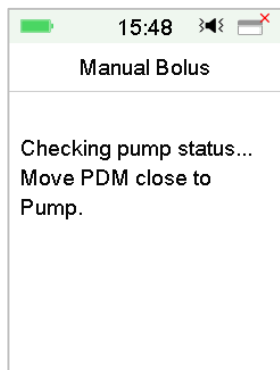

Atunci când administrarea insulinei este finalizată, ecran PDM se întoarce la Meniul Principal automat.

10. Atunci când un Bolus Normal este administrat, iar fereastra PDM devine neagră ca rezultat al închiderii iluminării, puteți mișca ușor PDM pentru a se lumina ecranul din nou.

4.2.2 Bolus Max

Bolusul Maxim (Bolus Max) este o caracteristică de siguranță care limitează cantitatea de insulină care trebuie administrată într-un singur bolus. Setarea din fabrică este de 10 unități. Puteți seta limita de la 0 la 30 de unități. Vă rugăm să setați bolusul maxim cu ajutorul echipei dumneavoastră de diabet.

Accesați fereastra **Bolus Max** pentru a seta bolusul max.

Meniul Principal → Setări → Pompa Insulinei → Setare Bolus → Bolus Max



4.3 Rată Bazală

Rata Bazală rata la care Pompa dumneavoastră cu Plasture injectează doze mici de insulină pentru a acoperi nevoile corpului dumneavoastră de insulină între mese. Ratele bazale de obicei acoperă în jur de 50% din doza zilnică totală (TDD) de insulină.

Un model bazal include cel puțin o rată bazală pentru o perioadă de 24 de ore. Un model bazal selectat este utilizat zilnic. Puteți seta până la 48 de rate bazale pentru orice model bazal. *Consultați „Selectați un Model bazal”, „Rată Bazală Temporară”, „Rată Bazală Temporară Presetată” din Capitolul „Caracteristicile Avansate ale Pompei” pentru mai multe informații.*

4.3.1 Setările dumneavoastră Bazale

Trebuie să vă programați setările dumneavoastră bazale înainte de a administra o insulină bazală. Puteți programa până la 8 modele bazale cu sistemul A7+ TouchCare®. Având mai multe modele bazale pre-setate face mai ușoară trecere de la un model la altul pentru a satisface diferitele nevoi ale dumneavoastră, precum weekenduri, zilele din săptămână, lucru în ture și menstruație.

- **Standard:** Modelul dumneavoastră bazal normal care susține activitatea dumneavoastră de zi cu zi.
- **Exercițiu:** Modelul dumneavoastră bazal de exercițiu care susține activitatea dumneavoastră de exercițiu.
- **Vacanță:** Modelul dumneavoastră bazal care suportă activitatea dumneavoastră din vacanță.
- **Boală:** Modelul bazală de boală care susține activitatea dumneavoastră în zilele de boală.
- **Model A/B/C/D:** Modelele Bazale pe care le definiți dumneavoastră, precum menstruație etc.

Vă recomandăm să setați ratele bazale cu ajutorul furnizorului dumneavoastră de asistență medicală.

Accesați fereastra **Setare Rată Bazală**.

Meniul Principal → Setări → Pompa de Insulină → Setare Rată Bazală




4.3.2 Editarea Modelului dumneavoastră Bazal Standard

Vă recomandăm să vă familiarizați cu modelul bazal Standard înainte de a folosi multiple modele bazale. Puteți seta până la 48 de segmente bazale în modelul bazal Standard.

Accesați fereastra **Editare Rată Bazală**.


Meniul Principal → Setări → Pompa de Insulină → Setare Bazală → Editare Rată Bazală

1. Alegeți modelul bazal **Standard** pentru a-l edita.

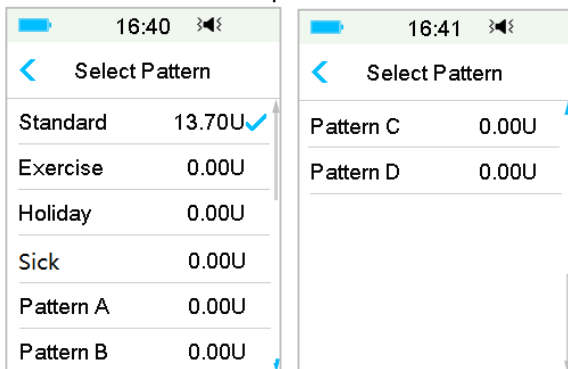


Notă: Modelul bazal activ este bifat.

2. Fereastra de editare apare. Apăsați pe **+Adăugare segment de timp** pentru a adăuga un nou segment. Introduceți timpul de sfârșit pentru acest segment. Apoi apăsați **Efectuat**.

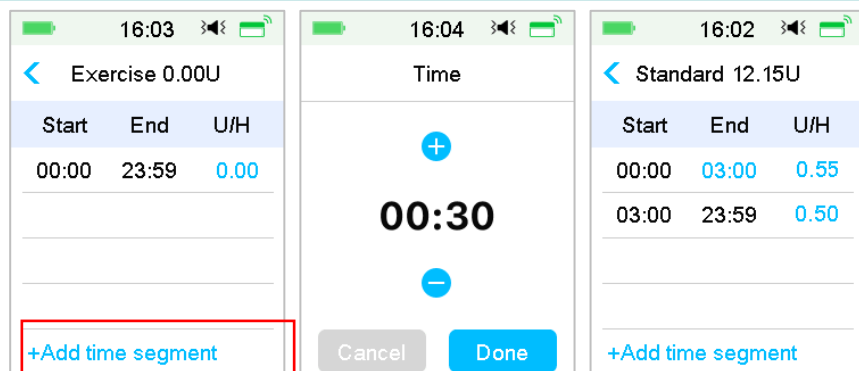


Notă:

- 1) Primul segment bazal începe întotdeauna la 00:00 12:00 am).
- 2) Ultimul segment bazal se încheie întotdeauna la 24:00 (12:00 pm).
- 3) Segmentele pot începe cu fiecare oră sau la fiecare jumătate de oră. Punctul de timp de sfârșit al ultimului segment este întotdeauna setat la miezul nopții.
- 4) Apăsați pe **+Adăugare segment de timp** pentru a crea și edita un nou segment.
3. Apăsați pe fontul albastru al câmpului **U/H** pentru a seta o valoare dorită a ratei bazale. Apoi apăsați **Efectuat**.

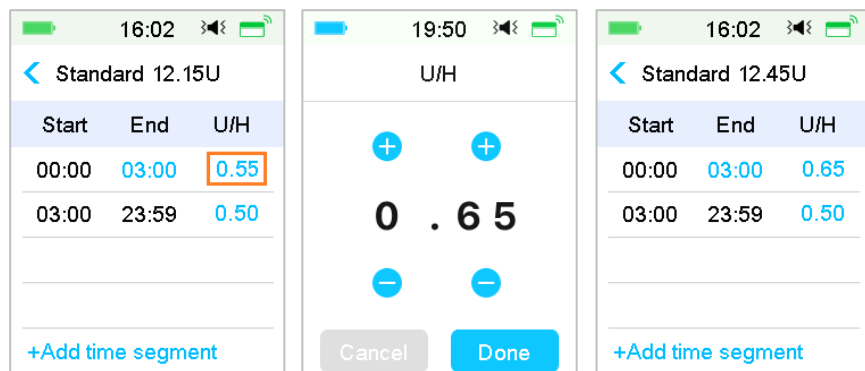

Notă: Puteți seta o rată bazală între 0 și Rata Bazală Max. cu o creștere de 0,05 U/H.

4. Atunci când ați terminat, apăsați  pentru a salva setarea bazală și pentru a vă întoarce la meniul anterior.

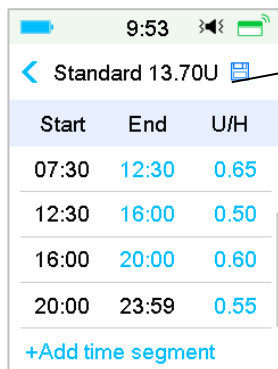

Start	End	U/H
07:30	12:30	0.65
12:30	16:00	0.50
16:00	20:00	0.60
20:00	23:59	0.55

[+Add time segment](#)


24 ore în Total

Notă: Dacă toate cele 48 de segmente bazale au fost adăugate, butonul **+Adăugare segment de timp** dispare automat. Setati segmentele dumneavoastră bazale conform recomandărilor furnizorului dumneavoastră de asistență medicală.

4.3.3 Verificarea Ratei Bazale Actuale

Fereastra Principală și **Fereastra de Status** indică informațiile ratei bazale curente.

1. Fereastra Principală

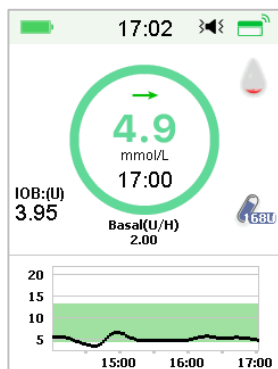

2. Status → Rată Bazală

5:45	Status
Delivery/Today	
Bolus	
Basal	
Other Status Info	
Device Info	

5:46	Basal
Basal Mode:	Manual
Pattern:	Standard
24-Hr Total:	13.70U
Basal:	0.55U/H
Temp Basal:	Inactive

4.3.4 Revizuirea Modelului dumneavoastră Bazale

Fereastra **Revizuire Bazală** vă indică ratele dumneavoastră bazale zilnice al tuturor modelelor.


1. Accesați fereastra **Revizuire Bazală**.

Meniul Principal → Setări → Pompa de Insulină → Setare Bazală → Revizuire Bazală

16:40	Select Pattern
Standard	13.70U ✓
Exercise	0.00U
Holiday	0.00U
Sick	0.00U
Pattern A	0.00U
Pattern B	0.00U

16:41	Select Pattern
Pattern C	0.00U
Pattern D	0.00U


2. Alegeți modelul bazal pe care doriți să îl revizuiți. Apăsați-l pentru a revizui setările dumneavoastră programate.

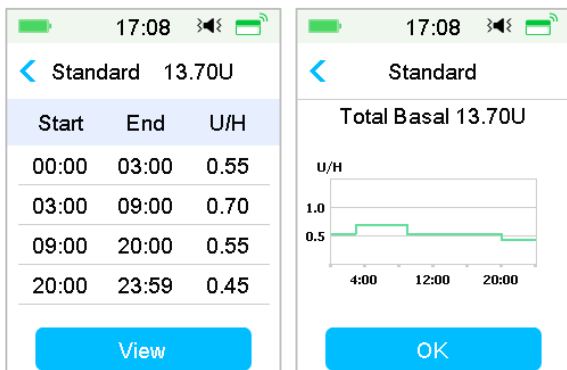

4.3.5 Ștergerea unui segment de timp al Modelului Bazal


1. Alegeți segmentul, glisați spre stânga pe fiecare și va apărea butonul ștergere. Apăsați pe **Ștergere** pentru a șterge segmentul ales. Glisați înapoi spre dreapta pentru a închide butonul **Ștergere**.

Ultimul segment nu poate fi șters, iar timpul de început al tuturor segmentelor nu poate fi modificat.

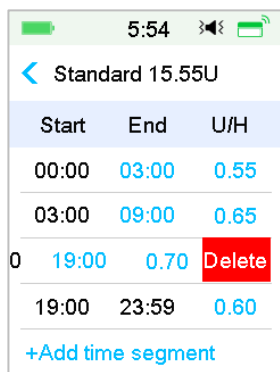

2. După ce segmentul ales este șters, timpul de început al următorului segment de după segmentul șters va deveni timpul de sfârșit al ultimului segment înainte de cel șters. Același lucru se întâmplă atunci când ștergeți mai multe segmente.

3. Atunci când primul segment este șters, timpul de început al celui de-al doilea segment (acum devenit primul segment) devine 00:00 (12:00AM).

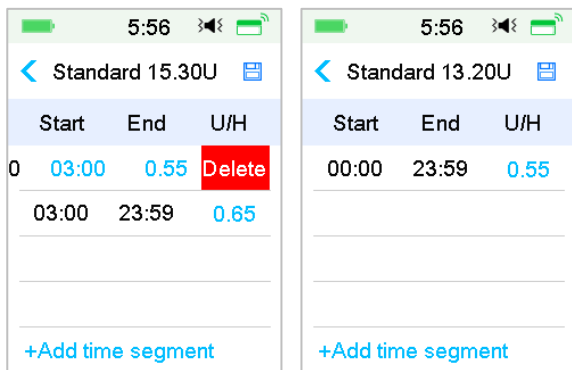

4.3.6 Modificarea timpului Modelului Bazal

Notă: Doar timpul de sfârșit al unui segment se poate edita.

1. Modificarea punctul de timp de sfârșit al unui segment într-un punct de timp ulterior.

Atunci când punctul de timp de sfârșit A al unui segment este modificat într-un punct de timp ulterior B (de exemplu: 12:00 este modificat în 15:00), toate segmentele anterioare dintre punctul de timp A și punctul de timp B vor fi șterse, lăsând doar segmentul editat caracterizat de o perioadă cuprinsă între punctul de timp inițial de început și punctul de timp de sfârșit B.

Punctul de timp de sfârșit B este egal cu punctul de timp de început al segmentului care urmează. În ceea ce privește rata bazală, atunci când nu este editată, rata bazală al segmentului anterior acoperă rata bazală a segmentului din aceeași perioadă sau din perioada care se suprapune după editare.

Exemplu: punctul de timp de sfârșit al primului segment este modificat din 12:00 în 15:00, vedeți mai jos:

13:58		
Standard 15.45U		
Start	End	U/H
00:00	12:00	0.70
12:00	13:00	0.65
13:00	15:00	0.50
15:00	23:59	0.60
+Add time segment		



13:59		
Standard 15.90U		
Start	End	U/H
00:00	15:00	0.70
15:00	23:59	0.60
+Add time segment		

2. Modificarea punctul de timp de sfârșit al unui segment într-un punct de timp anterior

Atunci când punctul de timp de sfârșit B al unui segment este schimbat într-un punct de timp anterior A, toate segmentele anterioare dintre punctul de timp A și punctul de timp B vor fi șterse lăsând doar segmentul editat caracterizat de o perioadă cuprinsă între punctul de timp inițial de început și punctul de timp de sfârșit A.

Punctul de timp de sfârșit A este egal cu punctul de timp de început al segmentului care urmează. În ceea ce privește rata bazală, atunci când nu este editată, rata bazală al segmentului anterior acoperă rata bazală a segmentului din aceeași perioadă sau din perioada care se suprapune după editare

Exemplu: punctul de timp de sfârșit al celui de-al treilea segment este modificat din 15:00 în 12:00.

13:58		
Standard 15.45U		
Start	End	U/H
00:00	12:00	0.70
12:00	13:00	0.65
13:00	15:00	0.50
15:00	23:59	0.60
+Add time segment		



14:02		
Standard 16.20U		
Start	End	U/H
00:00	12:00	0.70
12:00	23:59	0.65
+Add time segment		

4.3.7 Rata Bazală Maximă

Rata bazală Maximă (Max) este o limită de siguranță pentru valoarea insulinei bazale care poate fi administrată într-o oră. Rata maximă se aplică la fiecare rată bazală setată, inclusiv o rată bazală temporară. Odată ce ratele dumneavoastră bazale au fost setate, nu puteți seta o rată bazală maximă care să fie mai mică decât orice rată bazală programată. Setarea din fabrică este de 2,00 U/H. Intervalul de setare este 0,00U/H~25U/H. Vă rugăm să setați rata bazală maximă cu ajutorul furnizorului dumneavoastră de asistență medicală.

1. Accesați fereastra **Rată Bazală Maximă**.

Meniul Principal → Setări → Pompa de Insulină → Setare Bazală → Rată Bazală Maximă



2. Puteți modifica rata bazală maximă folosind tastatura de numere.



4.4 Suspendare și Reluare


4.4.1 Suspendarea Administrării Insulinei

Uneori se poate să fie necesară suspendarea administrării insulinei. Atunci când nu este administrat niciun bolus, puteți suspenda administrarea insulinei bazale pentru o perioadă dată de timp. Atunci când Bolusul este administrat, puteți alege să suspendați toate administrările insulinei (bazală și bolus) pentru o anumită perioadă de timp sau doar să opriți administrarea bolusului actual.

a. Atunci când nu este administrat niciun bolus:


1. Accesați fereastra **Suspendare**. Setați o perioadă de suspendare și apăsați **Continuă** pentru a continua.

Meniul Principal → Suspendare

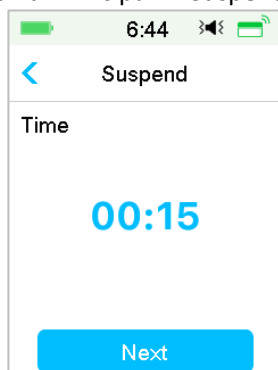


Notă: Puteți seta timpul de suspendare între 15 minute și 2 ore cu o creștere de 15 minute.

2. Următorul mesaj va apărea. **Glisați pentru suspendare** dacă doriți să suspendați administrarea insulinei.

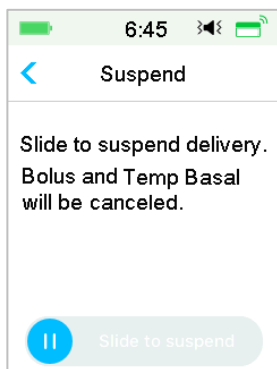


Notă: Atunci când suspendați administrarea insulinei, Bolusul și Rata Bazală Temporară va fi anulată și nu poate fi reluată.

3. PDM va afișa un mesaj pe ecran pentru a vă informa că administrarea insulinei este într-adevăr suspendată.

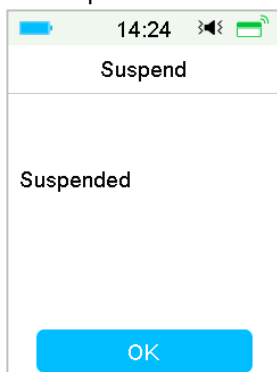


4. Durata de suspendare rămasă poate fi găsită pe **Pagina Principală**.

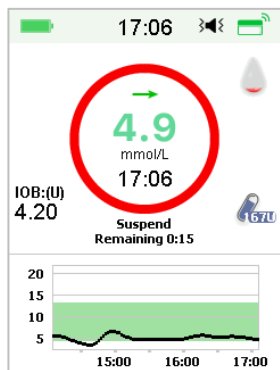


b. Atunci când un Bolus Normal/Extins/Combinat este administrat:

1. Puteți alege să suspendați toate administrările insulinei sau doar bolusul.


Main Menu → Suspend

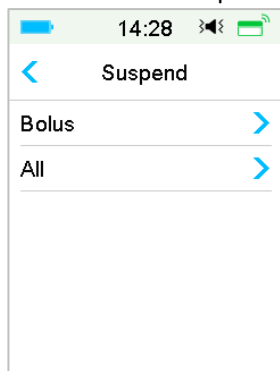

2. Dacă selectați **Toate**, se întâmplă la fel ca în situația în care nu este administrat niciun bolus. Funcția toate opri toată insulina.
3. Dacă selectați **Bolus**, statusul administrării a unui Bolus Normal, respectiv a unui Bolus Extins va fi afișat în următoarea fereastră. **Glisați pentru anulare** pentru a anula bolusul insulinei.

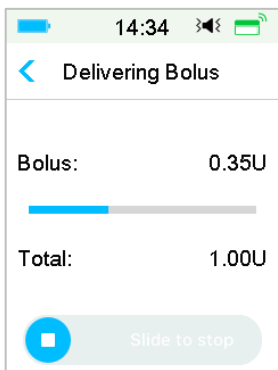


Oprirea Bolusului Normal

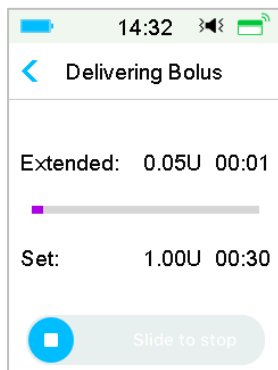

Oprirea Bolusului Extins

4.4.2 Reluarea Administrării Insulinei

După ce toate administrările insulinei sunt suspendate, apăsați **Reluare** din fereastra Meniului Principal și va apărea următoarea fereastră.

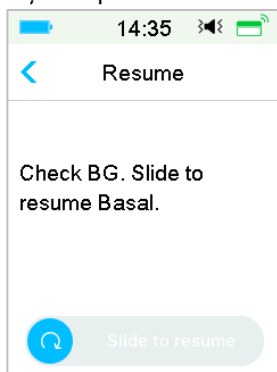


Glisați pentru reluarea administrării bazale.



Notă: Doar modelul bazal poate fi reluat. Bolusul și Rata Bazală Temporară nu poate fi reluată.

4.5 Setările Pompei de Insulină

Accesați fereastra Setările Pompei de Insulină. Puteți activa sau dezactiva Pompei de Insulină, puteți seta SN-ul Pompei, Setarea Bolusului, Setarea Bazală și puteți seta Alertele Pompei.

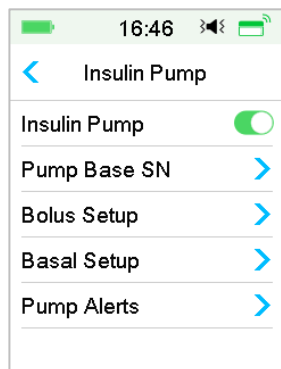

4.5.1 Adăugarea/Modificarea SN-ului Bazei Pompei

De fiecare dată când folosiți o nouă Bază a Pompei, trebuie să adăugați SN Bazei Pompei în PDM dumneavoastră. PDM și Baza Pompei dumneavoastră se vor conecta automat după fiecare proces de schimbare a Plasturelui cu Rezervor.

Atingeți **Setări** în **Meniul Principal** pentru a deschide fereastra Setări. Atingeți **Pompa de Insulină** pentru a deschide fereastra Setările Pompei. Activați funcția pompei de insulină

Atingeți **SN-ul Bazei Pompei** pentru a-l edita. Puteți utiliza PDM dumneavoastră pentru a căuta Baza Pompei dumneavoastră (doar pentru prima utilizare) sau puteți introduce manual SN-ul imprimat pe Baza Pompei dumneavoastră. SN-ul Bazei Pompei poate fi modificat doar atunci când nu există niciun Plasture cu Rezervor activ.

Consultați Secțiunea „Activarea unui nou Plasture cu Rezervor” pentru mai multe informații.

4.5.2 Setarea Bolusului

Atingeți **Setare Bolus** din fereastra **Pompa de Insulină** pentru a deschide fereastra **Setarea Bolusului**. Puteți seta Calculatorul Bolus, Bolusul Presetat și Bolusul Max în Setarea Bolusului.



Calculator Bolus

Consultați Capitolul „Caracteristicile Avansate ale Pompei” pentru mai multe informații. Consultați furnizorul dumneavoastră de asistență medicală înainte de schimbarea acestei setări.

Setarea Bolusului Presetat

Consultați Secțiunea „Bolus Presetat” pentru mai multe informații. Puteți seta până la șapte valori de bolus presetat: Mic Dejun, Prânz, Cină, Gustare, Bolus 1, Bolus 2 și Bolus 3.

Max Bolus

Bolusul Maxim (Bolus Max) este o caracteristică de siguranță care limitează cantitatea de insulină care trebuie administrată într-un singur bolus. Setarea din fabrică este de 10 unități. Puteți seta limita de la 0 la 30 de unități. Vă rugăm să setați bolusul maxim cu ajutorul furnizorului dumneavoastră de asistență medicală.

4.5.3 Setare Bazală

Atingeți **Setare Bazală** din fereastra **Pompa de Insulină** pentru a deschide fereastra **Setare Bazală**. Puteți edita rata bazală, puteți verifica revizuirea bazală, puteți seta rata bazală temporară presetată și să setați rata bazală maximă.



Editarea Ratei Bazale

Consultați Secțiunea „Rata Bazală” din Capitolul „Modul de utilizare a Pompei cu Plasure” pentru mai multe informații. Puteți seta până la 48 de rate bazale pentru fiecare model bazal.

Revizuirea Ratei Bazale

Consultați Secțiunea „Rata Bazală” din Capitolul „Modul de utilizare a Pompei cu Plasure” pentru mai multe informații. Fereastra **Revizuire Bazală** vă prezintă ratele dumneavoastră bazale zilnice ale tuturor modelelor.

Rata Bazală Temporară Presetată



Consultați Secțiunea „Rata Bazală” din Capitolul „Modul de utilizare a Pompei cu Plasure” pentru mai multe informații. Puteți seta până la șapte rate bazale

temporare presetate: Ex. Grea, Ex. Mediu, Ex. Ușoară, Boală, Temp. 1, Temp. 2 și Temp. 3

Rată Bazală Maximă



Consultați Secțiunea „Rata Bazală” din Capitolul „Modul de utilizare a Pompei cu Plasure” pentru mai multe informații. Rata bazală Maximă (Max) este o limită de siguranță pentru valoarea insulinei bazale care poate fi administrată într-o oră. Rata maximă se aplică la fiecare rată bazală setată, inclusiv o rată bazală temporară. Odată ce ratele dumneavoastră bazale au fost setate, nu puteți seta o rată bazală maximă care să fie mai mică decât orice rată bazală programată. Vă rugăm să setați rata bazală maximă cu ajutorul furnizorului dumneavoastră de asistență medicală. Setarea din fabrică este de 2,00 U/H.

4.5.4 Alertele Pompei

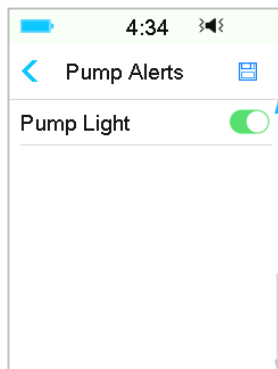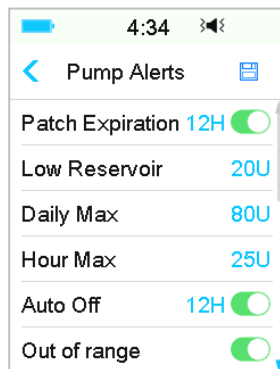

1. Expirare Plasure

Aici puteți activa/dezactiva alarma „PLASTURE EXPIRAT”, alerta „RECOMANDARE EXPIRARE PLASTURE” și alerta „PLASTURELE EXPIRĂ ÎN 1 ORĂ”. Atunci când alertele sunt activate, faceți nu înălțurați un Plasure cu Rezervor după 72 de ore, alarma „PLASTURE EXPIRAT” se repetă la fiecare oră până când sistemul dezactivează automat Plasurele cu Rezervor actual după 80 de ore de utilizare.

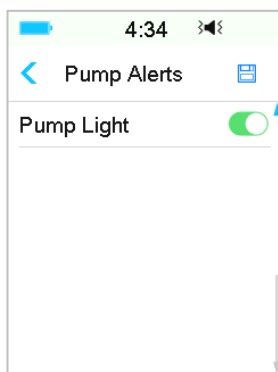
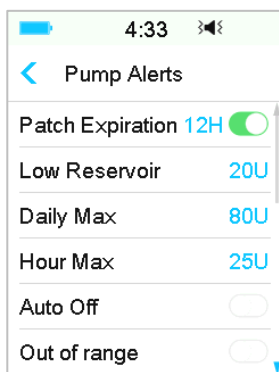


Puteți seta perioada Alertei „RECOMANDARE EXPIRARE PLASTURE” de la 2 ore până la 24 de ore înainte de expirare.

2. Rezervor Scăzut

Alerta “REZERVOR SCĂZUT” vă permite să programați PDM pentru a vă alerta atunci când insulina din Plasturele cu Rezervor ajunge la un anumit nivel, astfel încât să puteți planifica anticipat schimbarea Plasturelui cu Rezervor. Puteți selecta unul din următoarele tipuri de avertizări:

- Un număr specificat de unități care rămâne în Plasturele cu Rezervor
- O perioadă maximă specificată de timp care rămâne înainte de Plasturele cu Rezervor să fie gol

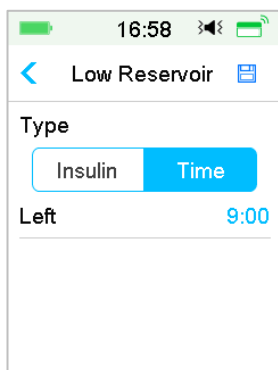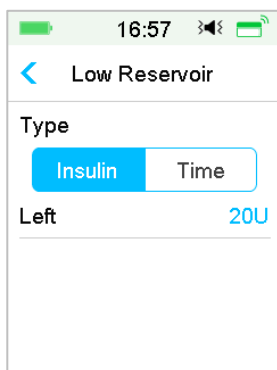

Notă: Puteți seta cantitatea de insulină între 5U și 50U cu o creștere de 1U. Puteți seta timpul între 2h și 24h cu o creștere de 30 min.

Note: Dacă un bolus este administrat atunci când apare o Alertă „REZERVOR SCĂZUT”, insulina rămasă poate fi mai puțină decât valoarea de pe afișajul alertei.

3. Administrare Max

Acest program este creat pentru a instrui Pompa să suspende automat administrarea insulinei și pentru a emite o alarmă dacă vi s-a administrat insulină în exces în ultima oră sau într-o zi. Există două tipuri de limite de administrare pe care le puteți seta, max pe oră și max. zilnic. Setarea din fabrică pentru max. pe oră este 25U, iar pentru max. zilnic este 80 U. Puteți alege să programați această funcție în PDM dumneavoastră în baza cantității de unități pe care o administrați de obicei într-o oră sau într-o zi. Discutați ce setări vi se potrivesc cel mai bine cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală

Notă: Puteți seta Max. Zilnic între 20 și 180 U, iar Max. pe Oră între 10 și 40 U.

Notă: Dacă Plasturele cu Rezervor a fost schimbat, cantitate de insulină pe oră va începe de la 0.

Notă: Administrarea insulinei va fi reluată automat la 0:00 am în următoarea zi dacă are loc suspendarea după ce max. zilnic a fost depășită.

Note: Dacă reluați administrarea insulinei manual după ce cea max orară/zilnică a trecut, cantitatea administrată anterior în această oră/zi va fi anulată, iar PDM va înregistra cantitatea orară/zilnică de la zero.

4. Auto Oprit

Puteți program PDM dumneavoastră să suspende automat administrarea bazală și să transmită o alarmă dacă PDM nu primește un status de la Pompa cu Plasture într-un anumit număr de ore. Obțineți statusul Pompei cu Plasture apăsând orice buton de pe PDM dumneavoastră. Această funcție poate fi folosită ca un paznic în cazul în care dumneavoastră sunteți incapabil să utilizați PDM dumneavoastră (de exemplu, fiind inconștient). Setarea din fabrică pentru această funcție este dezactivată. Puteți alege programul acestei funcții în PDM dumneavoastră în baza numărului de ore pe care îl dormiți de obicei. Discutați ce funcții și setări vi se potrivesc cel mai bine cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală.

Notă: Puteți seta timpul între 1h și 24h cu o creștere de 1h.

5. În afara ariei de acoperire

Dacă PDM dumneavoastră nu primește semnal de la pompă pentru o anumită perioadă de timp, PDM va emite o alarmă „Pompă în afara ariei de acoperire”. Țineți PDM și pompa la o distanță de 4 metri și înlăturați toate obstacolele dintre pompă și PDM.

Setarea din fabrică pentru această alarmă este dezactivată. Puteți activa sau dezactiva această alarmă.

Notă: Puteți seta timpul între 30 minute și 3 ore cu o creștere de 15 minute. Setarea din fabrică este 1 oră.

6. Lumina Pompei

Lumina pompei se va aprinde intermitent de culoare roșie sau galbenă atunci când apar alarme sau alerte. Setarea din fabrică pentru această funcție este activată. O puteți activa/dezactiva.

5.1 Calculator Bolus

Cu introducerea de dumneavoastră a numărului de carbohidrați mâncați și valoarea dumneavoastră actuală (curentă) a BG, această caracteristică poate să vă calculeze automat Bolusul Alimentare sau Bolusul de Corecție, în baza raportului Insulină-Carbohidrați (raport I:C), Factorului de Sensibilitate la Insulină (ISF), BG Țintă și valoarea IOB pentru perioada actuală. Consultați furnizorul dumneavoastră de asistență medicală pentru rapoarte dumneavoastră personal I:C, Factorul de Sensibilitate la Insulină (ISF), Intervalele Țintă BG și Timpul IOB.

5.1.1 Cum funcționează Calculatorul Bolus

Introduceți citire BG dumneavoastră ca un factor de calcul al Calculatorului Bolus. Dacă urmează să luați o masă, introduceți cantitatea dumneavoastră de alimente în carbohidrați. Calculatorul bolus vă va oferi o sugestie de bolus pentru dumneavoastră.

Notă: Ca o măsură de identitate, sistemul doar vă permite să introduceți un bolus la sau sub limita maximă a bolusului pe care ați setat-o. *Consultați Capitolul „Modul de utilizare a Pompei cu Plasture” pentru mai multe informații cu privire la resetarea limitei dumneavoastră maximă a bolusului.* Consultați furnizorul dumneavoastră de asistență medicală înainte de schimbarea acestei setări.

5.1.2 Modul de setare al Calculatorului Bolus


Puteți face setările dumneavoastră personale în funcția calculator bolus din fereastra **Setare Calculator Bolus** sau când PDM este pornit pentru prima dată.

Instrucțiunile pentru programarea setărilor funcției calculator bolus sunt în paragrafele următoare. Programați-vă setările conform descrierii de mai jos pentru a vă asigura că ați programat toate setările.


Activarea/Dezactivarea Funcției Calculator Bolus

1. Accesați fereastra **Setare Calculator Bolus**.

Meniul Principal → Setări → Pompă de Insulină → Setare Bolus → Setare Calculator Bolus

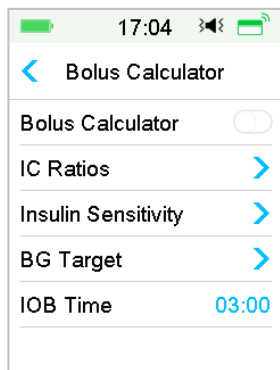

2. Activați sau Dezactivați Calculatorul Bolus. Setarea din fabrică este dezactivată.

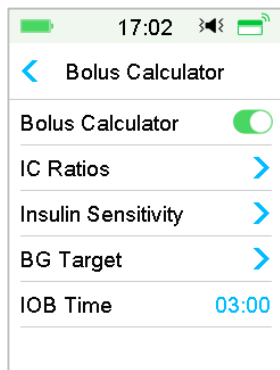

Notă: Rapoartele IC este o abreviere pentru Rapoarte Insulină-Carbohidrați. BG este o abreviere pentru glucoza din sânge.

Rapoartele Insulină Carbohidrați (I:C)

Un raport Insulină-Carbohidrați (I:C) descrie cantitatea de carbohidrați pe care o puteți acoperi cu o unitate de insulină.

Întrucât acest raport poate varia pe parcursul zilei, puteți programa până la opt rapoarte I:C. Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală vă poate ajuta să programați unul sau două rapoarte de carbohidrați atunci când începeți să folosiți funcția calculator bolus.


Notă: Dacă setați doar un raport Insulină-Carbohidrați, acesta va fi folosit pentru întreaga perioadă de 24 de ore.

În fereastra **Setare Calculator Bolus**, selectați **Rapoarte IC**.

1. Primul segment începe întotdeauna la miezul nopții. Câmpul **Carbohidrați** este indicat de cifrele albastre editabile. Puteți atinge cifrele albastre pentru a le modifica.

Notă: Puteți seta carbohidrații între 1,0 g și 200 g. Atunci când carbohidrații sunt între 1,0 g și 9,9 g, creșterea este 0,1 g. Atunci când carbohidrații sunt între 10 g și 200 g, creșterea este 1g.

2. Atingeți **+ Adăugare segment de timp** pentru a crea un nou segment.

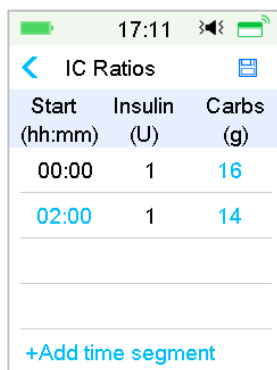

Start (hh:mm)	Insulin (U)	Carbs (g)
00:00	1	16
02:00	1	14
+Add time segment		

Notă: Adăugați segment de timp alegând între 00:30-23:30 sau 12:30A-11:30P, cu o creștere de 00:30.

Notă: Dacă **+Adăugare segment de timp** nu apare, înseamnă că ați programat toate segmentele posibile.

3. Continuați să setați segmentele rapoartelor conform recomandărilor furnizorului dumneavoastră de asistență medicală.

Notă: Alegeți segmentul, glisați spre stângă pe fiecare și va apărea butonul ștergere. Atingeți **Ștergere** pentru a șterge segmentul ales. Primul segment nu poate fi șters.

Start (hh:mm)	Insulin (U)	Carbs (g)
00:00	1	16
:00	1	14

+Add time segment

4. Atunci când ați terminat, apăsați  pentru a salva setările. Sau apăsați  pentru a anula setare și pentru a ieși din modul de editare.

Sensibilitatea la Insulină

Un factor de sensibilitate la insulină (ISF) evaluează nivelul glucozei din sânge care vă puteți aștepta să scadă cu o unitate de insulină. Această valoare este utilizată pentru a calcula doza sugerată de insulină pentru a corecta o BG mare. Întrucât această valoare poate varia pe parcursul zilei, puteți seta până la opt segmente de timp diferite. Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală vă poate ajuta să programați unul sau doi factori de sensibilitate la insulină atunci când începeți să folosiți funcția calculator bolus.

Notă: Dacă setați doar un factor de sensibilitate la insulină, acesta va fi folosit pentru întreaga perioadă de 24 de ore

În fereastra **Setarea Calculator Bolus**, alegeți **Sensibilitate la Insulină**.

1. Primul segment începe întotdeauna la miezul nopții. Câmpul **BG** este indicat de cifrele albastre editabile.

Notă: Puteți seta BG între 0,5 mmol/L și 22,2 mmol/L (10 mg/dL și 400 mg/dL) cu o creștere de 0,1 mmol/L (1 mg/dL).

2. Atingeți **+ Adăugare segment de timp** pentru a crea un nou segment.

17:13

< Insulin Sensitivity

Start (hh:mm)	Insulin (U)	BG (mmol/L)
00:00	1	2.6

+Add time segment

Notă: Adăugați segment de timp alegând între 00:30-23:30 sau 12:30A-11:30P, cu o creștere de 00:30.

Notă: Dacă **+Adăugare segment de timp** nu apare, înseamnă că ați programat toate segmentele posibile.

3. Continuați să setați segmentele ISF conform recomandărilor furnizorului dumneavoastră de asistență medicală.

Notă: Alegeți segmentul, glisați spre stângă pe fiecare și va apărea butonul ștergere. Atingeți **Ștergere** pentru a șterge segmentul ales. Primul segment nu poate fi șters, iar timpul de început al primului segment nu poate fi modificat.

17:13

< Insulin Sensitivity

Start (hh:mm)	Insulin (U)	BG (mmol/L)
00:00	1	2.6
:00	1	3.0

Delete

+Add time segment

4. Atunci când ați terminat, apăsați  pentru a salva setările. Sau apăsați < pentru a anula setare și pentru a ieși din modul de editare.

BG Țintă

O BG Țintă este obiectivul dumneavoastră personal pentru a ține sub control

nivelurile BG. O BG Țintă poate fi setată ca un interval curent (cu o limită inferioară și o limită superioară), sau o singură valoare. Întrucât obiectivele dumneavoastră pot varia pe parcursul zilei, puteți seta până la opt BG ținte. Dacă doriți să setați doar o valoare țintă în schimbul unui interval, setați ambele valori inferioară și superioară la același număr.


Dacă BG dumneavoastră actual este peste Intervalul BG Țintă, funcția calculator bolus va calcula o doză de corecție. Dacă BG dumneavoastră actual este sub Intervalul BG Țintă, funcția calculator bolus va calcula o corecție negativă și așadar o va reduce din bolusul dumneavoastră alimentare.

În fereastra **Setare Calculator Bolus**, alegeți **BG Țintă**.

1. Primul segment începe întotdeauna la miezul nopții. Câmpul **Interval BG** este indicat de cifrele albastre editabile.

Notă: Puteți seta limita inferioară și superioară între 3,3 mmol/L și 13,9 mmol/L (60 mg/dL și 250 mg/dL) cu o creștere de 0,1 mmol/L (1 mg/dL). Limita superioară nu trebuie să fie niciodată mai mică decât limita inferioară.

2. Atingeți **+ Adăugare segment de timp** pentru a crea un nou segment.

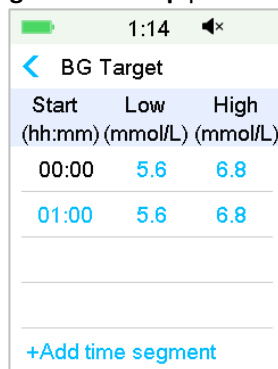

Start (hh:mm)	Low (mmol/L)	High (mmol/L)
00:00	5.6	6.8
01:00	5.6	6.8

+Add time segment

Notă: Adăugați segment de timp alegând între 00:30-23:30 sau 12:30A-11:30P, cu o creștere de 00:30.

Notă: Dacă **+Adăugare segment de timp** nu apare, înseamnă că ați programat toate segmentele posibile.

3. Continuați să setați segmentele BG Țintă conform recomandărilor furnizorului dumneavoastră de asistență medicală.

Notă: Alegeți segmentul, glisați spre stângă pe fiecare și va apărea butonul ștergere. Atingeți **Ștergere** pentru a șterge segmentul ales. Primul segment nu poate fi șters, iar timpul de început al primului segment nu poate fi modificat.

Start (hh:mm)	Low (mmol/L)	High (mmol/L)	
00:00	5.6	6.8	
:00	5.6	6.8	Delete


+Add time segment

4. Atunci când ați terminat, apăsați pentru a ieși din modul de editare și apăsați pentru a salva setările.

Timp IOB

Funcția IOB vă arată câtă insulină din doza bolusului interior este încă activă în organismul dumneavoastră. Valoarea actuală a insulinei rămase în corpul dumneavoastră este determinată de rata cu care corpul dumneavoastră folosește insulina, locul dumneavoastră de injectare, nivelul activității dumneavoastră și alți factori. PDM dumneavoastră folosește un algoritm curbiliniu care mimează modul în care insulina este metabolizată pentru a urmări IOB. Setarea IOB informează PDM care IOB trebuie să folosească pentru a calcula valoarea IOB de scăzut înainte de estimarea unui bolus. Vă rugăm să setați Timpul IOB cu ajutorul furnizorului dumneavoastră de asistență medicală.

În fereastra **Calculator Bolus**, selectați **Timp IOB** și editați-l.

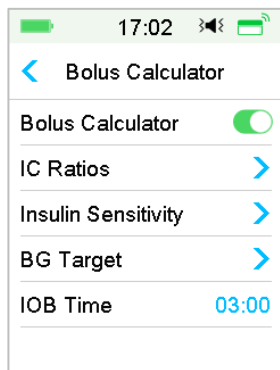


Note: Puteți seta Timpul IOB între 2h și 8h cu o creștere de 0,5h. Setarea din fabrică este de 3 ore (03:00).

5.1.3 Bolus Normal folosind Calculator Bolus

Cu ce calculatorul bolus este activat și programat, această funcție poate calcula valoarea estimativă de insulină de care aveți nevoie pentru bolusul de corecție sau bolusul alimentar. Aveți opțiunea de folosire a dozei estimate sau de a modifica această doză după necesități.

1. În fereastra **Bolus**, selectați **Calculator Bolus**.

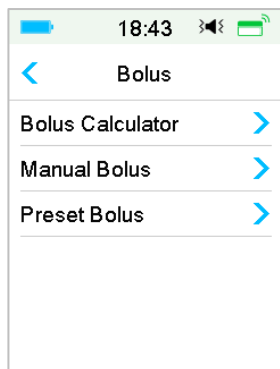

2. Atingeți valoarea **BG** pentru a introduce BG dumneavoastră și valoarea **Carbohidrați** pentru a introduce cantitatea de carbohidrați.

18:43

< Bolus Calculator

BG: 0.00U

--- mmol/L

Carbs: 0.00U

0 g

Next

Notă:

- 1) Dacă nu introduceți un BG și doriți un bolus pentru alimentația dumneavoastră, introduceți doar cantitatea de carbohidrați, iar funcția calculator bolus va calcula o valoare a insulinei pentru intrarea alimentației dumneavoastră fără a lua în considerare nivelul BG dumneavoastră.
- 2) Puteți introduce o valoare BG între 1,1 mmol/L și 33,3 mmol/L (20 mg/dL și 600 mg/dL) cu o creștere de 0,1 mmol/L (1 mg/dL). Setarea din fabrică este 5,6 mmol/L (100 mg/dL).
- 3) Puteți introduce o valoare a carbohidraților între 0 g și 300 g cu o creștere de 1g.
- 4) Puteți seta o doză a bolusului între 0 și Bolus Max cu o creștere de 0,05 U.
3. După introducerea BG și Carbohidraților, doza recomandată a Bolusului conform Calculatorului Bolus apare în partea dreaptă a valorii BG și valoarea carbohidraților. De exemplu:

18:45

< Bolus Calculator

BG: 0.65U

7.8 mmol/L

Carbs: 7.10U

40 g

Next

4. Următoarea fereastră apare cu o valoare calculată a bolusului. Puteți ajuta valoarea recomandată a Bolusului pentru **Setarea Bolusului** după necesități. Apoi alegeți tipul Bolusul și apăsați **Continuă**.

18:48

< Bolus Calculator

Set Bolus:

2.65 U

Type


Normal Bolus

Suggested: 2.65U

IOB: 0.00U


Next

Notă: Fereastra **Atenționare BG** va apărea dacă aveți opțiunea Atenționare BG activă. Puteți accepta sau modifica cu cât timp înainte doriți să vi se reamintească să verificați nivelul glucozei din sânge după un bolus.

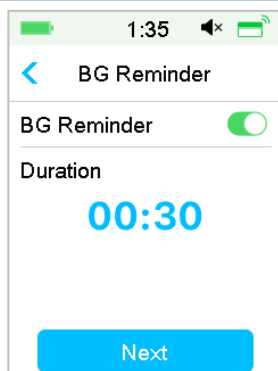

Consultați secțiunea „Atenționare BG” din acest capitol pentru mai multe informații.

5. **Glisați pentru Administrare** pentru a iniția administrarea bolusului. Pe măsură ce Bolusul Normal este administrat, valoarea indicată pe ecran se va adăuga la valoarea bolusului actual care este administrat.

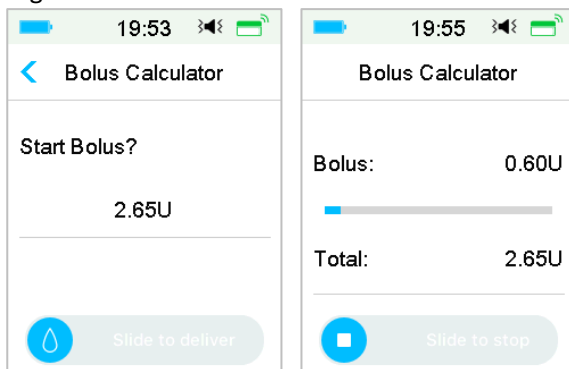


Notă: Puteți anula un Bolus Normal activ (unul care este administrat în prezent), chiar după ce administrarea de insulină a început. **Glisați pentru Anulare**, pentru a anula bolusul.

5.2 Bolus Combinat/Extins

Caracteristica Bolus Combinat/Extins este utilă pentru consumul de alimente bogate în carbohidrați sau bogate în grăsimi precum pizza, care presupune o absorbție prelungită a carbohidraților. De asemenea, este utilă în cazul în care veți mânca („ciuguli”) după câteva ore sau dacă aveți gastropareză, ceea ce

înseamnă că mâncarea rămâne în stomac pentru o perioadă mai lungă de timp decât în mod normal.

Vedeți următorul grafic pentru o descriere a diferitelor tipuri de bolus.

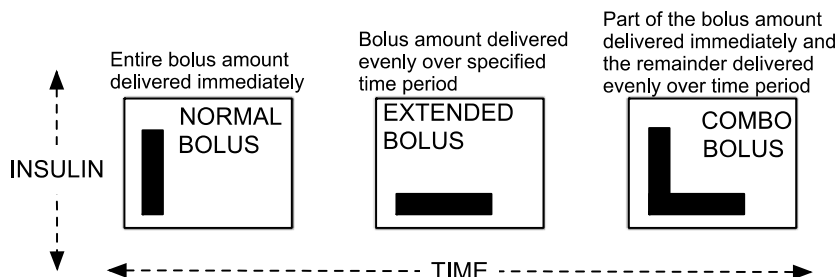

Notă: Este important ca dumneavoastră să vă consultați furnizorul de asistență medicală înainte de a folosi funcția Bolus Combinat/Extins. Trebuie să vă familiarizați cu funcțiile de bază ale PDM dumneavoastră înainte de a explora aceste opțiuni.

5.2.1 Bolus Combinat/Extins fără Calculator Bolus

1. Calculați-vă valoarea bolusului alimentar și/sau de corecție.
2. În fereastra **Meniu Bolus**, alegeți **Bolus Manual**.

The screenshot shows the 'Manual Bolus' screen with the following fields and values:

- Set Bolus: 1.00U
- Type: Extended Bolus
- IOB: 1.65U
- Next button


Bolus Extins

Pentru a seta un Bolus Extins, urmați pașii de mai jos:

- a. Apăsați valoarea **Setare Bolus** pentru a introduce valoarea unităților Bolusului Extins și apăsați **Continuă**.

Notă: Puteți seta o doză bolus între 0 și Bolus Max.

- b. Apăsați opțiunea **Scriveți** pentru a alege Bolusul Extins. Apoi apăsați **Continuă**.
- c. Introduceți durata pe care o doriți pentru Bolus Extins și apăsați **Continuă**.

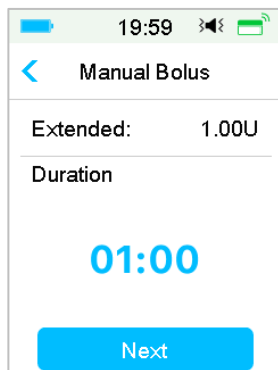

19:59

< Manual Bolus

Extended: 1.00U


Duration

01:00

Next

Notă: Puteți seta durata între 30 min și 8h cu o creștere de 30 minute.

- d. Detaliile Bolusul Extins vor fi afișate, apoi **Glisați pentru administrare** pentru a începe administrarea.

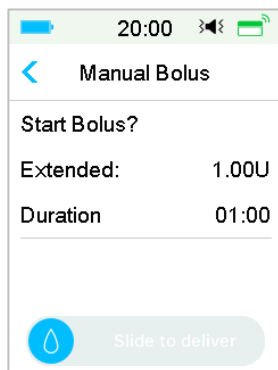

20:00

< Manual Bolus

Start Bolus?

Extended: 1.00U

Duration 01:00

 Slide to deliver

Notă: Fereastra **Atenționare BG** va apărea dacă aveți opțiunea Atenționare BG activă. Puteți accepta sau modifica cu cât timp înainte doriți să vi se reamintească să verificați nivelul glucozei din sânge după un bolus. *Consultați secțiunea „Atenționare BG” din acest capitol pentru mai multe informații.*

Bolus Combinat


Pentru a Seta un Bolus Combinat, urmați pașii de mai jos:

- Selecționați valoarea Setare Bolus pentru a introduce valoarea unităților Bolusului Combinat și apăsați **Continuă**.

Notă: Puteți seta o doză bolus între 0 și Bolus Max.

Notă: Numărul de unități pe care îl introduceți pentru Bolusul Combinat este valoarea totală a unităților Bolusului Normal și Bolusului Extins.

- Apăsați opțiunea **Scrieți** pentru a alege **Bolusul Combinat**. Apoi apăsați **Continuă**.

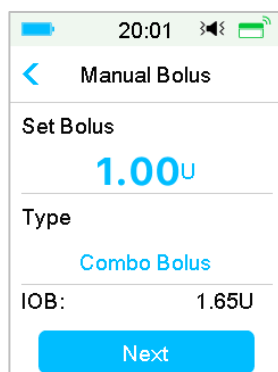

20:01

< Manual Bolus

Set Bolus

1.00U


Type

Combo Bolus

IOB: 1.65U

Next

- Apăsați pe pictograma albastră  pentru a crește Bolusul Normal. Apăsați pe pictograma mov  pentru a crește Partea Extinsă.
- Introduceți durata pe care o doriți pentru Bolusul Extins și apăsați pe Continuă pentru a continua.

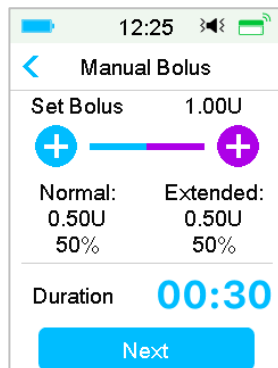

12:25

< Manual Bolus

Set Bolus 1.00U

Normal: 0.50U 50%

Extended: 0.50U 50%


Duration 00:30

Next

Notă: Puteți seta durata între 30 minute și 8h cu o creștere de 30 minute.

Note: Fereastra **Atenționare BG** va apărea dacă aveți opțiunea Atenționare BG activă. Puteți accepta sau modifica cu cât timp înainte doriți să vi se reamintească să verificați nivelul glucozei din sânge după un bolus. *Consultați secțiunea „Atenționare BG” din acest capitol pentru mai multe informații.*

- e. Detaliile Bolusului Combinat vor fi afișate. **Glisați pentru administrare** pentru a începe administrarea

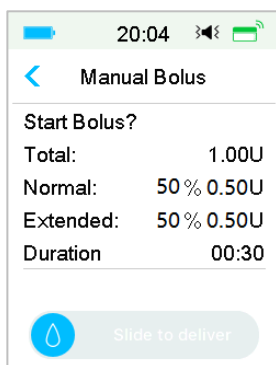

Start Bolus?	
Total:	1.00U
Normal:	50 % 0.50U
Extended:	50 % 0.50U
Duration	00:30

5.2.2 Bolus Combinat/Extins folosind un Calculator Bolus

Dacă folosiți funcția calculator bolus pentru a calcula valorile Bolusului dumneavoastră extins sau combinat, veți fi direcționat pentru a introduce citire BG dumneavoastră și/sau cantitatea de carbohidrați. Funcția calculator bolus va folosi această intrare pentru a calcula valoarea sugerată a bolusului dumneavoastră. Puteți de asemenea să modificați bolusul estimat dacă doriți.

1. Funcția bolus calculator și funcția Bolus Combinat/Extins trebuie să fie active, iar setările trebuie să fie programate. *Consultați secțiunea „Calculator Bolus” pentru mai multe informații.*
2. Introduceți un proces calculator bolus. După ce ați introdus BG dumneavoastră și/sau carbohidrați, valoarea calculată a bolusului apare în partea dreaptă. Apăsați **Continuă** pentru a continua.

20:05

< Bolus Calculator

BG: 0.70U

8.3 mmol/L

Carbs: 5.65U

85 g

Next

Notă: Dacă trebuie să faceți modificări în meniul anterior, apăsați < pentru a vă întoarce la meniul anterior, alegeți Calculator Bolus și re-introduceți valorile.

3. Puteți ajusta **Setare Bolus** după necesități.

20:11

< Bolus Calculator

Set Bolus:

5.65 U

Type

Normal Bolus

Suggested: 5.65U

IOB: 1.60U

Next

Notă: Puteți seta o doză bolus între 0 și Bolus Max.


Notă: Dacă există un Bolus Extins activ, partea extinsă sau Bolusul Combinat nu va fi disponibil până când Bolusul Extins activ nu este finalizat.

Notă: Dacă există o parte de corecție în doza bolusului sugerată, partea de corecție poate fi administrată doar ca un Bolus Normal sau ca o parte normală a Bolusului Combinat. Cu alte cuvinte, opțiunea Bolus Extins va deveni indisponibilă în acest caz.

Bolus Extins


Pentru a seta un Bolus Extins, urmați pașii de mai jos:

- a. Fereastra duratei extinse apare. Introduceți durata pe care o doriți pentru Bolusul Extins și apăsați **Continuă**.

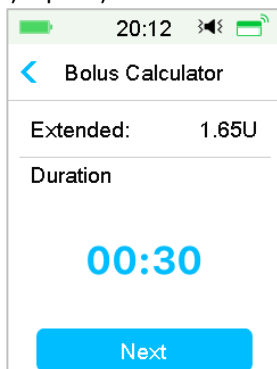

The screenshot shows the 'Bolus Calculator' app interface. At the top, the status bar displays the time 20:12, signal strength, and battery level. Below the status bar, there is a back arrow and the text 'Bolus Calculator'. The main display area shows 'Extended: 1.65U' and 'Duration' with a large blue digital clock showing '00:30'. At the bottom, there is a blue button labeled 'Next'.

- b. **Notă:** Puteți seta durata între 30 minute și 8h cu o creștere de 30 minute.
- c. Detaliile Bolusului Extins vor fi afișate. **Glisați pentru administrare** pentru a începe administrarea.

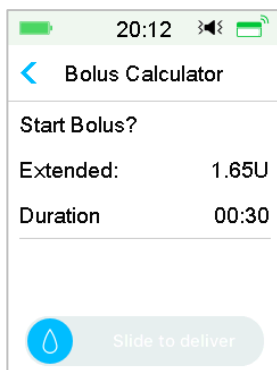

The screenshot shows the 'Bolus Calculator' app interface. At the top, the status bar displays the time 20:12, signal strength, and battery level. Below the status bar, there is a back arrow and the text 'Bolus Calculator'. The main display area shows 'Start Bolus?' and 'Extended: 1.65U'. Below this, 'Duration' is set to '00:30'. At the bottom, there is a blue circular button with a water drop icon and a grey button labeled 'Slide to deliver'.

Note: Fereastra **Atenționare BG** va apărea dacă aveți opțiunea Atenționare BG activă. Puteți accepta sau modifica cu cât timp înainte doriți să vi se reamintească să verificați nivelul glucozei din sânge după un bolus. *Consultați secțiunea „Atenționare BG” din acest capitol pentru mai multe informații.*


Bolus Combinat

Pentru a seta un Bolus Combinat, urmați pașii de mai jos:

- a. Apăsați pe pictograma albastră  pentru a crește Bolusul Normal.

Apăsați pe pictograma mov  pentru a crește Partea Extinsă.


b. Introduceți durata pe care o doriți pentru Bolusul Extins și apăsați pe **Continuă** pentru a continua.

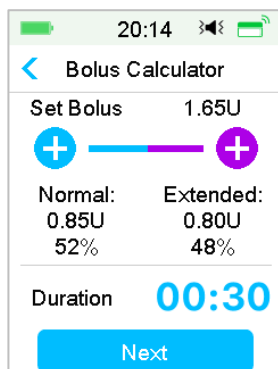

Notă: Puteți seta durata între 30 minute și 8h cu o creștere de 30 minute.

Notă: Fereastra **Atenționare BG** va apărea dacă aveți opțiunea Atenționare BG activă. Puteți accepta sau modifica cu cât timp înainte doriți să vi se reamintească să verificați nivelul glucozei din sânge după un bolus. *Consultați secțiunea „Atenționare BG” din acest capitol pentru mai multe informații.*

c. Detaliile Bolusului Combinat vor fi afișate. **Glisați pentru administrare** pentru a începe administrarea.

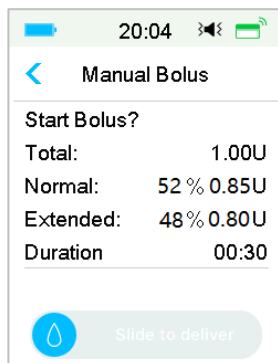

5.3 Bolus Presetat


Caracteristica bolus presetat vă permite să programați administrările

bolusului pentru utilizarea frecventă. Puteți seta până la șapte valori de bolus presetat: Mic Dejun, Prânz, Cină, Gustare, Bolus 1, Bolus 2 și Bolus 3.


5.3.1 Setarea Bolusului Presetat

1. Accesați fereastra **Setarea Bolusului Presetat**.


Meniul Principal → Setări → Pompa de Insulină → Setare Bolus → Setarea Bolusului Presetat

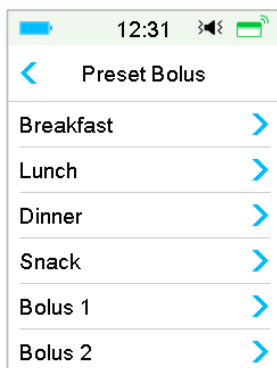

2. Alegeți un bolus presetat pe care doriți să îl editați. Dacă a fost editat, setarea actuală vă apare.

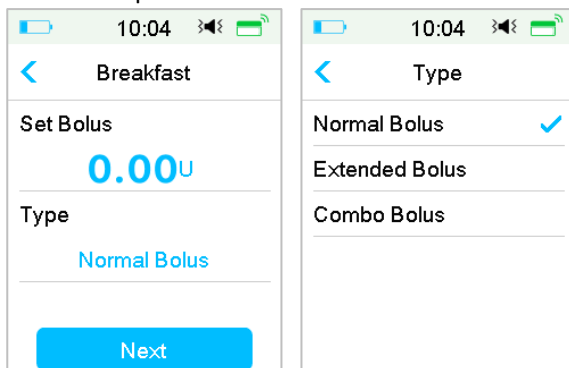

3. Alegeți un tip de bolus. Pentru un Bolus Normal, setați valoarea bolusului. Pentru un bolus Extins, setați valoarea și durata bolusului. Pentru un Bolus Combinat, setați valoarea bolusului, procentajele normale/extinse și durata.

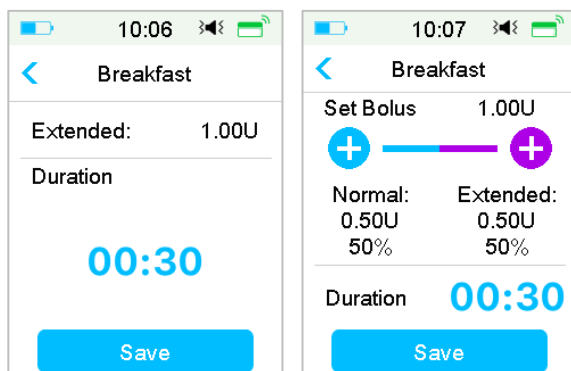


4. Atingeți **Salvare** pentru a salva setările. Apăsați **<** sau Butonul Principal și apăsați **Nu** pentru a anula setările.

5.3.2 Administrarea unui Bolus Presetat

Trebuie să setați un bolus presetat înainte de a-l putea administra.

1. Accesați fereastra **Bolus Presetat**.

Meniul Principal → Bolus → Bolus Presetat

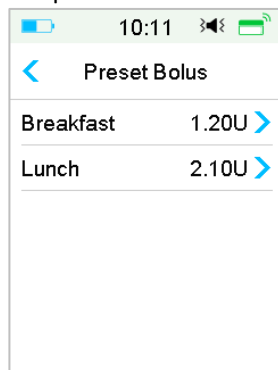

Setările existente ale bolusului presetat sunt prezente în această fereastră. Dacă nu ați setat niciun bolus presetat, această fereastră indică **Nicio Presetare**.

2. Selectați bolus presetat dacă doriți să administrați unul.

Notă: Fereastra **Atenționare BG** va apărea dacă aveți Atenționarea BG activată. Consultați „Atenționare BG” din acest capitol pentru mai multe informații.

3. Verificați setările bolusului presetat.
4. Porniți administrarea bolusului.

5.4 Alegerea unui Model Bazal

1. Accesați fereastra **Alegerea Modelului**.

Meniul Principal → Rata Bazală → Alegerea Modelului

2. Alegeți model dorit și glisați pentru a-l activa.

16:40	Select Pattern
Standard	13.70U ✓
Exercise	0.00U
Holiday	0.00U
Sick	0.00U
Pattern A	0.00U
Pattern B	0.00U

16:41	Select Pattern
Pattern C	0.00U
Pattern D	0.00U

5.5 Rată Bazală Temporară

Cu o rată bazală temporară, puteți ajusta rata dumneavoastră bazală pentru o scurtă perioadă de timp pentru a gestiona nivelurile de glucoză din timpul activităților temporare sau diferite condiții. De exemplu, poate doriți să creșteți rata bazală în zilele de boală sau să o scădeți în timpul exercițiului. Puteți seta durata unei rate bazale temporare până la 24 de ore cu o creștere de jumătate de oră.

Notă: În timpul administrării unei rate bazale temporare, modelul bazal este suprascris temporar, așadar nu este disponibil. După ce administrarea unei rate bazale temporare este finalizată sau anulată, sistemul dumneavoastră se va reîntoarce la modelul bazal ales.

5.5.1 Activarea unei Rate Bazale Temporare

1. Accesați fereastra **Rată Bazală Temporară**.

Meniul Principal → Rată Bazală → Rată Bazală Temporară


2. Alegeți un tip de rată bazală temporară, o rată temporară sau procentul și durată, apoi apăsați **Continuă** pentru a revizui setările ratelor bazale temporare.

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface for setting a temporary basal rate. Both screens are titled 'Temp Basal' and show a 'Current Basal' of 0.50U/H. The left screen has the 'Rate(U/H)' tab selected, showing a value of 0.40 and a duration of 04:00. The right screen has the 'Percent' tab selected, showing a value of 80% and a duration of 02:30. Both screens feature a blue 'Next' button at the bottom.

Notă: Dacă este selectat **Procentaj**, puteți seta rata bazală temporară, care să nu depășească Rata Bazală Max., între 0 și 200%, cu o creștere de 1%. Dacă este selectată **Rata (U/H)**, puteți seta rata bazală temporară între 0 și Rata Bazală Max. cu o creștere de 0,05 U/H.

Notă: Puteți seta durata între 30 min și 24h cu o creștere de 30 min.


3. Asigurați-vă că rata bazală temporară este corectă în această Revizuire a Ratei Bazale Temporare, apoi **Glisați pentru activare**.

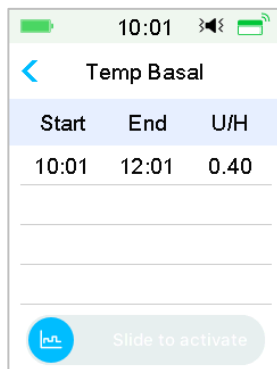

5.5.2 Anularea unei Rate Bazale Tempore


1. Accesați fereastra **Anularea unei Rate Bazale Tempore**. Selectați **Anularea unei Rate Bazale Tempore**.

Meniul Principal → Rată Bazală → Anularea unei Rate Bazale Tempore

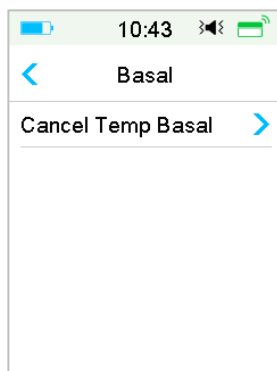

2. Glisați pentru a opri administrarea ratei bazale temporare apoi apăsați  pentru a continua administrarea.

Notă: Dacă suspendați administrarea de insulină în timp ce opțiunea rată bazală temporară este activă, rata bazală temporară va fi anulată.

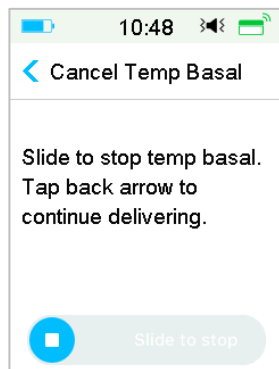


5.6 Rată Bazală Temporară Presetată

Prin intermediul caracteristicii rată bazală temporară presetată, puteți programa ratele bazale temporare pentru a se repeta în situații de scurtă durată. Puteți seta până la șapte rate bazale temporare presetate: Ex. Grea, Ex. Mediu, Ex. Ușoară, Boală, Temp. 1, Temp. 2 și Temp. 3.

5.6.1 Setarea Ratei Bazale Temporare Presetate

1. Accesați fereastra **Setarea Ratei Bazale Temporare Presetate**.

Meniul Principal → Setări → Pompa de Insulină → Setarea Ratei Bazale
→ Setarea Ratei Bazale Temporare Presetate

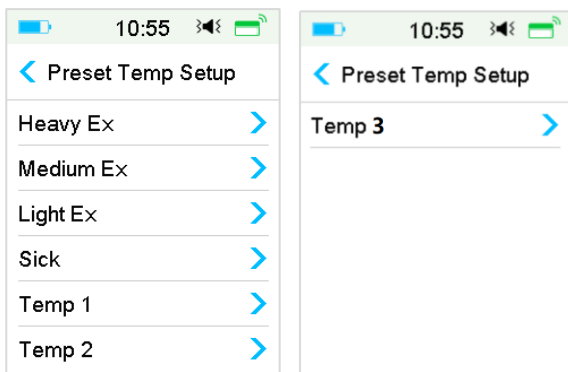


2. Alegeți o rată bazală temporară presetată pe care doriți să o editați. Alegeți tipul opțiunii bazale temporare (rată sau procent).
3. Setati durata și rata/procentul opțiunii bazale temporare presetate. Apăsați pentru **Salvare** pentru a salva setările.

5.6.2 Activarea unei Rate Bazale Temp. Presetate

Trebuie să setați o rată bazală temporară înainte de a o putea activa.

1. Accesați fereastra **Rată Bazală Temporară Presetată**.

Meniul Principal → Rată Bazală → Rată Bazală Temporară

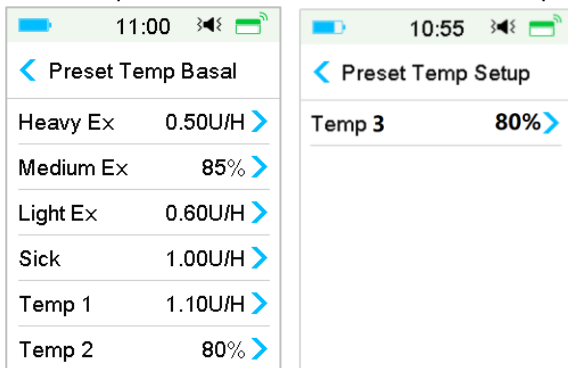

Tipurile ratei bazale temporare presetate sunt afișate în această fereastră. Dacă nu ați setat o rată bazală temporară presetată, această fereastră indică **Nicio presetare**.


2. Alegeți rata bazală temporară prestabilită pe care doriți să o activați.

3. Confirmați setările ratei dumneavoastră bazale temporare presetate.
4. Glisați pentru activare.

5.7 Atenționare

5.7.1 Atenționare Bolus

Atunci când eșuați să administrați un Bolus între punctul în timp A și punctul în timp B, veți primi o Atenționare în punctul în timp B.

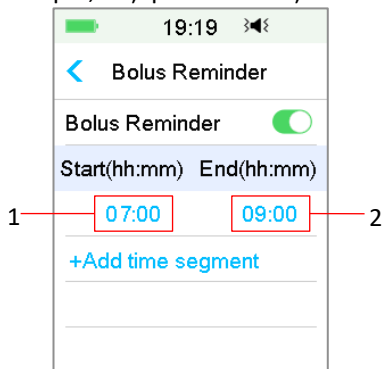


1. Punctul în Timp A

2. Punctul în Timp B

Puteți adăuga, șterge sau revizui Atenționările atunci când opțiunea Atenționare Bolus este activată.

Accesați fereastra **Atenționare Bolus**.

Meniul Principal → Setări → Atenționări → Atenționare Bolus

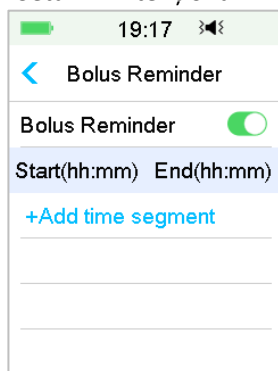

Adăugare Atenționare

Atingeți + **Adăugare segment de timp** pentru a adăuga o Atenționare, setând ora de început și de sfârșit.

Start(hh:mm)	End(hh:mm)
07:00	09:00
12:00	15:00
19:00	21:00

+Add time segment

Notă:

- 1) Ora de sfârșit trebuie să fie cel puțin 30 min după ora de început. Puteți programa până la patru Atenționări Bolus.
- 2) Atenționările vor fi salvate automat.

Ștergere Atenționare

Glisați din partea dreaptă spre stângă pe un segment, apăsați **Ștergere** pentru a șterge acel segment.

Start(hh:mm)	End(hh:mm)	
07:00	09:00	
12:00	15:00	Delete
19:00	21:00	


+Add time segment

5.7.2 Atenționare BG

După ce administrați un bolus, poate doriți să verificați BG dumneavoastră. Atenționarea BG este o caracteristică opțională care vă reamintește să vă verificați BG după un bolus.

Accesați fereastra **Setare Atenționare BG**.

Meniul Principal → Setări → Atenționări → Atenționare BG

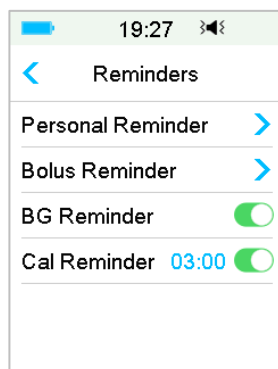


Dacă aveți o Atenționare BG activată, fereastra **DURATĂ ATENȚIONARE BG** apare atunci când dumneavoastră setați un Bolus.

Acesta vă permite să setați timpul înainte ca să fiți atenționat pentru a verifica glucoză din sânge după un bolus.

Intervalele de timp sunt între 00:30 până la 05:00 cu o creștere de 30 minute. Timpul standard este 00:30.

Puteți, de asemenea, să dezactivați atenționarea BG după fiecare bolus.

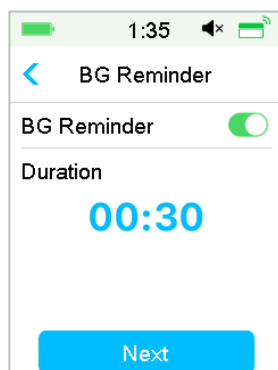

Puteți accepta sau modifica cu cât timp să vi se reamintească.


5.8 Istoricul Pompei

5.8.1 Istoricul Pompei

Istoricul Pompei afișează istoricul administrării (istoricul bolusului, istoricul bazal și istoricul administrării zilnice totale) și istoricul alertelor (alertele și alarmele pompei).


Accesați fereastra **Istoricul Pompei**.

Meniul Principal → Istoric → Istoricul Pompei

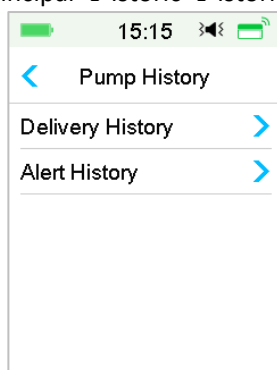

5.8.1.1 Istoricul Administrării

Puteți selecta o zi pentru a revizui graficul administrării. Acesta indică rezumatul administrării bazale, bolusului și administrării totale pentru o zi.

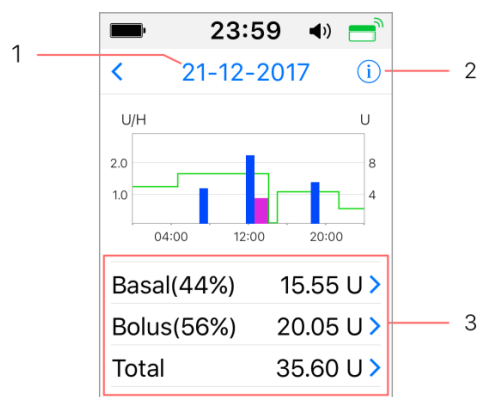


1. Atingeți data pentru a trece de la o înregistrare la alta din date diferite

2. Atingeți pictograma info pentru a vedea semnificațiile legendei.

3. Atingeți „Graficul rezumativ Bazal, Bolus, Total” din partea de jos a ferestrei Istoricul Administrării pentru a vedea detalii.

(1) Legendă

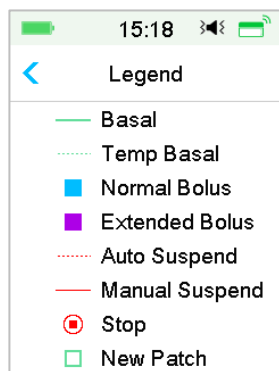

Legendă	Abreviere	Semnificație
	Rată Bazală	Curba de injectare a Ratei Bazale
	Rată Bazală Temp	Curba de injectare a Ratei Bazale Temp.
	Bolus Normal	Pictograma de administrare a Bolusului Normal
	Bolus Extins	Pictograma de administrare a Bolusului Extins
	Auto Suspendare	Această etichetă apare atunci când una din următoarele alarme apar: AUTO OPRIT, SUSPENDARE PREDICTIVĂ REDUSĂ, SUSPENDARE REDUSĂ, DEPĂȘEȘTE MAX TDD, DEPĂȘEȘTE MAX 1H DE LA ADMINISTRARE.
	Suspendare Manuală	Suspendați manual toate administrările de insulină
	Stop	Inclusiv dezactivarea plasturelui, aruncarea plasturelui și alarme: OCLUZIE DETECTATĂ, PLASTURE EXPIRAT, EROARE PLASTURE, BATERIE PLASTURE DESCĂRCATĂ COMPLET,

		EROARE BAZA POMPEI, REZERVOR GOL.
	Plasture Nou	Atunci când activați un nou plasture, această pictogramă va apărea.

(2) Istoric Bazal

Această fereastră afișează cele mai detaliate Informații Bazale.

	15:19		
<	29-08-2018		
*14:37	0.45U/H		
13:43	PLowSusp		
11:00	0.50U/H		
07:00	0.45U/H		
03:00	0.65U/H		
00:00	0.40U/H		

(3) Istoric Bolus

Informațiile pe scurt includ:

- Ora de început a acestui bolus;
- Statusul bolusului: finalizat, anulat, în curs de administrare;
- Tipul Bolusului;
- Cantitatea bolusului administrat | Cantitatea bolusului programat

	15:21		
<	29-08-2018		
18:40	Canceled	>	
	Calc-E: 4.50U 6.00U		
11:30	Completed	>	
	Calc-C: 5.10U 5.00U		
07:00	Completed	>	
	Calc-N: 1.00U 1.00U		

Tipul Bolusului:

- ✧ N: Bolus Normal
- ✧ E: Bolus Extins
- ✧ C: Bolus Combinat
- ✧ Normal: Normal Bolus prin Bolus Manual
- ✧ Extins: Bolus Extins prin Bolus Manual
- ✧ Combinat: Bolus Combinat prin Bolus Manual
- ✧ Calc-N: Bolus Normal prin Calculator Bolus
- ✧ Calc-E: Bolus Extins prin Calculator Bolus
- ✧ Calc-C: Bolus Combinat prin Calculator Bolus

Atingeți rândul înregistrării pentru a vedea cele mai detaliate informații. Consultați Capitolul „Caracteristicile Avansate ale Pompei” pentru mai multe informații.

(4) Informații Zilnice Totale

Această fereastră afișează cele mai detaliate Informații Zilnice Totale.

15:26

<

29-08-2018

Carbs

200g

Total Insulin

31.80U

Basal(34%)

12.70U

Bolus(66%)

19.10U

FoodBolus

7.30U #1

CorrBolus

2.10U #1

15:28

<

29-08-2018

Food+Corr

0.00U #0

ManualBo

9.70U #2

Bolus Total

19.10U

9:20

N 4.40U

14:30

E 7.30U 0:30

16:33

N 2.10U

15:28

<

29-08-2018

20:20

N 5.30U


- ✧ **N** reprezintă Bolus Normal.
- ✧ **E** reprezintă Bolus Extins.
- ✧ **C** reprezintă Bolus Combinat.

- ✧ **Bolus Alimentar 7,30U #1** înseamnă că există o doză a bolusului alimentar în ziua aleasă cu o valoare totală de 7,30U.
- ✧ **Bolus Corecție 2,10U #1** înseamnă că există o doză a bolusului de corecție cu o cu o valoare totală de 2,10U.
- ✧ **Alimentar+Corecție 0,00U #0** înseamnă că nu există nicio doză care să acopere atât carbohidrații, cât și corecția glucozei în ziua aleasă.
- ✧ **Bolus Manual 9,70U #2** înseamnă că există două doze ale bolusului manual în ziua aleasă în valoare totală de 9,70U.

5.8.1.2 Istoricul Alertelor

Accesați fereastra **Istoricul Alertelor**.

Meniul Principal ➔ Istoric ➔ Istoricul Pompei ➔ Istoricul Alertelor

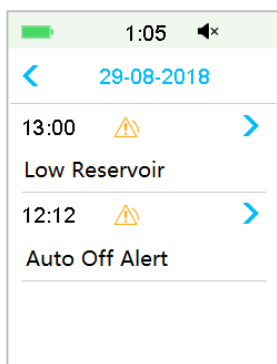

Atingeți data pentru a trece de la o înregistrare la alta a diferitelor date. Atingeți fiecare Alertă/Alarmă pentru a vizualiza informațiile detaliate ale alertei. Atingeți  pentru a vă reîntoarceți la meniul anterior.

Consultați Secțiunea „Pictogramele Alertelor” în Capitolul „Modul de utilizare a PDM” pentru mai multe informații cu privire la modul de soluționare a alarmelor și alertelor și semnificațiile diferitelor pictograme ale alarmei/alertelor.

5.8.2 Istoricul rezumativ al Pompei

5.8.2.1 Istoric rezumativ: Istoricul Insulinei

Această fereastră afișează istoricul rezumativ al administrării insulinei.

Accesați fereastra **Istoricul Insulinei**.

Meniul Principal → Istoric → Istoric rezumativ → Istoricul Insulinei

17:06	Insulin	1D
22-11-2016		
Daily Insulin	10.00U	
Daily Basal(30%)	3.00U	
Daily Bolus(70%)	7.00U	
Daily Carbs	30g	

17:06	Insulin	14D
08-11-2016 21-11-2016		
Daily Insulin	10.00U	
Daily Basal(30%)	3.00U	
Daily Bolus(70%)	7.00U	
Daily Carbs	30g	

Insulina Zilnică: Doza zilnică totală de insulină administrată pe zi.

Rata Bazală Zilnică: Doza zilnică medie și procentajul de insulină administrată ca Rata Bazală.

Bolus Zilnic: Doza zilnică medie și procentajul de insulină administrată ca Bolus.

Carbohidrați Zilnici: Cantitatea medie zilnică de carbohidrați.

5.8.2.2 Istoric rezumativ: Istoricul Bolusului

Această fereastră afișează Istoricul rezumativ al Bolusului.

Meniul Principal → Istoric → Istoric rezumativ → Istoricul Bolusului

17:18	Bolus	1D
22-11-2016		
Carbs Bolus	3.00U# 2.0	
Correction Bolus	5.00U# 4.0	

17:18	Bolus	14D
08-11-2016 21-11-2016		
Carbs Bolus	3.00U# 2.0	
Correction Bolus	5.00U# 4.0	

Doar Bolus Carbohidrați: Doza medie zilnică și numărul de ori doar al Bolusului Alimentare din zilele selectate.

Doar Corecție BG: Doza medie zilnică și numărul de ori doar al Bolusului pentru corecție BG doar în zilele selectate.

5.9 Soluționarea problemelor Pompei

Pot face saună cu o Pompă cu Plasture atașată?

Nu.

În primul rând, intervalul de temperatură de funcționare pentru Pompele cu Plasture este +5°C ~ +40°C.

În al doilea rând, dacă faceți saună, insulina va fi absorbită mai repede în corpul dumneavoastră, iar glucoza dumneavoastră din sânge poate avea fluctuații.

Pot să mă scufund cu Senzorul instalat?

Nu.

Pompa dumneavoastră cu Plasture este rezistent la apă la o adâncime de 2,5 metri (8 feet) timp de până la 60 de minute (IPX8).

Ceea ce înseamnă că presiunea maximă pe care dispozitivul o poate tolera este egală cu presiunea de 2,5 m adâncime în apă STĂTĂTOARE în loc de apă curgătoare.

Este OK să faceți duș sau să înotați cu dispozitivele instalate, dar dacă mergeți să vă scufundați, presiunea apei este prea mare pentru dispozitive.

Nu am văzut un mesaj de alertă, dar acesta apare în Istoric.

Dacă una din următoarele alerte apare, PDM va emite un semnal sonor/vibrație și va afișa un prim mesaj, iar dacă ați omis acea alertă, mai târziu, când verificați PDM, condiția care a generat alerta s-a modificat (de exemplu, nivelul glicemiei dumneavoastră a revenit în intervalul țintă), atunci nu veți mai vedea mesajul pe ecran, îl veți găsi doar în Istoric.

Alertă	Modificarea Alertei
DEPĂȘEȘTE MAX TDD	După ce administrarea insulinei începe automat din nou, alerta este schimbată în RATĂ BAZALĂ RELUATĂ.

DEPĂȘEȘTE MAX 1HR ADMINISTRARE	După ce administrarea insulinei începe automat din nou, alerta este schimbată în RATĂ BAZALĂ RELUATĂ.
-----------------------------------	---

Dacă următoarea alertă apare, PDM va emite un semnal sonor/vibrație și va afișa un prim mesaj, iar dacă ați omis acea alertă, mai târziu, când verificați PDM, alerta poate să fi trecut la o altă alertă/alarmă, și veți vedea DOAR mesajul alertei/alarmei reînnoite. Prima alertă va apărea în Istoric.

Alertă	Evoluția Alertei
REZERVOR GOLIT	REZERVOR GOL
RECOMANDARE EXPIRARE PLASTURE	PLASTURELE EXPIRĂ ÎN 1 ORĂ, apoi PLASTURE EXPIRAT
ALERTĂ AUTO OPRITĂ	AUTO OPRITĂ

Lumini de pe Pompa cu Plasture

Odată ce ați conectat baza pompei cu un nou Plasture cu Rezervor, veți vedea lumina indicatorului că se va aprinde intermitent în ordine albastru, verde, galben și roșu. Atunci când activați noul plasture, veți vedea lumina verde că se aprinde intermitent până când modelul bazal este activat.

O lumină galbenă (portocalie) indică o alertă, în timp ce o lumină roșie indică o alarmă.

Dacă PDM este departe de Pompa cu Plasture, cum va fi administrată rata bazală?

Modelul bazal selectat este depozitat în baza pompei, ceea ce înseamnă că dacă PDM este departe, modelul bazal va continua așa cum este planificat.

Pot să umplu plasturele cu insulină atunci când plasturele este aplicat pe corp?

NU. NU FACEȚI ACEST LUCRU NICIODATĂ. Insulina poate să fie administrată direct în corpul dumneavoastră, ceea ce este foarte periculos.

Fără obiecte magnetic în jur atunci când efectuați activarea (amorsare)

Atunci când umpleți Plasturele cu Rezervor, asigurați-vă că acesta este la cel puțin 30 cm (12 inch) de toate obiectele magnetice, precum magneți, telefoane mobile și alți Plasturi cu Rezervor. Pompa cu Plasture va detecta


volumul de insulină în rezervor odată ce este plină, iar dacă Pompa cu Plasture este într-un câmp magnetic, volumul detectat poate fi imprecis.




6.1 Alertele de Glucoză

Setați alertele dumneavoastră de glicemie Mică sau Mare înainte de a folosi senzorul. Atunci când caracteristica alerte de glucoză este activată, sistemul vă poate trimite alerte de glucoză inclusiv, **Glucoză Mare/Mică, Valoare Predictivă Mare/Mică și Alerte Rată**.

Meniul Principal → EasyLoop → Alerte de Glucoză

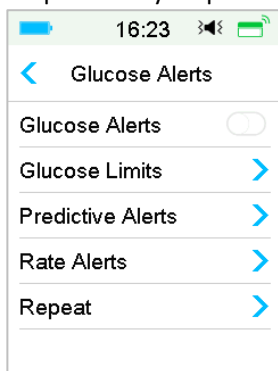

1. Puteți activa sau dezactiva Alertele de Glucoză.

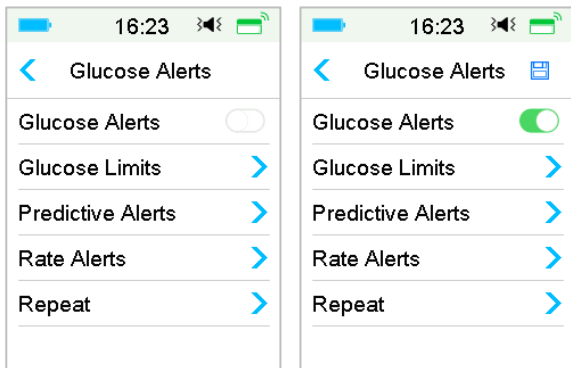

2. Atingeți  pentru a salva setările.

6.1.1 Limite Superioare/Inferioare


Trebuie să setați Limitele superioare și inferioare ale Glucozei recomandate de furnizorul dumneavoastră de asistență medicală după ce activați alertele de glucoză. Limitele dumneavoastră recomandate de glucoză pot varia în

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

timpul zile, dumneavoastră puteți seta până la opt perechi pentru perioade diferite de timp.

Accesați fereastra **Limitele Glucozei**.

Meniul Principal → EasyLoop → Alerte de Glucoză → Limitele Glucozei

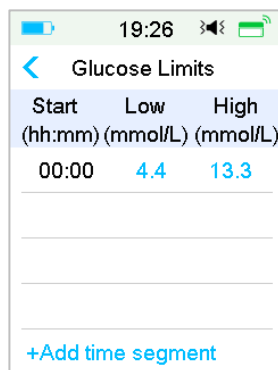

Start (hh:mm)	Low (mmol/L)	High (mmol/L)
00:00	4.4	13.3

+Add time segment

1. Adăugarea Segmentelor

Timpul de început al primului segment este stabilit să fie 00:00 sau 12:00A.


Adăugați segmente de timp alegând între 00:30-23:30 sau 12:30A-11:30P, cu o creștere de 00:30.

Vi se va reaminti dacă segmentul de timp ce urmează a fi setat există deja. Atunci când segmentele de timp sunt setate cu succes, acestea vor fi enumerate cronologic.

Dacă setați doar un segment, limitele glucozei acestui segment vor fi aplicate pentru 24 de ore.

Puteți seta până la 8 segmente cu limite inferioare și superioare pentru fiecare în timpul monitorizării în timp real.

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

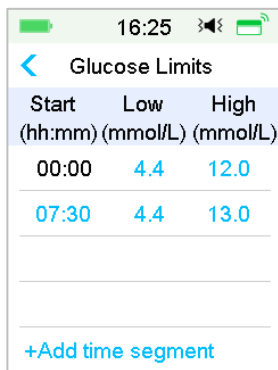

Start (hh:mm)	Low (mmol/L)	High (mmol/L)
00:00	4.4	12.0
07:30	4.4	13.0
+Add time segment		

Notă:

- 1) În segmentele de timp, doar segmentul care începe cu 0:00 nu poate fi șters. Puteți întotdeauna să editați intrarea fiecărui segment. Intervalul Limitei Inferioare este 2,8-5,0mmol/L (50-90 mg/dL), intervalul Limitei Superioare este 5,5-22,2mmol/L (100-400 mg/dL), ambele cu o creștere de 0,1 mmol/L (1mg/dL). Valoarea Limitei Superioare este întotdeauna mai mare decât valoarea Limitei Inferioare.
 - 2) În primul segment, Limita Inferioară standard este de 4,4 mmol/L, Limita Superioară standard este 13,3mmol/L.
2. Ștergerea segmentelor

Glisați de la dreapta la stânga pe un segment, apăsați **Ștergere** pentru a șterge acel segment.

16:26

Glucose Limits

Start (hh:mm)	Low (mmol/L)	High (mmol/L)	
00:00	4.4	12.0	
07:30	4.4	13.0	Delete
08:30	4.4	13.5	

+Add time segment

3. Atingeți  pentru a salva setările.


6.1.2 Alerte Predictive

Alertele predictive calculează când veți ajunge la Limitele Glucozei Inferioare sau Superioare, și apoi sistemul vă trimite o alertă înainte ca dumneavoastră să atingeți acele limite. O alertă predictivă vă informează dacă Senzorul dumneavoastră glicemic continuă să scadă sau să crească la rata actuală, iar dumneavoastră veți atinge Limita dumneavoastră a Glucozei în numărul de minute pe care l-ați setat anterior.

Accesați fereastra **Alerte Predictive**.


Meniul Principal → EasyLoop → Alerte de Glucoză → Alerte Predictive

1. Puteți activa/dezactiva Alertele Predictive.

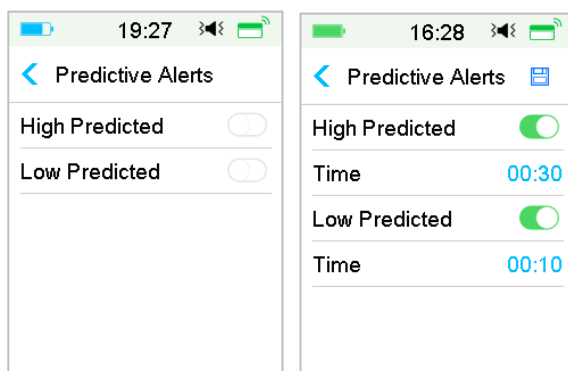

2. Atingeți semnul albastru plus/minus pentru a seta timpul alertei predictive. Vi se va reaminti uneori de timpul valorii predictive superioare sau inferioare (timpul alertei predictive) în prealabil.

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

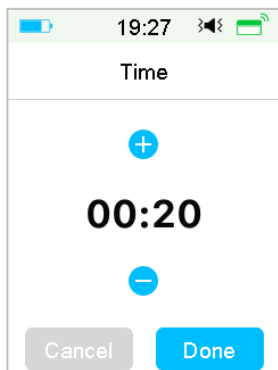

Notă: Puteți seta timpul între 5 min și 30 min cu o creștere de 5 min.

3. Atingeți  pentru a salva setările.


6.1.3 Alertele de Rate

Există două tipuri de alerte de rate:

- **Scădere Rapidă** pentru scăderea Senzorului glicemic la sau mai repede cât rata dumneavoastră pre-selectată
- **Creștere Rapidă** pentru creșterea Senzorului glicemic la sau mai repede decât rata dumneavoastră pre-selectată

Accesați fereastra **Alerte de Rate**.


Meniul Principal → EasyLoop → Alerte de Glucoză → Alerte de Rate

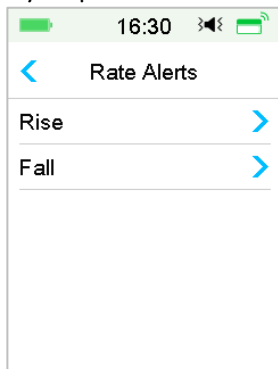


Accesați fereastra **Creștere**.

1. Puteți activa/dezactiva Alertele de Creștere.

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

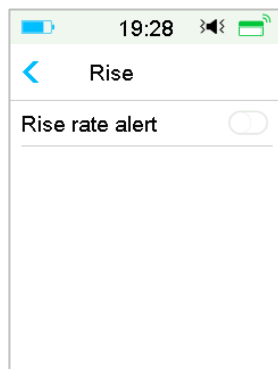


2. Puteți alege o rată relativă moderată sau o rată acută în creștere. *Consultați Secțiunea „Statusul Glicemic” pentru mai multe informații.*

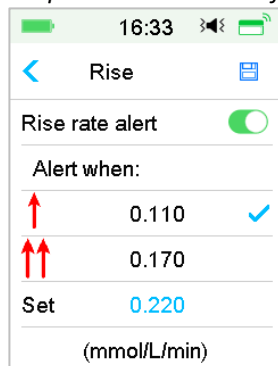

2. Puteți de asemenea seta rata între 0,065 mmol/L/min și 0,275 mmol/L/min (1,1 mg/dL/min și 5,0 mg/dL/min) cu o creștere de 0,005 mmol/L/min (0,1 mg/dL/min).

Apăsați semnul albastru plus/minus pentru a seta alerta de creștere. Vi se va reaminti atunci când SG dumneavoastră crește rapid.


Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

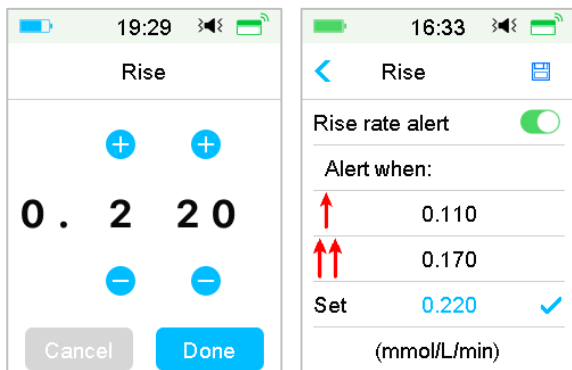

4. Atingeți  pentru a salva setările.


Accesați fereastra **Scădere**.

1. Puteți activa/dezactiva Alertele de Scădere.

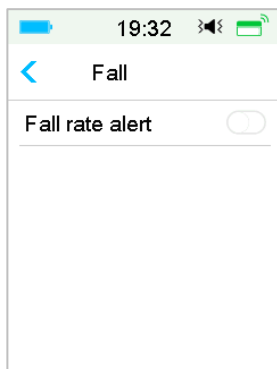


2. Puteți alege o rată relativă moderată sau o rată acută în scădere. *Consultați Secțiunea „Statusul Glicemic” pentru mai multe informații.*

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

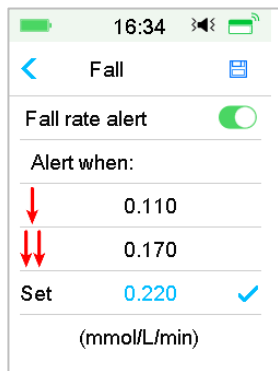

3. Puteți de asemenea seta rata personalizată între 0,065 mmol/L/min și 0,275 mmol/L/min (1,1 mg/dL/min și 5,0 mg/dL/min) cu o creștere de 0,005 mmol/L/min (0,1 mg/dL/min).

Apăsați semnul albastru plus/minus pentru a seta alerta de creștere. Vi se va reaminti atunci când SG dumneavoastră scade rapid.

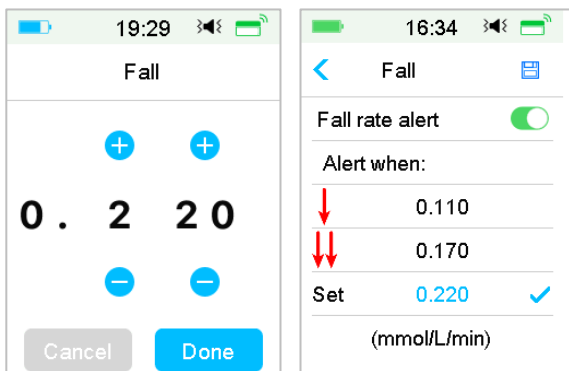


3. Apăsați  pentru a salva setările.

6.1.4 Repetare

Puteți seta intervalul de timp dintre alerte după prima alertă. După ce ați primit și anulat alerta „GLUCOZĂ MARE/MICĂ”, „CREȘTERE/SCĂDERE RAPIDĂ” sau „VALOARE PREDICTIVĂ MARE/MICĂ”, aceasta se va repeta în conformitate cu setările dumneavoastră până când condiția care a cauzat alerta este rezolvată.

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

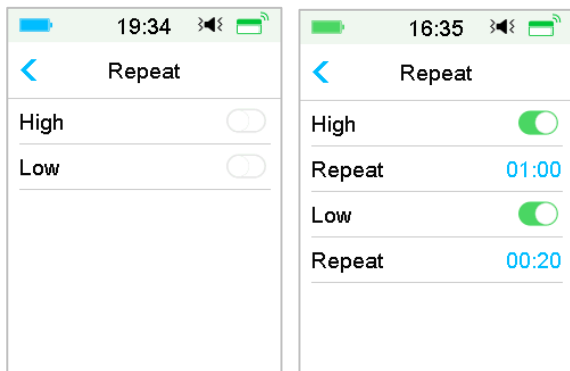

Notă: Puteți activa sau dezactiva Alerta.

Notă: Puteți seta timpul de **Repetare** a Alertelor pentru Valori Ridicate (Glucoză Mare, Creștere Rapidă și Valoare Predictivă Mare) între 5 min și 3h, iar a Alertelor pentru Valori Scăzute (Glucoză Mică, Scădere Rapidă și Valoare Predictivă Mică) între 5 min și 1h cu o creștere de 5 min.

6.1.5 Senzor Pierdut

Această alertă vă poate informa cu privire la faptul că semnalul transmițătorului a fost pierdut pentru o anumită perioadă de timp.

Atunci când semnalul transmițătorului a fost pierdut, verificați BG dumneavoastră pentru a lua decizii cu privire la tratament.

Notă: Puteți activa sau dezactiva această alertă.

Notă: Puteți seta timpul între 20 de minute și 4 ore cu o creștere de 10 minute. Setarea standard este de 20 de minute.

6.2 Schimbarea Senzorului


Senzorul dumneavoastră efectuează citirile glicemice pe o perioadă de până la paisprezece zile. Atunci când un Senzor expiră sau se defectează, sesiunea Senzorului dumneavoastră se încheie automat, iar PDM nu mai afișează citirile glicemice. Trebuie să înlăturați Senzorul și să deconectați Transmițătorul.

6.2.1 Deconectarea Senzorului de la PDM dumneavoastră

Accesați fereastra **Deconectare Senzor**.

Meniul Principal → Senzor → Deconectare Senzor

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

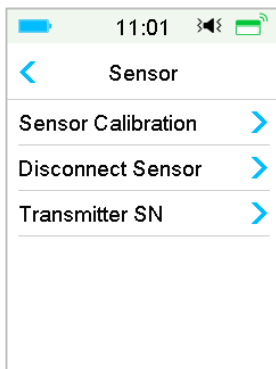


Notă: Opțiunea **Deconectare Senzor** este disponibilă doar atunci când un Senzor este conectat la PDM.

6.2.2 Înlăturarea Senzorului actual și Deconectarea Transmițătorului

1. Dezlipiți cu grijă folia adezivă de pe pielea dumneavoastră printr-o mișcare continuă pentru a înlătura Senzorul și Transmițătorul.



2. Prindeți lamelele de eliberare striate de pe părțile laterale ale suportului Senzorului și trageți cu grijă Transmițătorul de pe suportul Senzorului.

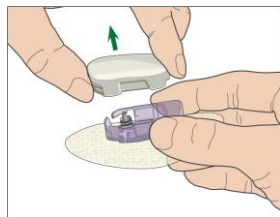

3. Aruncați suportul Senzorului și refolosiți Transmițătorul.

Notă: Nu aruncați Transmițătorul dumneavoastră. Se poate refolosi și reîncărca.

Notă: Asigurați-vă că ați deconectat complet Transmițătorul de la Senzor atunci când faceți acest lucru. NU depozitați Transmițătorul care se conectează la un Senzor sau la un cablu de încărcare USB întrucât acest lucru poate defecta bateria Transmițătorului.

6.2.3 Încărcarea Transmițătorului

Transmițătorul se încarcă cu ajutorul unui cablu de încărcare USB care este introdus într-un port USB 2.0/3.0 sau într-un adaptor de alimentare cu o tensiune nominală de DC 5V și o tensiune nominală actuală mai mare de DC 1000mA. Dispozitivul cu port USB și adaptorul de alimentare trebuie să fie conforme cu EN 60950-1 sau EN 60601-1.

Bateria trebuie să fie încărcată complet prima dată când utilizați Transmițătorul, ceea ce poate dura până la 2 ore. Se recomandă reîncărcarea Transmițătorului după fiecare sesiune a Senzorului. Dacă un Transmițător este depozitat timp de două luni, trebuie să încărcați complet bateria Transmițătorului pentru a vă asigura că funcționează corespunzător.

Indicatorul luminos se va aprinde intermitent atunci când Transmițătorul se încarcă și se va stinge atunci când Transmițătorul este încărcat complet.

Notă: Vă recomandăm ca Transmițătorul dumneavoastră să fie încărcat doar de persoana căruia îi este destinat sau de un operator calificat.


6.2.4 Adăugarea SN-ului Transmițătorului

În orice moment în care treceți la un nou Transmițător și/sau un PDM, trebuie să adăugați SN-ul Transmițătorului.

Meniul Principal → Senzor → SN-ul Transmițătorului

1. Apăsați pe **Conectare Senzor** dacă ați setat SN-ul Transmițătorului.

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

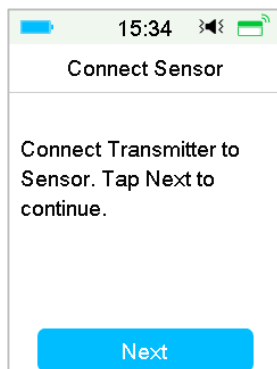

Notă: Nu uitați să actualizați SN dacă ați făcut trecerea la un nou Transmițător.


Notă: Puteți să schimbați SN-ul Transmițătorului doar atunci când nu există niciun Senzor conectat.

Puteți găsi SN-ul Transmițătorului pe cutia produsului sau pe spatele Transmițătorului.




2. Puteți fie să introduceți SN-ul manual sau să căutați SN-ul dacă este prima dată când introduceți SN-ul.

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

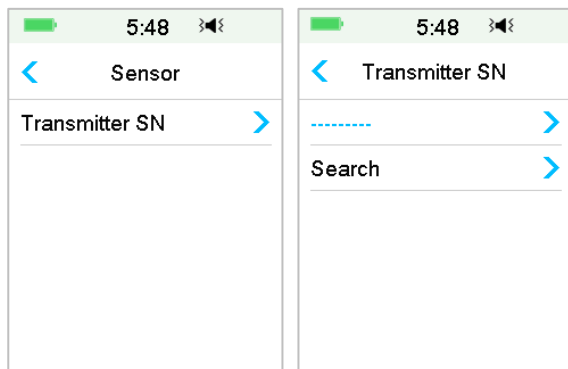


3. Puteți introduce SN-ul doar manual dacă doriți să actualizați SN-ul.

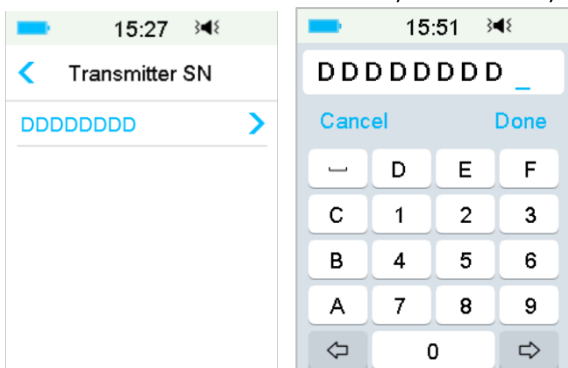

Introducerea SN-ului manual

Apăsați ----- sau SN-ul existent al Transmițătorului și veți vedea următoarea fereastră. Apoi introduceți SN-ul în PDM dumneavoastră și apăsați **Efectuat**.

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

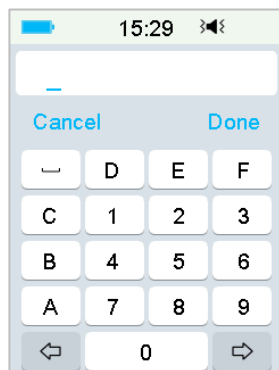


Dacă PDM dumneavoastră nu găsește o Pompă, asigurați-vă că Baza Pompei dumneavoastră este conectată la un nou Plasture cu Rezervor, mutați PDM mai aproape de Pompa dumneavoastră și căutați din nou sau introduceți SN-ul manual.

Căutarea SN-ului


Dacă selectați Căutare, asigurați-vă că Transmițătorul dumneavoastră este conectată la un nou Senzor și mutați PDM mai aproape de CGM dumneavoastră înainte de căutare. *Consultați Secțiunea „Introducerea unui nou Senzor” pentru mai multe informații.*

Dacă apăsați pe **Căutare** în **Senzor**, veți vedea următorul mesaj atunci când căutați SN.

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

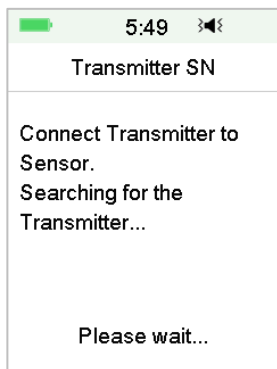


Dacă PDM dumneavoastră găsește o un Transmițător, SN-ul Transmițătorului apare pe ecran. Verificați dacă este același cu SN-ul imprimat pe Transmițătorul dumneavoastră. Dacă este corect, apăsați **OK**.

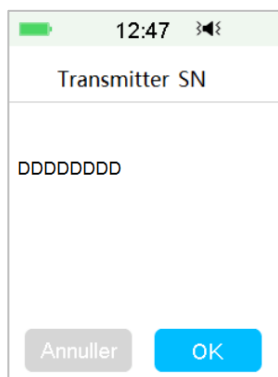

Dacă PDM dumneavoastră găsește mai multe Transmițătoare, apăsați **OK** pentru a vă întoarce la Meniul Senzor și apoi selectați „-----” pentru a introduce SN-ul manual.

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

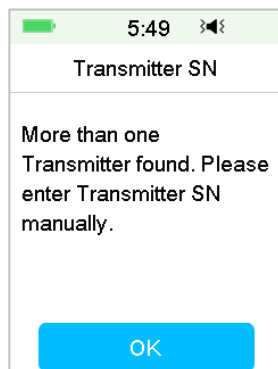

Dacă PDM dumneavoastră nu găsește un Transmițător, asigurați-vă că Transmițătorul dumneavoastră este conectat la un Senzor nou, mutați PDM mai aproape de CGM dumneavoastră și introduceți SN-ul manual.

6.2.5 Introducerea unui nou Senzor

6.2.5.1 Alegerea unui loc de introducere a Senzorului

Atunci când alegeți locația Senzorului, luați în considerare următoarele:


- Să puteți ajunge în mod confortabil la Pompă.
- Să aplicați Pompa pe o zonă plată a pielii cu grăsime subcutanată adecvată.
- Zona trebuie să rămână plată în timpul activităților zilnice normale fără a se îndoi sau a se plia.

Atunci când alegeți locația Senzorului, evitați următoarele:

- Zonele care sunt strânse de îmbrăcăminte, precum linia curelei sau talia.
- Zone curbate sau rigide din cauza mușchilor sau oaselor.
- Zone care implică mișcare riguroasă în timpul exercițiilor.
- Zone ale pielii cu cicatrici, tatuaje sau iritații.
- 5,0 cm (2 inch) în jurul ombilicului.
- Zone cu păr în exces.
- La 7,5 cm (3 inch) distanță de locul de injectare a pompei de insulină sau a locului de injectare manuală.

Mai jos sunt cele mai bune zone ale corpului (cu gri) pentru introducerea Senzorului:

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

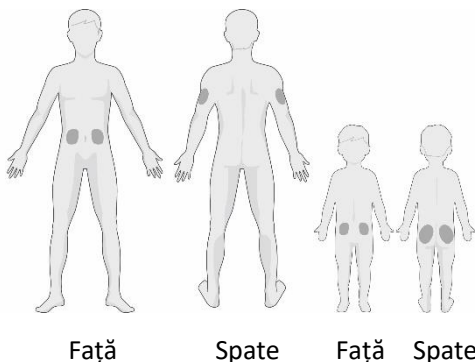

Dacă alegeți un loc de inserție pe abdomen sau fese, aplicați Senzorul în poziție orizontală. Dacă alegeți un loc de inserție pe membrul dumneavoastră superior, aplicați Senzorul în poziție verticală.

Este indicat să aveți un program de rotire în alegerea unui nou loc. Folosirea aceluiași loc prea des poate să nu îi permită pielii să se vindece și poate cauza apariția cicatricilor sau a iritației pielii.

6.2.5.2 Pregătirea Locul de Inserție

1. Spălați-vă pe mâini cu rigurozitate cu apă și săpun și așteptați să vă uscați.
2. Ștergeți locul ales pentru inserție cu alcool sanitar și așteptați ca zona să se usuce. Acest lucru poate ajuta la prevenirea infecției. NU introduceți Senzorul până când zona curată nu este uscată. Acest lucru va face ca adezivul Senzorului să stea ferm pe piele.

Atenție: Dacă Senzorul se dislocă din cauza faptului că adezivul suportului Senzorului nu face aderență cu pielea, puteți obține citiri false sau să nu obțineți nicio citire. Alegerea incorectă a locului sau pregătirea incorectă a locului poate determina aderență slabă.

6.2.5.3 Desfacerea Senzorului Glicemic

Deschideți pachetul Senzorului dezlipind hârtia de pe spatele ambalajului.

Fiți atent la următoarele aspecte:


Atenție: NU utilizați Senzorul dacă ambalajul steril al acestuia a fost deteriorat sau deschis sau dacă Senzorul a expirat sau dacă acesta este deteriorat în vreun fel.

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

Notă: Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun și apoi așteptați să se usuce înainte de deschiderea ambalajului și de manevrarea Senzorului. După deschiderea ambalajului, evitați să atingeți suprafața Senzorului care va intra în contact cu corpul, adică suprafața adezivă. Puteți contamina locul de inserție și să suferiți o infecție dacă nu aveți mâinile curate atunci când introduceți Senzorul.

6.2.5.4 Înlăturarea Foliei de Protecție de pe Suportul Senzorului

Îndoți folia de protecției din două părți ușor pe margine astfel încât să vedeți filonul dintre cele două piese. Țineți partea de inserție a Senzorului și încercați să nu atingeți suprafața adezivă. Înlăturați foliile de protecție de pe suportul Senzorului una câte una.

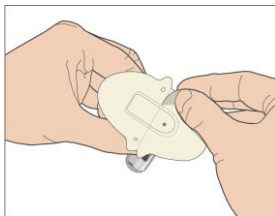

6.2.5.5 Localizarea Suportului Senzorului

Dacă introduceți Senzorul pe abdomen sau pe partea inferioară a spatelui, amplasați Senzorul orizontal pe piele.

Dacă introduceți Senzorul pe brațul superior, amplasați Senzorul vertical pe piele.


Mișcați-vă degetele în jurul foliei adezive pentru a-l fixa pe pielea dumneavoastră.



Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)



6.2.5.6 Înlăturarea dispozitivului de blocare de siguranță

Țineți Senzorul Glicemic cu o mână. Strângeți cu fermitate cele două părți de eliberare a dispozitivului de blocare de siguranță cu degetul mare și cu arătătorul de la cealaltă mână pe măsură ce ridicați dispozitivul de blocare de siguranță de pe dispozitivul de inserție. Păstrați dispozitivul de blocare de siguranță, veți avea nevoie de el mai târziu.

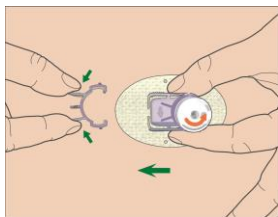

6.2.5.7 Introducerea Senzorului


Țineți dispozitivul de inserție așa cum se arată mai jos și apăsați cele două butoane în același timp. Puteți simți o mică înțepătură întrucât Senzorul este amplasat chiar sub pielea dumneavoastră.

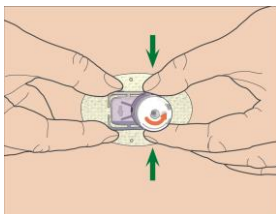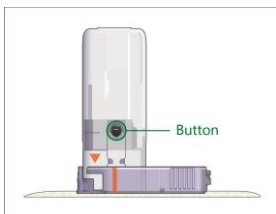

6.2.5.8 Înlăturarea dispozitivului de inserție

Prindeți și țineți lamelele de eliberare striate de pe părțile laterale ale suportul Senzorului cu o mână, rotiți dispozitivul de inserție aproximativ 40° în direcția (contrară acelor de ceas) indicați cu cealaltă mână, până când triunghiul portocaliu marcat de dispozitivul de inserție se aliniază cu linia portocalie de pe suportul Senzorului, apoi ridicați pe verticală dispozitivul de inserție de pe suport. Doar suportul Senzorului va rămâne pe corpul dumneavoastră.

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

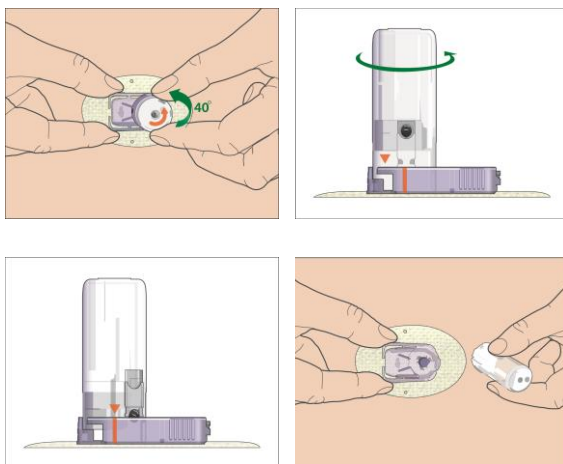

6.2.5.9 Verificarea Suportului Senzorului


Confirmați faptul că suportul Senzorului este bine prins de pielea dumneavoastră glisând degetele de-a lungul marginilor părții adezive și examinați dacă există vreo problemă de aderență.

Atenție: Dacă apare sângerarea în locul de inserție, nu atașați Transmițătorul de Senzor. Aplicați presiunea mare folosind un compresă sterilă sau o cârpă curată timp de 3 minute. Dacă sângerarea se oprește, atașați Transmițătorul de Senzorul. Dacă sângerarea continuă, înlăturați Senzorul, tratați locul conform necesității și introduceți un nou Senzorul într-un loc diferit.

Atenție: Verificați locul de inserție frecvent pentru infecție sau roșeață și inflamație, pentru umflare sau durere. Înlăturați Senzorul și solicitați ajutor medical specializat dacă una dintre aceste situații apare.

6.2.5.10 Aruncarea dispozitivului de inserție a Senzorului în siguranță

Atașați dispozitivul de blocare de siguranță pe dispozitivul de inserție pentru a acoperi deschiderile acestuia și pentru a ascunde acul în interior. Respectați regulamentele locale de eliminare a deșeurilor atunci când eliminați dispozitivul de inserție. Vă recomandăm să eliminați dispozitivul de inserție a Senzorului într-un recipient pentru obiecte ascuțite sau într-un recipient care nu se poate sparte cu un capac fix.

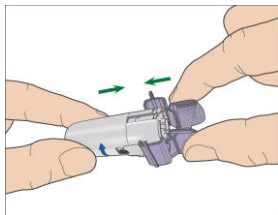


6.2.6 Atașarea Transmițătorului dumneavoastră

Notă: Dacă schimbați Senzorul, asigurați-vă că Transmițătorul dumneavoastră a fost deconectat de la vechiul Senzor cu cel puțin un minut înainte de conectarea noului Senzor.

Înainte de atașarea Transmițătorului la Senzor, trebuie să aveți bateria Transmițătorului încărcată complet și PDM setat.


Fixați Transmițătorul în suportul Senzorului până când cele două brațe flexibile se potrivesc în canelurile Transmițătorului. Indicatorul luminos se va aprinde intermitent de culoare verde după conectarea cu succes, de trei ori după conectarea corespunzătoare și de alte șase ori după verificarea cu succes a sistemului.

Notă: Asigurați-vă că auziți un click atunci când fixați Transmițătorul în poziție. Dacă acesta nu este fixat complet, conexiunea electrică și rezistența la apă pot fi compromise, ceea ce va duce la citiri imprecise ale Senzorului glicemic.

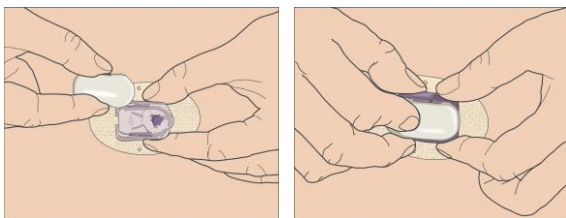

Lipirea Suportului Senzorului (Opțional)


Suportul Senzorului trebuie să stea pe pielea dumneavoastră folosind propriu adeziv. Dar dacă dumneavoastră considerați că suportul Senzorului nu se lipește bine în timpul activităților zilnice, puteți folosi adeziv medical pentru susținere suplimentară. Puteți adezivul doar peste piesele adezive albe de pe toate părțile laterale pentru suport egal. NU puneți adeziv peste Transmițător sau peste piesele din plastic ale suportului Senzorului.

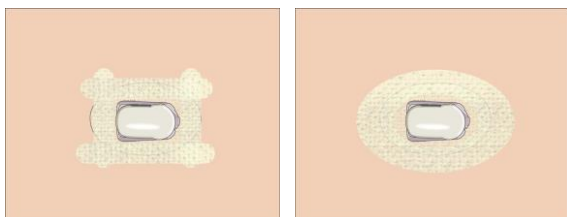

6.2.7 Conectarea Senzorului la PDM dumneavoastră

1. Accesați fereastra **Conectare Senzor**.


Meniul Principal → Senzor → Conectare Senzor

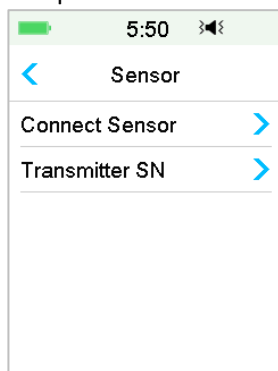

Notă: Opțiunea **Conectare Senzor** este disponibilă doar atunci când nu există în prezent un Senzor conectat la PDM.

2. Asigurați-vă că Transmițătorul dumneavoastră este conectat la un Senzor și că SN-ul Transmițătorul dumneavoastră este găsit sau introdus și apoi continuați apăsând Continuă.


Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

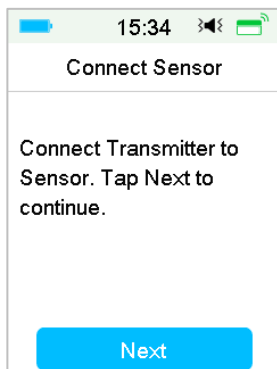


3. Dacă senzorul este fără calibrare, introduceți codul senzorului de pe eticheta senzorului care este un cod unic pentru fiecare senzor. Odată ce codul senzorului este introdus cu succes, calibrările nu mai sunt necesare.

Sau, omiteți pasul de introducere a codului senzorului și accesați fereastra Conexiuni. Senzorul trebuie să fie calibrat de două ori (o dată la fiecare 12 ore) în prima zi și apoi o dată la fiecare 24 de ore începând din a doua zi.

4. Atunci când ați terminat, următorul afișaj va apărea.

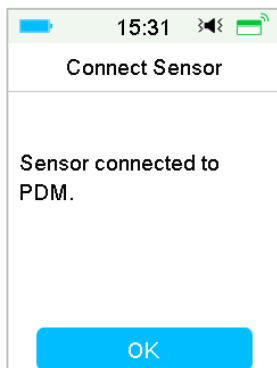

Notă: Dacă doriți să înlăturați un Senzor înainte de expirarea acestuia, deconectați-l de la PDM înainte de a conecta un nou Senzor. Atunci când conectați un nou Senzor direct, pe PDM va apărea mesajul „SENZOR RECONECTAT”.

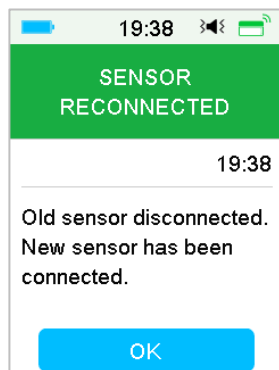


6.3 Calibrarea Senzorului dumneavoastră

De fiecare dată când PDM vă afișează un mesaj „VALOARE BG ACUM” sau “ATENȚIONARE CAL SENZOR”, trebuie să introduceți o valoare a BG pentru calibrarea Senzorului dumneavoastră.

Accesați fereastra **Calibrarea Senzorului**.

Meniul Principal → Senzor → Calibrare Senzor

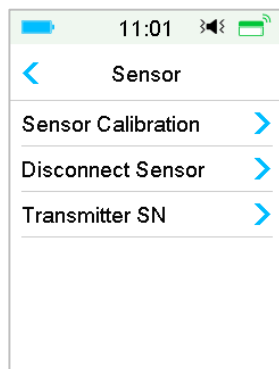

Notă: Dacă senzorul dumneavoastră nu este un senzor fără calibrare sau dacă omiteți pasul de introducere a codului senzorului, trebuie să calibrați senzorul de cel puțin două ori (o dată la 12 ore) în prima zi și apoi, o dată la fiecare 24 de ore începând cu a doua zi. Dacă ați introdus cu succes codul senzorului, sistemul nu va necesita calibrare. Dar puteți calibra senzorul dacă doriți.

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

Notă: Calibrarea este indisponibil în următoarele circumstanțe:


- Senzorul s-a deconectat de la PDM
- Senzorul se încălzește
- Timp de 15 minute după alerta EROARE CAL SENZOR
- Comunicare slabă prin undă RF între Transmițător și PDM
- Nicio citire

6.3.1 Introduceți valoarea dumneavoastră BG

Aici puteți introduceți valoarea dumneavoastră actuală a glucozei din sânge măsurată din deget cu ajutorul unui glucometru.

1. Accesați fereastra **Introduceți BG**.

Meniu Principal → Senzor → Calibrarea Senzorului

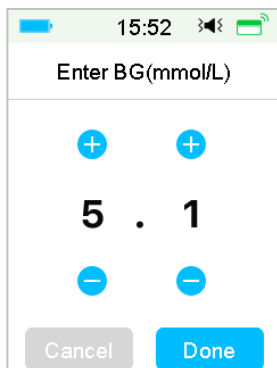

15:52

Enter BG (mmol/L)


5 . 1

Cancel Done

Notă: Vă rugăm să introduceți valoarea exactă a glucozei din sânge a unei testări din deget efectuate cu atenție cu ajutorul glucometrului dumneavoastră în interval de cinci minute.

2. Apăsați pe **Efectuat** pentru a vă confirma degetul, apoi apăsați butonul **Da** pentru a iniția calibrarea.

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

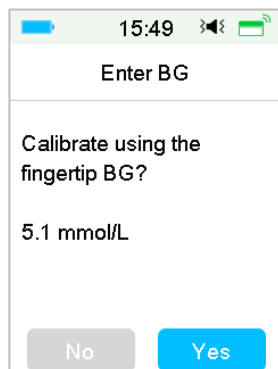

6.3.2 Setarea Repetării Calibrării

Accesați fereastra **Repetare Cal.**

Meniul Principal → Setări → Sistem CGM → Repetare Cal



După ce ați primit și anulat o alertă „VALOARE BG ACUM”, PDM va repeta alerta până când introduceți o nouă valoarea a glucozei din sânge.

Puteți activa sau dezactiva opțiunea **Repetare Cal.** Dacă opțiunea **Repetare Cal** este activată, puteți seta timpul de repetare a alertei „VALOARE BG ACUM” între 5 min și 1h cu o creștere de 5 min.


6.3.3 Atenționare de Calibrare

Atenționarea de Calibrare vă permite să vi se amintească cu o anumită perioadă de timp înainte de momentul în care trebuie să efectuați următoarea calibrare.

1. Accesați fereastra **Atenționare Cal.**

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

Meniu Principal → Setări → Atenționări → Atenționare Cal

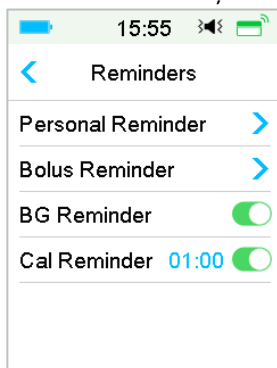

2. Puteți activa sau dezactiva **Atenționarea de Calibrare**.

Notă: Dacă Atenționarea Cal este activă, puteți seta timpul între 5 minute și 6h cu o creștere de 5 min.

6.4 Setările Sistemului CGM

Accesați fereastra **Sistem CGM**.

Meniul Principal → Setări → Sistem CGM




6.4.1 Caracteristica CGM activă/inactivă

Caracteristica CGM trebuie să fie activă pentru a primi datele Senzorului.

1. Selectați **Sistem CGM** din meniul **Setări**.

Meniul Principal → Setări → Sistem CGM

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

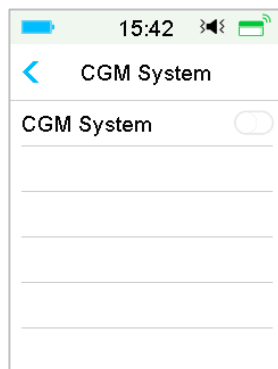

2. Puteți activa sau dezactiva caracteristica CGM.
3. După ce ați activat sistemul CGM, apare meniul SN-ul Transmițătorului.



6.4.2 Setarea SN-ului Transmițătorului

Atingeți **Setări** în Meniul Principal pentru a accesa fereastra **Setări**. Atingeți **Sistem CGM** pentru a deschide fereastra Setări CGM. Activați caracteristica Sistem CGM.


Atingeți **SN-ul Transmițătorului** pentru a adăuga acest Transmițător la PDM dumneavoastră. Puteți folosi PDM dumneavoastră pentru a căuta Transmițătorul dumneavoastră (doar pentru prima dată) sau puteți introduce manual SN-ul imprimat pe Transmițătorul dumneavoastră.

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

De asemenea, puteți introduce SN-ul Transmițătorului dumneavoastră nou în meniul Sistem CGM. *Consultați secțiunea „Adăugați SN-ul Transmițătorului” pentru mai multe informații.*

6.4.3 Intervalul Graficului

Puteți seta intervalul de timp al graficului senzorului în fereastra orizontală ca 3, 6, 12, 24 ore. Intervalul standard este de 12 ore.

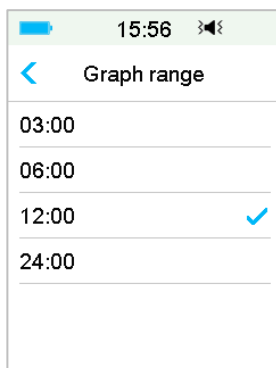


6.4.4 Repetare Cal

Consultați Secțiunea „Calibrarea Senzorului dumneavoastră” din acest capitol pentru mai multe informații.

6.4.5 Alertă Silențioasă

Accesați fereastra **Alertă Silențioasă**.

Meniul Principal → Setări → Sistem CGM → Alertă Silențioasă

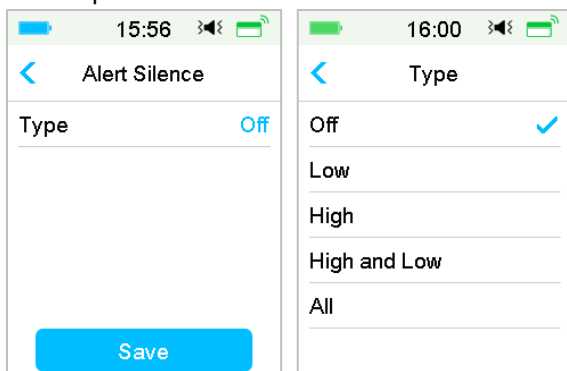

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

Atenție: Nu se recomandă punere pe silențios a alarmelor atunci când nu puteți să interacționați cu PDM dumneavoastră (de exemplu, atunci când dormiți).

Interacționarea cu PDM dumneavoastră include activități precum apăsarea butonului principal și verificarea ecranului.

Cu ajutorul caracteristicii Alertă Silențioasă puteți ține alertele de glucoză pe silențios pentru o perioadă de timp cuprinsă între 30 de minute până la 24 ore.

Există cinci opțiuni de Alertă Silențioasă:

- **Oprit**— Această opțiune înseamnă că toate alertele de glucoză sunt active: PDM va emite semnale sonore sau vibrație dacă o alertă a Senzorului apare.
- **Valoare mică** — PDM nu va emite un semnal sonor sau vibrație dacă o alertă cu privire la o valoare mică (GLICEMIE MICĂ, SCĂDERE RAPIDĂ sau VALOARE PREDICTIVĂ MICĂ) apare în perioada de timp specificată
- **Valoare mare** — PDM nu va emite un semnal sonor sau vibrație dacă o alertă cu privire la o valoare mare (GLICEMIE MARE, CREȘTERE RAPIDĂ sau VALOARE PREDICTIVĂ MARE) apare în perioada de timp specificată.
- **Valoare mare și mică** — PDM nu va emite un semnal sonor sau vibrație dacă o alertă cu privire la o valoare mare/mică (GLICEMIE MARE/MICĂ, CREȘTERE/SCĂDERE RAPIDĂ sau VALOARE PREDICTIVĂ MARE/MICĂ) apare în perioada de timp specificată.
- **Toate** —PDM nu va emite un semnal sonor sau vibrație dacă alertele „SENZOR PIERDUT”, „ATENȚIONARE CAL SENZOR”, „VALOARE BG ACUM”, „SENZORUL EXPIRĂ ÎN 6 ORE”, „SENZORUL EXPIRĂ ÎN 2 ORE”, „SENZORUL EXPIRĂ ÎN 30 MIN”, „SENZOR EXPIRAT” sau orice altă alertă de valoare mică/mare apare în perioada de timp specificată.

Consultați *“Pictogramele din Bara de Status”* și *Capitolul „Sistem de Siguranță și Alarme/Alerte”* pentru mai multe informații.

6.4.6 Senzor expirat

Accesați fereastra **Senzor Expirat**.

Meniul Principal → Setări → Sistem CGM → Senzor Expirat

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)



Pentru MD1026, data de expirare este setată la 14 zile.

Alerta „SENZOR EXPIRĂ ÎN 6 ORE”, alerta „SENZOR EXPIRĂ ÎN 2 ORE”, „SENZOR EXPIRĂ ÎN 30 DE MINUTE” și alerta „SENZOR EXPIRAT” vor apărea după caz.


6.5 Istoricul Senzorului

6.5.1 Istoricul Senzorului

PDM dumneavoastră stochează istoricul detaliat al Senzorului pentru a vă ajuta să țineți evidența citirilor dumneavoastră glicemice și condițiilor Senzorului.

Accesați fereastra **Istoricul Senzorului**.


Meniul Principal → Istoric → Istoricul Senzorului

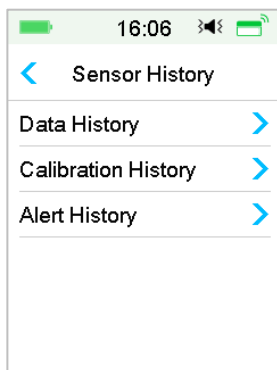

6.5.1.1 Istoricul Datelor


1. Alegeți **Istoricul Datelor** din fereastra **Istoricul Senzorului**.

Fereastra **Istoricul Datelor** afișează toate sesiunile Senzorului care au avut loc recent. Fiecare rând indică data de început a sesiunii Senzorului și durata (zi/oră/minut). De exemplu, înregistrarea 28-08-2018 5/21/8 înseamnă că Senzorul a fost inițiat la data de 28-08-2018 și a fost folosit timp de 5 zile 21 ore și 8 minute.

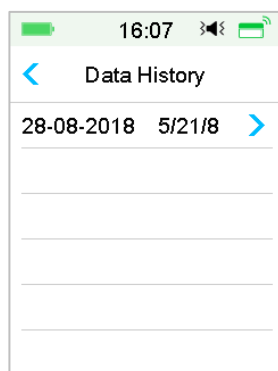

2. Alegeți o sesiune a Senzorului și veți vedea datele istoricului Senzorului din ultima zi.

Axa Y a graficului Senzorului este caracterizată de patru valori: 5, 10, 15, 20 mmol/L (90, 180, 270, 360 mg/dL). Axa X a graficului Senzorului prezintă o perioadă de 24 de ore.

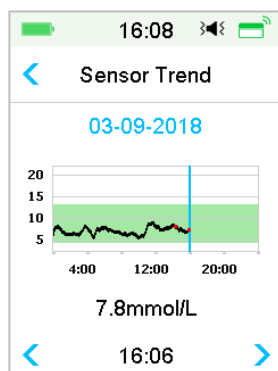


Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

Graficul Senzorului poate fi schimbat în vizualizare panoramică. Apăsați lung pe graficul Senzorului timp de 1 secundă și fereastra se va întoarce pe orizontală.

Notă:

- 1) Apăsați pe graficul Senzorului și mutați cursorul pentru a vedea valorile glucozei. Folosiți butoanele cu săgeți stânga și dreapta pentru a face ajustări fine în alegerea orei. Intervalul de timp dintre două valori este de 2 minute.
- 2) Ora la care un nou Senzor este aplicat va fi marcat cu o etichetă cu un pătrat verde „□”. Citirile din timpul etapei de încălzire nu vor fi afișate, ci vor fi marcate ca „încălzire”.
- 3) Valoarea glucozei sau statusul special va fi afișat în zona de jos, între săgețile stânga și dreapta. Statusul special include: eroare calibrare (ERR), nicio citire (???), etapa de încălzire (Încălzire), Senzorul glicemic este peste 22,2 mmol/L (400mg/dL), (VALOARE MARE) și Senzorul glicemic este sub 2,2 mmol/L (40mg/dL). (VALOARE MICĂ).
- 4) După etapa de încălzire, valorile dinainte de prima calibrare sunt înlocuite de „BG”.
- 5) Atunci când calibrarea Senzorului expiră, valorile citite vor fi subliniate
- 6) Calibrarea va fi marcată cu un punct roșu „•”.
- 7) În vizualizarea panoramică, apăsați pe Butonul Principal pentru a vă întoarce la Fereastra Principală.
- 8) În următoarele situații, nu puteți accesa fereastra în format panoramic apăsând lung pe grafic
 - atunci când nu există niciun Senzor conectat.
 - atunci când datele sunt în curs de recuperare după reconectare.
3. Atingeți data și veți vedea lista datelor din acea sesiune.


Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

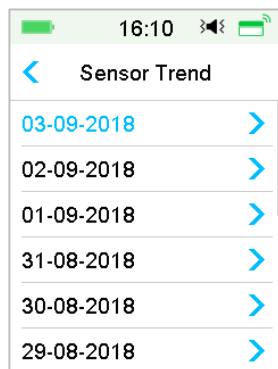

4. Alegeți o dată și veți vedea graficul tendinței de 24 de ore a Senzorului din acea zi.

6.5.1.2 Istoricul Calibrării


Alegeți **Istoricul Calibrării** în fereastra **Istoricul Senzorului**. Fereastra **Istoricul Calibrării** afișează istoricul calibrării.

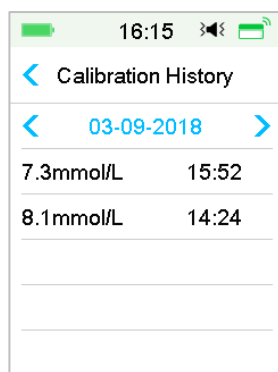

6.5.1.3 Istoricul Alertelor

Alegeți **Istoricul Alertelor** în fereastra **Istoricul Senzorului**. Fereastra **Istoricul Alertelor** afișează toate alertele Senzorului care au apărut recent.

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

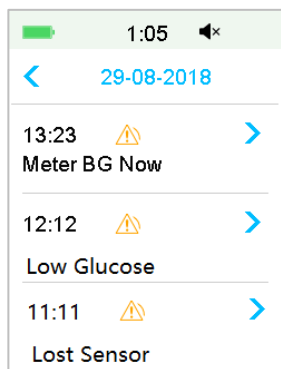

Alegeți o înregistrare a alertei pentru a vizualiza detaliile. Apăsați pe  pentru a vă întoarce la meniul anterior.


Consultați Secțiunea „Pictogramele Alertelor” și Capitolul „Sistemul de Siguranță și Alarmer/Alerte” pentru mai multe informații cu privire la modul în care puteți soluționa alarmele și alertele.

6.5.2 Istoric rezumativ: Istoricul Senzorului

Această fereastră afișează istoricul rezumativ al citirilor SG.

Accesați fereastra **Istoricul Senzorului**.

Meniu Principal → Istoric → Istoric rezumativ → Istoricul Senzorului

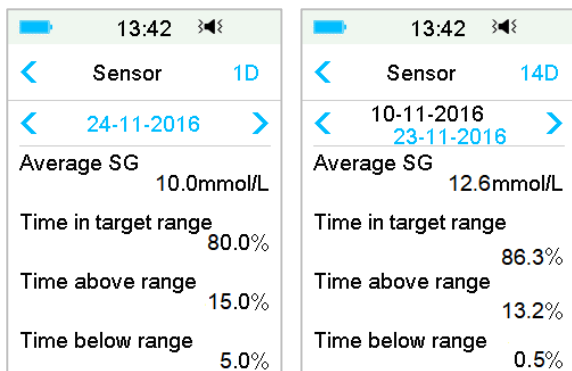

SG Mediu: Citirile medii SG din zilele selectate.

Time in target range: Procentajul duratei în care citirea SG este în intervalul țintă (3,9 – 10,0 mmol/L sau 70 - 180 mg/dL).

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

Timpul peste limita intervalului: Procentajul duratei în care citirea SG este peste intervalul țintă (10,0 mmol/L sau 180 mg/dL).

Timpul sub limita intervalului: Procentajul duratei în care citirea SG este sub intervalul țintă (3,9 mmol/L sau 70 mg/dL).

6.6 Soluționarea problemelor CGM

Pot să fac saună cu Sistemul CGM instalat?

Nu.

În primul rând, intervalul de temperatură de funcționare pentru transmițător este +5°C ~ +40°C.

În al doilea rând, dacă faceți saună, glucoza dumneavoastră din sânge poate avea fluctuații.

Pot să mă scufund cu Senzorul instalat?

Nu.

Senzorul dumneavoastră (inclusiv Transmițătorul instalat) este rezistent la apă la o adâncime de 2,5 metri (8 feet) timp de până la 60 de minute (IPX8).

Ceea ce înseamnă că presiunea maximă pe care dispozitivul o poate tolera este egală cu presiunea de 2,5 m adâncime în apă STĂTĂTOARE în loc de apă curgătoare.

Este OK să faceți duș sau să înotați cu dispozitivele instalate, dar dacă mergeți să vă scufundați, presiunea apei este prea mare pentru dispozitive.

Nu am văzut un mesaj de alertă, dar acesta apare în Istoric.

Dacă una din următoarele alerte apare, PDM va emite un semnal sonor/vibrație și va afișa un prim mesaj, iar dacă ați omis acea alertă, mai târziu, când verificați PDM, condiția care a generat alerta s-a modificat (de exemplu, nivelul glicemiei dumneavoastră a revenit în intervalul țintă), atunci nu veți mai vedea mesajul pe ecran, îl veți găsi doar în Istoric.

1. GLICEMIE MICĂ

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

2. GLICEMIE MARE
3. VALOARE PRECONIZATĂ MICĂ
4. VALOARE PRECONIZATĂ MARE
5. CREȘTERE RAPIDĂ
6. SCĂDERE RAPIDĂ
7. ALERTĂ SILENȚIOASĂ
8. EROARE SENZOR
9. SUB 3,1 mmol/L (56 mg/dL)
10. SENZOR PIERDUT

Dacă următoarea alertă apare, PDM va emite un semnal sonor/vibrație și va afișa un prim mesaj, iar dacă ați omis acea alertă, mai târziu, când verificați PDM, alerta poate să fi trecut la o altă alertă/alarmă, și veți vedea DOAR mesajul alertei/alarmei reînnoite. Prima alertă va apărea în Istoric.

Alertă	Evoluția Alertei
SENZOR EXPIRĂ ÎN 6 ORE	SENZORUL EXPIRĂ ÎN 3 ORE, apoi SENZORUL EXPIRĂ ÎN 30 MIN, și la final SENZOR EXPIRAT

Când trebuie să îmi încarc Transmițătorul?

Vă recomandăm să încărcați Transmițătorul după fiecare sesiune a Senzorului sau să vă asigurați că au trecut cel puțin 90 de secunde înainte de a conecta Transmițătorul la un nou Senzor.

Lumini verzi după instalarea Transmițătorului

După ce instalați Transmițătorul, lumina verde pe de Transmițător se va aprinde intermitent de 3 ori imediat indicând faptul că Transmițătorul s-a conectat în mod corespunzător la Senzor și se va aprinde intermitent de alte 6 ori în interval de 1 minut indicând faptul că verificarea sistemului a fost finalizată.

Anumite citiri ale Senzorului lipsesc din Fereastra Tendința Senzorului

Modul de utilizare a sistemului CGM (Opțional)

Dacă PDM este prea departe de Transmițător sau în cazul în care comunicarea Bluetooth dintre Transmițător și PDM este întreruptă temporar, anumite citiri ale Senzorului pot lipsi din fereastra cu Graficul Tendinței Senzorului.

Soluție: Mutați PDM aproape de Transmițător și așteptați o perioadă. Datele vor fi recuperat automat.


Ce să faceți atunci când apare alerta „Senzor Pierdut”

Mutați PDM mai aproape. Dacă PDM nu se poate conecta la Transmițător în 10 minute, mențineți Senzorul aplicat, deconectați Senzorul din meniul PDM și conectați-l din nou.




7.1 Setările (P)LGS

Alertele Glucozei și funcțiile **Suspendare Glucoză Redusă/Suspendare Predictivă Glucoză Redusă (Suspendare Redusă/Suspendare Pre Redusă)** sunt incluse în Meniul **EasyLoop**. Funcția Suspendare (Pre) Redusă este disponibilă atunci când sistemele CGM și Pompa de Insulină sunt ambele online. Limitele glucozei pentru alertele funcțiilor Suspendare Redusă/Suspendare Pre Redusă sunt aceleași.

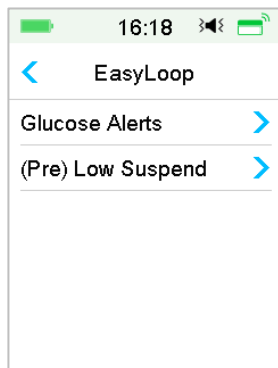

Accesați fereastra **Suspendare Redusă**.

Meniu Principal → EasyLoop → Suspendare (Pre) Redusă

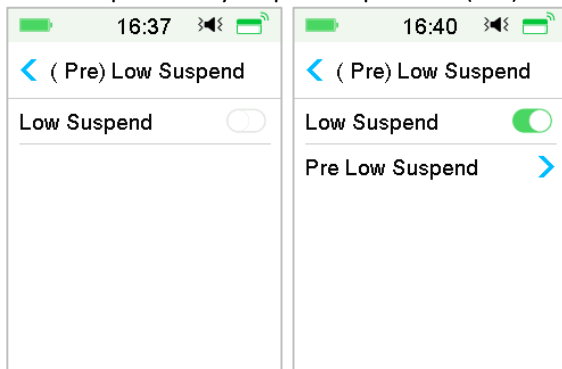

Notă: Dacă activați Suspendarea Redusă, caracteristica Suspendare Predictivă Redusă va apărea.

7.1.1 Suspendare Redusă

Caracteristica Suspendare Glucoză Redusă este disponibilă doar atunci când o Pompă cu Plasture și un Senzor Glicemic sunt utilizate. Setările de fabrică pentru această caracteristică sunt ca aceasta să fie dezactivată. Dacă o activați, PDM dumneavoastră va suspenda automat administrarea de insulină și va emite o alarmă atunci când Senzorul dumneavoastră glicemic este la sau sub limita suspendării reduse și va relua insulina bazală atunci când nu mai există riscul de glucoză redusă. Această caracteristică poate fi folosită ca o protecție sigură împotriva administrării excesive a insulinei. Puteți alege să programați această caracteristică în baza celei mai mici valori a Senzorului Glicemic. Discutați cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală despre ce setări vi se potrivesc cel mai bine.

Notă: Limita suspendării reduse dintre 2,8 mmol/L și 5,0 mmol/L (50 mg/dL și 80 mg/dL) se bazează pe setările **Limita Inferioară a Glucozei**. Consultați Secțiunea „Limite Superioare/Inferioare” din Capitolul „Modul de utilizare a sistemului CGM” pentru mai multe informații.

Condiții de Declanșare pentru Suspendare Redusă

Valoarea Senzorului glicemic este la sau sub limita inferioară.

Durata Suspendării

Odată ce Suspendarea Redusă este declanșată, perioada de suspendare va dura cel puțin 30 de minute, exceptând situația în care reluați manual insulina bazală. Durata maximă de suspendare este de 2 ore. După 2 ore de suspendare, insulina bazală va fi reluată necondiționat.

Condițiile de Declanșare pentru Reluarea Automată a Insulinei Bazale (de la 30 de minute la 2 ore de la suspendare)


Următoarele două condiții trebuie să fie îndeplinite pentru ca sistemul de reia automat insulina bazală.

- Valoarea Senzorului glicemic este cu cel puțin 0,8 mmol/L (15 mg/dL) mai mare decât limita inferioară.
- Se preconizează că valoarea Senzorului glicemic va fi cu cel puțin 1,7 mmol/L (30 mg/dL) mai mare decât limita inferioară în jumătate de oră.


Răspunsul la Alarmă

Modul de utilizare a (P)LGS (Opțional)

Dacă alarma Suspendării Reduse nu este anulată în 10 minute, o sirenă se va auzi împreună cu următoarea Atenționare.

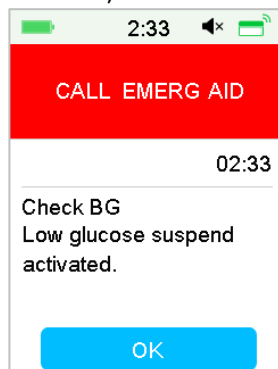


Dacă alarma Suspendării Reduse nu este anulată în timpul suspendării și insulina este reluată în 2 ore.

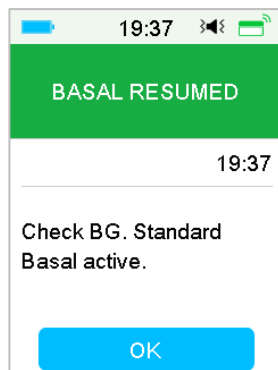


Dacă alarma Suspendării Reduse este anulată în timpul suspendării și insulina este reluată automat după 2 ore, o sirenă va continua și următorul mesaj de urgență va apărea.

Modul de utilizare a (P)LGS (Opțional)

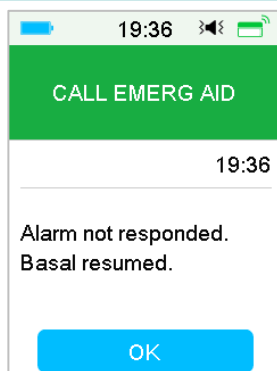

Dacă alarma Suspendării Reduse este anulată în timpul suspendării, o Atenționare va apărea atunci când insulina este reluată automat.

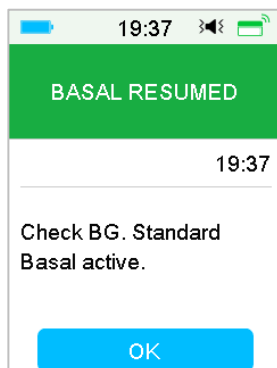

Pentru informații cu privire la momentul în care caracteristica Suspendare Redusă este indisponibilă, consultați secțiunea „Suspendare Predictivă Redusă”.

7.1.2 Suspendare Predictivă Redusă


Caracteristica Suspendare Predictivă Glucoză Redusă este disponibilă doar atunci când caracteristica Suspendare Redusă este activată și disponibilă. Setările de fabrică pentru caracteristica Suspendare Predictivă Redusă sunt ca aceasta să fie dezactivată. Dacă o activați, PDM dumneavoastră va suspenda automat administrarea de insulină și va emite o alarmă atunci când se preconizează că Senzorul dumneavoastră glicemic va ajunge la limita suspendării reduse într-o anumită perioadă de timp și va relua insulina bazală atunci când nu mai există riscul de glucoză redusă. Această caracteristică

Modul de utilizare a (P)LGS (Opțional)

poate fi folosită ca o protecție sigură împotriva administrării excesive a insulinei. Discutați cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală despre ce setări vi se potrivesc cel mai bine

Accesați fereastra **Suspendare Pre Redusă**.

Meniu Principal → EasyLoop → Suspendare (Pre) Redusă

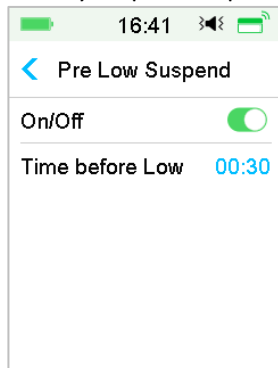

Notă: Puteți seta Durata înainte de Suspendarea Redusă între 5 minute și 40 de minute cu o creștere de 5 min. Setarea de fabrică este de 30 min.

Condiții de Declanșare pentru Suspendarea Predictivă Redusă (de la 30 min la 2h după suspendare)

Următoarele două condiții trebuie să fie îndeplinite pentru a iniția Suspendarea Predictivă Redusă.

- Valoarea Senzorului glicemic este la sau cu 3,9 mmol/L (70 mg/dL) peste limita inferioară.
- Se preconizează că valoarea Senzorului glicemic va scădea sau va fi cu 0,8 mmol/L (15 mg/dL) peste limita inferioară în perioada de timp setată și modificarea ratei de glucoză va fi negativă.

Durata Suspendării

Odată ce Suspendarea Predictivă Redusă este declanșată, perioada de suspendare va dura cel puțin 30 de minute, exceptând situația în care reluați manual insulina bazală. Durata maximă de suspendare este de 2 ore. După 2 ore de suspendare, insulina bazală va fi reluată necondiționat.

Condițiile de Declanșare pentru Reluarea Automată a Insulinei Bazale


Modul de utilizare a (P)LGS (Opțional)

Următoarele două condiții trebuie să fie îndeplinite pentru ca sistemul să reia automat insulina bazală.

- Valoarea Senzorului glicemic este cu cel puțin 0,8 mmol/L (15 mg/dL) mai mare decât limita inferioară.
- Se preconizează că valoarea Senzorului glicemic va fi cu cel puțin 1,7 mmol/L (30 mg/dL) mai mare decât limita inferioară în jumătate de oră.

Atenționare cu privire la Reluare

Indiferent dacă o alertă Suspendare Predictivă Redusă este anulată sau nu, aceeași Atenționare va apărea atunci când insulina este reluată în mod automat.

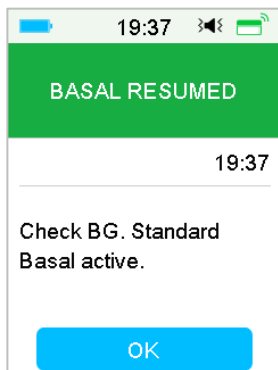

Când caracteristica Suspendare Redusă și cea Suspendare Predictivă Redusă sunt indisponibile

După ce administrarea de insulină este reluată după o Suspendare redusă sau. Suspendare Predictivă Redusă, caracteristica Suspendare Redusă și caracteristica Suspendare Predictivă Redusă vor fi indisponibile timp de 30 de minute.

7.2 Istoric rezumativ: Istoricul Suspendării Reduse

Accesați fereastra **Istoricul Suspendării Reduse**.

Meniu Principal → Istoric → Istoric rezumativ → Istoricul Suspendării Reduse

Modul de utilizare a (P)LGS (Opțional)

13:42	13:43
< Low Suspend 1D	< Low Suspend 14D
< 24-11-2016 >	< 10-11-2016 23-11-2016 >
# of PLGS	# of PLGS
#2.0	#2.8
# of LGS	# of LGS
#3.0	#3.6
Time in suspend	Time in suspend
0:45	0:53

Această fereastră afișează istoricul rezumativ Suspendare (Pre) Redusă.

of LGS: Numărul mediu zilnic de Suspendare din cauza LGS.

of PLGS: Numărul mediu zilnic de Suspendare din cauza PLGS.

Durata de Suspendare: Durata medie zilnică de suspendare din cauza LGS sau PLGS.

7.3 Soluționarea problemelor Suspendare Redusă

Nu am văzut un mesaj de alertă, dat acesta apare în Istoric.

Dacă una din următoarele alerte apare, PDM va emite un semnal sonor/o vibrație și va afișa un prim mesaj și dacă ați omis acea alertă, mai târziu când verificați PDM, condiția care a declanșat alerta s-a schimbat (de exemplu, nivelul dumneavoastră glicemic a revenit în intervalul țintă), atunci nu veți mai vedea mesajul pe ecran, doar îl veți găsi în Istoric.

Alertă	Modificarea alertei
SUSPENDARE REDUSĂ	După ce administrarea insuline pornește din nou în mod automat, alerta este modificată în RATĂ BAZALĂ RELUATĂ.
SUSPENDARE PRE REDUSĂ	După ce administrarea insuline pornește din nou în mod automat, alerta este modificată în RATĂ BAZALĂ RELUATĂ.



8.1 Sistem de Siguranță

Sistemul dumneavoastră A7+ TouchCare® efectuează automat o serie de verificări de siguranță. PDM emite o alertă sau alarmă și afișează un mesaj pe ecran pentru a vă informa cu privire la o situație anormală.

Dacă aveți mai multe notificări, trebuie să ștergeți prima notificare pentru a o vedea pe următoarea.

Setările dumneavoastră de alarmă și istoricul alarmelor/alertelor din ultimele 90 de zile sunt stocate în PDM chiar și atunci când bateria este descărcată complet și vor fi recuperate atunci când PDM este încărcat în mod corespunzător. Atunci când bateria PDM este goală, o nouă alertă/alarmă poate să nu fie înregistrată cu succes.

Notă: NU setați alarma (punct în timp, valoare limită etc.) sub limitele sau într-un mod în care face sistemul de siguranță inutil. Discutați cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală pentru a vedea ce setări sunt cele mai bune pentru dumneavoastră.

Notă: PDM și Pompa dumneavoastră consumă baterie atunci când vă notifică alertele, alarmele și atenționările. Dacă nu luați la cunoștință o notificare, bateria PDM scade rapid întrucât notificările se repetă și progresează. Acest lucru va reduce durata de viață a bateriei și Alarma „ÎNCĂRCAȚI PDM ACUM/BATERIE PLASTURE DESCĂRCATĂ COMPLET” sau alerta „BATERIE PDM DESCĂRCATĂ/ BATERIE PLASTURE DESCĂRCATĂ” va apărea mai devreme decât vă așteptați.

8.2 Verificări de Siguranță

O singură defecțiune va face ca pompa să suspende administrarea de insulină. Injectarea maximă în cazul unei singure defecțiuni este 0,05U.


8.3 Alarme

Alarmele sunt declanșate de condiții grave sau cu potențial grav. Trebuie să răspundeți la alarmă prin luarea unor măsuri corespunzătoare pentru a anula situația de alarmă.


De exemplu:

Sistem de Siguranță și Alarmer/Alerte

Atunci când alarma **“PLASTURE EXPIRAT”** apare, Fereastra de Blocare și fereastra de Alarmer indică următorul afișaj.

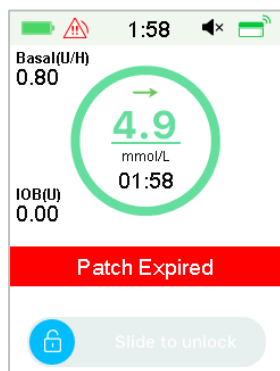

Alarma în Fereastra de Blocare

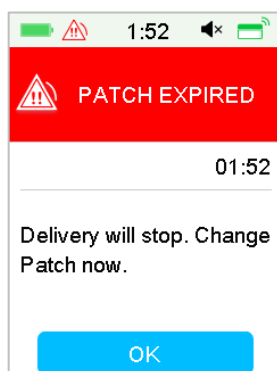

Alarma în afișajul neblocat

Dacă este o alarmă cu prioritate mare, PDM va afișa un mesaj de alarmă cu instrucțiuni și pictograma  (un triunghi roșu cu trei semne de exclamare) în fereastra de Alarmer.

Dacă este o alarmă cu prioritate medie, PDM va afișa un mesaj de alarmă cu instrucțiuni și pictograma  (un triunghi roșu cu două semne de exclamare) în fereastra de Alarmer.

Alarmerle PDM în diferitele moduri audio:

Modul Audio	 Alarmă cu prioritate medie
Sunet	PDM emite zece semnale sonore la fiecare douăzeci de secunde.
Vibrație	PDM emite o vibrație simplă la fiecare douăzeci de secunde.
Sunet și Vibrație	PDM emite trei semnale sonore și o vibrație simplă la fiecare douăzeci de secunde.

Sistem de Siguranță și Alarme/Alerte

Sunet oprit / Vibrație oprită	PDM emite o vibrație simplă la fiecare douăzeci de secunde.
--	---

Alarmerle Pompei cu Plasture de diferite priorități în diferitele moduri audio:

Modul audio	 alarmă cu prioritate mare	 alarmă cu prioritate medie
Sunet	PDM emite zece semnale sonore la fiecare zece secunde.	PDM emite zece semnale sonore la fiecare douăzeci de secunde.
Vibrație	PDM emite o vibrație simplă la fiecare zece secunde.	PDM emite o vibrație simplă la fiecare douăzeci de secunde.
Sunet și Vibrație	PDM emite zece semnale sonore și o vibrație simplă la fiecare zece secunde.	PDM emite trei semnale sonore și o vibrație simplă la fiecare douăzeci de secunde.
Sunet oprit / Vibrație oprită	PDM emite zece semnale sonore la fiecare zece secunde.	PDM emite o vibrație simplă la fiecare douăzeci de secunde.

Modul audio	 alarmă cu prioritate mare	 alarmă cu prioritate medie
Sunet	Pompa cu Plasture emite trei semnale sonore la fiecare minut.	Pompa cu Plasture emite trei semnale sonore la fiecare minut.
Vibrație	Pompa cu Plasture emite o vibrație triplă la fiecare minut.	Pompa cu Plasture emite o vibrație triplă la fiecare minut.
Sunet și Vibrație	Pompa cu Plasture emite trei semnale sonore și o	Pompa cu Plasture emite trei semnale sonore și o

Sistem de Siguranță și Alarme/Alerte

	vibrație triplă la fiecare minut.	vibrație triplă la fiecare minut.
Sunet oprit / Vibrație oprită	Pompa cu Plasture emite o vibrație triplă la fiecare minut.	Pompa cu Plasture emite o vibrație triplă la fiecare minut.

Alarma unei sonore:

Pictogramă	Unda sonoră	Semnificație
		PDM emite zece semnale sonore/vibrații de fiecare dată.
		PDM emite trei semnale sonore/vibrații de fiecare dată.
	 	Pompa cu Plasture emite trei semnale sonore/vibrații de fiecare dată.
	 	Pompa cu Plasture emite trei semnale sonore/vibrații de fiecare dată.

8.3.1 Alarmerle PDM

Dacă o alarmă PDM nu este ștearsă în 10 minute, PDM dumneavoastră va emite un sunet de sirenă până când alarma este ștearsă.

Mesajul PDM	Prioritate	Motiv	Măsuri de luat
POMPĂ ÎN AFARA ARIEI DE ACOPERIRE. Suspendare redusă eșuată. Mutați PDM aproape de Pompă. Pre suspendare eșuată. Mutați		Suspendare redusă sau Suspendare Predictivă Redusă eșuată întrucât PDM a pierdut comunicarea cu Pompa cu Plasture.	Atingeți pentru a-l șterge. Mutați PDM aproape de Pompă.

PDM aproape de Pompă.			
POMPĂ ÎN AFARA ARIEI DE ACOPERIRE Mutați PDM aproape de Pompă. Dacă nu recuperați semnalul Pompei, vă rugăm să schimbați Plasturele.		PDM nu a primit semnal de la Pompă pentru perioadă setată.	Atingeți pentru a-l șterge. Mutați PDM aproape de Pompă.
POMPĂ REPORNITĂ Plasture schimbat? Pentru ajutor, sunați la serviciul de relații cu clienții.		Pompa a repornit fără dezactivarea Plasturelui.	Atingeți pentru a-l șterge. Verificați dacă un nou Plasture este conectat și urmați instrucțiunile din acest Manual de Utilizare. Contactați serviciul de relații cu clienții dacă aveți întrebări.
EROARE PDM Înlăturați dispozitivul. Contactați serviciul de relații cu clienții.		A fost detectată o eroare PDM.	Atingeți pentru a-l șterge. Înlăturați Pompa și Senzorul. Contactați serviciul de relații cu clienții imediat. Verificați nivelul glucozei din sânge.
EROARE PDM PDM a repornit. Schimbați plasturele.		O eroare de software PDM este detectată, iar PDM a repornit, dar setărilor nu au fost modificate.	Atingeți pentru a-l șterge. Înlăturați Pompa cu Plasture și schimbați Plasturele cu Rezervor. Dacă problema se

Sistem de Siguranță și Alarme/Alerte

			repetă, contactați serviciul de relații cu clienții.
ÎNCĂRCAȚI PDM ACUM Încărcați PDM acum.		Bateria PDM este descărcată complet.	Atingeți pentru a-l șterge. Încărcați bateria PDM.

8.3.2 Alarmerle Pompei

Atunci când apare o alarmă a pompei:

Indicator luminos: Indicatorul luminos de pe pompă se aprinde intermitent de culoare roșie o dată pe secundă până când alarma este anulată.

Notă: Dacă o alarmă a Pompei nu este anulată în 10 minute, atât PDM dumneavoastră, cât și Pompa cu Plasture va emite un sunet de sirenă până când alarma este anulată.

Următorul tabel enumeră mesajele alarmei cu prioritate mare.

Mesaj PDM	Prioritate	Motiv	Măsurile de luat
OCLUZIE DETECTATĂ Administrare oprită. Schimbați Plasturele acum.		A fost detectată ocluzia pompei.	Atingeți pentru a-l șterge. Schimbați Plasturele. Verificați nivelul glucozei din sânge.
EROARE PLASTURE Administrare oprită. Schimbați Plasturele acum.		A fost detectată o eroare a Plasturei cu Rezervor.	Atingeți pentru a-l șterge. Schimbați Plasturele. Verificați nivelul glucozei din sânge.
EROARE BAZA POMPEI Înlăturați Pompa. Contactați serviciul de relații cu clienții.		A fost detectată o eroare a Bazei Pompei.	Atingeți pentru a-l șterge. Înlăturați Pompa. Contactați imediat serviciul de relații cu clienții. Verificați nivelul glucozei din sânge.

Următorul tabel enumeră mesajele alarmei cu prioritate medie.

Mesaj PDM	Prioritate	Motiv	Măsurile de luat
AUTO OPRIT Administrare suspendată. Niciun status primit.		PDM nu a primit un status al pompei în timpul perioadei de timp limită setată.	Atingeți pentru a-l șterge. Reluați administrarea bazală. Verificați nivelul glucozei din sânge și tratați-l dacă este necesar. Verificați istoricul Pompei.
PLASTURE EXPIRAT Administrarea se va opri. Schimbați Plasturele acum.		Plasturele cu Rezervor actual a ajuns la sfârșitul duratei de viață de 3 zile.	Atingeți pentru a-l șterge. Schimbați Plasturele. Verificați nivelul glucozei din sânge.
BATERIE PLASTURE DESCĂRCATĂ COMPLET Administrare oprită. Schimbați Plasturele acum.		Bateria Plasturelui cu Rezervor este descărcată complet.	Atingeți pentru a-l șterge. Schimbați Plasturele. Verificați nivelul glucozei din sânge.
MAX TDD DEPĂȘIT Depășire MAX TDD. Administrare oprită.		Ați încercat să administrați mai multă insulină decât cea estimată în baza setării dumneavoastră Max Zilnic.	Atingeți pentru a-l șterge. Verificați nivelul glucozei din sânge. Reluați administrarea bazală. Verificați istoricul bolusului și re-evaluați nevoia dumneavoastră de insulină. Continuați să monitorizați nivelul glucozei din sânge.
ADMINISTRAREA DEPĂȘEȘTE 1 ORĂ MAX. Depășește 1 oră max.		Ați încercat să administrați mai multă insulină decât cea estimată în	Atingeți pentru a-l șterge. Verificați nivelul glucozei din sânge.

Sistem de Siguranță și Alarmer/Alerte

Mesaj PDM	Prioritate	Motiv	Măsurile de luat
Administrare oprită.		baza setării dumneavoastră Max Zilnic.	Reluați administrarea bazală. Verificați istoricul bolusului și re-evaluați nevoia dumneavoastră de insulină. Continuați să monitorizați nivelul glucozei din sânge.
REZERVOR GOL Administrare suspendată. Schimbați Plasturele acum.		Nu există insulină în rezervor.	Atingeți pentru a-l șterge. Schimbați Plasturele. Verificați nivelul glucozei din sânge.
SUSPENDARE REDUSĂ Suspendare glucoză redusă activată.		Ultima citire a Senzorului glicemic este la sau sub limita setată a Suspendării Glucoză Redusă.	Atingeți pentru a-l șterge. Verificați nivelul glucozei din sânge și tratați-l dacă este necesar.



8.4 Alerte

Alertele sunt declanșate de situațiile care necesită atenția dumneavoastră. Alertele sunt mai puțin serioase decât alarmele. Trebuie să răspundeți la o alertă apăsând butoanele și/sau luând măsuri.

De exemplu:

Atunci când Alerta „BATERIE PLASTURE DESCĂRCATĂ” apare, Fereastra de Blocare și fereastra de Alerte indică următorul afișaj.

Sistem de Siguranță și Alarmer/Alerte

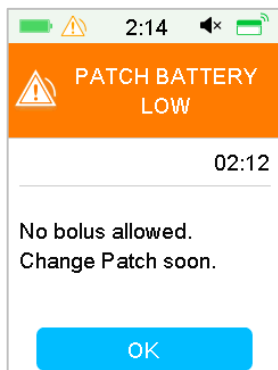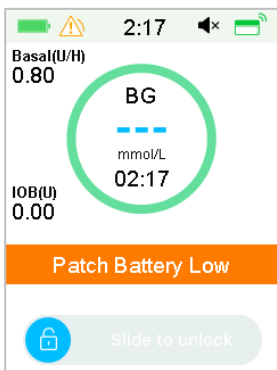

Alertă în Fereastra de Blocare
de Alerte

Alertă după deblocarea ferestrei

PDM afișează un mesaj de alertă cu instrucțiuni și pictograma  (un triunghi gol cu semnul exclamării) în fereastra de Alerte.

Alertele CGM și Alertele PDM în diferite moduri audio:

Modul Audio	 Alertă
Sunet	PDM emite două semnale sonore la fiecare trei minute
Vibrație	PDM emite o vibrație simplă la fiecare trei minute.
Sunet și Vibrație	PDM emite două semnale sonore și o vibrație simplă la fiecare trei minute.
Sunet oprit/Vibrație oprit	Fără semnale sonore, fără vibrație

Alertele Pompei cu Plasture în diferite moduri audio:

Modul Audio	 Alertă
Sunet	PDM emite două semnale sonore la fiecare trei minute

Sistem de Siguranță și Alarmer/Alerte

Vibrație	PDM emite o vibrație simplă la fiecare trei minute.
Sunet și Vibrație	PDM emite două semnale sonore și o vibrație simplă la fiecare trei minute.
Sunet oprit/Vibrație oprit	Fără semnale sonore, fără vibrație

Modul Audio	 Alertă
Sunet	Pompa cu Plasture emite trei semnale sonore la fiecare trei minute.
Vibrație	Pompa cu Plasture emite o vibrație triplă la fiecare trei minute.
Sunet și Vibrație	Pompa cu Plasture emite trei semnale sonore și o vibrație triplă la fiecare trei minute.
Sunet oprit/Vibrație oprit	Pompa cu Plasture emite o vibrație triplă la fiecare trei minute.

Una sonoră a fiecărui semnal sonor de alertă:

Pictogramă	Undă sonoră	Semnificație
		PDM dumneavoastră emite două semnale sonore de fiecare dată.

8.4.1 Alerte PDM

Următorul tabel enumeră mesajele de alertă pentru PDM.

Mesaj PDM	Prioritate	Motiv	Măsuri de luat
BATERIE PDM DESCĂRCATĂ Baterie PDM descărcată. Încărcați bateria în scurt timp.		Bateria PDM este descărcată.	Atingeți pentru a-l șterge. Încărcați bateria PDM în scurt timp.

8.4.2 Alertele Pompei

Atunci când o alertă a Pompei apare:

Indicator luminos: Indicatorul luminos de pe Pompa cu Plasture se aprinde intermitent de culoare galbenă o dată la fiecare două secunde până când alerta este ștearsă.

Următorul tabel enumeră mesajele de alertă pentru Pompa cu Plasture.

Mesaj PDM	Prioritate	Motiv	Măsurile de luat
SFÂRȘITUL SUSPENDĂRII Administrare suspendată la [].		Administrarea de insulină a fost suspendată pentru mai mult de 15 minute.	Atingeți pentru a-l șterge. Reluați administrarea bazală.
REZERVOR GOL [] rămas. Schimbați Plasturele.		Nivelul de insulină din Plasturele cu Rezervor a ajuns la limita inferioară setată.	Atingeți pentru a-l șterge. Schimbați Plasturele în scurt timp.
ALERTĂ AUTO OPRIT Administrarea se oprește dacă alerta nu este anulată în 15 minute.		PDM nu a primit statusul Pompei în limita de timp setată.	Atingeți pentru a-l șterge. Verificați nivelul glucozei din sânge. Verificați istoricul Pompei.
RECOMANDARE PLASTURE EXP Plasturele expiră în [] ore.		Plasturele cu Rezervor va expira în limita de timp setată.	Atingeți pentru a-l șterge. Schimbați Plasturele în scurt timp.
PLASTURE EXPIRĂ ÎN 1 ORĂ. Plasturele expiră în 1h. Schimbați plasturele în scurt timp.		Plasturele cu Rezervor va expira în mai puțin de 1 oră.	Atingeți pentru a-l șterge. Schimbați Plasturele în scurt timp.

Sistem de Siguranță și Alarme/Alerte

Mesaj PDM	Prioritate	Motiv	Măsurile de luat
BATERIE PLASTURE DESCĂRCATĂ Niciun bolus permis. Schimbați plasturele în scurt timp.		Bateria plasturelui este descărcată. Niciun bolus nu poate fi administrat. Administrarea bazală poate dura doar aproximativ 30 de minute.	Atingeți pentru a-l șterge. Schimbați Plasturele cu Rezervor în scurt timp.
SUSPENDARE PRE REDUSĂ Administrare suspendată. Nivel de glucoză predictiv scăzut.		Senzorul glicemic poate să fi ajuns la Limita de Suspendare a Glucozei Redusă în perioada de timp setată.	Atingeți pentru a-l șterge. Verificați nivelul glucozei din sânge și tratați-l dacă este necesar.

8.4.3 Alerte CGM

Dacă setați opțiunea audio ca **Sunet Oprit/Vibrație Oprită**, PDM dumneavoastră nu va emite semnale sonore sau vibrație pentru toate alertele CGM, exceptând:

Atunci când apare alerta „SUB 3,1 mmol/L (SUB 56 mg/dL)”, PDM dumneavoastră emite o vibrație triplă la fiecare trei minute. Dacă nu este ștersă în 9 minute, PDM dumneavoastră va emite un sunet de sirenă până când alerta este anulată.

Atunci când apare alerta „EROARE TRANSMIȚĂTOR”, „ÎNCĂRCAȚI TRANSMIȚĂTORUL”, „SENZOR EXPIRAT”, sau „EROARE SENZOR”, PDM dumneavoastră emite o vibrație triplă la fiecare trei minute.

Următorul tabel enumeră mesajele de alertă pentru CGM.

Sistem de Siguranță și Alarme/Alerte

Mesaj PDM	Prioritate	Motiv	Măsurile de luat
BATERIA TRANSMIȚĂTORULUI DESCĂRCATĂ Încărcați Transmițatorul în scurt timp.		Bateria Transmițatorului este aproape de a se descărca.	Atingeți pentru a-l șterge. Încărcați Transmițatorul în scurt timp.
ÎNCĂRCAȚI TRANSMIȚĂTORUL Încărcați Transmițatorul acum.		Bateria Transmițatorului este descărcată complet.	Atingeți pentru a-l șterge. Încărcați Transmițatorul.
EROARE TRANSMIȚĂTOR Contactați serviciul de relații cu clienții.		A fost detectată o eroare a Transmițatorului.	Atingeți pentru a-l șterge. Contactați serviciul de relații cu clienții.
NICIO CITIRE Verificați sau schimbați Senzorul.		Semnalele Senzorului sunt anormale.	Atingeți pentru a-l șterge. Verificați dacă Senzorul este lovit sau dislocat, asigurați-vă că Senzorul este introdus corect sau schimbați Senzorul.
SENZOR EXPIRAT Sesiunea Senzorului s-a încheiat. Schimbați Senzorul.		Senzorul actual a încheiat durata de funcționare de 14 zile.	Atingeți pentru a-l șterge. Schimbați Senzorul.
EROARE SENZOR Sesiunea Senzorului s-a încheiat. Schimbați Senzorul.		Senzorul nu funcționează corespunzător.	Atingeți pentru a-l șterge. Schimbați Senzorul.
VALOARE BG ACUM Introduceți o nouă valoare BG pentru calibrare sau apăsați OK pentru a anula alerta.		O nouă valoare BG este necesare imediat pentru calibrarea Senzorului.	Atingeți pentru a-l șterge. Introduceți o nouă valoare BG pentru calibrare sau apăsați OK pentru a anula alerta.

Sistem de Siguranță și Alarmer/Alerte

Mesaj PDM	Prioritate	Motiv	Măsurile de luat
EROARE CAL SENZOR Introduceți o nouă valoare BG după 15 minute.		Senzorul nu a fost calibrat corespunzător.	Atingeți pentru a-l șterge. Introduceți o nouă valoare BG după 15 minute.
GLICEMIE MICĂ Nivelul glucozei sub Limita Inferioară.		Ultima citire a Senzorului glicemic este de sau sub Limita Inferioară a glucozei.	Atingeți pentru a-l șterge. Verificați nivelul glucozei din sânge și tratați-l dacă este necesar. Continuați să monitorizați nivelul glucozei din sânge.
GLICEMIE MARE Nivelul glucozei peste Limita Superioară.		Ultima citire a Senzorului glicemic este de sau peste Limita Superioară a glucozei.	Atingeți pentru a-l șterge. Verificați nivelul glucozei din sânge și tratați-l dacă este necesar. Continuați să monitorizați nivelul glucozei din sânge.
VALOARE PREDICTIVĂ SCĂZUTĂ Glucoza poate să ajungă la Limita Inferioară în [] min.		Senzorul glicemic poate să ajungă la Limita Inferioară a Glucozei într-o anumită perioadă de timp.	Atingeți pentru a-l șterge. Verificați nivelul glucozei din sânge și tratați-l dacă este necesar. Continuați să monitorizați nivelul glucozei din sânge.
VALOARE PREDICTIVĂ RIDICATĂ Glucoza poate să ajungă la Limita Superioară în [] min.		Senzorul glicemic poate să ajungă la Limita Superioară a Glucozei într-o anumită perioadă de timp.	Atingeți pentru a-l șterge. Verificați nivelul glucozei din sânge și tratați-l dacă este necesar. Continuați să monitorizați nivelul glucozei din sânge.

Sistem de Siguranță și Alarme/Alerte

Mesaj PDM	Prioritate	Motiv	Măsurile de luat
CREȘTERE RAPIDĂ Senzorul glicemic crește rapid.		Senzorul glicemic crește la o rată care este mai rapidă decât Limita Ratei setată.	Atingeți pentru a-l șterge. Monitorizați tendința și nivelul de glucoză. Urmați instrucțiunile de la furnizorul dumneavoastră de asistență medicală.
SCĂDERE RAPIDĂ Senzorul glicemic scade rapid.		Senzorul glicemic scade la o rată care este mai rapidă decât Limita de Scădere setată	Atingeți pentru a-l șterge. Monitorizați tendința și nivelul de glucoză. Urmați instrucțiunile de la furnizorul dumneavoastră de asistență medicală.
SUB 3,1 mmol/L Senzorul glicemic sub 3,1 mmol/L. (SUB 56 mg/dL Senzorul glicemic sub 56 mg/dL.)		Ultima citire a Senzorului glicemic este de sau sub 3,1 mmol/L. (Ultima citire a Senzorului Glicemic este de sau sub 56 mg/dL.)	Atingeți pentru a-l șterge. Verificați nivelul glucozei din sânge și tratați-l dacă este necesar. Continuați să monitorizați nivelul glucozei din sânge.
SENZORUL EXP ÎN 6 ORE Schimbați Senzorul în 6 ore.		Sesiunea actuală a Senzorului mai are 6 ore până la încheierea perioadei.	Atingeți pentru a-l șterge. Schimbați Senzorul în 6 ore.
SENZORUL EXP ÎN 2 ORE Schimbați Senzorul în 2 ore.		Sesiunea actuală a Senzorului mai are 2 ore până la încheierea perioadei.	Atingeți pentru a-l șterge. Schimbați Senzorul în 2 ore.

Sistem de Siguranță și Alarmer/Alerte


Mesaj PDM	Prioritate	Motiv	Măsuri de luat
SENZORUL EXP ÎN 30 MINUTE Schimbați Senzorul în 30 de minute.		Sesiunea actuală a Senzorului mai are 30 de minute până la încheierea perioadei.	Atingeți pentru a-l șterge. Schimbați Senzorul în 30 de minute.
SENZOR PIERDUT Mutați PDM aproape de Transmițător.		PDM nu a primit semnal de la Transmițător pentru perioada de timp setată.	Atingeți pentru a-l șterge. Mutați PDM aproape de Transmițător

Dacă o Alertă Silențioasă este pornită, PDM nu va emite niciun semnal sonor sau vibrație atunci când apare o alertă. Mesajul de ALERTĂ SILENȚIOASĂ va fi afișat în fereastra PDM dumneavoastră în schimb, iar dumneavoastră puteți verifica alerta în istoricul alertei Senzorului. *Consultați Capitolul „Modul de utilizare a Sistemului CGM” pentru mai multe informații.*


Mesaj PDM	Prioritate	Motiv	Măsuri de luat
ALERTĂ SILENȚIOASĂ Au apărut Alerte. Verificați istoricul Senzorului.		Au apărut alerte ale Senzorului în timpul activării modului silențios.	Atingeți pentru a-l șterge. Verificați istoricul de Alerte al Senzorului. Luați măsuri în funcție de alerta apărută.

Notă:


- 1) Dacă Sunetul este pornit și Alerta Silențioasă este dezactivată, pictograma de sunet oprit nu va apărea în colțul din dreapta sus din această fereastră.

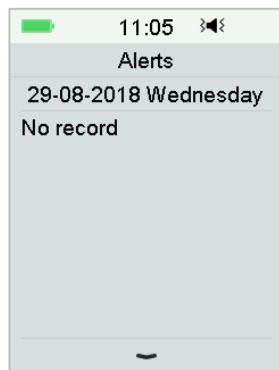

- 2) Dacă Sunetul și Alerta Silențioasă sunt pornite, pictograma temporară de sunet oprit „” va apărea în colțul din dreapta sus din această fereastră.

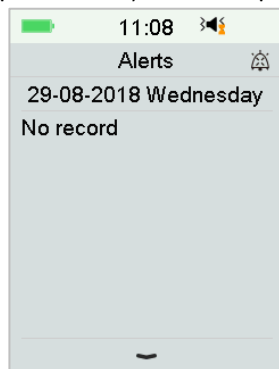

- 3) Dacă Sunetul este oprit, pictograma de sunet oprit „” va apărea în colțul din dreapta sus din această fereastră.

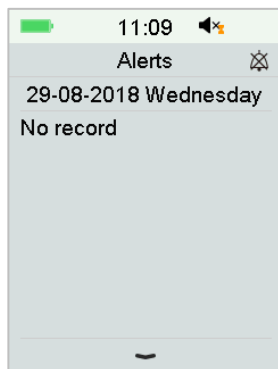


8.5 Mesaje de atenționare


Mesajele de atenționare sunt afișat automat pentru a vă reaminti de o condiție, funcție sau eveniment. Mesajele de atenționare includ notificările pe care le primiți după setarea atenționărilor și notificărilor de atenționare cu prioritate mică. Un mesaj necesită ca dumneavoastră să apăsați butoane pentru a-l șterge și/sau să luați măsuri dacă este cazul.

De exemplu:

Atunci când apare Mesajul “RATĂ BAZALĂ RELUATĂ”, Fereastra de Blocare și fereastra de Mesaje indică următoarea imagine.

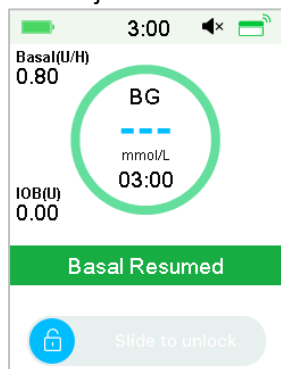

Mesaj în Fereastra de Blocare

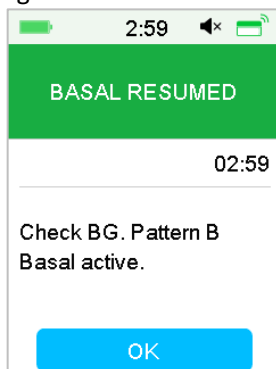

Mesaj după deblocare în Fereastra de Alerte

Sunet/vibrație: PDM dumneavoastră emite două semnale sonore și/sau o vibrație la fiecare trei minute, de trei ori în total.

8.5.1 Mesajele de atenționare ale PDM

Condiție	Mesaj PDM	Motiv
VERIFICARE SETĂRI	Verificați toate setările.	O eroare poate să fie apărut la setările dumneavoastră.
CEAS DEȘTEPTĂTOR	Ceas deșteptător.	Un ceas deșteptător este setat pentru această oră
BG RIDICATĂ	Tratați BG ridicată. Monitorizați BG.	Nivelul de glucoză din sânge introduse este mai mare decât 13,9 mmol/L (250 mg/dL).
BG SCĂZUTĂ	Tratați BG scăzută. Monitorizați BG.	Nivelul de glucoză din sânge introduse este mai mic decât 3,9 mmol/L (70 mg/dL).

8.5.2 Mesajele de atenționare ale Pompei

Condiție	Mesaj PDM	Motiv
VERIFICAȚI BG	Verificați BG dumneavoastră.	Atenționarea BG este activată pentru a vă reaminti să verificați valoarea BG după un bolus.
ATENȚIONARE BOLUS	Bolus nu este administrat în perioada specificată.	Atenționarea Bolus este activată pentru a vă reaminti să administrați un bolus după o anumită perioadă de timp.
RATĂ BAZALĂ ACTIVĂ GOALĂ	Rata dumneavoastră bazală activă este 0,00 U/H.	Rata bazală aleasă sau rata bazală temporară este 0,00 U/H.
RATĂ BAZALĂ RELUATĂ	Verificați BG. [] Rata bazală activă.	Rata bazală suspendată anterior a fost reluată automat.

8.5.3 Mesajele de atenționare ale CGM

Condiție	Mesajul PDM	Motiv
ATENȚIONARE CAL SENZOR	Introduceți o nouă valoare BG pentru CAL cu [].	O valoare BG trebuie să fie introdusă până la ora indicată pentru a calibra Senzorul.

Sistem de Siguranță și Alarmer/Alerte

Condiție	Mesajul PDM	Motiv
CAL SENZOR EȘUATĂ	Calibrarea senzorului a eșuat. Vă rugăm să reîncercați să îl calibrați mai târziu.	O valoare BG este necesară câteva minute mai târziu pentru a calibra Senzorul.
SENZOR RECONECTAT	Senzorul vechi a fost deconectat. Senzorul nou a fost conectat.	Senzorul vechi a fost deconectat și un senzor nou s- a conectat direct.

9.1 Emisii electromagnetice

Testarea Emisiilor	Conformitate
Emisii RF EN 60601-1-2:2007+AC:2010, IEC 60601-1-2:2007, CISPR 11:2009+A1:2010 și IEC 60601-1-2:2014	Grup 1
Emisii RF EN 60601-1-2:2007+AC:2010, IEC 60601-1-2:2007, CISPR 11:2009+A1:2010 și IEC 60601-1-2:2014	Clasa B

9.2 Imunitate Electromagnetică

Testarea Imunității	Nivelul de Testare IEC 60601	Nivel de conformitate	Mediul electromagnetic
Sistemul A7+ TouchCare® este creat pentru a fi folosit în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul Sistemului A7+ TouchCare® trebuie să se asigure că acesta este folosit într-un astfel de mediu electromagnetic.			
Descărcare electrostatică IEC 61000-4-2	±8kV descărcare de contact ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV evacuare a aerului	±8kV descărcare de contact ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV evacuare a aerului	Pentru mediul de îngrijire medicală la domiciliu și mediul de îngrijire medicală într-o unitate specializată.
Port de alimentare, Semnal și Cablu de Interconectare	Tabelul 5 al IEC 60601-1:2014 ±2Kv, 100Hz, pentru portul de alimentare AC	În timpul testării, EUT funcționa conform așteptărilor.	Alimentarea cu energie electrică de rețea trebuie să fie de calitate ca cea folosită în mediile

Testarea Imunității	Nivelul de Testare IEC 60601	Nivel de conformitate	Mediul electromagnetic
Sistemul A7+ TouchCare® este creat pentru a fi folosit în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul Sistemului A7+ TouchCare® trebuie să se asigure că acesta este folosit într-un astfel de mediu electromagnetic.			
IEC 61000-4-4:2012			tipice comerciale sau spitalicești.
Descărcare IEC 61000-4-5:2005	$\pm 0.5\text{kV}$, $\pm 1\text{kV}$ (mod diferit) $\pm 0.5\text{kV}$, $\pm 1\text{kV}$, $\pm 2\text{kV}$ (mod uzual)	În timpul testării, EUT funcționa conform așteptărilor.	Alimentarea cu energie electrică de rețea trebuie să fie de calitate ca cea folosită în mediile tipice comerciale sau spitalicești.
Căderi de tensiune și întreruperi la Portul de Alimentare AC IEC 61000-4-11:2014	0%UT; 0.5T (0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° și 315°) 0%UT; 1T(0°) 70%UT; 20T(0°); 0%UT; 250T(0°)	0.5T(10ms); 1T (20ms); 25T(500ms); 250T(5s)	Alimentarea cu energie electrică de rețea trebuie să fie de calitate ca cea folosită în mediile tipice comerciale sau spitalicești. Dacă utilizatorul A7+ necesită funcționarea continuă în timpul unei căderi de tensiune, se recomandă ca A7+

Testarea Imunității	Nivelul de Testare IEC 60601	Nivel de conformitate	Mediul electromagnetic
Sistemul A7+ TouchCare® este creat pentru a fi folosit în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul Sistemului A7+ TouchCare® trebuie să se asigure că acesta este folosit într-un astfel de mediu electromagnetic.			
			să fie conectat la o sursă de alimentare care nu se întrerupe sau la o baterie.
Câmpuri magnetice la frecvența de alimentare IEC 61000-4-8	Tabelul 4 al IEC 60601-1-2:2014 30A/m, 50HZ și 60HZ	30A/m	Adecvat pentru majoritatea mediilor, dacă nu există un echipament magnetic industrial în apropiere, iar intensitatea câmpului magnetic nu depășește 400A/m
Câmpuri de proximitate față de echipamentul wireless de comunicare prin unde RF IEC	Tabelul 9 al IEC 60601-1-2:2014	În timpul testării, EUT funcționa conform așteptărilor.	Distanța recomandată de separare $d = [12/E1] P$ 80 MHz până la 800 MHz

Testarea Imunității	Nivelul de Testare IEC 60601	Nivel de conformitate	Mediul electromagnetic
Sistemul A7+ TouchCare® este creat pentru a fi folosit în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul Sistemului A7+ TouchCare® trebuie să se asigure că acesta este folosit într-un astfel de mediu electromagnetic.			
61000-4-3:2006+A1+A2			d = [23/E1] P 800 MHz până la 6 GHz
Testul de imunitate al câmpului electromagnetic RF IEC 61000-4-3:2006+A1+A2	IEC 61000-4-3:2006+A1+A2 10V/m (Pentru mediul de îngrijire medicală la domiciliu și mediul de îngrijire medicală într-o unitate specializată) 80 MHz~2.7 GHz	10V/m (Pentru mediul de îngrijire medicală la domiciliu și mediul de îngrijire medicală într-o unitate specializată) 80 MHz~2.7 GHz	unde p este puterea maximă nominală de ieșire a transmițătorului în wați (W) conform indicațiilor producătorului transmițătorului și d este distanța de separare recomandată în metri (m). Intensitățile câmpului față de transmițătorii ficși RF, așa cum sunt determinate de un studiu al unui locației electromagnetice,

Testarea Imunității	Nivelul de Testare IEC 60601	Nivel de conformitate	Mediul electromagnetic
Sistemul A7+ TouchCare® este creat pentru a fi folosit în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul Sistemului A7+ TouchCare® trebuie să se asigure că acesta este folosit într-un astfel de mediu electromagnetic.			
			trebuie să fie mai mici decât nivelul de conformitate din fiecare interval de frecvență. Interferența poate apărea în apropierea echipamentului marcat cu următorul simbol: 
Notă: UT înseamnă la tensiunea AC de rețea înainte de aplicarea tensiunii de test. Notă: La 80 MHz și 800 MHz, se aplică cel mai mare interval de frecvență. Notă: Aceste instrucțiuni pot să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbția și reflexia din structuri, obiecte și persoane. Notă: Tabelul este conform cu IEC (EN) 60601-1-2 Ediția 3.			

Intensitățile câmpului

A. Intensitățile câmpului pentru transmițătorii ficși, precum stațiile de bază pentru telefoanele radio (celulare/fără fir) și radiouri mobile de teren, radio

amatori, difuzări radio AM și FM și difuzări TV, nu pot fi anticipate cu acuratețe teoretic. Pentru a evalua mediul electromagnetic datorat transmițătorilor ficși RF, un studiu al locației electromagnetice trebuie să fie luat în considerare. Intensitatea măsurată a câmpului din locația în care Sistemul A7+ TouchCare® este folosit depășește nivelul de conformitate RF aplicabil de mai sus, Sistemul A7+ TouchCare® trebuie să fie observat pentru a verifica funcționarea normală a acestuia. În cazul funcționării anormale este observată, pot fi necesare măsuri suplimentare, precum reorientarea sau relocarea Sistemului A7+ TouchCare®.

B. Peste intervalul de frecvență 150 kHz până la 80 MHz, intensitățile câmpului trebuie să fie mai mici de 10 V/m.

Descărcare electrostatică

Deși sistemul dumneavoastră A7+ TouchCare® este creat pentru a nu fi afectat de nivelurile tipice de descărcare electrostatică (ESD), nivelurile foarte ridicate ESD pot conduce la resetarea Sistemului A7+ TouchCare®. Dacă PDM repornește, vă rugăm să verificați setările PDM pentru a vă asigura că toate setările sunt salvate la valorile dorite. Dacă are loc Repornirea Pompei, vă rugăm să schimbați un nou plasture. Dacă CGM repornește, vă rugăm să reîncărcați transmițătorul și să schimbați un nou senzor.

Pentru informații suplimentare cu privire la schimbarea unui nou plasture, consultați Capitolul „Modul de utilizare a Pompei cu Plasture”.

Pentru informații suplimentare cu privire la schimbarea unui nou senzor, consultați Capitolul „Modul de utilizare a sistemului CGM”.

Pentru informații suplimentare cu privire la reintroducerea setărilor PDM dumneavoastră, consultați Secțiunea „Setări” în Capitolul „Modul de Utilizare a PDM”.

Dacă nu puteți să reintroduceți setările PDM dumneavoastră, să schimbați un nou plasture sau senzor, sau considerați că există o problemă cu dispozitivul dumneavoastră, contactați reprezentantul dumneavoastră local.

Distanțele de separare recomandate dintre echipamentul portabil și mobil de comunicații prin unde RF și Sistemul A7+ TouchCare®

Sistemul A7+ TouchCare® este creat pentru a fi folosit într-un mediu electromagnetic în care perturbațiile radiate RF sunt controlate. Clientul sau utilizatorul Sistemului A7+ TouchCare® poate ajuta la prevenirea interferenței electromagnetice prin păstrarea unei distanțe minime între echipamentul portabil și mobil de comunicații prin unde RF (transmițătoare) și Sistemul A7+ TouchCare® în baza recomandărilor de mai jos, conform puterii maxime de ieșire a echipamentului de comunicație.

Puterea maximă nominală de ieșire a transmițătorului (W)	Distanța de separare conform frecvenței transmițătorului (m)		
	150 kHz~80 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	80 MHz~800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	800 MHz~2.5 GHz $d = 2.3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Pentru transmițătoarele nominale la o putere maximă de ieșire care nu este enumerată mai sus, distanța de separare recomandată d în metri (m) poate fi estimată folosind ecuația aplicabilă frecvenței transmițătorului, unde p este puterea maximă nominală de ieșire a transmițătorului în wați (W) conform indicațiilor producătorului transmițătorului.

Notă: La 80 MHz și 800 MHz, se aplică distanța de separare pentru intervalele mai mari de frecvență.

Notă: Aceste instrucțiuni pot să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbția și reflexia din structuri, obiecte și persoane.

Atenție:

- 1) Informațiile cu privire la EMC (Compatibilitate Electromagnetică) din acest manual trebuie să fie consultate înainte de instalarea și folosirea Sistemului A7+ TouchCare®.
- 2) Sistemul A7+ TouchCare® nu este proiectat pentru a fi folosit într-un mediu cu înaltă tensiune, într-un câmp magnetic de înaltă intensitate, acolo unde intensitatea PERTURBAȚIILOR ELECTROMAGNETICE este ridicată.

- 3) Echipamentul Portabil de Comunicații prin Unde RF trebuie să fie folosit la cel puțin 30 cm (12 inch) distanță de toate părțile produselor Medtrum. În caz contrar, ar putea apărea deteriorarea performanței acestui echipament.
- 4) Trebuie să fie evitată folosirea acestui echipament în apropierea sau suprapus cu un alt echipament medical întrucât acest lucru poate determina funcționarea necorespunzătoare. În cazul în care o astfel de folosire este necesară, acest echipament și celălalt echipament medical trebuie să fie observat pentru a verifica dacă acestea funcționează în mod normal.
- 5) Alte cabluri și accesorii pot afecta în mod negativ performanța EMC.



10.1 Simbolurile de pe eticheta Produsului

Simbol	Semnificație	Simbol	Semnificație
	Număr lot		NU folosiți produsul dacă ambalajul este deteriorat
	Număr de referință		Sterilizat folosind oxid de etilenă
	Producător		Sterilizat folosind radiațiile
	A se utiliza înainte de: (aaaa-ll-zz)		Respectați instrucțiunile de folosire
	Avertizare: Consultați instrucțiunile de folosire		Comunicare prin unde radio
	Temperatura de depozitare		Rezistent la apă până la 2,5 m adâncime timp de 1 oră
	A NU se refolosi		Numărul de serie al dispozitivului
	Marca CE acordată de un organism notificat		Echipament de tip BF (Protecție împotriva șocurilor electrice)
	Deșeuri echipament electric și electronic		Reprezentant Autorizat în Comunitatea Europeană

Appendix I: Symbols and Icons

Simbol	Semnificație	Simbol	Semnificație
IP22	Protecția împotriva Obiectelor Mari și Picăturilor de Apă IEC 60529		

10.2 Pictograme PDM

Pictogramă	Semnificație	Pictogramă	Semnificație
	Alarmă cu Prioritate Ridicăță		Alarmă cu Prioritate Medie
	Alertă		Sunet oprit
	Sunet oprit temporar	00:00 a	Ora
	Semnalul RF al pompei		Baterie
	Se încarcă		Încărcat



11.1 Specificații PDM

Model: FM-018

Dimensiune: 76,2 mm x 48,4 mm x 9,375 mm

Greutate: 42,4 g

Ecran: 2,4 in

Intervalul de Temperatură de Funcționare: +5°C ~ +40°C

Intervalul de Umiditate Relativă de Funcționare: 20%~ 90%RH

Presiunea Atmosferică de Funcționare: 700~1060 hPa

Intervalul de Temperatură de Depozitare: -10°C ~ +55°C

Intervalul de Umiditate Relativă de Depozitare: 20%~ 90%RH

Presiunea Atmosferică de Depozitare: 700~1060 hPa

Clasificare: Cu alimentare internă, Funcționare continuă

Baterie: Integrată 3.8 V baterie din polimer litiu-ion

Alimentare: 5.0 VDC, 1.0 A

Durata de Viață a Bateriei: Aproximativ 1 săptămână din momentul în care este încărcată complet.

Depozitarea Datelor: Depozitează automat datele din ultimele 90 de zile

Distanța de Comunicare Wireless: 10 m distanță de Transmițător, 4 m distanță de pompa de insulină

Tipul Alarimei: Vizuală, auditivă și prin vibrații

Volum: 52.3 dB(A) măsurat de la o distanță de 1 m

Garanție Limitată: 4 ani

Clasificare de Rezistență la Praf și Apă: IP22

11.2 Specificațiile Pompei cu Plasture

Model:

Baza Pompei: JN-022

Plasturele cu Rezervor: MD-JN-011

Dimensiune: 56,5 mm x 33,3 mm x 13,3 mm

Greutate: 21,5 g (fără insulină)

Intervalul de Temperatură de Funcționare: +5 °C ~ +40 °C

Intervalul de Umiditate Relativă de Funcționare: 20%~90%RH

Presiunea Atmosferică de Funcționare: 700~1060 hPa

Intervalul de Temperatură de Depozitare: -10°C ~ +55°C

Anexa II: Informații Tehnice

Intervalul de Umiditate Relativă de Depozitare: 20%~90%RH

Presiunea Atmosferică de Depozitare: 700~1060 hPa

Clasificare: Cu alimentare internă, Piese aplicate de tip BF, Funcționare Continuă

Baterie: Alimentată cu două baterii buton (1,5 V)

Distanța de Comunicare Wireless: 4 m

Rata de Rezistență la Apă: IPX8 (2,5 m, 60 min)

Garanția Limitată a Bazei Pompei: 1 an

Durata de Conservare a Plasturelui cu Rezervor: 2 ani

Metoda de Sterilizare a Plasturelui cu Rezervor: Cu ajutorul gazului EO

Volumul Rezervorului: 200 U (2 mL) (1 U=10 µL)

Tipul de Insulină Folosit: U-100

Intervalul Ratei Bazale: 0,00 ~ 25 U/h (majorare: 0,05 U/h)

Intervalul Bolusului: 0,05 ~ 30 U (majorare: 0,05 U)

Rata de Administrare a Bolusului: 0,05 U/2 s

Presiunea Maximă de Injectare și Limita de Presiunea în caz de Ocluzie: 15 psi

Intervalul Maxim de Timp pentru Alarma în caz de Ocluzie:

Administrare Bazală (0,1 U/h): < 30 h

Administrare Bazală (1 U/h): < 3 h

Administrare Bolusului (3 U at 1,5 U/min): < 120 s


Volumul Bolusului după eliberarea Ocluziei: < 3 U


Acuratețea de Administrare:

Bazală: +/- 5% (la ratele: 0,1~ 25 U/h)

Bolus: +/- 5% (pentru toate valorile stabilite: 0,05 ~ 30 U)

Acuratețea Rezultatelor Testelor (ciclul de testare: 29 H, rata de administrare: 1,0 U/H, eroare medie: 0,40%):

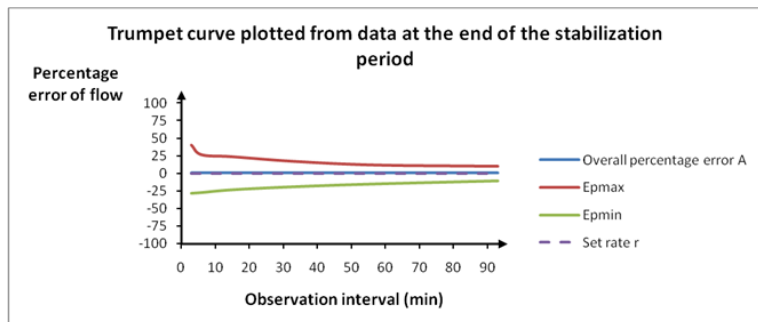

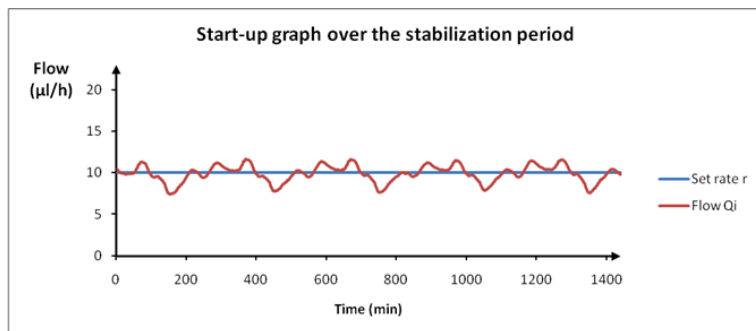

Notă: Pompa cu Plasture poate să nu ajungă la acuratețea de măsurare menționată mai sus în anumite circumstanțe precum exerciții viguroase sau condiții de funcționare anormale.

11.3 Specificațiile Transmițătorului

Model: MD1026

Dimensiune: 36.1 mm x 19.4 mm x 7.2 mm

Greutate: 3.57 g

Intervalul de Temperatură de Funcționare: +5°C ~+40°C

Intervalul de Umiditate Relativă de Funcționare: 20%~90%RH

Presiunea Atmosferică de Funcționare: 700~1060 hPa

Intervalul de Temperatură de Depozitare: -10°C~+55°C

Intervalul de Umiditate Relativă de Depozitare: 20%~90%RH

Presiunea Atmosferică de Depozitare: 700~1060 hPa

Baterie: Integrată 3.7 V baterie litiu ion polimer

Rezistență la Apă: IPX8 (2.5 m, 60 min)

Clasificare: Tipul echipamentului BF, Funcționare continuă

Stocarea Datelor: Stochează automat datele din ultimele 14 zile

Distanța de Comunicare wireless: 10 m

Garanție Limitată: 1 an

11.4 Specificațiile Senzorului de Glucoză

Model: MD3026

Anexa II: Informații Tehnice

Intervalul de Temperatură de Depozitare: +2°C~+30°C

Intervalul de Umiditate Relativă de Depozitare: 20%~90%RH

Presiunea Atmosferică de Depozitare: 700~1060 hPa

Intervalul Glicemic: 2,2~22,2 mmol/L (40~400 mg/dL)

Metoda de Sterilizare: Prin radiație

Durata de viață a Senzorului: până la 14 zile

11.5 Precizia Sistemului CGM

A fost efectuat un studiu clinic pentru a stabili precizia senzorului în cazul adulților cu diabet de tip 1 și tip 2 cu vârsta de cel puțin optsprezece ani. Testarea în clinică a constatat în testarea frecventă a probelor de sânge venos folosind Dispozitivul de Analiză a Glucozei Yellow Spring Instrument Life Sciences 2300 STAT Plus™ (YSI) într-o zi oarecare din timpul funcționării senzorului. Precizia s-a bazat pe procentajul citirilor glucozei CGM care sunt cuprinse între $\pm 20\%$, $\pm 30\%$ și $\pm 40\%$ pentru valorile de referință de 100 mg/dL (5,6 mmol/L) și peste, și ± 20 mg/dL (1,1 mmol/L), ± 30 mg/dL (1,7 mmol/L) și ± 40 mg/dL (2,2 mmol/L) pentru valorile de referință mai mici de 100 mg/dL (5,6 mmol/L).

Tabel. Procentajul Citirilor Glucozei CGM cuprinse între $\pm 20\%$ / ± 20 mg/dL, $\pm 30\%$ / ± 30 mg/dL și $\pm 40\%$ / ± 40 mg/dL al YSI.

Numărul Perechilor CGM-YSI	Cel mult $\pm 20\%$ / ± 20 mg/dL	Cel mult $\pm 30\%$ / ± 30 mg/dL	Cel mult $\pm 40\%$ / ± 40 mg/dL
13116	89.0%	97.8%	99.4%



Glosar

Model Bazal	Un set alcătuit din una sau mai multe rate bazale care acoperă o perioadă de 24 de ore.
Rată bazală	Valoarea de insulină bazală continuă care este administrată în mod automat în fiecare oră.
BG	Abreviere pentru Glucoza din Sânge. Consultați secțiunea <i>Glucoza din Sânge</i> .
Ținta BG	Valorile superioare și inferioare la care glucoza dumneavoastră din sânge este corectată atunci când folosiți Calculatorul Bolusului.
Glucoză din sânge (BG)	Nivelul de glucoză prezent în sânge, deseori măsurat cu ajutorul unui glucometru.
Glucometru/Metru/B G Metru	Un dispozitiv medical utilizat pentru măsurarea nivelului de glucoză din sânge.
Calculator Bolus	O caracteristică menită să calculeze un nivel estimat al bolusului bazat pe valorile BG și pe carbohidrații pe care îi introduceți.
Doză Bolus	Doza de insulină folosită pentru a acoperi o creștere preconizată a nivelurilor de glucoză cauzată de carbohidrați sau pentru a scădea o valoare ridicată a glucozei din sânge până la intervalul dumneavoastră țintă.
Atenționare Bolus	O atenționare a faptului că un bolus nu a fost administrat în anumite perioade de timp pe care le-ați specificat, deseori setare în jurul orelor de masă.
C	Abrevierea pentru Bolus Combinat. Consultați secțiunea <i>Bolus Combinat</i> .
Calibrare	Procesul de utilizare a unei citiri a unui glucometru sau a unei valori venoase a glucozei din sânge pentru a calcula valorile Senzorului de Glucoză.
Calc-C	Bolus Combinat conform Calculatorului Bolus
Calc-E	Bolus Extins conform Calculatorului Bolus
Calc-N	Bolus Normal conform Calculatorului Bolus
C-Ext.	Partea extinsă a <i>Bolusului Combinat</i> .
C-E	
CGM	Abreviere pentru Monitorizarea Continuă a Glucozei. Consultați secțiunea <i>Monitorizarea Continuă a Glucozei (CGM)</i> .
C-N	Partea normală a <i>Bolusului Combinat</i> .
C-Normal	

Glossary

Combinat	Parte a valorii bolusului administrat imediat și atenționarea efectuată în mod egal într-o anumită perioadă de timp.
Bolus Combinat	
Monitorizarea Continuă a Glucozei (CGM)	Un Senzor este introdus sub piele pentru a verifica nivelurile glicemiei în lichidul interstițial. Un Transmițător trimite citirile Senzorului de glucoză către un dispozitiv de afișare.
Bolus de Corecție	Bolus folosit pentru a scădea o valoare ridicată a glucozei în sânge la intervalul dumneavoastră țintă.
Sunet oprit/Vibrație Oprită	Atât vibrația, cât și sunetul sunt oprite din Opțiunile Audio.
E	Abrevierea pentru Bolus Extins. Consultați secțiunea <i>Bolus Extins</i> .
EasyLoop	Funcțiile de siguranță inclusiv Alerte de Glucoză, Suspendare Redusă și Suspendare Predictivă Redusă.
Extins	Valoarea bolusului administrat în mod egal într-o anumită perioadă de timp.
Bolus Extins	
Bolus Alimentar	Bolus folosit pentru a acoperi o creștere preconizată a nivelurile de glucoză din cauza carbohidraților.
Alimentar+Corecție	Înseamnă un bolus care acoperă carbohidrații și corectează glucoza.
Limita Superioară	Valoarea pe care o setați pentru a determina atunci când sistemul vă va alerta în cazul unei situații de nivel superior al Senzorului de glucoză.
Raport IC	Abreviere pentru Rata Insulină-Carbohidrați. Consultați secțiunea <i>Rata Insulină-Carbohidrați</i> .
Factorul de Sensibilitate la Insulină (ISF)	Valoarea cu care glucoza din sânge este redus cu o unitate de insulină.
Raport Insulină-Carb.	Numărul de grame de carbohidrați acoperiți de o unitate de insulină.
ISF	Abreviere pentru Factorul de Sensibilitate la Insulină. Consultați secțiunea <i>Factorul de Sensibilitate la Insulină (ISF)</i> .
IOB	Insulina bolus administrată de Pompă care funcționează în continuare la nivelurile dumneavoastră reduse de glucoză din sânge.

Glosar

Timp IOB	O setare a Calculatorului Bolus care vă permite să setați durata de timp în care insulina bolus este înregistrată ca IOB.
Limita inferioară	Valoarea pe care o setați pentru a stabili când să vă alerteze sistemul în cazul unui nivel scăzut al Senzorului Glicemic.
Manual-Bo	Administrarea manuală a unei doze de insulină.
Manual Bolus	
Administrare Max 1h	Setarea valoarea maximă a insulinei care poate fi administrată într-o oră.
Bolus Max	Setarea valoarea maximă a insulinei care poate fi administrată într-o doză.
Doza Zilnică Totală Maximă (TDD)	Setarea valoarea maximă a insulinei care poate fi administrată într-o zi.
N	Abrevierea pentru Bolus Normal. Consultați secțiunea <i>Bolus Normal</i> .
Bolus Normal	Valoarea completă a bolusului administrat imediat.
Notă	O Notă vă oferă informații de ajutor.
Ocluzie	Un blocaj sau o întrerupere în administrarea insulinei.
Bolus Prestabilit	Puteți seta și salva un bolus pentru mese sau gustări specifice pe care le mâncați sau beți în mod frecvent.
Rată Bazală Temporară Prestabilită	Puteți seta și salva rate bazale temporare pentru utilizarea repetată.
Sensibilitate	Consultați Secțiunea <i>Factorul de Sensibilitate la Insulină (ISF)</i> .
Senzor Glicemic (SG)	Valoarea de glucoză care este prezent în lichidul interstițial și este măsurată de un Senzor Glicemic.
Sesiunea Senzorului	Perioada de monitorizare de 14 zile de la introducerea unui nou Senzor. În timpul acestui interval de timp, glucoza dumneavoastră este monitorizată și raportată o dată la două minute, iar datele vă sunt transmise către dispozitivul dumneavoastră de afișare.
SG	Abrevierea pentru Senzorul Glicemic. Consultați secțiunea <i>Senzorul Glicemic (SG)</i> .
Suspendare	Această funcție oprește administrarea de insulină până în momentul în care o reporniți.

Glossary

	Doar insulina bazală repornește atunci când administrarea este reluată.
Rată Bazală Temp (Rată Bazală Temporară)	Puteți crește sau scădere temporar rata dumneavoastră bazală actuală pentru o anumită perioadă de timp.
Avertizare	O avertizare vă informează cu privire la un posibil pericol.

