



# MEDISEPT

Perfect disinfection

**Importator și reprezentant autorizat în  
REPUBLICA MOLDOVA:**

S.A. "M-INTER-FARMA", Mun. Chișinău,  
str. Grenoble 23,21  
Tel. (022) 904-006, 904-005, Fax: (022)  
904-007. shop.

**Număr de înregistrare de stat a  
dispozitivelor medicale**

**Nr. DM000349513**



## Velox® Duo Wipes

### Șervețele pe bază de alcool pentru curățarea și dezinfectarea rapidă a suprafețelor mici și a echipamentului medical

Șervețele pentru curățarea și dezinfectarea rapidă a suprafețelor mici în domeniul medical, aziluri, sanatorii, centre fitness și SPA, frizerii, saloane de masaj și frumusețe, grădinițe și școli. Produsul este potrivit pentru suprafețele care au contact cu produsele alimentare.

#### Caracteristicile produsului:

- Activ în 30 sec. contra Bacteriilor, Fungilor, Tuberculozei, Virusurilor încapsulate, Adeno și Rota virusurilor.
- Recomandat pentru echipamentul medical, echipamentul de reabilitare, piesele stomatologice, paturile pacienților, dulapuri, mese.
- Pentru dezinfectarea suprafețelor dispozitivelor care vin în contact cu produsele alimentare.
- Șervețele nețesute 19x15 cm, 50 g/m<sup>2</sup>
- Testate dermatologic.

#### Beneficiile utilizatorului:

- Eficiență garantată confirmată de testări.
- Reducerea înaltă a riscului de infectare.
- Efect rapid asupra suprafețelor curățate și dezinfectate.
- Efect de îmbărsărire.
- Econom în utilizare.



Șervețele



Activ contra  
B, F, Tbc, V  
în 30 sec



Dispozitive  
medicale  
neinvazive



Aromă  
tonică de  
ceai

# Velox® Duo Wipes

## Aplicarea:

Șervețele pentru curățarea și dezinfectarea rapidă a suprafețelor mici în domeniul medical, aziluri, sanatorii, centre fitness și SPA, frizerii, saloane de masaj și frumusețe, grădinițe și școli. Produsul este potrivit pentru suprafețele care au contact cu produsele alimentare. Recomandate pentru suprafețele mici a echipamentului medical: paturi și scaune de operare, paturi, echipament medical și chirurgical, dezinfectarea pieselor stomatologice înaintea sterilizării, portamprentelor și amprentelor din silicon. Șervețele dezinfectează suprafețele omorînd în 30 sec. bacteriile, fungii, mycobacteriile, virusurile încapsulate (ca Vaccinia, BVDV, SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV), Rota și Noro virusurile.

	EN 14885	Condiții	
		curat	murdar
Bacterii (inclusiv MRSA)	EN 13727	30 sec.	30 sec.
	EN 16615	30 sec.	30 sec.
Fungi (C. albicans)	EN 13624	15 sec.	15 sec.
	EN 16615	30 sec.	30 sec.
Mycobacteria tuberculosis (M. terrae)	EN 14348	30 sec.	30 sec.
Virusuri încapsulate (HIV, HBV, HCV, Influenza A, B, C, Vaccinia, SARS-Cov-2, Herpes simplex, Ebola)	EN 14476	30 sec.	60 sec.
BVDV	EN 14476	30 sec.	30 sec.
Rota virus	EN 14476	30 sec.	60 sec.
Noro virus	EN 14476	30 sec.	30 sec.

## Instrucțiuni de utilizare:

Scoateți un șervețel din ambalaj și ștergeți suprafața. Așteptați 30 sec. În condiții de murdărie, timpul de acțiune împotriva virusurilor încapsulate și a virusului Rota este extins până la 60 secunde. În cazul dezinfectării suprafețelor care intră în contact cu alimentele, clățiți-le cu apă potabilă. Alte suprafețe nu necesită clătire cu apă. Închideți bine ambalajul. După deschiderea ambalajului, utilizați șervețelele în termen de 21 zile. A nu se utiliza dacă șervețelul este uscat. A nu se utiliza pe suprafețe sensibile la alcool (de exemplu, sticlă acrilică). Numai pentru uz profesional.

## Compoziție:

container/rezervă 100 buc. conțin: 250 gr. agent de înmuiere.  
Ambalaj moale 50 buc. conțin: 173 gr. agent de înmuiere.  
100 gr. agent de înmuiere conține: ethanol, propan-2-ol

## Unități de ambalare:

100 buc. container,  
100 buc. rezervă,  
50 buc. șervețele în ambalaj moale cu închidere autoadezivă.



Dispozitiv medical clasa II în conformitatea cu Legea privind Dispozitivele Medicale. Destinat pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale neinvazive.

Numărul autorizației pentru produsele biocide în Polonia: 7905/19

Fișa cu date de securitate și fișa cu date a componentelor sunt disponibile la adresa [www.medisep.biz](http://www.medisep.biz)

CE 2274