

Exportarea jurnalelor de stare ale pachetului de soluții

Condiții prelabile

- Este disponibilă o unitate flash USB.
1. Conectați unitatea flash USB.
 2. Atingeți **Meniu > Jurnale date > Jurnal înlocuire**.
 3. Selectați activitatea "Pachet de soluții eliminat".
 4. Atingeți butonul **Export jurnal de stare**.


Caseta cu senzori

Pentru a vedea starea casetei cu senzori

1. Atingeți **Meniu > Stare analizor > Consumabile**.
2. Pentru mai multe informații, atingeți butoanele **Stare > Casetă senzor**.

Înlocuirea casetei cu senzori

Elemente necesare

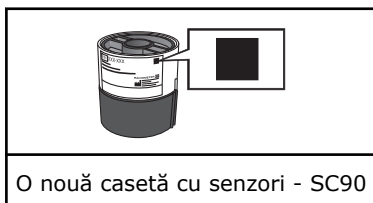

S3

1. Atingeți **Meniu > Stare analizor**.
2. Atingeți butoanele **Consumabile > Înlocuire > Casetă cu senzori**.
3. Atingeți butonul **Apăsăți pentru a începe asistarea video**.
4. Verificați dacă aveți caseta cu senzori corectă.
5. Așteptați deschiderea compartimentului casetei cu senzori.
6. Scoateți caseta cu senzori și eliminați-o folosind procedura pentru deșeuri cu risc biologic.



7. Atingeți butonul **Acțiune încheiată**.
8. Scoateți folia de pe pachetul noii casete cu senzori, deșurubați capacul și scoateți caseta cu senzori.
9. Atingeți butonul **Acțiune încheiată**.